

# FLEXIBLINK

---

RTV art.nr. 020377

## Digital vekkerklokke

Art. nr. VKD



Dette er en enkel, digital vekkerklokke med repetisjon.  
Den brukes sammen med Sengevibrator SVB1 og SVB 3.

---

Vestfold Audio AS  
Sandefjord

## FLEXIBLINK

**Bruksanvisning****DIGITAL VEKKERKLOKKE**

Art. nr. VKD

**Vekkerklokke VKD passer til FlexiBlink Sengevibrator SVB1 og SVB3.  
Den er har repetisjon.**

**Virkemåte**

Vekkerklokke VKD viser tiden med tall i siferrute (display). Justering av tid og vekketidspunkt utføres med trykkknapper i bakkant av klokken overside.

På vekketidspunktet starter Sengevibratoren. På toppen av vekkerklokken er det en stor knapp. Når den trykkes ned, stanser Sengevibratoren.

Vekkerklokke VKD har innebygd lydvarsling. Den kan derfor brukes uavhengig av FlexiBlink Sengevibratorene.

Vekkerklokke VKD drives med strøm fra veggkontakten (230 volt AC). Den kan utstyres med reservebatteri (se avsnittet *Reservebatteri*).

**Plassering og montering**

Vekkerklokken plasseres på ønsket sted.

1. Sett om ønskelig inn reservebatteri (Ikke inkludert. Se avsnittet *Reservebatteri*)
2. Sett nettkablen inn i veggkontakten (230 volt)
3. Sett inn pluggen til Sengevibratoren

Nå er Vekkerklokken klar for innstilling av tid.

**Forklaring av knappene**

*Tallene i oversikten nedenfor og videre i denne bruksanvisningen, viser til illustrasjonen i Brukerveiledningen for Vekkerklokke VKD.*

- ① Alarm av/på knapp
- ② Stilling av tid
- ③ Stilling av alarm
- ④ (Repetisjons- (snooze-) knapp
- ⑤ Justering av timer
- ⑥ Justering av minutter

**Hvordan stille tiden**

Når apparatet er tilkoblet strømmen, vil et blinkende signal indikere at tiden må stilles.

Trykk knapp ② og ⑥. Minuttene vil da "løpe" fremover.

Trykk knapp ② og ⑤. Timene vil da "løpe" fremover.

**Hvordan stille alarmen**

Trykk knapp ③ og ⑥ eller ⑤ til ønskede minutter og timer er stilt inn.

Sett bryter ① til posisjon "on". Da vil du automatisk bli vekket til innstilt tid.

I høyre hjørne av displayet får du en indikasjon på at alarmen står på.

**Repetisjons- (snooze-) funksjonen**

Når du blir vekket om morgenen og du trykker på snooze knappen ④ vil det være stille i 9 minutter før du på nytt får ny alarm. Denne funksjonen kan repeteres inntil 2 timer etter at alarmen første gang koblet inn.

Når du ønsker å stoppe alarmen setter du knapp ① i "off" posisjon.

**Reservebatteri**

Vekkerklokke VKD har batterilomme for reservebatteri. Lokket til batterilommen sitter i underkant av klokken.

Reservebatteriet på 9 volt holder på minnefunksjonen ved strømbrudd. Vekkeuret vil da vise rett tid når strømmen kommer tilbake. Ved strømbrudd over lengre tid vil displayet vise at uret må stilles på ny.

Som reservebatteri kan man bruke alkalisk batteri. Andre typer batterier kan også benyttes.

**Enkel feilretting**

Dersom vekkerklokken ikke viser tiden i siferruten (displayet), får den antakelig ikke strøm fra veggkontakten.

Dersom vekkerklokken går, men man ikke får vekking, kan dette skyldes at Sengevibratoren ikke mottar strøm fra batterieliminator/lader.

**Dersom du trenger hjelp til feilretting**

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

Fylles ut av hjelpemiddelsentralen

# FLEXIBLINK

---

## Brukerveiledning

### VEKKERKLOKKE

VKD

#### Produsent

Vestfold Audio AS  
3234 Sandefjord

#### Tekniske spesifikasjoner nødvendig for sikker bruk

Bruksområde: Innendørs.  
Driftsspenning: 230 volt AC  
Reservebatteri: 9 volt (f.eks. alkalisk)  
Batt.størrelse: 6LR61 (IEC), 9V (ANSI)

#### Nødvendige advarsler i forbindelse med bruk

Ingen.

#### Utfyllende informasjon om hvordan hjelpemiddelet skal brukes

Se bruksanvisningen.

#### Rengjøring utført av bruker

Vekkerklokke VKD kan rengjøres med myk klut oppvridd i lunkent, mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann.

#### Vedlikehold utført av bruker

Hjelpemiddelet er vedlikeholdsritt, bortsett fra batteriskift.

#### Lagring når ikke i bruk

Oppbevares på et tørt og helst støvfritt sted.

#### Utfyllende om feilindikasjoner

Se bruksanvisningen.



**Vekkerklokke  
VKD**

RTV art.nr. 020377

---

Vestfold Audio AS  
Sandefjord