


Noogleberry manuell penispumpe

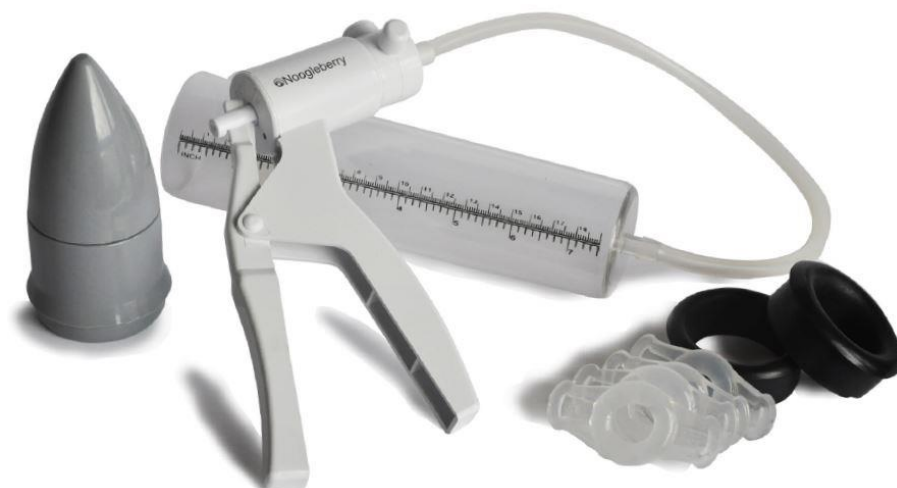

Erekttil dysfunksjon er det medisinske uttrykket for det som i dagligspråket betegnes som impotens, dvs. en manglende evne til å oppnå og å beholde ereksjon av penis tilstrekkelig for å kunne gjennomføre samleie. Man anslår at ca. 10 % av menn over 50 år og ca. 20-25 % over 65 år opplever erekttil dysfunksjon. De vanligste fysiske årsakene til erekttil dysfunksjon er diabetes, overvekt, legemidler, nerveskader, hormoner og hjerte-kar sykdommer. Penispumpe er et av flere behandlingsalternativer for erekttil dysfunksjon, og Quintets manuelle penispumpe Noogleberry er **refusjonsberettiget og kan rekvireres kostnadsfritt av din lege.**

Bruksområder

Hvem bør vurdere å bruke en penispumpe?

Noogleberry er et trygt og effektivt hjelpemiddel som kan brukes av pasienter med ED forårsaket av mange forhold, inkludert:

- Dårlig blodtilførsel til penis
- Diabetes
- Kirurgi for prostata eller kolonkref
- Psykologiske problemer som angst eller depresjon
- Pasienter med høyt blodtrykk

Målet med penisrehabilitering er å stimulere blodtilførsel til penis for å forbedre seksuell funksjon. Under radikal prostatektomi, kan delikate nerver som spiller en viktig rolle være fjernet, skadet eller traumatisert. En manglende ereksjon kan også skyldes skader på arterier som reduserer blodtilførsel til penis.

For å forhindre permanent skade på de svamplignende områder av erketilt vev er det viktig å sørge for økende blodtilførsel til penis rett etter kirurgi slik at en opprettholder penisvevet mens den nevrane banen regenererer.

Spesifikasjoner

Vekt: 192 g

Størrelse på sylindere*: 20.5 cm x 5.8 cm dia

Størrelse på ereksjonsringer: 10,12.5,15,20 mm dia

*Merk at vi også tilbyr større sylindere

Noogleberry manuell penispumpe drives av en håndpumpe. Den skaper ereksjon på kort tid, en ereksjon som kan vare i opptil 30 minutter.

Plastsylinderen plasseres over penis, og håndpumpen brukes til å lage et vakuum som øker blodgjennomstrømning til penis og ereksjon oppnås. Den naturlige ereksjonen holdes på plass med en ereksjonsring ved roten av penis.

Tilbehør

Ereksjonsringene

Vi tilbyr et utvalg av ereksjonsringer, men standard ereksjonsringer med denne manuelle penispumpe er Noogleberry ereksjonsringer i silikon som kommer i 4 størrelser. Ringene inneholder ikke latex eller ftalater.



Sylinderringe

Det er inkludert 2 sylinderringe sammen med Noogleberry manuelle penispumpe – en stor og en liten.



Gel

Vår gel er laget spesielt for bruk sammen med penispumper ved erektil dysfunksjon. Den har en konsistens som forenkler et godt vakuum uten at den er for tyntflytende og holder lenge på fuktigheten. Ved siden av å skape en god forsegling mellom penis og pumpens sylinder, vil den også gjøre det lettere for deg og tre på og fjerne selve ereksjonsringen.

Merk at vi tilbyr flere spesialtilpassete tilbehør slik som større sylindere, andre typer ereksjonsringer, flere typer skrotumskjold, andre typer gel etc.