



MEMOmessenger 2

Brukerveiledning

Art. Nr: 508890

Programversjon: 3.0 eller nyere

Innhold

Innhold	2
MEMOmessenger 2	5
Produktbeskrivelse	5
Tiltent formål.....	5
MEMOmessenger 2 leveres med.....	5
Dag- og ukeplanleggings skjema	5
Forskjeller MEMOmessenger (1) og MEMOmessenger 2	5
Beskrivelse av produktet MEMOmessenger 2.....	6
MEMObase 2 består av:.....	6
Justering av kontrast på MEMObase berøringsskjerm	6
Inn- og utganger på baksiden av MEMObase	6
MEMOgo 2 består av:	7
Knapper på MEMOgo 2.....	7
Lading av MEMOgo.....	8
Å sette MEMOgo i MEMObase	8
Før du tar MEMOmessenger i bruk.....	8
Grunnleggende funksjoner.....	8
MEMObase uten MEMOgo docket.....	8
MEMOgo når den ikke er docket.....	8
MEMObase med MEMOgo docket.....	8
Av/på	9
Lav batterispenning	9
Lysdiode	9
Kvitteringslyder.....	9
Funksjoner som skjer om natten	9
Installere MEMOgo og Backup	10
Installere ny MEMOgo (adopsjon, sammenkobling mellom MEMOgo og MEMObase).....	10
Backup	10
Funksjoner for MEMOgo	11
Opplesing av tid.....	11
Meldinger.....	12
Repetisjonsfunksjon	13
Vekking.....	13
Opplesning av tidligere meldinger	13
Opplesning av fremtidige meldinger.....	13
Huskelapp	14
Voluminnstilling	14
Funksjoner for MEMObase	15

Klokken.....	15
Månesymbol, døgninformasjon og datoinformasjon.....	15
Digital klokke i kombinasjon med engelsk språk	15
Meldingsmarkeringer.....	15
Nedtelling til neste melding - Timestokk.....	15
Ingen klokkeinformasjon.....	15
Programmering av MEMOmessenger	16
Meny - Meldinger.....	16
Meny – Innstilling.....	21
Artikkelnummer og tilbehør	27
Dette leveres med MEMOmessenger 2	27
Dette kan kjøpes som tilbehør.....	27
Tekniske data.....	27
MEMObase 2	27
MEMOgo 2	27
Rengjøring	28
Lagring og kassering.....	28
Lagring	28
Kassering	28
Viktig informasjon.....	29
Sikkerhetsinstruksjoner før du bruker MEMOmessenger.....	29
Alvorlige hendelser.....	29
Samsvar med kravene til medisinskteknisk utstyr.....	29

MEMOmessenger 2

Produktbeskrivelse

MEMOmessenger 2 er en talende klokke som hjelper deg å huske.

Alarm med melding gis i form av lydsignal og innlest talemelding.

MEMOmessenger er utviklet i samarbeid med brukere og fagpersoner innen områdene demens, utviklingshemming, ervervet hjerneskade og psykiatri i Norge og Sverige. MEMOmessenger er også utviklet med støtte fra Norges forskningsråd.

Tiltenkt formål

MEMOmessenger kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for personer med kognitiv nedsettelse. Den som har utfordringer med å planlegge - og strukturere - hverdagen sin, eller har hukommelsesvansker, kan få mye hjelp av MEMOmessenger.

MEMOmessenger 2 leveres med

- MEMObase 2
- MEMOgo 2
- Innstillingspenn
- Belteveske
- Ørepropper (for diskrete meldinger)
- Klistremerker for merking av knapper på MEMOgo 2
- Snor for å ha MEMOgo 2 rundt halsen
- Strømadapter
- Brukerveiledning
- Hurtigguide

Dag- og ukeplanleggings skjema

Oversiktsark for dag- og ukeplanlegging kan skrives ut fra www.abilia.no

Forskjeller MEMOmessenger (1) og MEMOmessenger 2

Funksjonene i begge modellene er like, men de har forskjellig batterilading og strømadapter. Dette betyr at du ikke kan blande de forskjellige delene. MEMOmessenger 2 har desuten forbedret lyd kvalitet.

I denne brukerveiledning bruker vi MEMOmessenger-navnet selv om det faktisk er MEMOmessenger 2. Det samme gjelder for MEMObase og MEMOgo (MEMObase 2 og MEMOgo 2).

Beskrivelse av produktet MEMOmessenger 2

MEMOmessenger 2 består av en stasjonær enhet *MEMObase 2*, og en bærbar enhet *MEMOgo 2*. MEMOgo kan stå i MEMObase hele tiden, eller tas med.

MEMObase 2 består av:

- Berøringsskjerm som kan betjenes med innstillingspenn eller finger
- Innstillingspenn for å betjene berøringsskjermen
- Plass til MEMOgo



- Metallplate som fungerer som fot ved plassering av MEMObase på bord, eller som opphengsbrakett på vegg.


Justering av kontrast på MEMObase berøringsskjerm

MEMObase er ved levering innstilt med optimal kontrast. Om nødvendig er det mulig å justere, dette må gjøres av en tekniker! Innstillingsskruen er lett å ødelegge, og om skrujernet berører elektroniske komponenter på kretskortet kan displayet ødelegges.

Justering av
kontrast



Inn- og utganger på baksiden av MEMObase

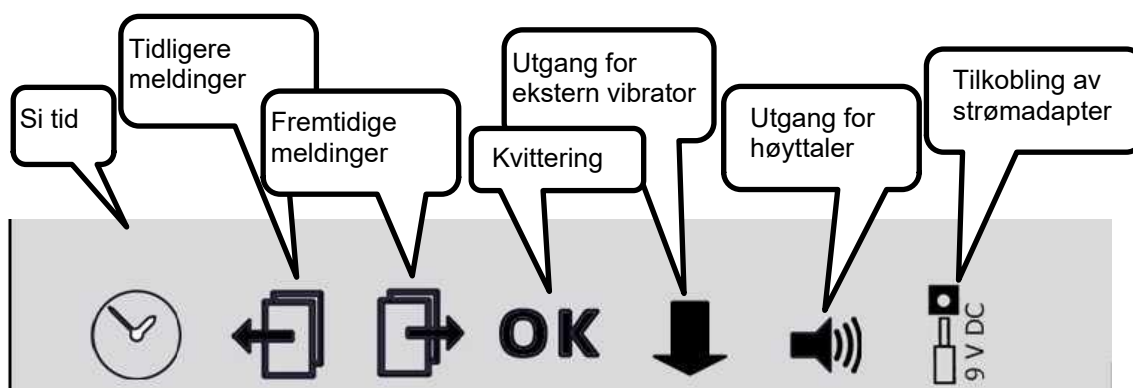

MEMOgo 2 består av:

- 8 knapper
- utgang for ørepropp
- inngang for strømadapter
- kontakt for docking i MEMObase 2

Klistremerker

De medfølgende klistremerkene kan brukes til å dekke over knapper som ikke er i bruk, slik at de ikke forvirrer. De kan også brukes til alternativ merking (man foretrekker/forstår gjerne ulike symboler), og de kan brukes til å orientere MEMOgo stående i stedet for liggende.


Ørepropper

Øreproppene brukes om man ønsker diskrete meldinger. Når øreproppene er tilkoblet vil meldingen kun høres i dem – ikke i høyttaleren. Å sette inn øreproppene kan også være en måte å "slå av" MEMOgo på (MEMOgo kan også slås av ved å holde begge volumknappene inne samtidig to sekunder –beskrevet mer utfyllende et annet sted i brukerveiledningen).

Halssnor

Halssnoren festes i tuppen av MEMOgo dersom man ønsker å ha den om halsen i stedet for i vesken.

Knapper på MEMOgo 2

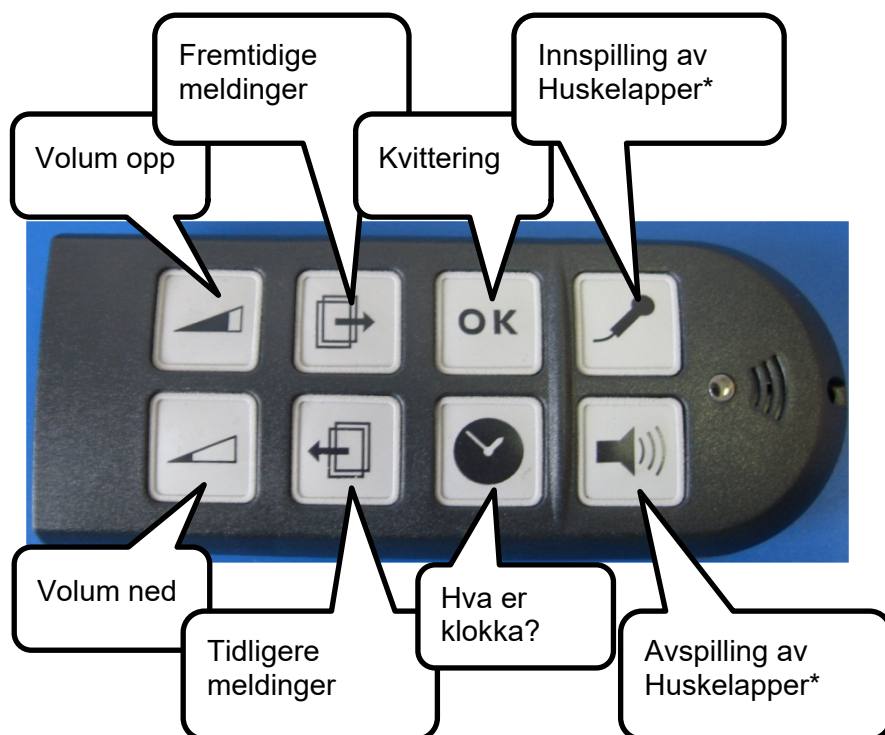


* Huskelapper spilles inn direkte på MEMOgo (samme funksjon som en diktafon), og er ikke knyttet til et bestemt tidspunkt slik meldinger spilt inn via MEMObase er.

Lading av MEMOgo

MEMOgo har et oppladbart batteri og lades normalt ved å legge den (betegnelsen "docke" blir i det etterfølgende brukt) i MEMObase. Den kan også lades med strømadapteren som følger med, og som normalt er plagget i MEMObase. Hvis Memo Go har blitt utladet i en lengre periode, kan det ta litt tid før den gule lysdioden tennes, og den kan til og med begynne å blinke en stund.

Å sette MEMOgo i MEMObase

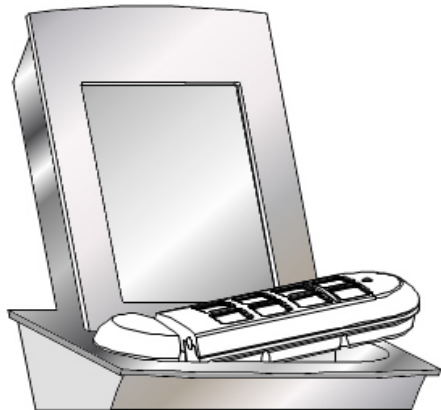

Skyv MEMOgo fra høyre mot venstre i MEMObase dockingstasjonen (se bilde).

OBS! Ikke dytt MEMOgo rett ned i MEMObase. Dette kan skade pluggen på MEMObase.

Et pling bekrefter at MEMOgo er riktig plassert.

En gul lampe på MEMOgo indikerer at lading har startet.

Før du tar MEMOmessenger i bruk

! **ADVARSEL:** Bruk bare den strømadapteren som følger med MEMOmessenger.

MEMObase må være koblet til strømadapteren for å fungere. MEMOgo må være oppladet for å fungere.

Grunnleggende funksjoner

MEMObase uten MEMOgo docket

MEMObase viser kun klokkebilde med dag, dato og år. Ingen andre funksjoner er tilgjengelig uten at MEMOgo er docket til MEMObase.

MEMOgo når den ikke er docket

MEMOgo fungerer som en klokke og gir påminnelser.

Meldingene høres i høyttaler i MEMOgo når øreplugg ikke er tilkoblet til MEMOgo.

Meldingene høres kun i øreplugg når denne er tilkoblet til MEMOgo.

MEMObase med MEMOgo docket

Tilgang til Meldingsmenyen og Innstillingsmenyen.

Alle funksjoner som er tilgjengelig i MEMOgo når den ikke er docket er også tilgjengelig når den er docket.

Meldinger leses opp i høyttaler på MEMObase og ekstern høyttaler hvis dette er tilkoblet.

Ved tidspunkt for en melding aktiveres vibratorutgangen på MEMObase, vibrator på MEMOgo aktiveres ikke.

Eksterne bryterinnnganger på MEMObase får samme funksjon som tilhørende bryter på MEMOgo.

Det tas backup av MEMOgo som lagres i MEMObase.

Synkronisering av klokke mellom enhetene skjer hver gang MEMOgo dockes og hver gang backup blir tatt.

Av/på

MEMObase slås av med å dra ut strømadapteren.

MEMOgo slås av og på ved å trykke og holde knappene *Volum opp* og *Volum ned* samtidig i 2 sekunder i docket eller i ikke docket tilstand.

Hvis MEMOgo dockes i avslått tilstand eller slås av mens den var docket, kommer teksten "MEMOgo er avslått" på displayet (i tillegg til klokkebildet).

Lav batterispennning

Når det er 10 % eller mindre restkapasitet i batteriene, sier MEMOmessenger "MEMOgo må lades" hver time.

Lysdiode

MEMOgo docket:

Lading = Fast gul

Fulladet = Fast grønn

Felles for docket og ikke docket MEMOgo:

Innspilling av huskelapp = Blinkende gul

Sletting av huskelapp = Blinkende gul

Kvitteringslyder

MEMOgo har følgende kvitteringslyder:

Ding-dong: ved forvarsel av meldinger.

Pling: ved avstilling av vekkerklokke

ved slutten av opplesing av tidligere og fremtidige meldinger

ved slutten av huskelapper

når MEMOgo slås av ved at trykke på knappene *Volum opp* og *Volum ned* samtidig i 2 sek

Pling-Pling: Når strømadapteren tilkoples eller når MEMOgo dockes.

Funksjoner som skjer om natten

Hver natt klokken 02.00 slettes gamle meldinger (eldre enn i går) på MEMOgo.

Installere MEMOgo og Backup

Installere ny MEMOgo (adopsjon, sammenkobling mellom MEMOgo og MEMObase)

Ved levering er MEMOgo adoptert av sin MEMObase. Det betyr at alle meldinger som lagres i MEMOgo også blir overført til MEMObase (backup).

Det er mulig for andre brukere å få sin MEMOgo docket i en fremmed MEMObase både for lading og opplesing av meldinger. Data vil ikke overføres for backup og enheten vil ikke bli linket uten at man bevisst velger det fra "Avansert" meny.

Om man mister sin MEMOgo, og får en ny, vil den kunne adopteres av MEMObase slik at alle meldingene man har lagret blir tilbakeført til MEMOgo.

MEMOgo kan være adoptert av flere MEMObaser. Hvis man for eksempel har behov for å bruke sin MEMOgo vekselvis hos mor og far som ikke bor sammen, kan de ha hver sin MEMObase hvor man kan legge inn nye meldinger. Disse meldingene lagres i MEMOgo som overfører dem til den andre MEMObasen neste natt den dockes der.

OBS! Man kan bare sammenkoble MEMObase og MEMOgo av samme versjon. MEMOgo (1) kan ikke adopteres til MEMObase 2, eller omvendt, MEMOgo 2 kan ikke adopteres til MEMObase (1).

Backup

Komplett backup av MEMOgo blir lagret i MEMObase hver natt kl. 02.00. I tilfelle MEMOgo ikke er docket på backup tidspunktet, blir backup tatt så snart MEMOgo blir docket igjen. Samtidig slettes gamle meldinger (eldre enn i går).

Eventuell alarm og andre hendelser som oppstår mens backup pågår blir prioritert.

Funksjoner for MEMOgo

Opplesing av tid

Når *Klokkeknappen* trykkes leses tiden opp. Opplesing av ukedag, dato, år og tid vil stå i forhold til hva som er innstilt under Innstillingsmenyene.

Eksempel 1:

Når det er valgt tale for alle tidsfunksjoner og det er analog klokke blir tiden lest opp i følgende format:

"Klokka er to over halv tre, det er torsdag natt fjerde juni to tusen og åtte"

Eksempel 2:

Når tale er valgt av for alle tidsfunksjoner og det er digital klokke blir tiden lest opp i følgende format:

"Klokka er to trettito"

Rekkefølgen på opplesing gir mulighet for å avbryte talen etter å ha hørt f.eks. klokketidspunktet. Dersom OK trykkes under opplesing av klokka, stopper opplesing umiddelbart.

Meldinger

Når tidspunkt for en melding inntreffer varsler MEMOmessenger på følgende måte:

Display:

Når MEMOgo er docket lyser displayet opp til maks lysstyrke i ett minutt før det går tilbake til vanlig innstilt lysstyrke. Ved repetisjon betyr det at displayet er tent i max lysstyrke i 10 minutter, eller til OK trykkes.

Vibrator:

Når MEMOgo ikke er docket og vibratorfunksjonen er valgt på, aktiveres vibratoren for MEMOgo tre ganger før en melding kommer – ti sekunder før, fem sekunder før og ett sekund før meldingen kommer.

Utgang for vibratorutgang:

Når MEMOgo er docket aktiveres vibratorutgangen (9 V DC) på MEMObase alltid ti sekunder før meldingen kommer.

Lyd:

Forvarsel (ding-dong)

Dersom "Forvarsel lyd" er valgt på kommer det et "*Ding-dong*" lydsignal på rett før talemeldingen.

Opplesning av tid

Tiden sies etter "*Ding-dong*" lydsignalet.

Talemelding

Innspilt talemelding avleses etter at opplesning av tid er ferdig. Det er mulig å legge inn flere talemeldinger på samme tidspunkt. Opplesning av flere meldinger på samme tidspunkt skjer med 5 sekunders opphold.

Eksterne høyttalere

Dersom en har behov for å få avspilt meldingene i et annet rom i tillegg til der MEMOmessenger står, kan man koble høyttalere med innbygget forsterker (PC høyttalere) til MEMObase. Ønskes høyttalere i flere rom må man koble utgangen merket "Line Out" på MEMObase til "Line In" på en forsterker (stereoanlegg). "Line Out" på klokka er en stereo utgang for 3,5 mm Jack-plugg.

Dersom meldingstidspunktet inntreffer mens MEMOmessenger er opptatt med en annen funksjon (lese opp tid, legge inn huskelapp osv.), vil funksjonen avbrytes og meldingen varsles.

Det er ikke mulig å avbryte en melding første gang den kommer. Dersom man ønsker å stoppe talen kan det gjøres ved å tilkoble ørepluggen.

Repetisjonsfunksjon

Dersom repetisjonsfunksjonen er valgt på skal varslingen repeteres hvert minutt inntil 10 ganger, eller inntil *OK* trykkes. Repetisjonen varsles på samme måte som en melding, bortsett fra at opplesning av tid ikke er med.

En melding med repetisjonsfunksjon kan kvitteres etter at den er presentert første gang.

Hvis det er flere meldinger med repetisjonsfunksjon samtidig, vil den melding som er påbegynt opplest kvitteres når man trykker *OK*.

Dersom sum av talebeskjeder overstiger repetisjonsintervallet på 60 sekund, avsluttes repetisjon på de eldste meldingene, slik at nye meldinger får prioritet.

Vekking

Dersom vekkerklokkefunksjon er valgt, repeteres varslingen hvert 3. minutt inntil 10 ganger, eller inntil vekkerklokke avstilles ved at *OK* trykkes og holdes inne i 2 sekund (varsles ved et "*Pling*"). Vekkerklokkefunksjon varsles på samme måte som en melding, bortsett fra at opplesning av tid ikke er med. Den 10. meldingen er kraftigere enn de foregående.

En vekkemelding kan kvitteres etter at den er presentert første gang.

Opplesning av tidligere meldinger

Dersom knappen *Tidligere meldinger* trykkes, leser MEMOmessenger opp tidligere meldinger. Opplesingen begynner med at produktet sier "Tidligere meldinger". Det er mulig å bla tilbake til midnatt i går. Nyeste melding avleses først, og eldste melding sist. Man spoler bakover i meldingene ved å trykke *Tidligere meldinger* innen 5 sekund etter at melding er lest ferdig. Dersom knappen trykkes før en melding er lest ferdig, avbrytes meldingen og neste melding leses opp (hurtigspoling).

Dersom *OK* trykkes under opplesing av en melding, stoppes talen umiddelbart.

MEMOmessenger sier dagens ukedag og dato en gang, deretter leses kun tidspunkt i forkant av meldinger. Dersom man blar lengre tilbake enn midnatt, sies det "I går", ukedag og dato for i går en gang, deretter leses kun tidspunkt i forkant av meldinger. Når det ikke er flere meldinger og knappen trykkes, sier MEMOmessenger "*Pling*".

Opplesning av fremtidige meldinger

Kommende meldinger leses opp dersom man trykker på knappen *Fremtidige meldinger*. Opplesingen begynner med at MEMOmessenger sier "Fremtidige meldinger". Man spoler fremover i meldingene ved å trykke *Fremtidige meldinger* innenfor 5 sekund etter at melding er lest ferdig. Dersom knappen trykkes før en melding er lest ferdig, avbrytes meldingen og neste melding leses opp.

Dersom *OK* trykkes under opplesing av en melding, stoppes talen umiddelbart.

Det leses opp tidspunkt i forkant av hver melding. En gang for aktuell dag leses det i tillegg ukedag og dato (eksempel: *mandag 20. mars, klokka halv to*).

Når det ikke er flere meldinger og knappen trykkes, sier MEMOmessenger "*Pling*".

Huskelapp

Huskelapper er, i motsetning til Meldinger, ikke knyttet opp mot en bestemt tid. Det er dessuten mulig å spille inn huskelapper direkte på MEMOgo uten at den er docket i MEMObase. Det er valgbart fra *innstillingsmenyen* om MEMOmessenger skal ha 1 eller 10 huskelapper. Lengde på en huskelapp er begrenset med total gjenværende taleminne. Dersom 1 huskelapp er valgt, vil gammel huskelapp overskrives av ny. Dersom 10 huskelapper er valgt, er det mulig å velge i innstillingsmenyen om den 11. huskelappen skal overskrive den første. Standard innstilling er at overskriving ikke er tillatt.

Innspilling

Ny huskelapp spilles inn ved å holde inne *mikrofonknappen* i 2 sekund. Etter 2 sekunder starter gul lysdiode å blinke (dersom ikke alt minne er oppbrukt), og innspillingen starter. Lysdioden blinker under innspillingen så lenge knappen holdes inne eller til eventuelt alt minne er brukt opp. Når minne er oppbrukt, sier MEMOmessenger "Minnet er fullt".

Avspilling av innleste huskelapper

Dersom *Høytaler*-knappen trykkes, avspilles innleste huskelapper. Rekkefølgen er alltid fra nyeste huskelapp til eldste huskelapp. Man blar i huskelapper ved å trykke *Høytaler*-knappen innen 5 sekunder etter at huskelappen er lest ferdig. Dersom knappen trykkes før en huskelapp er lest ferdig, avbrytes huskelappen og neste huskelapp leses opp (hurtigspoling).

Det er kun innleste huskelapper som blir avspilt (ikke tid eller nummer på huskelappen). Når det ikke er flere huskelapper og knappen trykkes, sier produktet "Pling".

Dersom *OK* trykkes under avspillingen, stoppes talen umiddelbart.

Sletting

Sletting av en huskelapp skjer ved å bruke *OK*-knappen. Sletting vises ved at gul lysdiode blinker i 3 sekund. **Det er ingen angrefunksjon.** Det kommer en talemelding "Meldingen er slettet" når en huskelapp blir slettet.

Dersom *OK* trykkes og holdes i 2 sekunder under avspilling av en huskelapp, avbrytes avspillingen og huskelappen slettes.

Dersom *OK* trykkes og holdes i 2 sekunder innen 5 sekunder etter avspilling av en huskelapp, slettes meldingen.

Voluminnstilling

Voluminnstilling for lyd skjer alltid på MEMOgo ved å trykke på knappene *Volum opp* eller *Volum ned*. Volumet har fem trinn og innstillingene huskes. Det er ikke mulig å sette volum til null. Voluminnstilling i docket modus gjelder for høytaler i MEMObase. Voluminnstilling ved ikke docking gjelder felles for høytaler i MEMOgo og for ørepropp.

Ved trykk på *Volum*-knappene høres en "Pling" med det lydnivået som er valgt.

Det kommer opp et eget bilde med grafisk framstilling av volumet ved endring på volumet i MEMObase. Bildet vises mens man stiller volum, og i 1 påfølgende sekund.

Funksjoner for MEMObase

Klokken

Klokkebildet som er valgt, d.v.s. analog eller digital klokke, vises normalt på displayet. Når man er i en innstillingsmeny, og er inaktiv i tre minutter, går MEMOmessenger tilbake til klokkebilde.

Visningsformat på MEMObase følger den MEMOgo som til enhver tid er docket. Dermed vil en bruker som låner en MEMObase få samme funksjon uansett hvor docking skjer. Når docking opphører, velges det visningsformat på MEMObase som ble konfigurert sammen med adoptert MEMOgo.

Dersom det trykkes midt i klokkebildet og MEMOgo er docket, vil tidspunktet leses opp.

Månesymbol, døgninformasjon og datoinformasjon

Månesymbol gir informasjon om det er natt eller dag.

Døgninformasjon gir informasjon om når på døgnet det er (morgen, formiddag, ettermiddag, kveld og natt).

Det er mulig å velge om dato og årstall skal presenteres på displayet.

Digital klokke i kombinasjon med engelsk språk

Dersom digital klokke med 12-timers format er valgt fra innstillingsmenyen, og det også er valgt engelsk språk, vil AM/PM vises.

Meldingsmarkeringer

Når MEMOgo er docket, og analog klokke og *meldingsmarkeringer* er valgt i innstillingsmenyene, vil meldinger for de kommende 12 timer vises som en prikk i kanten rundt klokkeskiven.

Når det trykkes på en *meldingsmarkering* på displayet, vil den eller de meldinger som ligger i tidsintervallet til markeringen bli opplest. Oppløsning på meldingsmarkeringene er 30 minutter.

Flere meldinger under samme prikk leses opp fortløpende etter hverandre. Opplesing av en talebeskjed kan avbrytes ved et nytt trykk - da leses neste beskjed opp. Det leses opp klokkeslett for hver melding i forkant av talebeskjed.

Nedtelling til neste melding - Timestokk

Når MEMOgo er docket, skal Timestokken (nedtelling til neste alarm) vises dersom funksjonen *nedtelling* er valgt fra innstillingsmenyen. Timestokken skal da være synlig fra det tidspunktet det er 2 timer igjen til en alarm, og telle ned 1 sirkel hvert kvarter inntil alle 8 sirklene er tallet ned. Siste sirkel slettes når varsling / forvarsling begynner. Når tidspunktet for førstkomende melding er passert, vises tiden til neste melding.

Ingen klokkeinformasjon


Dersom MEMObase har vært uten spenning og dersom MEMObase har dårlig klokkebatteri slik at klokkeslett ikke lenger er gyldig, skal ikke klokka vises på skjermen. I stedet vises eget bilde "SETT I MEMOGO".

Programmering av MEMOmessenger

MEMOmessenger har to hovedmenyer – én for å legge inn **meldinger**, og én for å gjøre mer grunnleggende **innstillinger**. All programmering gjøres på berøringskjermen.

Trykk og hold inne knappen på venstre side av MEMObase for å komme inn i til menyene. Bruk innstillingspennen som følger med MEMOmessenger.

Programmeringsknapp

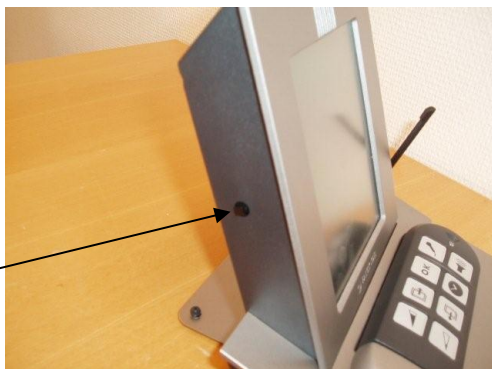

OBS! MEMOgo må være slått på for å gå inn i innstillingsmodus.

Meny - Meldinger

Dersom *programmeringsknappen* trykkes og holdes i 3 sekunder, vises hovedmenyen Meldinger. Fra denne menyen kan det velges mellom følgende valg:



Dersom det ikke er mere plass tilgjengelig for flere meldinger, vises teksten "MINNET ER FULLT" i stedet for de 4 valgene for å sette melding.

SJEKK/ENDRE knappen vises bare når det er lagt inn meldinger.

Sett enkel, ukentlig, månedlig og årlig melding

Når "Sett melding" er valgt, vises følgende:

The image shows four screenshots of a blue interface for setting reminders. Each screen has a title bar, a time display, a date display, and several options. The first screen is for 'ENKEL MELDING' (Single Message) showing 10:57 on Tuesday, April 22, 2008. The second is for 'UKENTLIG MELDING' (Weekly Message) showing 10:59, with checkboxes for days of the week (M, T, O, T, F, L, S, ALLE) and options for 'MASING 1 MIN' and 'VEKKING 3 MIN'. The third is for 'MÅNEDLIG MELDING' (Monthly Message) showing 11:00 on 'DAG 22' (Day 22), with options for 'MASING 1 MIN' and 'VEKKING 3 MIN'. The fourth is for 'ÅRLIG MELDING' (Annual Message) showing 11:00 on '22 APRIL'. All screens have a 'TIDSBEGRENSNING AV' (Time Limit) button and an 'AVBRYT' (Cancel) button.

- Nåtid, samt piler for å bla i tid vises
- Sjekkbokser for REPETISJON og VEKKING.
- Knapper for INNSPILLING og AVBRYT.
- For ukentlig melding vises sjekkbokser for valg av ukedager.
- For ukentlig, månedlig og årlig melding vises knapp for tidsbegrensning av meldinger. Dette kan være aktuelt for eksempel i ferietider.

Knappene HØR MELDING og LAGRE vises ikke før det er spilt inn en talebeskjed.

Menyene startes alltid med å vise nåtid, og tida oppdateres ikke etter hvert som klokka går. I tilfelle tidspunktet for melding har blitt for gammelt når man trykker på knappen LAGRE for en enkel melding, vil tidspunktet for melding bli lagret til 1 minutt senere enn lagringstidspunktet.


Repetisjon og vekkerklokke kan ikke velges samtidig. Siste valg overstyrrer forrige.

Det blas fram og tilbake med pilene. Det er ikke mulig å gå tilbake lengre enn til nåtid. *Det er derfor nødvendig å stille inn dag/dato først dersom ønsket tidspunkt på dagen er tidligere enn tiden nå.* Det blas en enhet pr trykk, f.eks. 1 minutt pr trykk. Dersom en pil trykkes og holdes mer enn 0,8 sekund, startes det å bla fortløpende med 4 ganger pr. sekund. Da begynner minutter å løpe med faktor på 10.

Dersom det er andre meldinger på et tidspunkt vises dette ved et eget bjellesymbol. Bjellesymbolet vises uansett om meldingen er deaktivert eller utenfor en tidsbegrensning. Det er mulig å høre meldingen ved å trykke på bjellesymbolet. Meldinger leses fortløpende etter hverandre, opplesing av en talebeskjed kan avbrytes ved et nytt trykk, og da høres neste talebeskjed hvis det er flere meldinger på samme tid.

Melding annenhver uke


Om man velger ukentlig melding vil man også kunne velge om den bare skal komme annenhver uke.

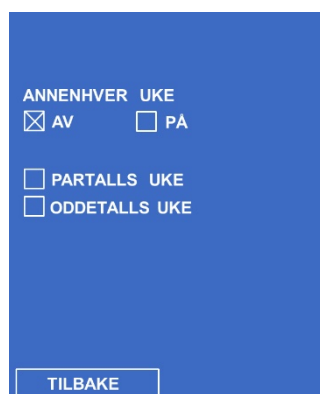

ANNENHVER UKE
 AV PÅ
 PARTALLS UKE
 ODDETALLS UKE
TILBAKE

Innspilling

Når knappen (hvit sirkel) trykkes, vises en egen innspillingsmeny.

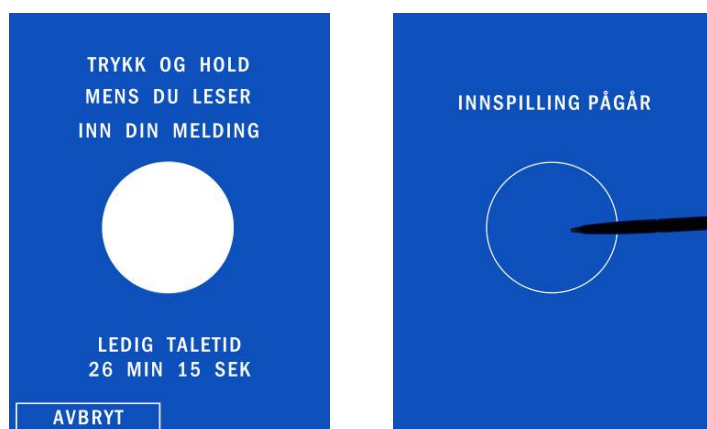

Stor hvit sirkel (trykk og hold for innspilling av melding).

AVBRYT for å avbryte innspilling og komme tilbake til "Sett melding" meny.

Teksten "TRYKK OG HOLD MENS DU LESER INN DIN MELDING".

Teksten "LEDIG TALETID" vises til det gjenstår mindre enn 244 minutter. Så er antall minutter som gjenstår på linjen under, der XX minutt eller sekund er status på gjenvarende taleminne. Går over til å vise sekunder hvis det er mindre enn 5 minutter igjen av taleminne.

Dersom innspillingssymbolet (fylt sirkel) trykkes, starter innspilling og eget bilde med hvit sirkel (uten fyll) samt teksten "INNSPILLING PÅGÅR" vises så lenge knappen trykkes. Dersom taleminnet blir oppbrukt under innspilling, avbrytes innspilling og teksten "MINNET ER FULLT" vises. Det som har vært innspilt så langt lagres.

Tips! For tydeligere meldinger anbefales det at du venter i 2 sekunder før du snakker etter at du har trykket på innspillingssymbolet.

Når knappen slippes vises "Sett melding" meny igjen.

Dersom tidspunkt for en melding inntreffer mens man holder på med å lage, sjekke eller endre meldinger, avbrytes eventuell igangsatt inn- og avspilling uten å gå ut av innstillingsmeny og meldingen leses opp. I tilfelle en innspilling avbrytes, lagres det som har vært innspilt så langt og teksten "AVBRYT GRUNNET OPPLESING AV MELDING" vises.

Hør melding

En høyttalersymbol vises når det er spilt inn en talebeskjed. Når en talebeskjed er spilt inn og symbolen trykkes, avspilles meldingen. Et nytt trykk stopper avspilling.

Tips: For best resultat – snakk med normal stemme nær mikrofonen som sitter i MEMOgo.

Tidsbegrensning



En tidsbegrenset melding er en melding som skal komme i en bestemt, begrenset tidsperiode. Det kan for eksempel være i ferietider. Starttid bestemmer hvilken dato meldingen skal begynne å komme. Sluttid bestemmer hvilken dato meldingen skal opphøre.

Man kan velge å skru av en tidsbegrenset alarm ved å trykke AV. Knappen for TILBAKE returnerer til forrige menybildet.

Avbryt

Knappen AVBRYT avbryter uten å lagre meldingen, og forrige menybilde vises.

Lagre

Knappen LAGRE vises først når det er spilt inn en talemelding, slik at man unngår lagring av melding som ikke har fått innspilt en talebeskjed. Trykk på knappen fører til at alarmen lagres og forrige menybilde vises.

Sjekk/Endre melding

Når du har en innspilt melding som ikke er aktuell i en viss tidsperiode, men vil bli aktuell på nytt, kan du deaktivere meldingen. På denne måten lagrer du den innspilte meldingen og deres tidsdata. For å deaktivere en melding, gå til Sjekk/Endre melding, bla med pilen til den aktuelle meldingen. For å kunne Deaktivere, velg først alternativet Endre. Den nye siden som vises, har et alternativ for Deaktivering. Deaktiver meldingen ved å merke sjekkboksen. Meldingen varsler nå ikke på den angitte tiden, med mindre du aktiverer meldingen under Sjekk/Endre melding og fjern avkrysningsboksen for Deaktivering.

Når SJEKK / ENDRE er valgt, vises følgende:



"SJEKK / ENDRE" vises øverst på displayet.

Nåtid vises samt tilhørende piler for å bla i tid.

Sjekk bokser for å sette søkekriterier for enkel, ukentlig, månedlig og årlig melding.

Meldingsknapper for å søke fram og tilbake i meldinger ut ifra gitt starttid og valgt type melding.

Knappene SLETT, HØR MELDING og ENDRE vises bare når det er en melding til tilhørende valgt tid.

Det blas i tid fram og tilbake med pilene. Det er ikke mulig å gå tilbake lengre enn til nåtid. Det blas en enhet pr trykk, f.eks. 1 minutt pr trykk. Dersom en pil trykkes og holdes mer enn 0,8 sekund, startes det å bla forløpende med 4 ganger pr. sekund.

Dersom det er en melding på et tidspunkt vises følgende:

- Type melding.
- Eventuelt informasjon om tidsbegrensing.
- Eventuelt informasjon om deaktivering.
- I høyre øvre hjørne vises antall meldinger på aktuelt tidspunkt, og hvilken av meldingene som vises, f.eks. 1/4 er den første av fire meldinger som er lagret på dette tidspunktet.

Slett

Knappen SLETT vises bare når det er valgt en melding. Når knappen trykkes, avbrytes eventuelt opplesning, og ny meny for å bekrefte sletting vises. Ny meny gjentar all relevant informasjon om meldingen. *Avbryt*-knappen avbryter uten å slette, og forrige menybilde vises.

For repeterende meldinger er det mulig å slette enkelte forekomster uten at alle meldingene slettes.

SLETT sletter meldingen og oppdatert forrige menybilde vises med samme tidspunkt.

Hør melding

Høytalersymbolet vises bare når det er valgt en melding. Et trykk på symbolet avspiller talebeskjeden. Et nytt trykk stopper avspilling.

Avbryt

Trykk på knappen AVBRYT avbryter eventuelt opplesning, og menyen "Meldinger" vises.

Endre

Når knappen ENDRE trykkes går MEMOmessenger til tilhørende meny for "Endre melding". Øvrig funksjonalitet er som for "Sett melding".

Avslutt

Ved å trykke på knappen AVSLUTT, forlates menyen "Meldinger" og klokkebildet vises.

Meny – Innstilling



Dersom *Programmerings*-knappen trykkes og holdes i 6 sekunder, vises hovedmenyen Innstilling. Dersom tidspunkt for en melding inntreffer mens man holder på med innstillinger, blir meldingen lest opp uten å gå ut av innstillingsmenyene.

Fra menyen kan det velges mellom følgende valg:

Still klokke

Når STILL KLOKKE er valgt, vises følgende:



"STILL KLOKKE " vises øverst på displayet.

Nåtid vises samt tilhørende piler for å bla i tid.

Sjekkboкс for å sette 12 timers visning.

Sjekkboкс for automatisk justering for sommertid.

Knapper for AVBRYT og LAGRE.

Menyene startes alltid med å vise nåtid, og tida oppdateres ikke etter hvert som klokka går.

Det blas fram og tilbake med pilene. Det er ikke mulig å gå tilbake lengre enn til 01.01.2007. Det blas en enhet pr trykk, f.eks. 1 minutt pr trykk. Dersom en pil trykkes og holdes mer enn 0,8 sekund, startes det å bla forløpende med 4 ganger pr. sekund. Da begynner minutter å løpe med faktor på 10.

AVBRYT

Knappen avbryter uten å lagre, og forrige menybilde vises.

LAGRE

Trykk på knappen lagrer klokke og dato informasjon, sekund i klokka settes til 0 og forrige menybilde vises.

Å stille klokka direkte på MEMOgo

OBS! Å stille klokken gjøres mye enklere på displayet på MEMObase. Se avsnittet over. Å stille klokka direkte på MEMOgo er kun hensiktsmessig dersom man reiser over tidssoner og ikke har med seg MEMObase.

Trykk og holde inne *Klokkesymbolet* i 10 sekunder. Etter 10 sekunder starter innstillingen av klokka ved at årstallet først stilles. Dette gjøres ved at MEMOmessenger først sier årstallet for å indikere at årstallet kan endres.

Følgende knapper benyttes for å stille klokka:

OK:	Start neste innstilling, og sier verdien på denne innstillingen. Starter med årstall, deretter måned, dato, timer og minutt. Når knappen trykkes under innstilling av minutt, avsluttes programmeringen og klokka oppdateres.
Volum opp og ned:	Øker og minker innstillingsverdien, og sier verdien.
Klokkesymbolet:	Avslutter programmeringen uten å oppdatere klokka.

Eksempel på tale for setting av dato 02.03.2008 og klokka 15:45:

Innstillings- sekvenser:	Talemelding:
Årstall	To tusen og åtte
Måned	Mars
Dato	Andre Mars
Timer	Klokka femten
Minutt	Klokka femten førtifem

Dersom klokka stilles fram og det er meldinger i dette tidsrommet, blir ikke disse meldingene varslet.

Displayvisning

Når DISPLAYVISNING er valgt, kan man ved hjelp av sjekkbokser bestemme om følgende skal vises på klokkebildet:

DISPLAYVISNING

- DIGITAL KLOKKE
- BARE TIMEVISER
- MELDINGSMARKERING
- NATTSYMBOL
- NEDTELLING

VISNING

- KLOKKESLETT
- DØGNVISNING
- UKEDAG
- DATO
- ÅR

TALE

-
-
-
-
-

AVBRYT LAGRE

- Digital klokke
- Bare timeviser (for analog klokke)
- Meldingsmarkering (for analog klokke)
- Nattsymbol
- Nedtelling (til neste alarm)

I tillegg er det sjekkbokser for å velge om MEMOmessenger skal si følgende for en melding:

- Klokkeslett
- Døgnvisning
- Ukedag
- Dato
- År

AVBRYT

Knappen avbryter uten å lagre, og forrige menybilde vises.

LAGRE

Trykk på knappen lagrer innstillinger, forrige menybilde vises.

Døgnoppdeling

Når DØGNOPPDELING velges, kan man stille starttidspunktet for:

DØGNOPPDELING

MORGEN: ◀ 06:00 ▶

FORMIDDAG: ◀ 10:00 ▶

ETTERMIDDAG: ◀ 14:00 ▶

KVELD: ◀ 18:00 ▶

NATT: ◀ 23:00 ▶

LYS DAG ◀ 100% ▶

LYS NATT ◀ 100% ▶

AVBRYT LAGRE

- Morgen
- Formiddag
- Ettermiddag
- Kveld
- Natt

Det er piler for å bla fram og tilbake for hver tid på døgnet i step på en halv time. Gyldig område for start på morgen er fra kl 04:00 til 12:00. Gyldig område for start på natt er fra kl 18:00 til 02:00. Det er ikke mulig å velge tidsintervaller som overlapper med andre dagtidspunkter eller med natt-tidspunkt.

Når MEMOmessenger er satt opp med engelsk språk er det ikke innstilling for formiddag. Da er morgen (morning) default fra 6 til 12, ettermiddag (afternoon) fra 12 til 18, kveld (evening) fra 18 til 23 og natt (night) fra 23 til 6.

Menybildet inneholder justering av backlight lysstyrke for dag og natt. Ved å trykke på tilhørende piler stilles styrken på lyset opp og ned i step på 1 %. Backlight endres i takt med innstillingen. Etter langt trykk endres styrken 4 ganger i sekundet. Lys for dag og natt kan stilles helt fritt i forhold til hverandre (det er f.eks. mulig å ha kraftigere lys om natten.)

På menybildet er det knapper for AVBRYT og LAGRE med samme funksjonalitet som i "Displayvisning" menyen.

Forvarsling

Når FORVARSLING er valgt, kan man ved hjelp av sjekkbokser velge om meldinger skal ha:



- Forvarsel med lyd
- Forvarsel med vibrasjon

På menybildet er det knapper for AVBRYT og LAGRE med samme funksjonalitet som i "Displayvisning" menyen.

MEMOgo

Når MEMOgo er valgt, kan man ved hjelp av sjekkbokser velge om produktet skal ha 1 eller 10 huskelapper. Det er ikke mulig å velge begge samtidig. Siste valg overstyrer forrige.



Når 10 huskelapper er valgt, er det mulig å velge om huskelapp 11 skal overskrive den første. Standardinnstillingen er at overskriving ikke er tillatt.

Man kan også velge å deaktivere tastene for volumkontroll og tastene for å bla forover og bakover i meldingene.

På menybildet er det knapper for AVBRYT og LAGRE med samme funksjonalitet som i "Displayvisning" menyen.

Avansert

Når AVANSERT er valgt, vises det et menybildet med følgende valg:



- SPRÅK
- ADOPTER MEMOGO
- TILBAKEFØR BACKUP
- KALIBRER SKJERM
- SLETT ALLE MELDINGER
- FABRIKKOPPSETT
- AVBRYT

Språk

På MEMOmessenger kan man velge mellom norsk, svensk og dansk tale og tekst, med både mann- og kvinnestemme.



Når meny SPRÅK velges, vises det navnet på valgt språk med tilhørende piler for bla gjennom mulige språkvalg.

Sjekk bokser brukes for å velge mann eller kvinnestemme. Begge sjekkbokser kan ikke velges samtidig. Siste valg overstyrer forrige.

Adopter MEMOgo

Når ADOPTER MEMOGO velges fra menyen, linkes MEMOgo med MEMObase. Da vises teksten "MEMOGO ER ADOPTERT" i 5 sekunder, deretter viser produktet "Avansert" meny igjen. Eventuell tidligere linking til andre MEMOgo vil bli slettet hos MEMObase.

Tilbakefør backup

OBS! Dette er aktuelt dersom man har fått en ny MEMOgo (mistet den gamle) og vil overføre meldinger som ligger som backup på MEMObase. Alt som eventuelt ligger lagret i MEMOgo blir slettet.

Når TILBAKEFØR BACKUP velges fra menyen og MEMOgo er docket i en MEMObase som den er linket sammen med skal fullstendig backup overføres fra MEMObase til MEMOgo. Det vises "BACKUP KOPIERES TIL MEMOGO" på displayet mens kopieringen pågår, deretter viser produktet "Avansert" meny igjen.


OBS! Dette tar ca.30 minutter.

Hvis MEMOgo og MEMObase ikke er linket sammen, vil teksten "MEMOGO ER IKKE ADOPTERT" vises i 5 sekunder, deretter viser produktet "Avansert" meny igjen.

Hvis det ikke finnes gyldig backup, vil teksten "INGEN GYLDIG BACKUP" vises i 5 sekunder, deretter viser produktet "Avansert" meny igjen.

Alarmer som har sin varslingsstidspunkt mens backup tilbakeføres blir ignorert.

Kalibrer skjerm

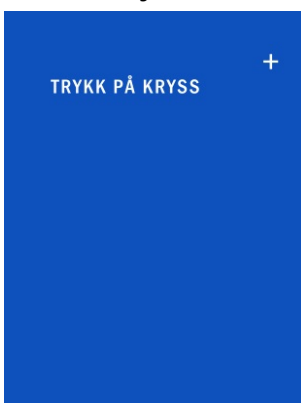

Når KALIBRER SKJERM meny velges, vises det et kryss i høyre øvre hjørne og tekst midt på skjermen "TRYKK PÅ KRYSS". Etter at bruker trykker på krysset, forsvinner dette krysset og det vises kryss i nedre venstre hjørne med samme tekst. Etter at bruker trykker på krysset, viser produktet "Avansert" meny igjen.

Slett alle meldinger

Her kan man slette alle meldinger uten å endre på annet oppsett.

Fabrikkoppsett

Dette vil slette alle meldinger som ligger lagret både i MEMObase og i MEMOgo. I tillegg vil alle funksjoner nullstilles som følger:

- Ingen meldinger.
- Ingen huskelapp meldinger.
- 10 huskelapper. Overskriving ikke tillatt.
- Automatisk stilling for sommertid.
- Analog klokke.
- 24-timers format.
- Full visning av klokke, tid på døgnet, ukedag, dato og år.
- Meldingsmarkering, nattsymbol og nedtelling.
- Dag starter med morgen kl. 06:00 med 80% lysintensitet på displayet.
- Natt starter kl. 23:00 med 20% lysintensitet på displayet.
- Forvarsling lyd.
- Forvarsling vibrasjon.
- Informasjon om linking i MEMObase blir slettet.
- Valgt språk påvirkes ikke.
- Sletter all backup i MEMObase.

Kalibrering av skjerm forblir uendret ved valg av Fabrikkoppsett.

Når man velger FABRIKKOPPSETT, vises teksten "PRODUKTET HAR FÅTT FABRIKKOPPSETT" i 5 sekunder, deretter viser MEMOmessenger klokkebildet.

Avbryt

Ved å trykke på AVBRYT knappen vises menyen "Innstilling".

Avslutt

Ved å trykke på AVSLUTT knappen, forlates menyen "Innstilling" og klokkebildet vises.

Artikkelnummer og tilbehør

Dette leveres med MEMOmessenger 2

Art.nr	Benevning	Beskrivelse	Antall
508891	MEMObase 2	stasjonær enhet	1 stk.
508892	MEMOgo 2	bærbar enhet	1 stk.
105182	Pekepenn		1 stk.
502626	Ørepropper	for diskrete meldinger	1 stk.
508573	Halssnor	snor for å ha MEMOgo 2 rundt halsen	1 stk.
980262	Symbolsett	klistremerker for egen merking av MEMOgo	1 stk.
508574	Belteveske	til MEMOgo-enheten	1 stk.
508893	Strømadapter		1 stk.
	Bruksanvisning		1 stk.
	Snabbguide		1 stk.

Dette kan kjøpes som tilbehør

502529	Ekstern vibrator
	Diverse brytere

Tekniske data

MEMObase 2

Vekt:	710 gram
Mål:	200 x 185 x 150 mm
Skjermstørrelse:	7 tommer (88 x 116 mm)
Backupbatteri:	CR2032
Estimert levetid:	5 år

MEMOgo 2

Vekt:	115g
Mål:	123x50x26 mm
Taletid:	Min 600 min (inkl. huskelapper)
Batteri:	Oppladbart 3,7 V LiPo 600 mAh (batteriskifte må foretas hos leverandør)
Ladetid:	Tomt batteri til fulladet; 4 timer
Forbruk standby:	380µA. Gir en teoretisk standbytid på 2 måneder.
Aktiv, middels lydnivå:	Typisk 290 mA. Gir en teoretisk taletid på ca. 2 timer.
Aktiv, høyt lydnivå:	Typisk 360 mA. Gir en teoretisk taletid på overkant av 1,5 timer.
Strømadapter:	9 V 0,8 A
Backupbatteri:	CR2032
Estimert levetid:	5 år

Rengjøring

! **ADVARSEL:** MEMOmessenger må ikke senkes i vann.

MEMOmessenger kan rengjøres med en klut *lett fuktet* i såpevann, men må ikke nedsenkes i væske. Koble fra strømtilførselen under rengjøring. Vær spesielt forsiktig med rengjøring av tastaturet til MEMOgo. Bruk av løsemidler, eller hardhendt rengjøring, vil kunne få trykket til å løsne.

Lagring og kassering

Lagring

Oppbevar produktet innendørs i romtemperatur og borte fra fuktighet.

Kassering

Ytteremballasjen skal resirkuleres som papiravfall.

Inneremballasjen skal resirkuleres som plastavfall.


Produktet skal resirkuleres som elektronikkavfall når det skal kasseres. Det kan leveres til alle utsalgssteder som selger elektronikkprodukter, til din leverandør, eller på kommunal oppsamlingsplass.



Viktig informasjon

Før du bruker produktet, må du lese og forstå innholdet i denne bruksanvisningen.

Sikkerhetsinstruksjoner før du bruker MEMOmessenger

 **ADVARSEL:** Les de følgende advarslene før du bruker produktet.

- Bruk bare den originale strømadapteren som følger med MEMOmessenger.
- MEMOmessenger må ikke senkes i vann.

Alvorlige hendelser

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse i forbindelse med produktet, skal dette rapporteres til produsenten og myndighetene i ditt land. En hendelse anses som alvorlig hvis den direkte eller indirekte kan ha ført til, eller kan føre til dødsfall til en pasient, bruker eller annen person, midlertidig eller permanent alvorlig svekkelse av pasientens, brukerens eller andres helsetilstand eller en alvorlig trussel mot folkehelsen.

Samsvar med kravene til medisinskteknisk utstyr

MEMOmessenger markedsføres som et teknisk hjelpemiddel for personer med funksjonshemninger, og det oppfyller alle nødvendige krav, forskrifter og direktiver for medisinskteknisk utstyr. Produktansvar Produktet er utviklet og risikovurdert i samsvar med ISO 14971. Bruksanvisningen og de tekniske spesifikasjonene er utformet i samsvar med sikkerhetsvurderingen i risikoanalysen. Vær alltid sikker på når du bruker produktet. Abilia AB tar ikke ansvar for konsekvenser etter feil bruk eller installasjon av produktet. Enhver form for manipulering eller manipulering av produktet ugyldiggjør garantien og fraskriver seg produsentens ansvar. Anslått levetid for produktet gjelder når det brukes i samsvar med den tiltenkte bruks- og vedlikeholdsinstruksjonen.

Kontaktinformasjon

Sverige

Abilia AB, Råsundavägen 6, 169 67 Solna, Sverige

Telefon +46 (0)8- 594 694 00 | support@abilia.se | www.abilia.se

Norge

Abilia AS, Tevlingveien 23, 1081 Oslo, Norge

Telefon +47 23 28 94 00 | support@abilia.no | www.abilia.no

Storbritannia

Abilia UK Ltd, Unit12 Buckingway Business Park, Swavesey,
Cambridge, CB24 4AE, Storbritannia

Telefon +44 (0) 1954 281 210 | support@abilia.uk | www.abilia.uk

Internasjonal

www.abilia.com/intl/get-products/distributors

CE

