



Easy Roll Glidelaken

Bruksanvisning:

EasyRoll plasseres med glideflaten opp og sentreres midt i sengen, med øvre kant litt nedenfor puten.

NB: Markeringssømmen skal følge madrasskantene ved en sengebredde på 90cm. Sidepartiene brettes inn under madrassen.

Vær nøye med at hele kroppen fra skuldre til sete hviler på glideflaten. De hvite sidepartiene på lakenet fungerer som viktige bremseflater slik at brukeren ikke glir ut av sengen. De gir også støtte ved legging og oppreising i sengen.

Vaskeinstruks:

Vaskes på 60 grader, og kan ved behov vaskes på 90 grader.

Tørketromles på maks 70 grader. Det ideelle er å henge glidelakenet til tork, og at det strekkes før opphenging.

Kan strykes på middels høy temperatur, noe som også forbedrer glide-evnen.

Materiale:

Glidedelen er 100 % spesialvevd polyester.

Side og underdel er 50 % polyester og 50 % bomull.

Sertifisering/tester:

- CE-godkjent
- Godkjent i henhold til brannkrav NT Fire 029:1987 SS 876 00 01

Miljø:

Kan sorteres som brennbart avfall uten skadelig innvirkning på miljøet.