


Mobil Tipp

Dusch och toalettstol med motor

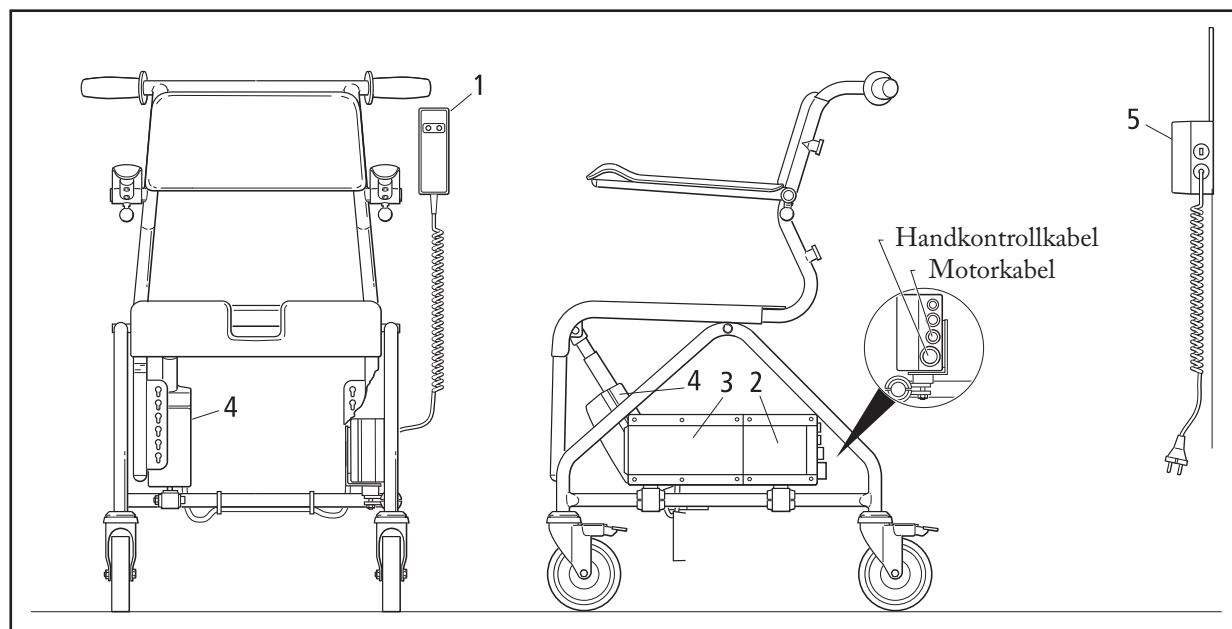

- 1 Handkontroll (vattensäkrad enl. IP 65), bipackas.
- 2 Styrenhet (vattensäkrad enl. IP 65).
- 3 Batteri (vattensäkrad enl. IP 65).
- 4 Ställdon (vattensäkrad enl. IP 65).
- 5 Laddare med väggskena, bipackas

Laddaren monteras på vägg, nära eluttag.
Laddaren kan lämnas konstant ansluten till elurtaget.

Se till att batteri, ställdon och handkontroll är ordentligt anslutna till styrenhet.

Sittenhetsen är tippbar 30° bakåt och 5° framåt. Användning av nackstöd rekommenderas.

OBS! Innan Mobil Tipp tas i bruk måste batteriet laddas.

- Batteriet lyfts av stolen och ansluts till laddaren. Handtag finns fram till på batteriet.
- Ett tomt batteri behöver 8 timmars laddning.
Gul lampa lyser= Laddning pågår.
Grön lampa lyser= Batteriet är fulladdat.
- Strömstyrkan från laddaren överstiger aldrig 24V.
- Laddningen avbryts genom att batteriet avlägsnas från laddaren.
OBS! Avbryt aldrig laddningen genom att dra ur väggkontakten.

Ladda batteriet ofta!

Beroende på hur mycket Mobil Tipp används varierar behovet av laddning.

En summerton hörs när batteriet har förbrukat 50% av sin kapacitet. Batteriet tål att laddas upp ofta.


För att slippa onödiga driftstopp rekommenderar vi regelbunden laddning och att kontaktytor mellan batteri och styrenhet är rengjorda.

78116E

10-04-21

Etac AB, Box 203, SE-334 24 Anderstorp
Tel. +46/371-58 73 00, Fax. +46/371-58 73 90

www.etac.com

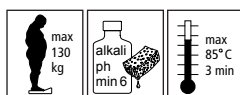

CE

etac®