

## **BRUKSANVISNING TEMPOVOX GRØNN**

### URET HAR FØLGENDE FUNKSJONER:

Sier tiden i timer og minutter, og forteller deg i tillegg hvilken dag, dato og måned, det er. Uret har også valgfrie funksjoner som kan skrues av og på etter behov. Disse funksjonene er alarm, automatisk varsling hver hele time og automatisk varsling hvert minutt. Sistnevnte funksjon kan jo være praktisk når du f.eks. skal koke egg, venter på bussen e.l.

### HVORDAN BRUKE KLOKKEN:

Klokken har en stor gul trykknapp, som er taleknappen, og to små justeringshull i tillegg til en justeringsskrue for lydstyrke.

Legg uret på bordet foran deg, slik at den store gule knappen som vi kaller taleknappen vender opp, og er plassert i høyre hjørne lengst fra deg. Justeringsskruen sitter da innfelt på boksens høyre sidekant. De to justeringshullene sitter plassert ca. to millimeter til venstre for taleknappen. Disse aktiveres ved å bruke en tynn gjenstand, f. eks. en tannpirker. For ordens skyld kaller vi hullene for knapp 1 lengst fra deg, og knapp 2 nærmest deg. Nå som vi vet hvor alle knapper er plassert skal vi se litt på hvordan de brukes.

For å stille klokken funksjoner, går du fram på følgende måte:

Juster lydstyrken til ønsket nivå med en liten skrutrekker. Lydstyrken er i utgangspunktet innstilt med normal lydstyrke, men ønsker du høyere eller lavere nivå vrir du gjentatte ganger til høyre for høyere nivå, eller til venstre for lavere nivå.

For innstilling av klokken og de andre funksjonene må vi bruke de to justeringshullene. Knapp 2 fungerer som en velger mellom minuttvarsling, timevarsling eller alarm/vekking av eller på.

Knapp 1 er knappen for å aktivere innstillingene. For å gjøre innstillinger bruker du knapp 1 og knapp 2. Knapp 1 er fremover, mens knapp 2 er tilbake. Med den store gule knappen flytter du deg til neste innstillingsalternativ i menyen.

Du har følgende ni valg i menyen:

Alarm timer

Alarm minutter

Vekke signal

Tidsinnstilling timer

Tidsinnstilling minutter

Innstilling ukedag

Innstilling dato

Innstilling måned

Innstilling årstall

Trykker du en gang på knapp 1, sier klokken f.eks ”Alarmen er satt til timer, tolv null ni” Dette er altså valget for justering av timene på vekkefunksjonen. Bruk nå knapp 1 og knapp 2 for å velge ønsket time. Trykker du nå en gang på den store gule knappen vil du komme til valget for justering av minuttene på vekkefunksjonen. Nå kan du stille inn minuttene på vekkefunksjonen. Gjenta samme prosedyre for å stille inn vekkesignal, tidsinnstilling timer, minutter, dag, dato, måned og år.

Når du har gått gjennom hele menyen vil du høre to korte pip. Du har nå gått igjennom hele menyen, og innstillingene er lagret.

Gir du taleknappen ett kort trykk, forteller den deg kun klokkeslett. Holder du taleknappen inne vil den etter klokkeslettet også fortelle deg dag, dato og måned. Står alarmen i på-posisjon vil du også få bekreftet tidspunkt for vekking.

Klokken leveres med skinnetui som kan henges rundt halsen. Den drives av 2 stk. LR03 batterier som er inkludert i prisen. For å skifte disse må du løsne skruen på baksiden av klokken. Løft av toppen, men vær forsiktig med ledningen til høyttaleren som er plassert i topplokket. De to batteriene sitter plassert horisontalt i batteriboksen i klokkens underdel. Husk at den flate enden på batteriet skal plasseres mot fjæren i batterirommet. Det er meget viktig at disse ikke settes feil vei, da dette kan ødelegge elektronikken. Ønsker du ytterligere opplysninger om klokken kan du ta kontakt med hjelpemiddelsentralen der du bor, eller ringe oss i Adaptor AS (Tidl. Blindes Produkter) på telefon 23-21-55-55