



medemagruppen



**Bruksanvisning
Sof*Care SC840 overmadrass**

Gratulerer med valget av Sof*Care trykkavlastende overmadrass !

Sof*Care SC840 er en forebyggende og behandlende antidecubitus overmadrass basert på Gaymar's unike 3-lags cellekonstruksjon, med over 300 individuelle celler. Denne madrassen gir en tilnærmet optimal trykkfordeling med maksimalt trykk på 32 mmHg, og tilpasser seg pasientens vekt og kroppsbygging.

Anbefalt bruksområde:

Sof*Care SC840 er beregnet for å forebygge og behandle liggesår opp til sårgrad 3 ved hjelp av lavtrykk luftstøtte.
SC840 er en overmadrass, og skal alltid benyttes med underliggende hovedmadrass.

Kontra indikasjoner:

Luftstøttebehandling anbefales ikke nå pasienten har problemer med spinalstabilitet.

Viktig informasjon:

Les nøye gjennom denne bruksanvisning og eventuell annen medfølgende dokumentasjon før produktet tas i bruk.

Sof*Care SC840 er kun beregnet til det bruk som angitt i denne bruksanvisning, og bruk eller håndtering i strid med dette medfører bortfall av garanti- og produktansvar. Sof*Care SC840 er testet og samsvarsvurdert etter gjeldene forskrifter, og medfører ingen risiko ved korrekt bruk.

Det er dog viktig å kontrollere pasientens hud med jevne mellomrom for å avdekke fargeendringer eller sprekkeformasjoner.


Produktet inneholder ikke Latex, og det er ingen kjente allergiske reaksjoner ved bruk.

Av hensyn til pasientens komfort og hygiene anbefales det benyttet et pustende overtrekkslaken på madrassen.

Innholdsfortegnelse:

1. Forberedelse før bruk	3
2. Bruksanvisning	4
3. Vedlikehold	5
4. Feilsøking	6
5. Garanti- og leverandør opplysninger	6



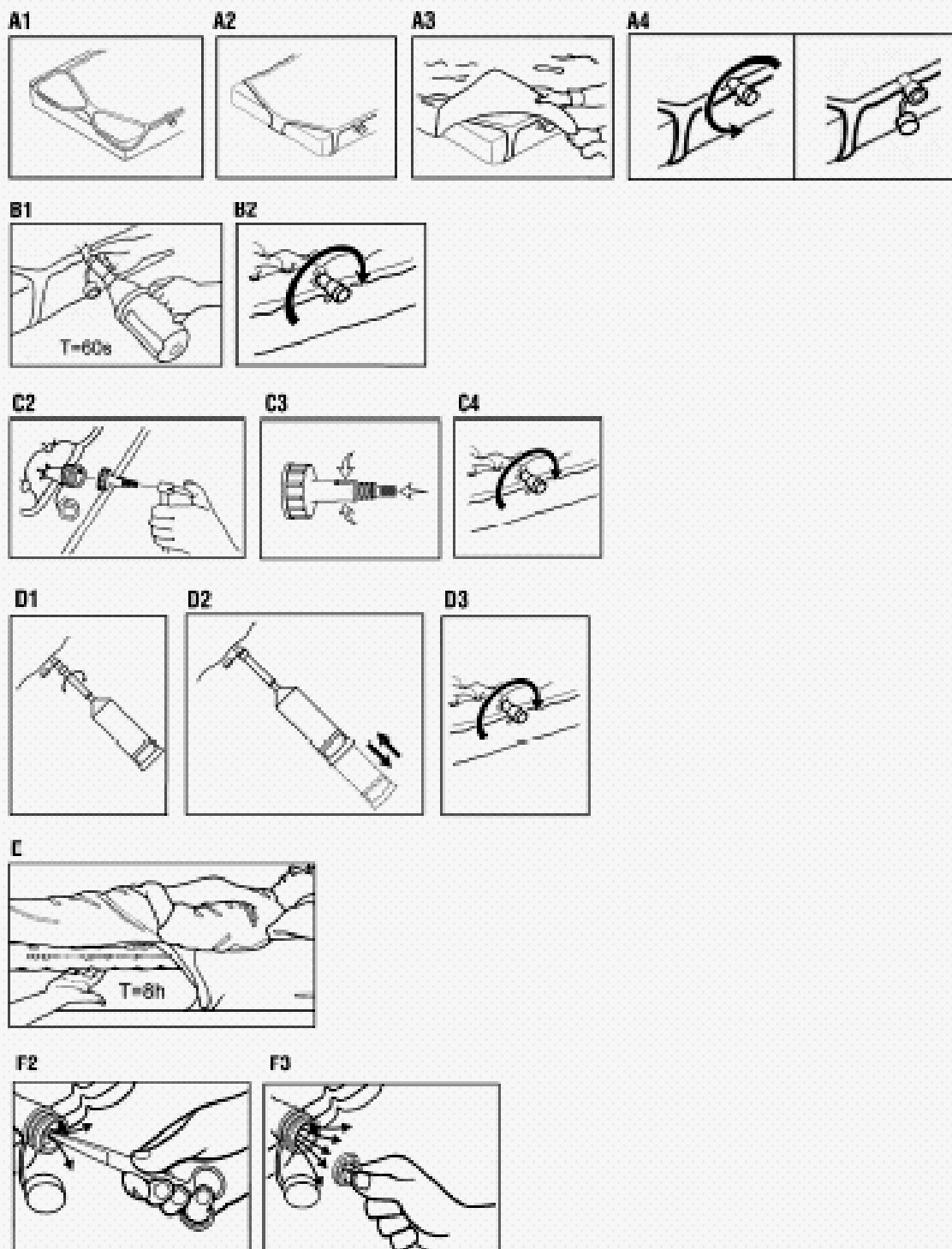

1. Forberedelse før bruk (tegning A)

1. Stå ved sengens fotende og rull ut madrassen slik at luftventilen befinner seg på høyre side.
2. Plasser hjørnebåndene rund hovedmadrassens fire hjørner.
3. Skru av den blå ventilhetten for fylling av madrassen.

2. Bruksanvisning (tegning B til F)

Oppfylling med elektrisk trykkpumpe SC525:

1. Sett pumpens munnstykke inn i luftventilen og slå på pumpen i cirka 60 sekunder. Pumpen forhindrer automatisk at det fylles for mye luft i madrassen.
2. Ta bort pumpen, slå den av og skru på den blå ventilhetten.

Oppfylling med elektrisk vedlikeholdspumpe CF302 (C100-ES):

1. Koble pumpen til madrassens ventilmunnstykke.
2. Sett justeringshjul i midtposisjon, start pumpen og fyll opp madrassen (dette tar ca. 40 minutter).
3. Plasser pasienten på madrassen og still inn reguleringsbryter til ønsket komfortinnstilling.
4. Pumpen skal være på og tilkoblet madrassen til enhver tid for å opprettholde korrekt trykk.

Oppfylling med manuell pumpe:

1. Koble pumpen til madrassens ventilmunnstykke. Hvis pumpen ikke av fabrikat Gaymar benyttes adapter SC535. Ved bruk av adapter SC525, påse at adapterens hull på siden ikke er tildekket. Disse hull hjelper til for raskere fylling av madrassen.
2. Pump opp madrassen til korrekt trykk. Ved bruk av Gaymar manuell pumpe er antall drag for korrekt trykk angitt på pumpen. Ved bruk av annen manuell pumpe må trykket kontrolleres med hånden som anvist på tegning E.
3. Når korrekt trykk er oppnådd, kobles pumpen fra og den blå ventilhetten skrues på.

OBS!

Ved bruk av manuell pumpe er det en fare for overfylling av madrassen, dette kan skade produktet og gjøre det ubrukelig til det angitte formål.

- Vi anbefaler derfor alltid bruk av elektrisk pumpe.

Etter fylling av madrass bør det legges på laken før pasienten tar madrassen i bruk.

Etterkontroll av madrass uten tilkoblet vedlikeholdspumpe:

Sof*Care madrassen ser normalt ut som om den ikke er tilstrekkelig pumpet opp. Den beste måten å sjekke korrekt lufttrykk er å kontrollere med hånden:

Stikk hånden inn under overmadrassen ved pasientens seteregion med rette fingre, og håndflaten opp. Om pasienten ikke kommer i kontakt med håndflaten er madrassen tilstrekkelig fylt. Oppstår det kontakt mellom håndflate og pasient må madrassen etterfylles som angitt over.

Utfør etterkontroll minimum hver 8. time, og etter hver fylling av madrass.

Tømming / CPR (momentan) tømming:

1. Skru av den blå ventilhetten, eller koble fra vedlikeholdspumpe om det er tilkoblet.
2. For langsom eller delvis tømming av luft, benytt en penn eller en annen tynn gjenstand uten skarp spiss og trykk inn i ett av ventilens fire hull slik at luften strømmer langsomt ut (se tegning F2).
3. For CPR eller fullstendig tømming av luft, dra i fliken som holder ventilskiven på plass slik at denne løsner (se tegning F3).

VIKTIG. Slipp ut all luft før igangsetting av CPR.

3. Vedlikehold / rengjøring

Sof*Care overmadrass er enkel å vedlikeholde og rengjøre.

1. Slipp ut luften som beskrevet under punktet tømming før rengjøring. Rengjør madrassen med ett mildt desinfeksjonsmiddel eller mildt såpevann. Tørk madrassen tørr med en klut, eller la den lufttørre. Benytt ikke løsningsmiddel eller alkohol som rengjøringsmiddel, dette vil skade eller tørke ut materialet i madrassen.
2. OBS! Blod og andre kroppsvæsker skal tørkes nøye av før det benyttes desinfeksjonsmiddel. Det anbefales benyttet desinfeksjonsmiddel som for eksempel ett tiprosent klorert blekemiddel (klorert blekemiddel med 5,25 % natriumhydroklor) på madrassens overflate. La madrassen tørke fullstendig, da det er middelets kontakttid som avgjør desinfeksjonens effektivitet. Tørk av overflaten med en ren tørr klut for å fjerne overskytende desinfeksjonsmiddel.
3. Madrassen er nå klar til bruk.



4. Feilsøking

Feilindikasjon:	Tiltak:
Madrassen lekker luft:	Sjekk om det ikke er noen fremmedlegemer i ventilen, og at denne er tett.
	Sjekk om ventilhetten tetter ordentlig.
	Sjekk om madrassen er punktert eller skadet på annen måte.
Madrassen kan ikke fylles opp:	Sjekk ventilen for fremmedlegemer.
Vedlikeholdspumpen virker ikke:	Sjekk at pumpen er tilsluttet lysnettet og er slått på.
	Sjekk pumpens brukerveiledning.

Kontakt leverandør hvis feilen ikke lar seg avdekke eller rette på stedet.

5. Garanti- og leverandøropplysninger

Sof*Care SC840 leveres med 2 år produktgaranti.

For garantibestemmelser på pumper og annet tilbehør, sjekk medfølgende dokumentasjon.

Dette produktet importeres og omsettes av:

Medema Norge AS
Postboks 133
1483 Skytta

Telefon: 67 06 49 00

Telefaks: 67 06 49 90

e-post: firmapost@medema.no

Web: www.medema.no

Produsent, importør og forhandler er ikke ansvarlig for feil bruk av produktet, og de skader dette måtte medføre på personer og eiendom.



Notater:





medemagruppen