

Nordic Eye Solo 2 HD Basic

Bruks- og monteringsanvisning



Innholdsregister

Produktets innhold	s. 3
Systemkrav.....	s. 3
Monteringsanvisning	s. 4
Håndkontroll (Ikke standard for Solo2 HD Basic).....	s. 5
Menyer	s. 6
Tilkobling PC.....	s. 7
Hurtigtaster.....	s. 8
Vedlikehold	s. 9
Rengjøring.....	s. 9
Avfallshåndtering	s. 9
Materiale	s. 9
Leverandør	s. 9
Tekniske data	s. 10
Samsvarserklæring	s. 11

Produktets innhold

Produktet inneholder følgende deler:

- Nordic Eye kamera
- Kamerafeste
- Håndkontroll
- Strømforsyning
- USB kabel
- Skjermkabel HDMI - DVI
- CD-plate med programvare

Systemkrav

Følgende systemkrav må oppfylles for å kunne bruke Nordic Eye Solo:

- Skjerm med DVI eller HDMI tilkobling
- PC med USB 2.0 / 3.0
- Windows XP, Vista, 7/8

Monteringsanvisning

- Monter kamerafestet på et egnet bord
- Sett kamera på festet
- Koble Solokamera til skjerm eller PC



Skru på kamera med bryteren på kamerastolpen.



Håndkontroll

Ikke standard for Solo2 HD Basic



Nordic Eye Solo håndkontroll

Z+	Zoom inn
Z-	Zoom ut
Pil venstre	Minsker lysstyrken
Pil høyre	Øker lysstyrken
OK	Forhåndsvalgt forstørring
FUNC	Snur bildet 180°
MODE	Veksler mellom positiv, negativ og fargebilde

MODE og FUNC knappene vil kun virke i leseposisjon.

NB!

Ved bytte av håndkontrollen eller batteri, må enheten «settes» opp på nytt til kamera. Dette gjøres ved å holde håndkontrollen inntil kameraenheten og gi en av knappene et kort trykk. Vent 3-4 sekunder og håndkontrollen skal nå være klar til bruk sammen med kamera.

Menyer

Knappene på håndkontrollen har flerfunksjoner.

Ved å holde inne MODE- knappen vil en brukermeny og en servicemeny bli tilgjengelig.

I BRUKERMENYEN kan du gjøre følgende:

- Speilfunksjon
- Referanselinje og kulissefunksjon
- Kunstige farger

I SERVICEMENYEN kan du justere:

- Justere lys, farger og kontrast
- Kamera hvitbalanse, tiltfunksjon og skjermopløsning
- Innstillinger for språk og fabrikkinnstilling

Referanselinje og gardin / avblendingsfunksjon

Ved å holde FUNC-knappen inne i 3 sekunder vil man få frem en referanselinje eller en gardin for avblending på skjermen.

Tilkobling til PC

- Sett inn USB kablen i Nordic Eye Solo og til en ledig USB port på din datamaskin.
- Slå på kamera. Pcen vil automatisk finne Solo hardware og installere denne.
- Installer programvare fra medfølgende CD. Følg instruksjonene på skjermen.

Nå er Solokamera klar til bruk sammen med PC ved bruk av hurtigtaster.

Hurtigtaster

	FUNKSJON
CTRL+WIN+S	Vindustype (helt bilde eller splitt)
CTRL+WIN+↑	Øke forstørring
CTRL+WIN+↓	Minske forstørring
CTRL+WIN+I	Lagre bilde
CTRL+WIN+J	Lagre som..
CTRL+WIN+O	Lagre film
CTRL+WIN+C	Øker lysnivå
CTRL+WIN+V	Minsker lysnivå
CTRL+WIN+T	Snur bildet 180°
CTRL+WIN+E	Avslutter programmet
CTRL+WIN+U Y	Delt bilde oppe / nede
CTRL+WIN+ L	Delt bilde venstre / høyre
CTRL+WIN+ M	Minimere og maksimere program
CTRL+WIN+Z	Frys bilde
CTRL+WIN+N	Versjonsinformasjon

Vedlikehold

Det er ikke nødvendig med periodisk vedlikehold.

Rengjøring

Alle deler som utstyret består av kan vaskes med en godt oppvridd klut med mildt såpevann eller glassrens.

Det må ikke brukes rengjøringsmetoder som kan forårsake fuktighet i apparatet, som for eksempel rennende vann, høytrykkspyler eller vaskemaskin.

Avfallshåndtering

All emballasje til Nordic Eye produktene er produsert i nedbrytbart materiale.

Materiale

Produktene eller emballasjen inneholder ingen allergifremkallende materiale.

Leverandør

SynSupport Nordic Eye
Duevegen 7,
2016 Frogner
Telefon: 63 82 57 00

Tekniske data

Forstørring på 22" skjerm	2,2 - 85x
Fokus.....	Autofokus
Arbeidshøyde.....	280mm
Oppløsning monitor	1920x1080 – Full HD
Oppløsning PC.....	1280x720 – HD
Tilkoblinger	USB 2, USB 3 og HDMI
Maks forbruk.....	18W
Strømforsyning	USB eller 12 V
Vekt kameraenhet.....	0,95 kg
Vekt komplett ved transport.....	2,6 kg
Dimensjoner i bruk.....	45 x 9 x 39 cm
Dimensjoner ved transport.....	25 x 43 x 12 cm
operativsystem.....	Windows XP, Vista, 7 og 8

EMC: Product is tested according to EMC immunity and emission. By EN 60 601-1-2 (2001) Class B, Group 1

Samsvarserklæring



Declaration of conformity

According to the Medical Devices Directive 93/42 /EEC incl. amendment 92/31 EEC and EMC directive 89/336EEC.

EN60601-1 “Medical electrical equipment part 1: General requirements for safety”
En60601-1-2 “Medical electrical equipment part 1: General requirements for safety -1 collateral standard : electromagnetic capability “

Has been tested for the following systems:

SOLO

Date and place of issue.

Växjö, Sweden, 2014-11-07

Signature of authorized person



Christer Gustavsson CEO
nordiceye AB