



ROHO DRY FLOATATION® Wheelchair Cushions

Operation Manual



SUPPLIER: This manual must be given to the user of this product.

USER: Before using this product, read instructions and save for future reference.

ROHO® DRY FLOATATION® Rullestolputer

Bruksanvisning

LEVERANDØR: Denne bruksanvisningen må gis til brukeren av dette produktet.

BRUKER: Les denne bruksanvisningen før du benytter produktet og oppbevar for senere referanse.

INNHALDSFORTEGNELSE

TILTENKT BRUK	82
PRODUKTSPEKIFIKASJONER	82-83
ADVARSLER	84
DELER	85
TILPASNING AV PUTER	86-87
FJERNING AV TREKK & UTSKIFTNING	88
RENGJØRING & DESINFISERING AV PRODUKTET	88-89
PROBLEMLØSNING	89
AVHENDING	89
KONTAKTINFORMASJON	89
R REKLAMASJON	90
BEGRENSET GARANTI	90

ROHO, Inc. jobber kontinuerlig med å forbedre produktene og forbeholder seg retten til å endre dette dokumentet. Siste gyldige versjon av dette dokumentet finnes på www.roho.com.



ROHO® Puteprodukter produseres av ROHO, Inc.,
100 North Florida Avenue, Belleville, Illinois 62221-5429, USA, www.roho.com.

USA: 800-851-3449 • Faks: 888-551-3449 • e-post: cc@roho.com

Utenfor USA: 618-277-9150 • Faks: 618-277-6518 • e-post: intl@roho.com

© 2007, 2015 ROHO, Inc.

De følgende er varemerker og registrerte varemerker fra ROHO, Inc.: ROHO®, DRY FLOATATION®, ISOFLO Memory Control®, Yellow Rope®, shape fitting technology®, CONTOUR SELECT®, ENHANCER®, QUADTRO SELECT®, HIGH PROFILE®, MID PROFILE™, og LOW PROFILE®.

Produkter i denne bruksanvisningen kan være dekket av ett eller flere amerikanske eller andre internasjonale patenter og varemerker. For ytterligere opplysninger, se www.roho.com.

TILTENKT BRUK:

Hver ROHO® DRY FLOATATION® produkt i denne bruksanvisningen er en justerbar, luftfylt, rullestolpute med luftceller. Den har ingen brukervekt begrensning, men puten må ha riktig størrelse i forhold til brukeren.

ROHO, Inc. anbefaler evaluering av lege/kliniker som har erfaring i sittestillinger, posisjonering og mobilitet: 1) for å avgjøre om puten passer til brukeren; og 2) for å avgjøre om en solid setepattform er å anbefale dersom puten benyttes på en rullestol med hengemattesete.

Hver av følgende produkter som bruker ROHO DRY FLOATATION®-teknologi og er beregnet på å forme seg etter brukerens fasong for å beskytte hud og bløtvev, gi god sittestilling og fremme sårheling.

- ROHO LOW PROFILE® PUTE TOKAMMER (LOW PROFILE Pute tokammer)
- ROHO MID PROFILE™ PUTE TOKAMMER (MID PROFILE Pute tokammer)
- ROHO HIGH PROFILE® PUTE TOKAMMER (HIGH PROFILE Pute tokammer)
- ROHO QUADTRO SELECT® LOW PROFILE® PUTE (QUADTRO SELECT LOW PROFILE)
- ROHO QUADTRO SELECT MID PROFILE™ PUTE (QUADTRO SELECT MID PROFILE)
- ROHO QUADTRO SELECT HIGH PROFILE® PUTE (QUADTRO SELECT HIGH PROFILE)
- ROHO CONTOUR SELECT® PUTE (CONTOUR SELECT)
- ROHO ENHANCER® PUTE (ENHANCER)

Hver av følgende produkter som bruker DRY FLOATATION®-teknologi og er beregnet på å forme seg brukerens fasong for å beskytte hud og bløtvev, og fremme sårheling.

- ROHO LOW PROFILE® PUTE ENKAMMER (LOW PROFILE Pute enkammer)
- ROHO MID PROFILE™ PUTE ENKAMMER (MID PROFILE Pute enkammer)
- ROHO HIGH PROFILE® PUTE ENKAMMER (HIGH PROFILE Pute enkeltkammer)

PRODUKTSPEKIFIKASJONER:

MATERIALER:

Rullestolputene i denne bruksanvisningen er laget av neoprengummi med forniklede messingventiler. SELECT-putene har også ISOFLO Memory Control®. Toppen og bunnen av ISOFLO Memory Control er laget av polykarbonat, knappene er laget av polypropylen og ventilspindelen er laget av polypropylen støpt over aluminium.

PRODUKTSPEKIFIKASJONER FORTSETTELSE:**STANDARD PUTE DIMENSJONER OG VEKT:**

PUTE	HØYDE	GJENNOMSnittlig VEKT*
LOW PROFILE PUTE MED ENKELTKAMMER	5,5 cm	1,1 kg
LOW PROFILE PUTE MED DOBBELTKAMMER	5,5 cm	1,1 kg
QUADRO SELECT LOW PROFILE	5,5 cm	1,1 kg
MID PROFILE PUTE MED ENKELTKAMMER	8,5 cm	1,4 kg
MID PROFILE PUTE MED DOBBELTKAMMER	8,5 cm	1,4 kg
QUADRO SELECT MID PROFILE	8,5 cm	1,4 kg
HIGH PROFILE PUTE MED ENKELTKAMMER	10,5 cm	1,5 kg
HIGH PROFILE PUTE MED DOBBELTKAMMER	10,5 cm	1,5 kg
QUADRO SELECT HIGH PROFILE	10,5 cm	1,5 kg
CONTOUR SELECT	5,5 til 10,5 cm	1,6 kg
ENHANCER	5,5 til 10,5 cm	1,6 kg

*Merk: Gjennomsnittlig vekt er basert på 9 x 9 celler (42,0 cm x 42,0 cm) pute.

PUTE	MINSTE BREDDER		MINSTE DYBDE		STØRSTE BREDDER		STØRSTE DYBDE	
	ant. luft-lommer	cm	ant. luft-lommer	cm	ant. luft-lommer	cm	ant. luft-lommer	cm
LOW PROFILE PUTE MED ENKELTKAMMER	6	29.0	6	29.0	11	50.5	11	50.5
LOW PROFILE PUTE MED DOBBELTKAMMER	6	29.0	6	29.0	11	50.5	11	50.5
QUADRO SELECT LOW PROFILE	5	28.0	6	30.0	13	62.5	12	56.0
MID PROFILE PUTE MED ENKELTKAMMER	7	33.5	7	33.5	11	50.5	11	50.5
MID PROFILE PUTE MED DOBBELTKAMMER	8	37.5	9	42.0	8	37.5	9	42.0
QUADRO SELECT MID PROFILE	8	41.0	8	38.5	10	49.5	10	47.0
HIGH PROFILE SINGLE COMPARTMENT CUSHION	6	29.0	6	29.0	15	68.0	12	55.0
HIGH PROFILE DUAL COMPARTMENT CUSHION	6	29.0	6	29.0	11	50.5	11	50.5
QUADRO SELECT HIGH PROFILE	6	32.5	6	30.0	14	67.0	12	56.0
CONTOUR SELECT	7	36.5	8	38.5	13	62.5	12	56.0
ENHANCER	8	37.5	8	37.5	11	50.5	11	50.5


Merk: Kontakt Kundeservice for spesielle putestørrelser.



ADVARSLER

ROHO-produktene er ment å være en del av en helhetlig pleierutine. ROHO, Inc. anbefaler at en lege gir produktanbefalinger basert på en vurdering av pasientens individuelle medisinske og terapeutiske behov.

- **Undersøk huden ofte, minst en gang om dagen. Nedbrytelse av hud/bløtvev kan forårsakes av mange ulike faktorer og kan variere fra pasient til pasient. Enhver rødhet, blåmerker eller mørkere områder (sammenlignet med normal hud) kan bety begynnelsen på nedbrytelse av bløtvev. Ta kontakt med lege umiddelbart.**
- **Puten og trekket MÅ samsvare i størrelse og MÅ brukes som anvist i denne bruksanvisningen. HVIS DE IKKE SAMSVARER: 1) putens fordeler kan reduseres eller elimineres, noe som øker risikoen for skader på hud eller annet bløtvev og 2) brukeren kan bli ustabil og utsettes for fallfare.**
- **SJEKK LUFTNIVÅET OFTE, MINST EN GANG OM DAGEN!**
- **RIKTIG OPPBLÅSING:** Bruk av annen pumpe enn den leverte håndpumpen kan skade puten og ugyldiggjøre garantien.
- **FØR LITE LUFT: IKKE** bruk en pute med for lite luft. Ved bruk av en pute med for lite luft blir putens positive effekter redusert eller eliminert, og risiko for skader på hud og uønskede vev øker. Dersom puten virker å ha for lite luft eller ser ut til ikke å være i stand til holde på luften, kontroller at ventilen er stengt ved å dreie den med klokken. **MERKNAD:** For QUATTRO SELECT og CONTOUR SELECT-putene, kontrollerat den grønne knappen på ISOFLO Memory Control er trykket mot midten av ISOFLO ventilen i ULÅST (UNLOCKED) posisjon slik at alle kammer blir fylt med luft når puten blåses opp. Dersom puten fremdeles ikke holder på luften, kontakt omgående din terapeut, hjelpemiddelsentralen, eller Etac AS.
- **FØR MYE LUFT: IKKE** bruk en pute med for mye luft. Sittende på en pute med for mye luft kan du ikke kunne synke ned i puten og vil redusere eller eliminere putens positive effekter og øker risiko for skader på hud og underliggende vev.
- **PLASSERING AV PUTE OG TREKK:** Produktet må brukes med cellene oppover. Dersom trekket ikke brukes på riktig måte eller har feil størrelse reduseres eller elimineres putens fordeler og dermed øker faren for problemer med hud og underliggende vev.
- **LUFTTRYKK:** Endringer i høyde over havet kan kreve tilpasning av puten. Kontroller puten når høyden over havet endres.
- **PUNKTERING:** Ikke utsett puten for skarpe gjenstander som kan punktere luftcellene og dermed føre til lekkasje.
- **VARME/ÅPEN FLAMME: IKKE** utsett puten for høy varme, åpen ild eller glødende aske.
- **KLIMA:** Dersom en pute har blitt utsatt for temperaturer under 0 °C og virker unaturlig stiv, bør den varmes opp til romtemperatur. Åpne ventilen og rull sammen puten noen ganger til neoprenet er mykt og smidig igjen. Gjenta normal tilpasningsprosedyre før puten tas i bruk.
- **FARE FOR USTABILITET OG FALL: IKKE** bruk puten på toppen av, eller sammen med, andre produkter eller materialer, med unntak av det som står oppført i avsnittet Tiltenkt bruk. Dette kan i så fall forårsake ustabilitet for brukeren som igjen kan resultere i fall. Ta kontakt med terapeut eller lege for råd om riktig bruk.
- **HINDRINGER: IKKE** legg uegnede gjenstander mellom brukeren og puten da det kan redusere produktets effekt.
- **HÅNTERING: IKKE** bruk noen av ventilene som bærehandtak eller til å dra i puten. Bær puten enten i det gule nylontau (hvis den finnes), ved å holde under puten eller bær i trekkets bærehandtak.
- **KREMER: IKKE** la oljebaserte kremer eller lanolin komme i kontakt med puten siden disse kan bryte ned materialet.
- **OZON:** USA Environmental Protection Agency, Health Canada og andre statlige organer har fremlagt advarsler når det gjelder ozon. Vedvarende eksponering for ozon vil bryte ned gummi, stoff og andre materialer benyttet i fremstillingen av ROHO-produkter og kan påvirke produktets ytelse og ugyldiggjøre garantien.
- **BRUK AV PRODUKTET: IKKE** bruk puten som et flytevest
- **IKKE** bruk andre pumper, trekk eller reparasjonsutstyr enn originale ROHO produkter. Hvis andre deler blir brukt kan puten bli skadet og garantien falle bort.
- Hvis du **IKKE** klarer å utføre en eller flere av oppgavene beskrevet i denne bruksanvisningen, må du be om hjelp

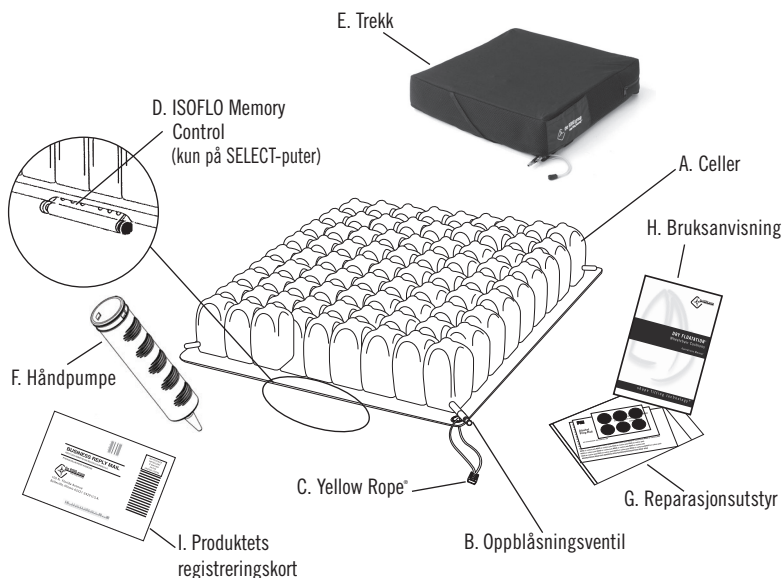
DELER:

- A. Celler:** Individuelle luftceller som står i forbindelse med hverandre gjennom små kanaler.
- B. Oppblåsningsventil:** Brukes til å åpne og lukke putens lufttilførsel. Noen modeller har flere enn én ventil.
- C. Yellow Rope®:** For å løfte og bære puten. Den skal alltid ligge foran på brukerens venstre side.
- D. ISOFLO Memory Control:** Kun på SELECT-puter. ISOFLO Memory Control lar deg styre luftfordelingen i puten ved å låse luften i separate kammer, for ytterlige posisjonering og stabilisering.
- E. Trekk:** Brukes til å beskytte puten. Borrelås med hann- og hunndel er inkludert på undersiden som hjelp for å feste puten til stolen.
- F. Håndpumpe:** Brukes til å blåse opp puten.
- G. Reparasjonsutstyr:** Lappesett for små reparasjoner.
- H. Bruksanvisning:** Instruksjoner for justering, vedlikehold, garanti og annen viktig informasjon om puten.
- I. Produktets registreringskort:** Brukes til å registrere produktet. Fyll ut registreringskortet og send det til ROHO Inc. eller registrer via nettet på www.roho.com.


Bestilling av erstatningsdeler, **innen USA**, kan gjøres ved å kontakte ROHO kundeservice, ved å ringe leverandøren eller ved å besøke The ROHO Store på www.therohostore.com. **Utenfor USA**, ta kontakt med ditt lands ROHO-forhandler.

TILPASNING AV PUTER:


! MERK: Tokammer puter: For å oppnå best posisjoneringsresultater for personer med skjev bekkenstilling anbefales det å justere den laveste siden først. Tokammer kan brukes for venstre-høyre eller framover-bakover (bekkentilt) posisjonering av bekkenet. For de som bruker framover-bakkeover posisjonering skal den bakre delen justeres først. Når begge kamre er justert bør begge kamre kontrolleres engang til å sikre riktig justering.

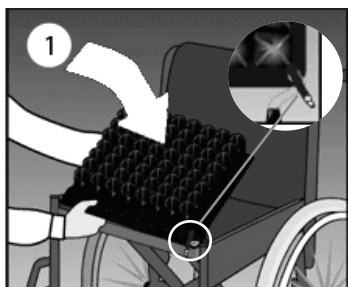


1. Legg puten på midten av stolen og sørg for at cellene peker oppover. Rådfør deg med din terapeut for alternativ plassering av luftventilene.

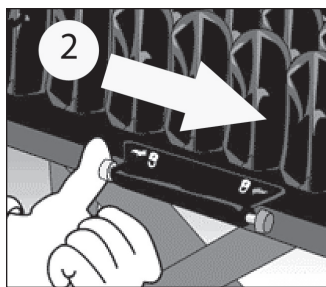


2. (DETTE STEGET KUN FOR SELECT CUSHIONS)
Trykk ISOFLØ's grønne knapp mot midten ("UNLOCKED") for å åpne.

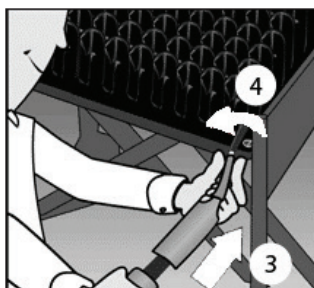


3. Sett pumpens gummislange over ventilen.
4. Skru ventilen **mot klokken** for å åpne.

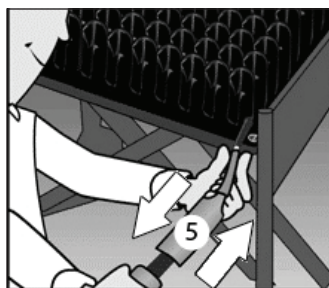

5. Blås opp puten til den begynner å bue seg litt oppover.

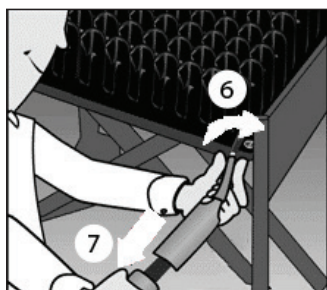


6. Steng ventilen ved å skru slangen og ventilen **med klokken**.
7. Fjern pumpen. (Repetér stegene 1 - 7 på puter med flere ventiler).

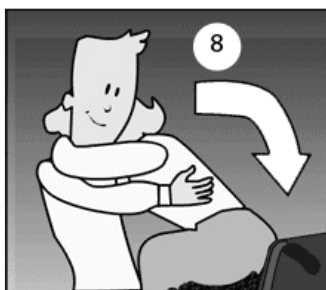


8. Plasser brukeren i stolen og sørg for at puten er plassert midt under brukeren. Brukeren skal sitte i sin normale sittestilling.

TILPASNING AV PUTER FORTSETTELSE:

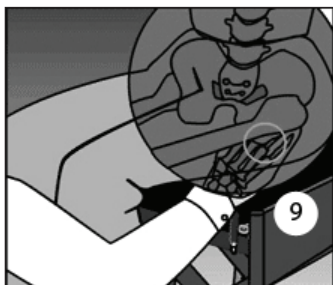

9. Plasser den ene hånden din mellom putens overflate og brukersens sitteknute. For å få hånden på plass kan låret løftes noe opp før hånden skyves innunder sitteknuten, låret senkes ned igjen.

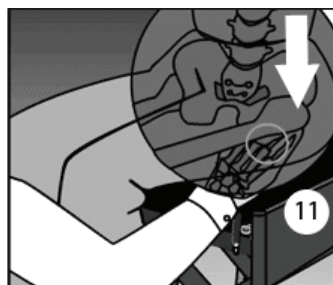

11. Slipp ut luft til du så vidt kan røre fingertuppene.


⚠ OPPBLÅSING: IKKE sitt på en pute som ikke er korrekt oppblåst. For lite luft eller for mye luft i puten, inkludert i individuelle segmenter, reduserer eller eliminerer putens positive effekter og kan øke risiko for skader i hud og underliggende vev. Puten er mest effektiv når det er 1,5 cm til 2,5 cm luft mellom sitteknutene og bunnen av puten.



10. Åpne ventilen for å slippe ut luft mens du holder hånden under sitteknuten.



12. Skru ventilen igjen. (Reperer stegene 9 - 12 for andre luftventiler på puter med flere ventiler).

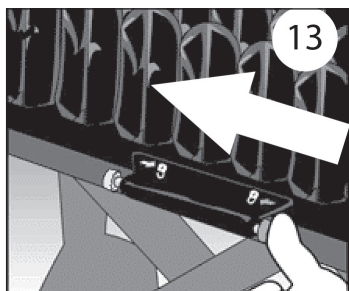


13. (KUN FOR SELECT CUSHIONS) Posisjoner brukersens bekket på puten i ønsket sittestilling og sørg for at denne stillingen holdes mens luft overføres gjennom ISOFLO Memory Control. Når luften er fordelt i puten trykkes ISOFLOs "Røde"-knapp mot midten til låst stilling (LOCKED). Luften er nå låst i fire segmenter og gi en mer stabil sittestilling. Sjekk hver kammer (segment) i puten igjen for å sikre riktig luftmengde.

FJERNING AV TREKK & UTSKIFTNING:

Selv om et trekk ikke er nødvendig er et ROHO-trekk inkludert med hver standardpute for å bidra til å hindre putens celleri å bule utover rullestolsetet samt for å lette forflytninger. Undersiden av trekket er laget av sklisikkert materiale som bidrar til at puten holdes bedre på plass i stolen.

Å sette trekket på puten:

1. Legg trekket med det sklisikre materialet oppover og glidelåsen mot deg.
2. Skyv puten inn i trekket med cellene vendt ned.
3. Standardtrekk - dra putehjørnet forsiktig ut av hjørneåpningen i trekket, gjenta dette for alle 4 hjørner. (Vis forsiktighet når ventilen og den gule snoren dras gjennom åpningen).
Heavy Duty Cover - Skyv puten forsiktig inn i trekket, med ventilen mot glidelåsen.
4. Dra igjen glidelåsen og snu puten slik at **luftcellene peker oppover**. Puten er nå klar til bruk dersom den har blitt korrekt tilpasset brukeren (se Tilpasning av puter i denne bruksanvisningen).

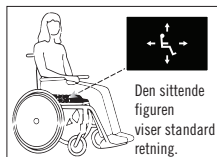

Se etiketten på undersiden av puten og bildet på forsiden for riktig retning av puten i forhold til putetrekket.

Dersom den er riktig tilpasset, vil puten ligge flatt på stolen (det sklisikre materialet på undersiden) med alle luftlommene tildekket og alle fire hjørnene synlig (gjelder ikke HD).

Fjerning av trekket: Dra opp glidelåsen og fjern trekket fra puten.



Undersøk putetrekket for skade og erstatt det etter behov.

RENGJØRING & DESINFISERING AV PRODUKTET:

Rengjøring og desinfisering er to separate prosedyrer. Rengjøring må skje før desinfisering. Produktet må rengjøres, desinfiseres og kontrolleres for eventuelle feil mellom bruk av forskjellige personer.

Vedlikehold av trekket: Fjern borelås bitene (hånddelen) fra undersiden av trekket før rengjøring og desinfisering. Vaskes med liknende farger.

Rengjøring av trekket: Fjern trekket. Maskinvask i kaldt vann (30 °C) med mild såpe, skånsomt vaskeprogram, eller tørk rent med klut med nøytral såpe og varmt vann. Tørkes i tørketrommelen på lav varme.



Desinfisering av trekket: Vask for hånd i kaldt vann (30 °C) med 1 del klorin og 9 deler vann, skylld deretter grundig. Trekket kan også maskinvaskes i varmt vann (60 °C) for desinfisering. Tørkes i tørketrommelen på svak varme.



eller



Merk: Følg sikkerhetsmerkingen på klorinflasken.

Rengjøring av puten: Fjern trekket, lukk ventilen(e) og legg i bløt i en stor vaskeukem. ROHO, Inc. anbefaler bruk av mildt oppvaskmiddel, flytende vaskemiddel eller vaskepulver eller annen husholdningssåpe. Bland ut i følge vaskemidlets instruksjoner for overflaterengjøring. Bruk en myk plastbørste, svamp eller vaskeklut til å gni forsiktig alle puteoverflater. Skylld med rent vann og lufttørk. **IKKE** legg i direkte sollys.

Desinfisering av puten: Repeter rengjøringsmetodene beskrevet over med en løsning bestående av 1 del klorin og 9 deler varmt vann. Følg sikkerhetsforskriften på klorinflasken. La det rengjorte produktet ligge i bløt i klorinløsningen i 10 minutter. Skylld grundig med rent vann og lufttørk. **Merk:** De fleste bakteriedrepende midler er sikre så lenge produsentens utblandingsinstruksjoner følges.

IKKE:



- Maskinvask puten eller legg den i tørketrommel.
- Bruk slipemidler som stålull eller skurebørster.
- Bruk etsende oppvaskmaskinsmidler.
- Bruk rengjøringsmidler som inneholder mineralolje eller organiske løsemidler som aceton, toluen, metyletylketon (MEK), nafta, rensmidler, limfjernere, osv.
- La vann eller rengjøringsmiddel komme på innsiden av produktet.
- Utsett produktet for ultrafiolett lys eller rengjøringsmetoder med ozongass.
- Bruk oljebaserte kremer, lanolin eller fenolbaserte desinfeksjonsmidler på produktet siden disse kan forringe materialets integritet.

RENGJØRING & DESINFISERING AV PRODUKTET FORTSETTELSE:

Sterilisering av puten: Følg retningslinjene for rengjøring og desinfisering beskrevet ovenfor. ROHO-produkter er ikke sterilpakket og er verken ment å være eller påkrevd å være sterile før bruk. Høye temperaturer fremskynder aldri prosessen til puten og kan forårsake skader på den. Dersom institusjonens rutiner krever sterilisering, må ventilen(e) åpnes og lavest mulig temperatur i kortest mulig tid benyttes. Gass-sterilisering er å foretrekke fremfor dampautoklaving, men ingen av delene anbefales. Under enhver prosess som benytter trykk må alle ventiler være åpne for å hindre skader på produktet. ROHO, Inc. fraråder på det sterkeste steriliseringsmetoder som benytter seg av temperaturer høyere enn 93 °C for DRY FLOATATION-produktene.

FEILSØKING:

Luft siver ut: Kontroller først for at alle ventiler er stengt ved å skru ventilene med klokken. Hvis luften fremdeles lekker ut bør det sjekkes for synlige hull. Dersom ingen hull er synlige, pump opp puten, lukk ventilen og legg putendel for del i vann i en vask eller i en balje for å se etter luftbobler.

Dersom du finner små hull kan reparasjonsutstyret som ble levert sammen med produktet brukes. Følg bruksanvisningen i reparasjonsutstyret. Dersom store hull eller andre lekkasjer påvises, se avsnittet BEGRENSET GARANTI.

Ukomfortabel/Ustabil: Sørg for at puten ikke er for mye oppblåst. (se Tilpasning av puter). Sørg for at cellene og trekkets elastiske overside peker opp ("UP"). Sørg for at puten ikke er for stor eller for liten for rullestolen. La brukeren sitte på puten i minst en time for å venne seg til strukturen av produktets overflate og hvordan man sitter nedsunken i puten.

Puten sklir i rullestolen: Sørg for at den sklisikre undersiden av trekket ligger på stolsetet ("DOWN"). Bruk retningsmerkene på puten og trekket.

AVHENDING:

Når puten brukes og avhendet på riktig måte, er det ingen kjente miljøfarer tilknyttet bestanddelene i produktene i denne bruksanvisningen. Kast produktet og/eller bestanddelene i samsvar med gjeldende retningslinjer. **MÅ IKKE BRENNES.**

KONTAKTINFORMASJON:

I U.S.A.:

ROHO Kundeservice og Garanti Kontakt:

Telefon: 800-851-3449 • Faks: 888-551-3449

Garanti Kontakt: warranty@roho.com

Kundeservice: cc@roho.com

Merk: Dersom du blir bedt om å returnere eventuelle deler, sendes disse til:

ROHO, Inc.

1501 South 74th Street

Belleveille, IL 62223

Utenfor U.S.A.:

ROHO International:

Telefon: 618-277-9150 • Faks: 618-277-6518

E-post: intl@roho.com

Eller, besøk www.roho.com for en oversikt over ROHOs internasjonale distributører.

RETNINGSLINJER FOR TILBAKESENDELSER:

Alle produkter som returneres må være nye og ubrukte og krever forhåndsgodkjenning fra ROHO Inc. og er underlagt et gebyr. Ta kontakt med vår garantiavdeling (Warranty Service Department) før produktet sendes tilbake **innenfor USA**.

Utenfor USA, ta kontakt med ditt lands ROHO-forhandler.

BEGRENSET GARANTI:

Hva dekkes?

ROHO, Inc. dekker enhver defekt i materialer eller produksjonsfeil.

Hvor lenge?

Fra datoen produktet ble først kjøpt:

SELECT CUSHIONS	36 måneder
Alle andre DRY FLOTATION-produkter	24 måneder
Putetrekk	6 måneder

Hva dekkes ikke?

Et produkt som har blitt misbrukt, skadet i en ulykke eller skadet i en naturkatastrofe, f.eks. oversvømmelse, tornado, jordskjelv, brann. Enhver utskiftning av medfølgende deler eller modifikasjoner på produktet vil oppheve garantien.

Hva kunden må gjøre:

Innen USA må kunden kontakte ROHO, Inc. Warranty Service Department (garantiavdelingen).

Merk: Alle puter eller materialer sent til ROHO, Inc. uten forhåndsgodkjenning vil ikke bli returnert til kunden. **Utenfor USA**, ta kontakt med ditt lands ROHO-forhandler.

Spørsmål?

Se KONTAKTINFORMASJON.

Ansvarsfraskrivelse.

Impliserte garantier, inkludert SALGBARHET og PASSENDE BRUK FOR EN SPESELL HENSIKT er også begrenset til samme tidsperiode for produkttypene oppført ovenfor i "Hvor lenge"-avsnittet og enhver handling for brudd på slike garantier eller eventuelle uttrykte garantier heri må påbegynnes før den tid.

Dine rettigheter og effekten av denne garantien på disse.

Denne garantien begrenser varigheten av alle impliserte garantier som nevnt ovenfor og begrenser eller utelukker erstatning for tilfeldige eller indirekte skader. Noen rettsområder tillater ikke begrensninger på hvor lenge impliserte garantier varer og noen rettsområder tillater ikke utelukkelse eller begrensning av indirekte eller tilfeldige saker, så det kan hende disse reglene ikke gjelder deg. Selv om denne garantien gir deg spesielle lovmessige rettigheter kan det hende du har andre rettigheter som kan variere fra rettsområde til rettsområde.



Mailing/Shipping Address:
1501 South 74th Street, Belleville, IL 62223-5900 USA

Administrative Offices:
100 N. Florida Avenue, Belleville, IL 62221-5429 USA
U.S.: 800-851-3449 • Fax 888-551-3449
Outside the U.S.: 618-277-9150 • Fax 618-277-6518

www.roho.com



The Quality Management System
of ROHO, Inc. is certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003.

T20200
Revision: 04/21/15
Print Date:

Qty:



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

