

AbleCenter AC-01 Multimedia System



AbleCon.no

Bruksanvisning

Bruksanvisning – AbleCenter®

Navigering

Ablecenteret styres med piltastene.

Det kan være lurt å flytte arket/boka i stedet for å bevege kamera med piltaster.

Forstørrelse

Start gjerne med liten forstørrelse, finn ut hvor eller hva du vil forstørre og økt forstørrelsen med tasten Q. Du kan redusere forstørrelse med W.

Lagre bildepunkter

Det kan være lurt å starte opp med å lagre aktuelle fokuspunkter i klasserommet. Dette kan være punkter som tavle, oppslags tavle, et sted læreren står ofte og skrivebordsplate. Husk at utstyret også lagrer den forstørrelsen du trenger, så still gjerne inn dette også før lagring.

Bildepunkter lagres ved å trykke Alt og et tall fra 1 til 9.

Lagre bilde

Om du vil ta et bilde, trykk tallet 0. Det kan være lurt å ha et system på hvor man lagrer bildene i forhold til fag og klassesetrinn.

Svart/hvitt bilde høykontrast

Du kan endre bildet til svart/hvit høykontrast bilde ved å trykke F3. Et trykk til på F3 vil gi andre farger kombinasjoner. Husk du kan kombinere dette med å invertere fargebilde med bokstaven i.

Gjøre bildet lysere

Lyset i bildet kan bli lysere ved å trykke Alt og A.

Gjøre bildet mørkere

Lyset i bildet kan bli mørkere ved å trykke Alt og S. Husk at lys og kontrast ofte påvirker hverandre, slik at når man har endret på lyset kan det være lurt å justere kontrasten også.

Øke kontrast

Bildet kan bli skarpere ved å øke kontrasten. Dette gjøres med Alt og Z.

Minke kontrast

Bildet kan bli dusere ved å minke kontrasten. Dette gjøres med Alt og X.

Få bildet tilbake til standard

Har man trykket på litt for mange knapper, kan man få tilbake standard bilde ved å trykke på bokstaven R.

Dele bildet

Det er mulig å dele bilde slik at du ha kamera bilde i en del og pc bildet i en annen. Trykk Windows-tast og en av pil tastene for å veksle mellom horisontal og vertikal deling. Du kan også bruke Alt og en av piltastene for å få en fast satt deling av et fullt skjermbilde.

Full skjerm bilde av/på

Full skjerm settes ved å trykke Tabulator, et trykk igjen på tabulator slår av full skjerm og setter bilde tilbake til vindu visning.

Rotere bilde

Det er mulig å rotere bildet fast 90 grader mot høyre ved et trykk på bokstaven T. Flere trykk på T vil rotere videre rundt 90 grader. Om du ønsker mindre rotering av gangen kan du holde nede ALT og trykke T for å rotere med klokken retning, og CTRL og T for å rotere mot klokken retning.

Autofokus

Kamera har automatisk autofokus satt på, denne kan slås på eller av ved å trykke Slett-bakover-knappen. Det kan være nyttig å slå av autofokus for å få et roligere bilde under høykontrast visning av tekst.

OCR – Tekstgjenkjenning

Det er mulig å behandle aktivt bilde med vår innebygde tekstgjenkjenningsmodul. Trykk F4 og du får 3 valg om du ønsker å tekstgjenkjenne, trykk tallet 1 for en fil, trykk tallet 2 det aktive bilde eller tallet 3 for smartboard. Nå leses teksten opp på valgt språk. Du kan stoppe oppleser med mellomrom-tasten og starte den igjen med samme mellomrom-tast. Trykk ESC for å avslutte tekstgjenkjenning og velg så om du ønsker å lagre dokumentet. Med tasten F5 kan du bytte mellom OCR bilde og kamera bilde.

Skifte mellom kamera og projektor/smartboard bilde

Det er mulig å bytte mellom kamera og projektor/smartboard ved å trykke på F10 for kamera og F11 for projektor/smartboard.

Flytte projektor/smartboard

Man flytter projektor/smartboard bilde med piltaster. Det er også mulig å holde CTRL-tasten inne samtidig som du beveger på mus.

Forstørrelse i projektor / smartboard

Bildet fra projektor/smartboard kan økes ved å trykke Q og redusere ved å trykke W.