

N KLAR TIL BRUK




x:panda leveres sammenslått så den ruver minst mulig under transport. Gjør følgende ved klargjøring:


- Løft sete ut av kassen
- Tilpass ryggvinkelen (A)
- Tilpass ryggghøyden (B)
- Tilpass setedybden (C)
- Tilpass lårstøttene (D)

Ytterligere opplysninger om justering står på side 6 + 7.

x:panda er nå klar til bruk.

Vi anbefaler at bruksanvisningen leses grundig før produktet tas i bruk.

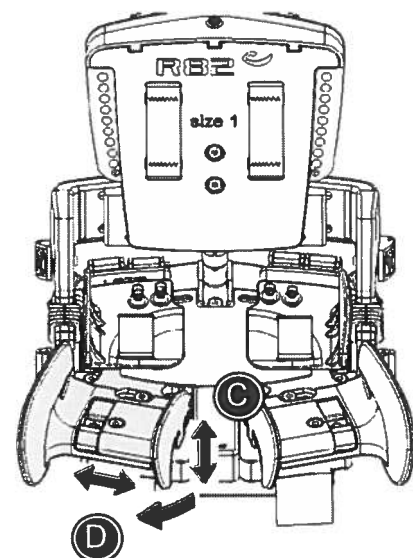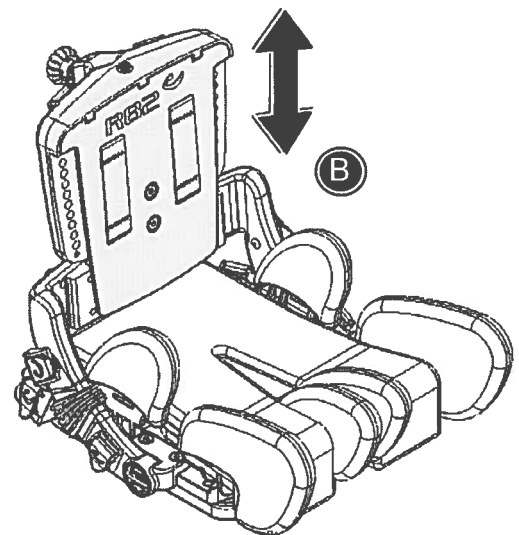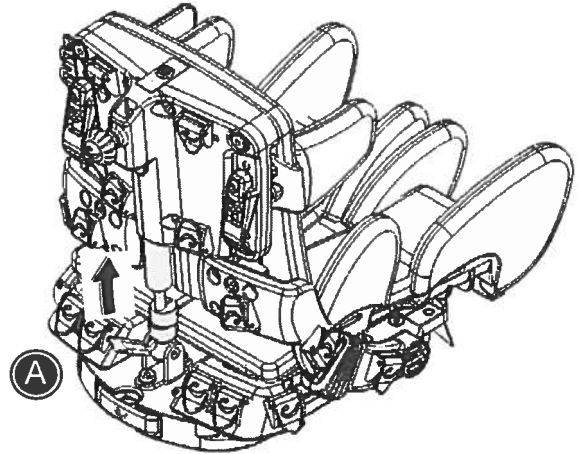

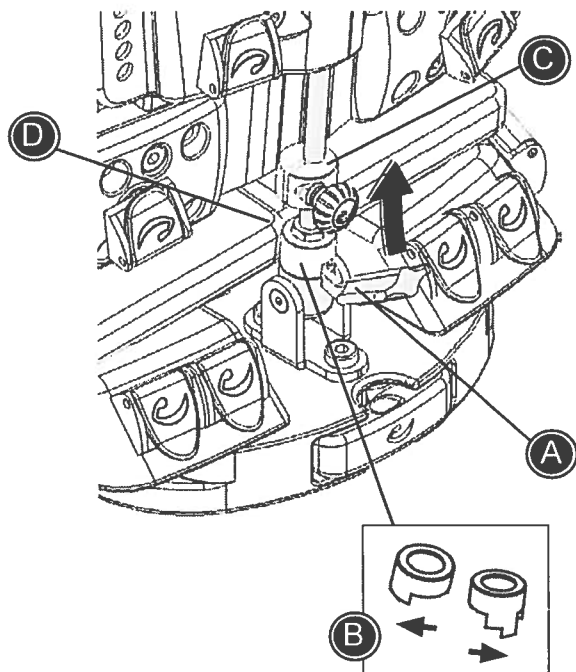

N RYGGVINKLING

Håndtaket (A) utløses for å vinkle ryggen.


! Hold godt fast i ryggen før håndtaket utløses.

Utløserhåndtaket er utstyrt med en sikkerhetslås (B). Drei denne til venstre for å aktivere – drei til høyre for å deaktivere.

! Låsen skal alltid aktiveres etter justering av ryggvinkelen.

Rygge på x:panda er dynamisk. Flytt den lille ringen (C) opp eller ned for å endre bevegelsesutslaget.

! Når ryggen vinkles skal man påse at fingrene ikke komme i klemme mellom gas-sfjæren og setet (C).

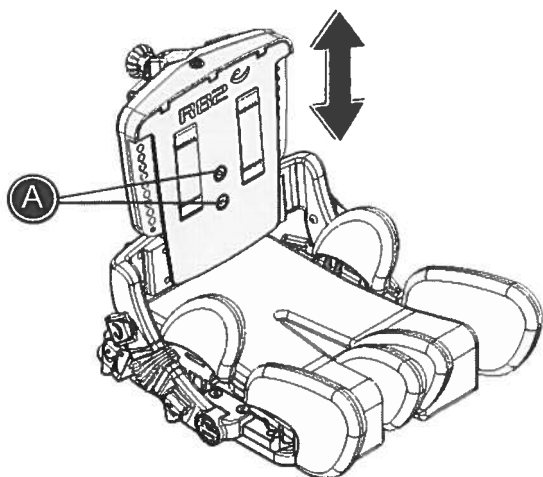


N RYGGHØYDE JUSTERING

Skrue (A og B) skal løsnes for å justere høyden.

Stram alle skrue (A og B) igjen når riktig rygg høyde er innstilt.


i Skrue (A og B) skal IKKE skrues helt ut, kun løsnes.

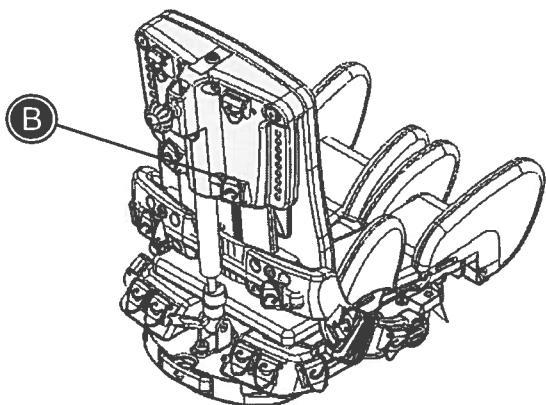

N HOFTESTØTTER - INDIVIDUELL JUSTERING

Vinkel-, dybde- og breddejustering:
Skrue (A) skal løsnes for tilpassing. Skrus fast
i ønsket stilling.

i Skruene skal IKKE skrues helt ut, kun løsnes.

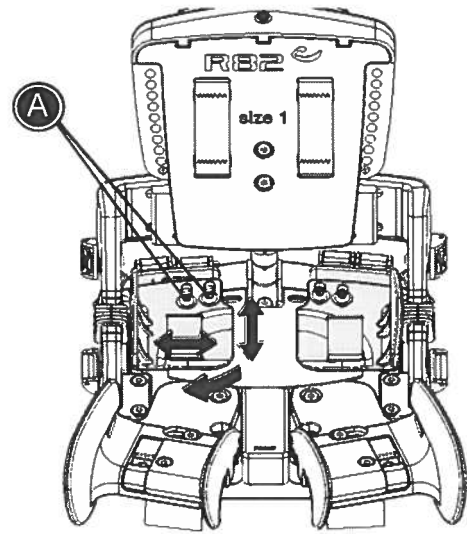

N BENSTØTTER - INDIVIDUELL JUSTERING

Vinkel- og dybdejustering:
Skrue (A) skal løsnes for tilpassing. Skrus fast
i ønsket stilling.

i Skruene (A) skal IKKE skrues helt ut, kun løsnes.

Breddejustering
Fjern skruen (B) for å tilpasse bredden. Skrus
fast i ønsket stilling.

