


N KLAR TIL BRUK

Multi Frame leveres sammenslått fra R82 slik at den ruver minst mulig under transport.

Gjør følgende ved klargjøring:

- 1) Trykk inn knappene (A) på kjørebøylen mens denne slås ut.
- 2) Trekk opp kjørebøylen slik at understellet slås ut. Dra til hele kjørebøylen klikker på plass (B).
- 3) Kjørebøylen justeres til ønsket stilling ved å trykke inn knappene (A) mens kjørebøylen justeres til ønsket høyde.

Multi Frame er nå klar til bruk.

 Påse at låsestiftene (B) ved remmen klikker inn i beslaget når kjørebøylen vippes på plass.

 Pass på at ikke fingrene kommer i klemme når understellet slås ut.

