


Efter installation ska **bruksanvisning** och **installationsmanual** lämnas kvar hos användaren

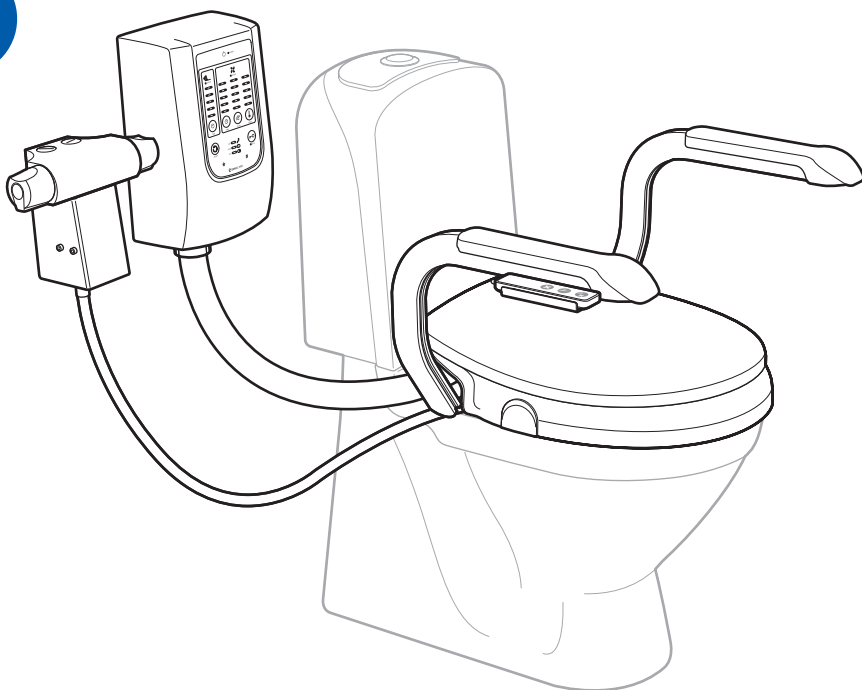

Produktbeskrivning

Bidette R3 är en automatisk bidétillsats med dusch och torkfunktion som monteras på en befintlig toalettstol. Duschstrålen och torkluften styrs med en handkontroll. **Bidette R3** kan enkelt programmeras så att alla kan använda den, oavsett behov och förutsättningar.

Bidette R3, utrustad med armstöd (extra tillval)

Bidette R3 är fabriksinställd med lämpliga inställningar. Efter installation är bidetten direkt klar att användas. Det enda som behövs är att ställa in vattentryck och vattentemperatur på blandaren.

OBS!



Tekniska data:

Denna produkt är inte avsedd att användas av personer (gäller även barn) med nedsatt fysisk/mental förmåga eller brist på erfarenhet, om de inte övervakas eller instrueras, angående användningen av produkten, av en person med ansvar för deras säkerhet.

Barn skall övervakas för att säkerställa att de inte leker med denna produkt.

Max brukarvikt på sitsen: **380 kg**

Max belastning på armstöden:
75 kg / armstöd

Sitsens höjd över toalettporslinet:
65 mm

Tillverkare

Svan Care AB
Alvägen 1
771 41 Ludvika
Sweden
www.svancare.se

Bruksanvisningen avser

Modell: Bidette R3
Mjukvaruversion: 180110
Utgivningsdatum: 17 januari 2018
Version: Rev P

Försäkran om överensstämmelse

Produkten överensstämmer med de väsentliga kraven (Bilaga 1) enligt LVFS 2003:11 samt Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter enligt klass I.
Produkten är märkt enligt **CE**.

Avsedd användning

Bidette R3 är en automatisk bidétillsats med dusch och torkfunktion som monteras på en befintlig toalettstol. Duschstrålen och torkluften styrs med en handkontroll. Bidette R3 kan enkelt programmeras så att alla kan använda den, oavsett behov och förutsättningar.

Tillbehör

Följande tillbehör kan användas till produkten:

<i>Benämning</i>	<i>Artikelnummer</i>
Svan Lift	10 701
Hygiensits	10 631
Mjuksits	10 399
Hålförminskare	11 277
Löst toalettlock	11 278
Armstöd Alu	11 401
Armstöd Gripo	10 415

Avsedd användare

Bidette R3 är avsedd att användas av person som läst och förstått denna bruksanvisning innan bidén tas i bruk.

Klassificering

Typ av skydd mot elektrisk stöt	Klass I
Grad av skydd mot elektrisk stöt	Typ B
Grad av skydd mot inträngande av vatten	IP 24
Grad av skydd vid användning i närhet av eldfarliga anestesigaser	Får ej användas i närhet av eldfarliga anestesigaser
Driftsätt	Kontinuerlig drift

Miljökrav vid drift

Temperaturområde:	+10° till +40° C
Lufttryck:	700 – 1060 hPa
Relativ fuktighet:	5 – 90 % icke kondenserande

Miljökrav vid förvaring/transport

Temperaturområde:	-40° till +50° C
Luftryck:	500 – 1100 hPa
Relativ fuktighet:	10 – 100 % icke kondenserande

Produktens märkning



CE-märkning. Visar överensstämmelse med Rådets direktiv 93/42/EEG om medicintekniska produkter. Produkten uppfyller kraven i LVFS 2003:11.



Visar överensstämmelse med Rådets direktiv 2012/19/EU om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE). Symbolen betyder att kasserad elektrisk och elektronisk utrustning inte får kastas som hushållssopor utan måste lämnas till separat återvinning.



Patientansluta delar Typ B.



Läs medföljande bruksanvisning.



På/Av knapp.

Symboler i bruksanvisningen



Symbolen indikerar att försiktighet bör tas för att förhindra patient- eller personskada och/eller försämring av utrustningen.



Varningssymbolen indikerar en potentiell fara som, om den inte undviks, kan innebära allvarlig patient- eller personskada.



För att undvika risk för elektrisk chock får bidén endast anslutas till ett nätuttag med skyddsjord.

Produkten får inte tas isär eller öppnas.



Handkontrollen och fläkthuset får inte öppnas eller repareras av obehörig. Kontakta tillverkaren eller din distributör för hjälp med service. Bidette R3 får inte modifieras utan tillstånd från tillverkaren.

Bidette R3 får inte användas samtidigt som den repareras eller underhålls.

Säkerhetsinformation

Svan Care ansvarar endast för säkerhet, pålitlig drift och prestanda om produkten används enligt de instruktioner som anges samt att användaren följer säkerhetsinformationen i denna bruksanvisning. Den som negligerar denna säkerhetsinformation utsätter sig själv, patienten och annan personal för potentiell fara.

Installation

Installation får endast utföras av behörig personal. För information om installation se "Installationsanvisning Bidette R3"

Underhållskrav

Kontrollera minst en gång per månad att slangarna är hela och korrekt anslutna. Kontrollera att inga synliga skador finns på kabel eller andra komponenter. Vid misstänkt skada får produkten inte användas.

Slangar och toaletsits kan bytas av användaren under förutsättning att de originalkomponenter som anges i denna bruksanvisning används. Inga andra tillbehör får användas än de som anges av tillverkaren.

Standards

Följande standards uppfylls:
IEC/EN 60601-1:2006 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda

IEC/EN 60601-1- 2:2014 Elektrisk utrustning för medicinskt bruk - Del 1-2: Allmänna fordringar beträffande säkerhet och väsentliga prestanda - Tilläggsstandard för elektromagnetiska störningar – Krav och tester

SS-EN 12182:2012 Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar - Allmänna krav och provningsmetoder

SS-EN 60335-1:2012/A11 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 1: Allmänna fordringar

SS-EN 60335-2- 84:2003+A1 Elektriska hushållsapparater och liknande bruksföremål - Säkerhet - Del 2-84: Särskilda fordringar på elektriska toaletter

SS-EN 62233:2008 Hushållsapparater och liknande bruksföremål - Mätning av elektromagnetiska fält med avseende på exponering

Så här fungerar Bidette R3



Hel-automatisk



Automatknapp

Ett tryck på den gröna automatknappen och Bidette R3:

Spolar bort kallt vatten → duschar rent → och torkar torrt

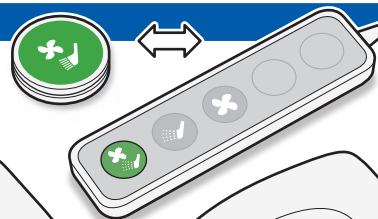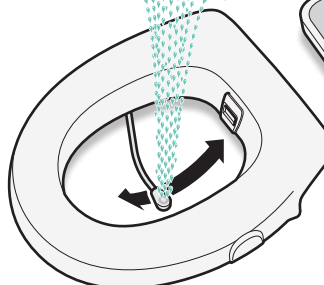

Du kan alltid avbryta ett moment. Med ett extra tryck stegar du fram till nästa moment. Om man använder Bidetten igen inom 15 min startar duschen direkt utan förspolning.


Halv-automatisk



Duschknapp


Ett tryck på den blå duschknappen och Bidette R3:

Spolar bort kallt vatten → duschar rent

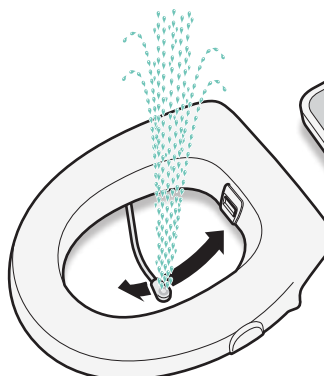

Ett extra tryck och vattnet stängs av.

Om man använder Bidetten igen inom 15 min startar duschen direkt utan förspolning.

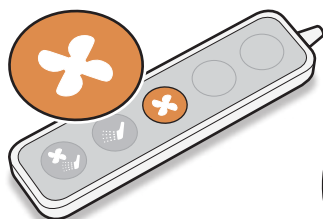

Flätknapp


Ett tryck på den oranga flätknappen och Bidette R3:

Torkar torrt



Ett extra tryck och fläkten stannar.

Vattentryck och vattentemperatur

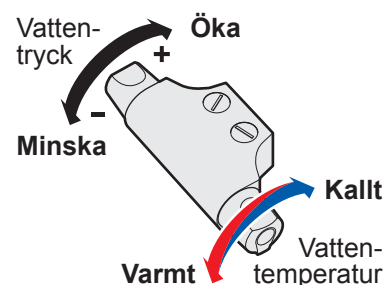

Ställ in vattentryck och vattentemperatur på termostatblandaren.

Bidetten är nu klar att användas.


Om inte bidetten används under en längre tid ska blandaren stängas.

Enklare inställningar för Bidette R3

Ändra inställningar

1. Tryck på **Power** så att panelen tänds.
2. Ändra dina inställningar genom att trycka på respektive **inställningsknapp**. Värdet stegas upp vid varje knapptryckning. Efter max börjar värdet om igen från min.
3. **Klart!** Panelen släcks ner efter 15 minuter.


Bidette R3 är förinställd med lämpliga värden (bilderna visar förinställda värden). Inga övriga inställningar behöver göras om inte detta är användarens önskan.

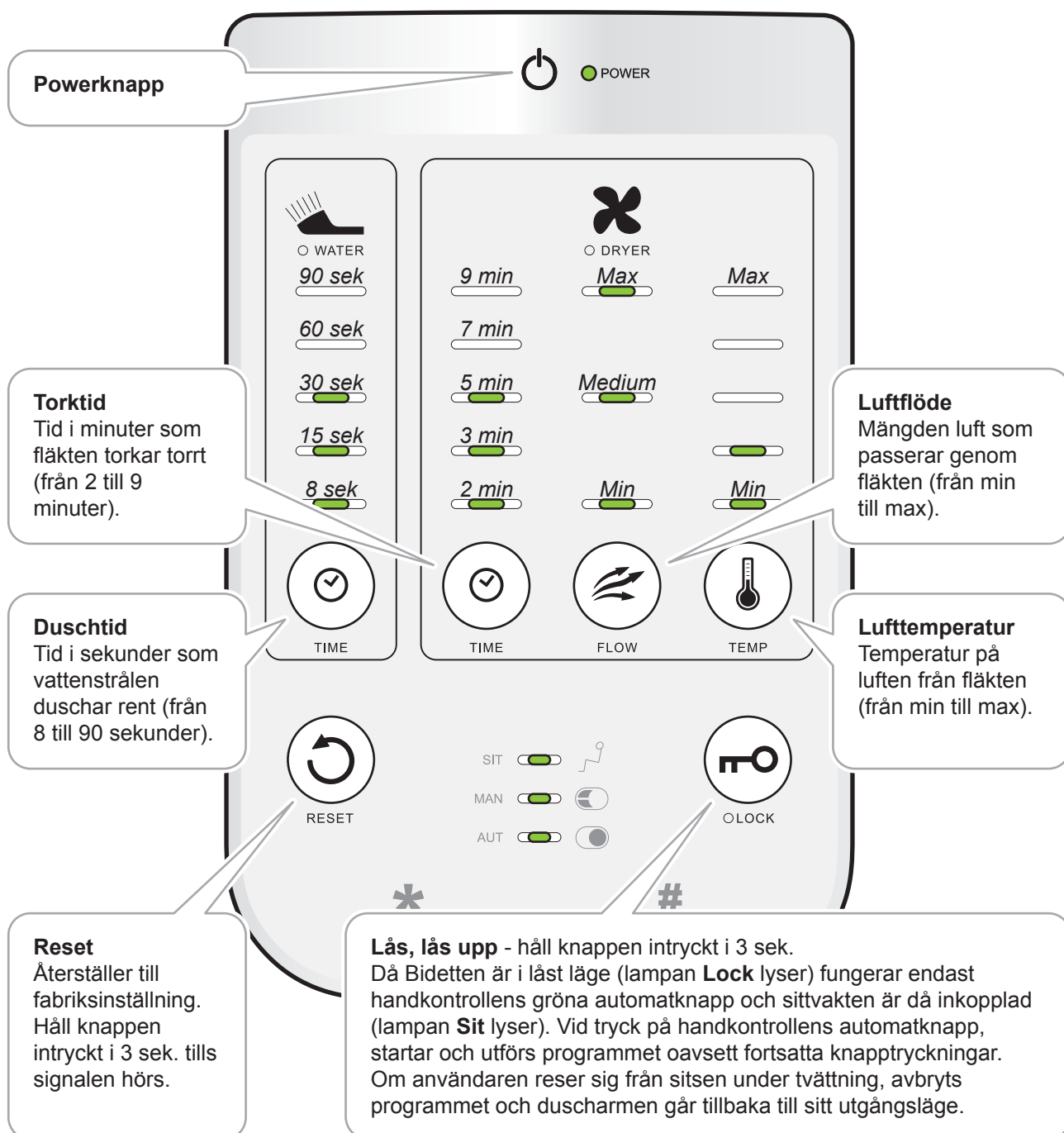

Inställningar *

Ändra inställningar

1. Tryck på **Power** så att panelen tänds.
2. Tryck på * i 3 sek. tills lampan **Water** börjar blinka.
3. Ändra dina inställningar.
4. Tryck på * för att avsluta.


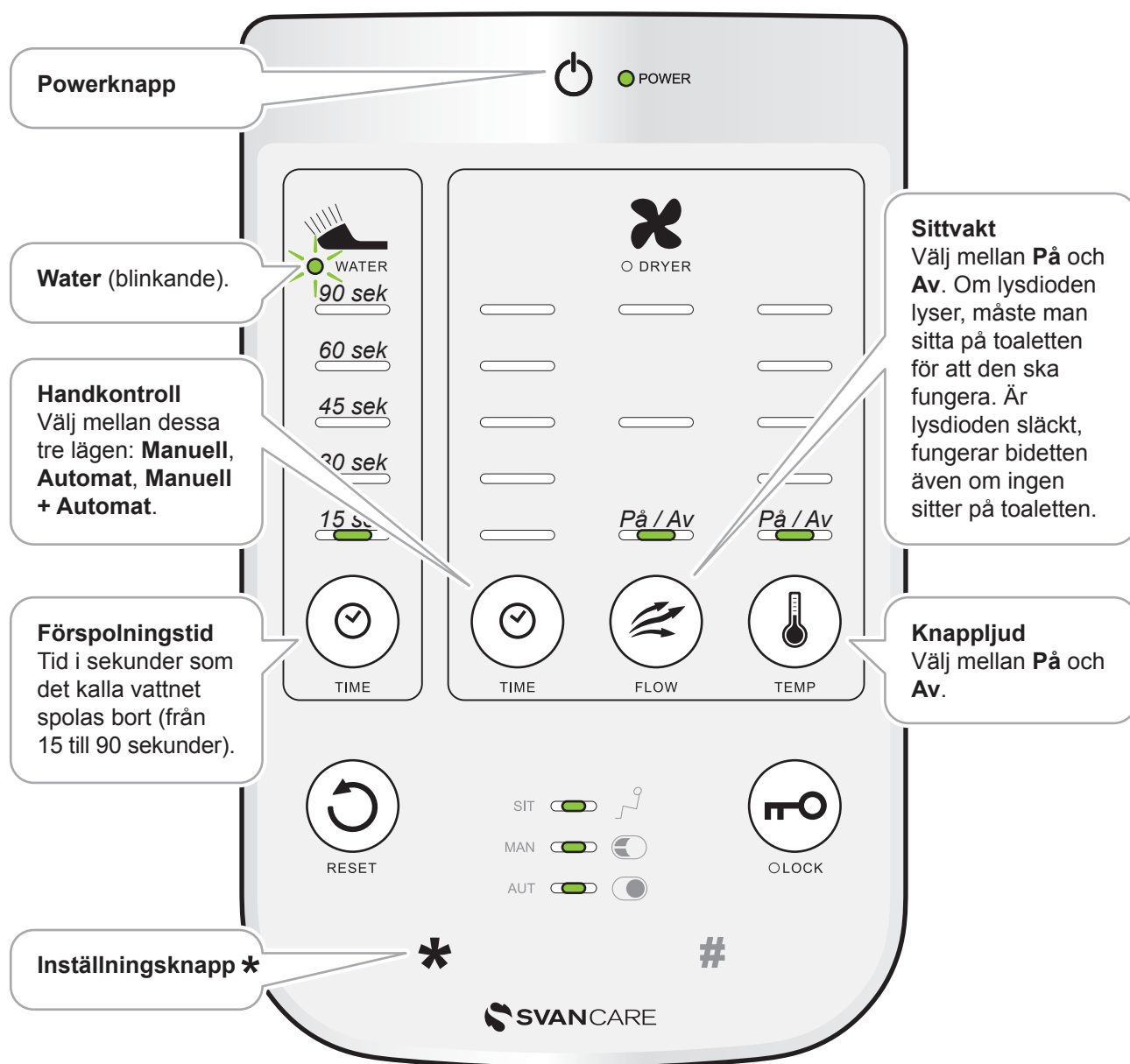


Inställningar


Ändra inställningar

1. Tryck på **Power** så att panelen tänds.
2. Tryck på **#** i 3 sek. tills lampan **Dryer** börjar blinka.
3. Ändra dina inställningar.
4. Tryck på **#** för att avsluta.

Duscharmens olika lägen

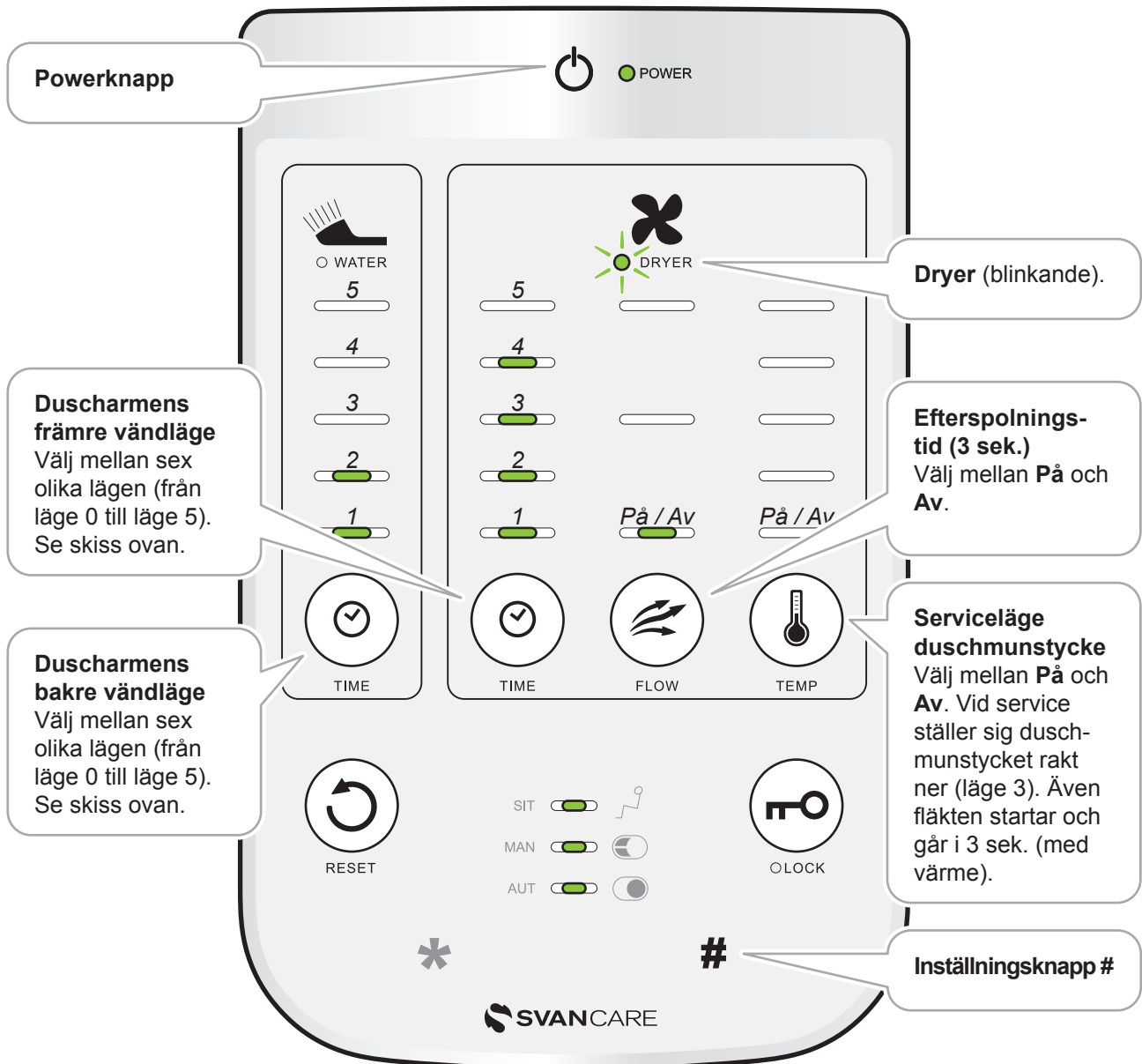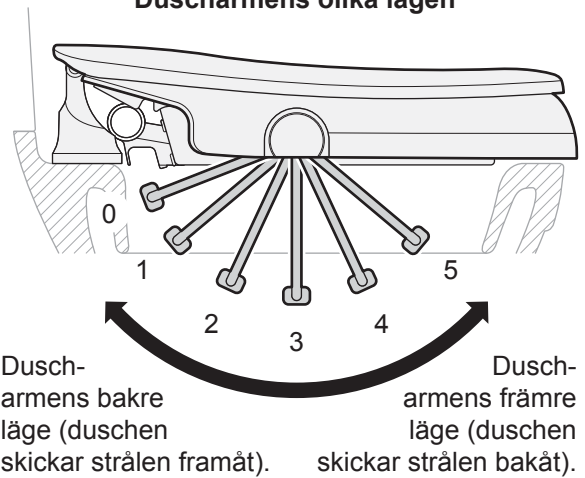

Bidette R3, komponentlista

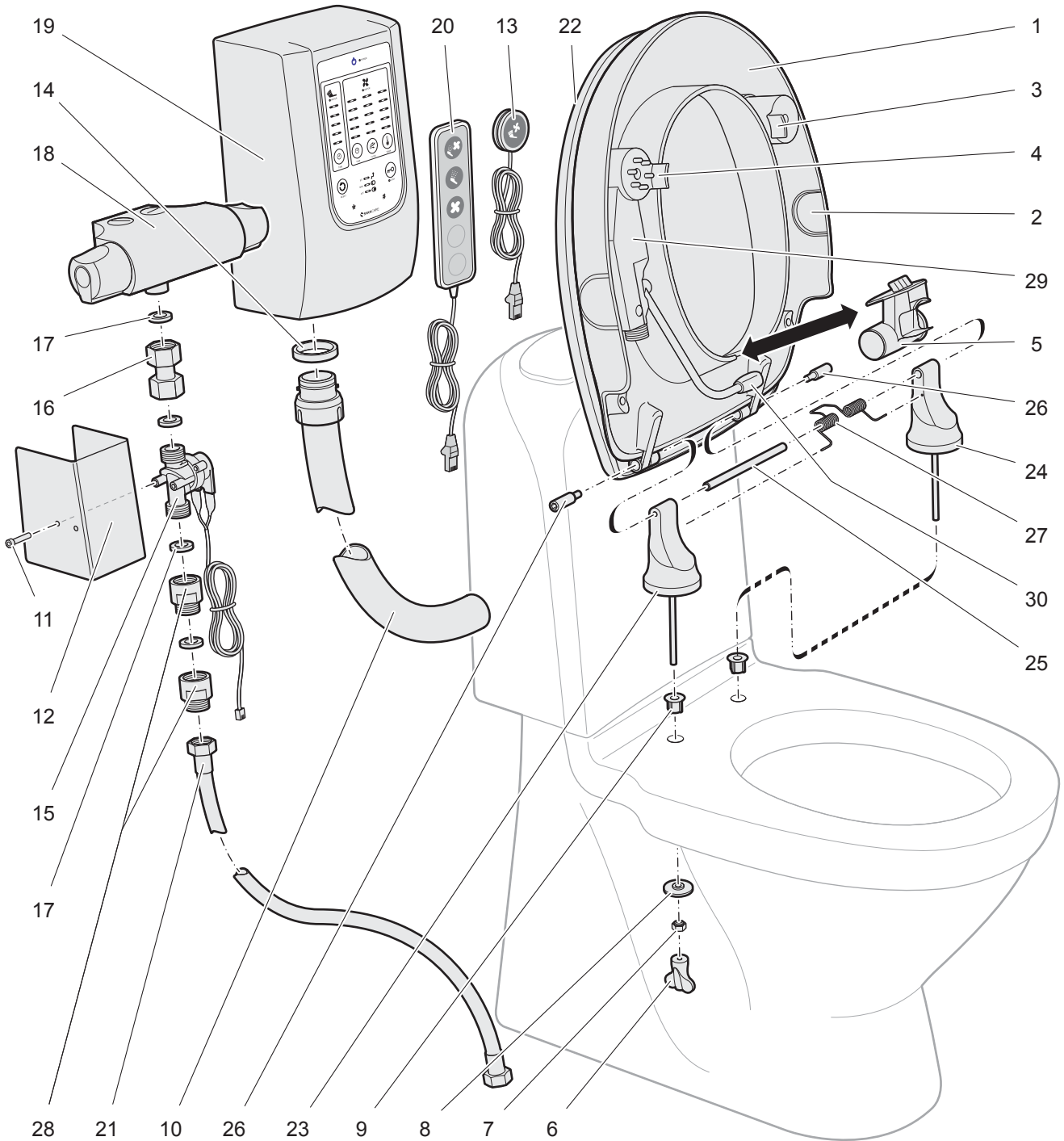

Svan Care förbehåller sig rätten till ändringar i komponentlistan. Aktuell information finns på vår hemsida.

Komponentlista till Bidette R3

Nr	Ant.	Benämning	Artikelnummer	Nr	Ant.	Benämning	Artikelnummer
1	1	Komplett sits med lock	11 251	16	1	Koppling	11 336
2	2	Täcklock sida	11 207	17	4	Packning	10 210
3	1	Sidoflytt.n.skydd utan hål	11 448	18	1	Termostatblandare	10 238
4	1	Sidoflytt.n.skydd med hål	11 203	19	1	Fläkthus R3/M3	11 298
5	1	Luftmunstycke komplett	11 226	20	1	Handkontroll Trippel (magnet)	11 466
6	2	Verktug mutterhållare	11 259	21	1	Högtrycksslang 100 cm	11 334
7	2	Mutter	11 254	22	1	Lock	11 243
8	2	Bricka	11 253	23	1	Stödben höger	11 273
9	2	Hålförminskare porslin	11 252	24	1	Stödben vänster	11 274
10	1	Luftslang ca 83 cm	11 331	25	1	Axel	11 275
11	2	Skruv	11 339	26	2	Låsskruv	11 276
12	1	Ventilkåpa	11 445	27	1	Dämpfjäder	11 350
13	1	Handkontroll Singel	11 450	28	2	Backventil R3/M3	11 378
14	1	Packning luftslang	11 247	29	1	Motor komplett	11 189
15	1	Vattenventil med kablage	11 378	30	1	Duschmunstycke ställbart	11 193

Allmänna tips och råd

Läs igenom bruksanvisningen noga, så du lär dig produktens funktion och dess inställningsmöjligheter.

Bidette R3 kan enkelt programmeras så att alla kan använda den, oavsett behov och förutsättningar.

Är användaren en person med kognitiv funktionsnedsättning, kan bidettens låsfunktion hjälpa. Se beskrivning av låsknapp på sidan 3.

Har personen svårt att resa sig. Komplettera Bidette R3 med armstöd eller Svan Lift.

Duschstol går bra att använda över Bidette R3. Detta tack vare att duschstrålen kommer underifrån. Då duschstol används måste sittvaken vara **Av**, se inställningar på sidan 4.

Nyheter och tillbehör till Bidette R3, titta gärna på vår hemsida: **www.svancare.se**

Rengöring av produkten

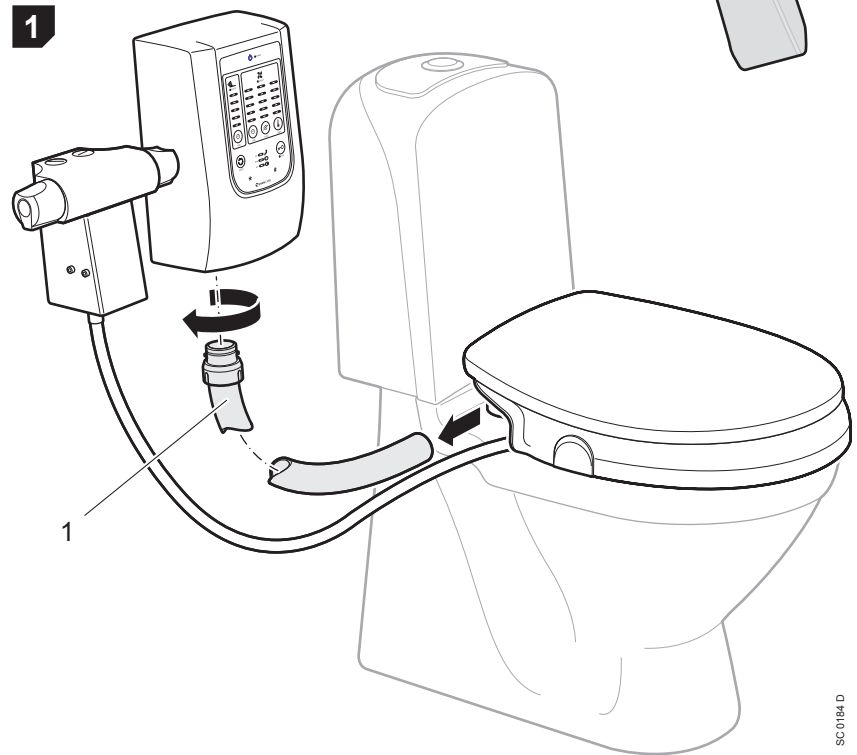


Bild 1

Fläkthus och termostatblandare torkas av med fuktad trasa.

Toalett och bidette rengörs med ett mildt rengöringsmedel som inte repar.

Luftslang (pos 1) kan tas loss, rengöras och sköljas separat.



SC 0184 D

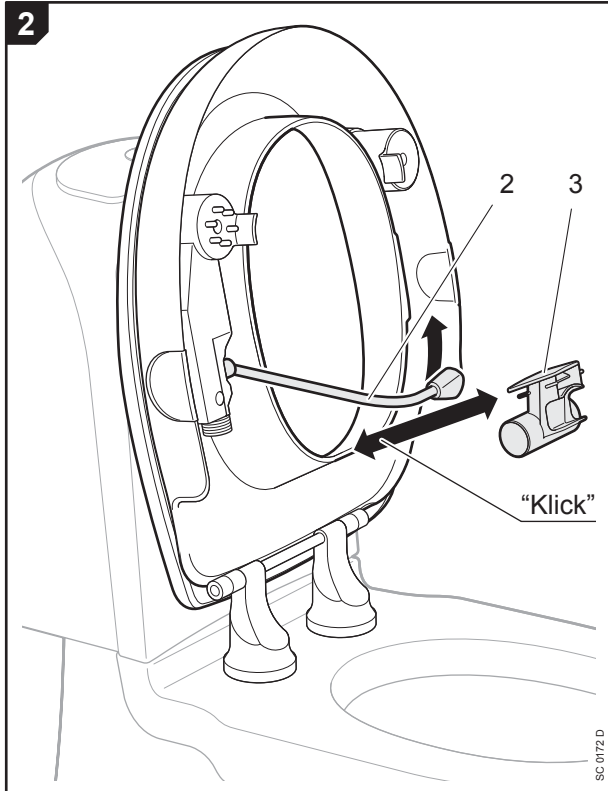


Bild 2

Fäll upp sitsen.

Vrid duscharmen (pos 2) så att den inte låser luftmunstycket.

Luftmunstycket (pos 3) kan nu tas loss, rengöras och sköljas separat.