

## Bruksanvisning badkarssits 1-1130/1-1131/1-1136/1-1137

### **SE - Allmänt**

Beskrivna produkter överensstämmer med EG-direktivet 93/42 och är godkänd som medicinteknisk produkt klass 1. Bruksanvisningen är en del av artikeln och måste hållas tillgängliga för brukaren. Även vid byte av brukare tillhör instruktionen produkten. Särtryck, översättningar och kopiering i någon form, helt eller delvis, utan uttryckligt tillstånd från tillverkaren Nordic activity AB / Sverige är inte tillåtet. Upphovsrätten ligger hos tillverkaren. Instruktionen ligger inte under kontinuerlig översyn. För information om aktuell status, vänligen kontakta oss. Ändringar genom produktutveckling av konstruktionen är möjliga men utan anmälningsplikt.

### **Indikationer:**

Produkten har utvecklats för personer med nedsatt rörlighet och behov av stöd och hjälp.

### **Säkerhet / användning**

Badkarssitsen måste ligga säker utan att vippa på alla fyra anti glid gummifötter. Innan varje användning bör detta kontrolleras. Halkrisk består när du ska sitta ner och / eller stiga upp. Använd vid behov hjälp av assistent när du inte har tillräckligt ståformåga. Böj dig inte extremt framåt eller bakåt - TIPPRISK! Se till före användning att produkten ligger stadigt med gummifötterna på badkarskanten.

### **Leverans**

Artikeln 1-1136/1-1137 levereras komplett monterad i en låda och är klar att använda. Stabilisatorskruvarna måste skruvas lätt mot badkarsväggarna för att förhindra att sitsen kan flytta sig. För artikel 1-1130/1-1131 måste bärarmarna monteras. Lyft på sitsen, montera armarna i rätt bredd. Upp till 90kg brukarvikt kan vingmuttrarna användas. Vid högre brukarvikt använd låsmuttrarna som följer med i leveransen. Tillbehör 1-1113 och/eller 1-1114 monteras på samma sätt som bärarmarna. Efter monteringen trycks sitsen på ramen igen.

### **Rengöring**

Rengöring och desinfektion bör utföras regelbundet (vid byte av brukare ett krav). Vid rengöring, använd en mild tvållösning utan sliptillsatser. Desinfektion kan utföras med konventionella lösningar.

### **Underhåll**

Produkten är underhållsfri. Defekt komponent - kontakta din återförsäljare eller servicecenter för utbyte.

### **Garanti**

Garantitiden är 24 månader och täcker alla defekter i produkten, som visat sig vara material eller tillverkningsfel.



### **FLEXIBLE standard**

Artikel 1-1130 / 1-1134-W / 1-1134-H




### **FLEXIBLE hygiene**

Artikel 1-1131 / 1-1133-W / 1-1133-H

### **Tillbehör för 1-1130/1-1131**

1-1113 Ryggstöd mjuk  
 1-1114 Ryggstöd hård

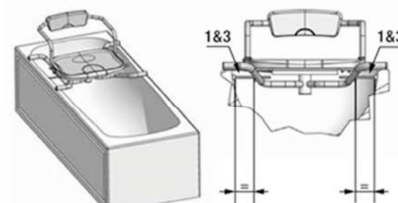

### **SWIVEL standard**

Artikelnr. 1-1136 Standardsits



### **SWIVEL hygiene**

Artikelnr. 1-1137 Hygienesits