

## **Bruksanvisning**

med service manual og vedlikeholds-  
og rengjøringsbeskrivelse.

Softseat,  
Solidseat

# Innhold

**Innhold s. 1 - 2**

**Softseat bruksanvisning s. 3 - 6**

**Solidseat bruksanvisning s. 7 - 10**

**Posisjonering s. 11 - 12**

**Vedlikeholdshenvisning s. 13 - 14**

**Rengjøringsrutiner s. 15 - 16**

**Miljø og ansvar s. 31-32**



 **For å sikre korrekt og trygg bruk er det viktig at du leser denne bruksanvisninger nøye!**

**Ved bruk i bil henvises det til utfyllt risikoanalyse for sikring i bil. Hoftebelte og eventuelt vest som er montert i setet er ikke sikkerhetsele, men posisjoneringsutstyr. Det er dermed ikke tilstrekkelig for sikring av bruker i biltransport.**



Bruksanvisningen gjelder for:

## Bruksanvisning Softseat

Gratulerer med et spesialtilpasset Softseat fra Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd med setet og funksjonaliteten enten du er den som skal sitte i setet, du er ledsager, forelder eller annet omsorgspersonell. Det er viktig at du setter deg inn i denne bruksanvisningen før dette setet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du har, vær god og sett det tilbake i plastlommen der du fant det.

! For ytterligere informasjon om våre produkter henvises det til Ergoseats hovedkatalog og egne bruksanvisninger for de ulike understellene.



Fest produkt spesifikasjon her

Denne brukansvisningen gjelder følgende konfigurasjon:

Fest pakkseddel her

## BORD

Bordet festes sammen med et armlen på ene siden av rullestolen. For å feste bordet, sett bodets bærestang inn i sylindern på undersiden av armlenet. Bordet kan sideforskyves mot høyre og venstre. I tillegg kan bordet trekkes frem og tilbake i dybden. Det kan også tiltes opp og ned på siden av rullestolen. Bordet er avtagbart og fjernes ved hjelp av et gantagrep.



## FOTBRETT OG FOTKASSE

(1) Bildet viser fast fotbrett. Fotbrett kan også fås i oppfellbar variant. (2) Fotkasse justerbar kan størrelsesjusteres.

Fotkassen kan også justere sidelengs på gaffel og settes opp med usymmetrisk vinkel. Fotkassen justeres ved å løsne skruene bakerst inni kassen og skruen i senter under kassen. Finn riktig størrelse og fest skruene.



## PUTE OG TREKK

Trekkene er avtagbare og kan vaskes på 95°. (Ps. se merkelapper)



## NAKKESTØTTE

Dybden på nakkestøtten kan justeres fram og tilbake ved å åpne gantagrepene på toppen. Høyden kan også justeres ved å åpne/lukke gantagrepene på nedre del av nakkestøtten. Vinkelen kan justeres ved å løsne/stramme skruene på kuleleddet bak på nakkestøtten. Dersom din nakkestøtte er utstyrt med sideforskyvningadapter løsne/stram de to ytterste skruene på nakkestøtten beslaget for å justeres nakkestøtten sidelengs.



## ARMLENER

Armlenene kan justeres både opp og ned, ved å løsne/stramme skruene der armlenen er festet mot kassen. Ved å løsne/stramme de to skruene på midten av armlenne kan også armlenene vinkel justeres.



(1)



(2)

## HOFTEBELTE

Hoftebeltet strammes (1) og løsnes (2) som annvist på bildet. Beltet er festet i kassen med chinch mount, slik at det kan fjernes fra setet for å vaskes. For å løsne disse kan man eventuelt bruke en mynt.





Bruksanvisningen gjelder for:

## Bruksanvisning Solidseat

Gratulerer med et spesialtilpasset solidesate fra Ergoseat. Vi håper du vil være fornøyd med setet og funksjonaliteten enten du er den som skal sitte i setet, du er ledsager, forelder eller annet omsorgspersonell. Det er viktig at du setter deg inn i denne bruksanvisningen før dette setet tas i bruk. For at andre skal ha samme nytte av dette heftet som du har, vær god og sett det tilbake i plastlommen der du fant det.

! For ytterligere informasjon om våre produkt henvises det til Ergoseats hovedkatalog og egne bruksanvisninger for de ulike understellene.



Fest produkt spesifikasjon her



Denne brukansvisningen gjelder følgende konfigurasjon:

Fest pakkseddel her

## POLSTRING OG TREKK

Polstrinen er bygget opp av 3 lag. Polster nr. 2 er todelt for gi plass for større klesplagg. Rygg eller setedel kan fjernes ved å åpne opp klipsene langs kanten av setet. Polstrene er vaskbare på 40° og er merket med type materiale og polster 1, 2 og 3. Der nr. 1 alltid plasseres nærmest bruker, og nr. 3 alltid som siste polster mot ABS skall.(Ps. se merkelapper).

## BORD

Bordet festes sammen med et armlen på ene siden av rullestolen. For å feste bordet, sett bodets bærestang inn i sylindren på undersiden av armlenet. Bordet kan sideforskyves mot høyre og venstre. I tillegg kan bordet trekkes frem og tilbake i dybden. Det kan også tiltes opp og ned på siden av rullestolen. Bordet er avtagbart og fjernes ved hjelp av et gantagrep.

## FOTBRETT OG FOTKASSE

(1) Bildet viser fast fotbrett. Fotbrett kan også fås i oppfellbar variant. (2) Fotkasse justerbar kan størrelsesjusteres.

Fotkassen kan også justere sidelengs på gaffel og settes opp med usymmetrisk vinkel. Fotkassen justeres ved å løsne skruene bakerst inni kassen og skruene i senter under kassen.

Finn riktig størrelse og fest skruene.



## NAKKESTØTTE

Dybden på nakkestøtten kan justeres fram og tilbake ved å åpne gantagrepene på toppen. Høyden kan også justeres ved å åpne/lukke gantagrepene på nedre del av nakkestøtten. Vinkelen kan justeres ved å løsne/stramme skruene på kuleleddet bak på nakkestøtten. Dersom din nakkestøtte er utstyrt med sideforskyvningadapter løsne/stram de to ytterste skruene på nakkestøtten beslaget for å justeres nakkestøtten sidelengs.

## ARMLENER

Armlenene kan justeres både opp og ned, ved å løsne/stramme skruene der armlenen er festet mot kassen. Ved å løsne/stramme de to skruene på midten av armlenne kan også armlenene vinkel justeres.

## HOFTEBELTE

Hoftebeltet strammes (1) og løsnes (2) som annvist på bildet. Beltet er festet i kassen med chinch mount, slik at det kan fjernes fra setet for å vaskes. For å løsne disse kan man eventuelt bruke en mynt.





## Softseat og Solidseat P O S I S J O N E R I N G

Riktig posisjonering er avgjørende for at setet skal fungere trykkavlastende.

## 1 . SJEKK SIKKERHET

Sett alltid sikkerhet først. Sjekk at hjulene på setet er låst, og at setet er godt festet til understellet.

## 2 . TILT BAKOVER

Plasser brukeren riktig i setet slik at det oppnås ønsket støtte og posisjon. Etterjuster ved behov inntil korrekt posisjon er oppnådd.

## 3 . PLASSERBRUKER

Det er viktig at bruker kommer helt ned i setet, og flere teknikker finnes for dette. Ved bruk av seil prøv å senke personen som anvist. Ved manuell løfting, forsøk å justere personen inn i setet til du er sikker på at korrekt posisjon er oppnådd.

## 4 . POSISJONER HOFTEBELTE

Hoftebeltet skal posisjoneres over hofte, og trykket skal gå som anvist på bildet.

**! Hoftebelte skal stramme nedover, og sikrer at posisjonen oppnådd i punkt 3 beholdes over tid.**

## 5 . STRAM HOFTE BELTE


## 6 . FEST VEST OG ANDRE BELTER

Fest neoprenvest, anklets (fotreimer) og eventuelle andre innfestninger som er tilordnet stolen.

**! At bruker sitter korrekt i setet er essensielt for at setet skal fungere trykkavlastende.**

## 7 . TIL BRUKER I RIKTIG POSISJON

Bruk tilt aktivt gjennom dagen for å oppnå variasjon i trykkfordeling. Sjekk med bruker hvor lang sittefrekvens denne normalt har og tilpass til dette. Det er store individuelle forskjeller på hvor lenge bruker benytter setet.

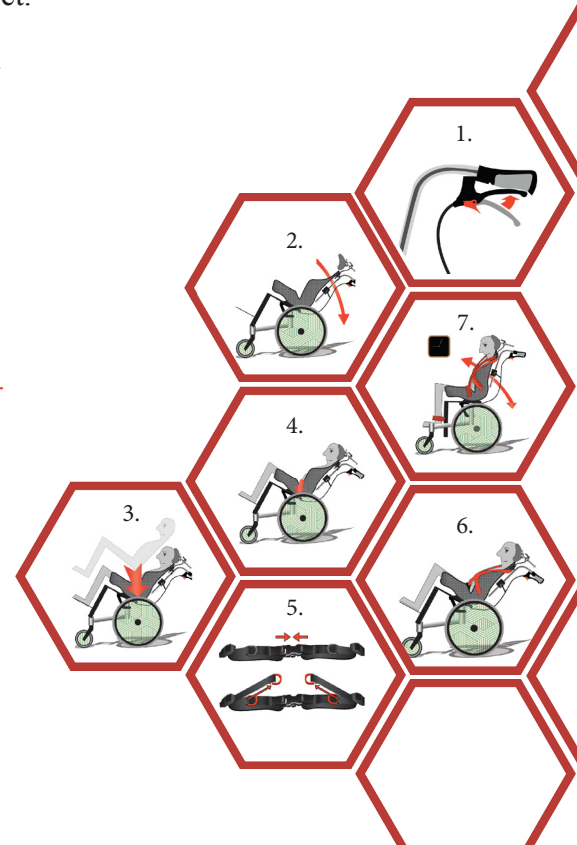



## Softseat og Solidseat

### VEDLIKEHOLDSANVISNING

Riktig vedlikehold øker sikkerheten og holdbarheten på produktet over tid.

#### KONTROLL AV SLITASJE:

Kontroller alltid festepunkter, fikserings- og posisjoningsbånd for slitasje før anvendelse. Tilbehør som er montert på setet (nakkestøtte, armlen, fotbrett m.m.) bør sjekkes jevnlig og etterstrammes ved behov.

#### ETTERTILPASSNING:


Mindre justeringer og korreksjoner kan utføres i setet. Dette må foretas av Ergoseat sin representant eller i samråd med denne.

#### ERSTATNINGS PUTE OG POLSTER:

Dersom det blir behov for nye polster, eller puter kan disse etterbestilles hos Ergoseat. Erstatnings produkt vil til en hver tid kunne bestilles uten ny konsultasjon av Ergoseat, og vil være en kopi av original løsning.

#### ERSTATNINGS TREKK:

Dersom det blir behov for erstatnings trekk kan disse etterbestilles hos Ergoseat. Erstatningstrekk vil til en hver tid kunne bestilles uten ny konsultasjon og vil være en kopi av originalt trekk.

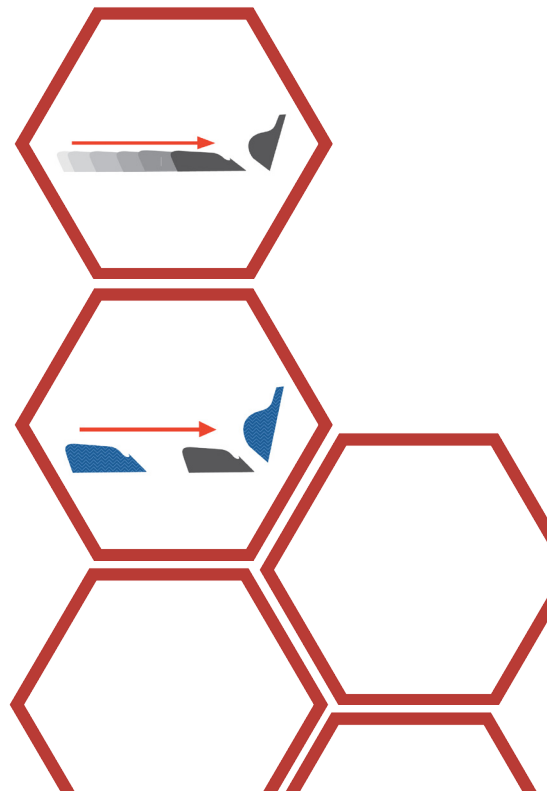





# Softseat og Solidseat RENGJØRINGSRUTINER

Riktig renhold øker holbarheten på produktene.

## DAGLING RENHOLD

- Løs smuss tørkes normalt av setet med en varm fuktig klut.
- Se ellers anvisning på trekkets vaskelapp.

## INKONTINESTREKK


- Løse inkontinestrekk kan vaskes på 60 °C og lufttørkes.
- Inkontinestrekket er antibakterielt og allergitestet.

## STOFFTREKK

- Setet har avtakbare stofftrekk for å gjøre det enklere å rengjøre. Trekkene kan maskin vaskes på 95 °C.
- trekkene er merket med vaskeanvisning, som også markerer plassering av putene.
- Vaskeanvisningen skal være plassert oppe på ryggdelen og bak på setet.
- Trekkene er antibakterielle og allergitestet.

## POLSTER

- Setet har avtakbare polster. Håndvask er å foretrekke på grunn av slitasje, men polstrene tåler maskinvask på inntil 40° C. Vreng polsteret og bruk et skånsomt vaskeprogram.
- Polstrene er merket med vaskeanvisning i tillegg til nummerering.
- Vaskeanvisningen er plassert oppe på ryggdelen.

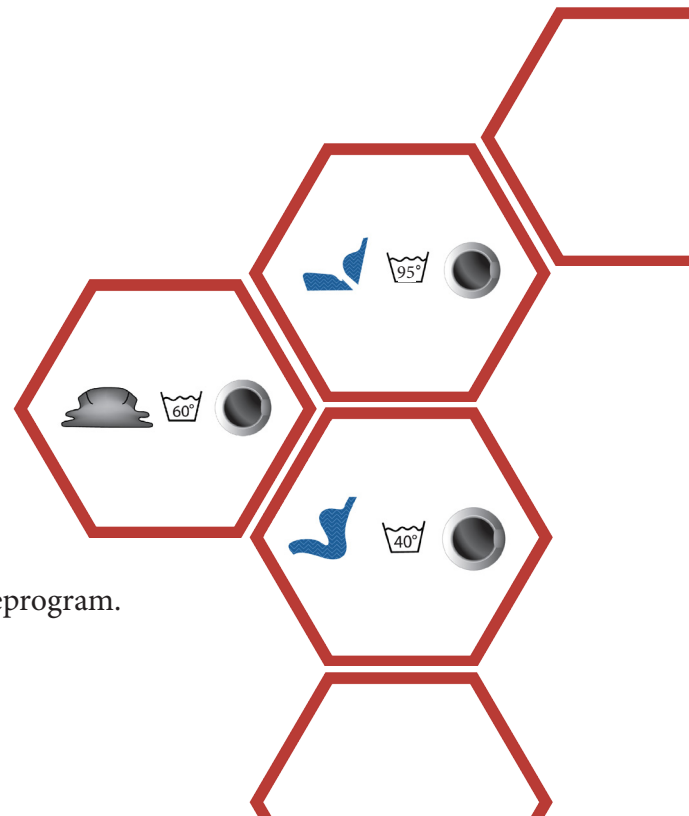

# Ergoseat

## Miljø og ansvar

Ergoseat jobber alltid for at så lite avfall som mulig genereres under fremstillingen av våre produkter.

Vi tenker miljø i alle ledd, og er stolte av å være de første med en "on site" digitaliseringsløsning med direkte opplastning. Dette eliminerte den tradisjonelle gipsformen, og frakt av denne. Vår teknologi har bidratt sterkt til å redusere avfall og bruk av kjemiske stoffer.

Samtidig tenker vi ansvar i form av sikker bruk av våre produkter. Vi er derfor stolte av å kunne si at våre individuelle seteløsninger møter krav stilt i 13/42/EØF.



Produktet kan resirkuleres i sin helhet. Du finner mer informasjon om dette på [www.ergoseat.no](http://www.ergoseat.no)



**Ergoseat AS**

Kokstadvegen 46, 5257 Kokstad. Tlf. +47 55101600

Fax. +47 55101601, e-post: [post@ergoseat.no](mailto:post@ergoseat.no)