


## Brukerveiledning

# Quick Talker 23 - 12 - 7 Communicators™

**Ny robust design for bruk over alt!**

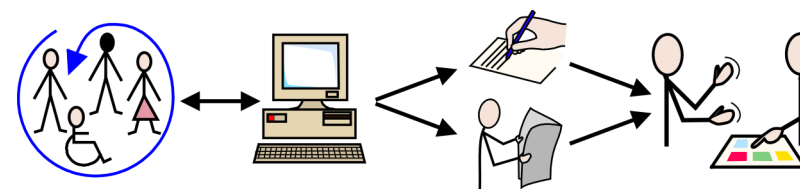


**www.normedia.no**

## 6. Slett melding

**Enkelt felt** - Gå i *Opptak* og trykk og slipp opp et felt i rask rekkefølge

**Slett på nivå** - Trykk og hold RECORD knappen nede i 10 sek. Alle meldinger på det aktive nivået vil bli slettet

**Slett alt** - Trykk og hold RECORD knappen nede i 30 sek. Alle meldinger vil da bli slettet

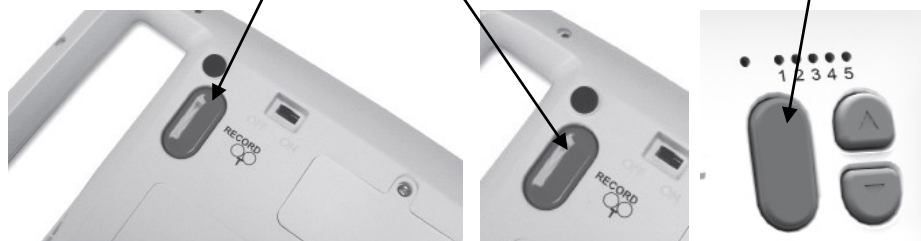

## 7. Avanserte funksjoner

### Kjernemeldinger

De tre kjernemeldingene er like på alle nivåer. De sist innspilte spilles.

### Lås kontrollene (RECORD + NIVÅ)

Trykk og hold de røde *Record* og *Nivå* knappene samtidig i 5 sek. Alle lysene vil blinke 2 ganger. Gjenta for å låse opp kontrollene.

## 7. Vedlikehold og Garanti

**Rensing og stell:** Gjør ren enheten med en lett fuktig klut.

Spesifikasjoner	QT 7	QT 12	QT 23
Kjernefelt	3	3	3
Meldingsfelt	4	9	20
Opptakstid	6 min	12 min	18 min
Vekt: m/4 AA batt.	0,7 kg	0,73 kg	0,75 kg
Dimensjoner	29 x 29,5 x 4.25 cm (br - h - d)		


### Garanti

Ablenet tilbyr en begrenset to års garanti på kommunikatorne sine.

Detaljer om garantien fins på [www.ablenet.com](http://www.ablenet.com)

For service kontakt NorMedia AS på [www.normedia.no](http://www.normedia.no)

## 1. Quick Talker 7/12/23 Guide. Nøkkelfunksjoner

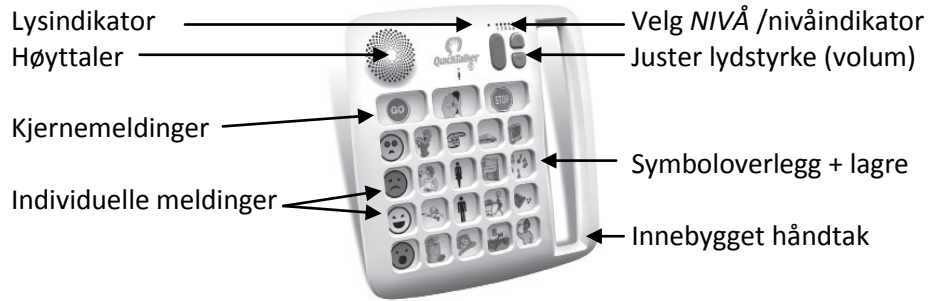

## 2. Sett i batteri og slå på enheten

På undersiden av enheten

Snu enheten opp ned



Skru av/på enheten

Sett inn 4 stk. AA batterier i batterirommet


## 3. Velg nivå

Øverst på enhetens forside

Nivåindikator

Velg NIVÅ (5 stk.)

Velg NIVÅ 1 – 5 ved å trykke på den røde knappen

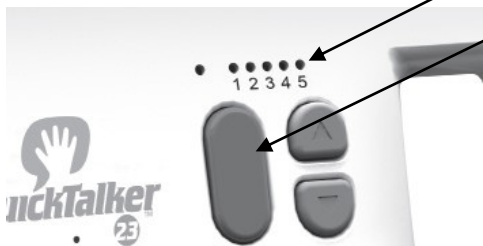

## 4. Opptak: Spill inn melding

### Gå i Opptak modus

Trykk og hold RECORD knappen bakpå enheten nede til det røde lyset slås på



### Spill inn meldinger

Trykk og hold et felt nede, tal inn meldingen når det piper og slipp så opp. Tips: Hold 15 - 20 cm avstand til mikrofonen.



### Gå ut av Opptak modus

Trykk og slipp RECORD knappen så slås lyset av. Merk: Enheten går automatisk ut av Opptak modus etter 20 sek. uten aktivitet.

## 5. Spill av melding

### Spill av en melding


ved å trykke på et felt



**Merk:** Ved å trykke på et annet felt stopper den aktive meldingen

### Juster volumet

Trykk på en av de grå knappene for å justere lydstyrken

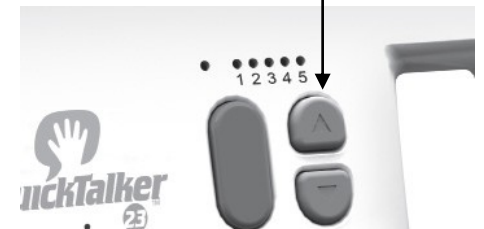

### Melding og lysfunksjon

Hvis en trykker på et felt vil opptakslyset blinke *gult* hvis det er tomt, og *rødt* hvis feltet har innspilt lyd.