



Invacare® **Sonnet Dual**



Norsk brukermanual

*Invacare EC-Høng AIS
Ident. no.: 913912
Version 02 09.2002*

Manual Invacare® Sonnet Dual

Sengebordet er utviklet for hjemmepleie og sykehus, og har flere funksjoner spesielt utviklet for disse brukergruppene.



Figur 1

Fold ut sideklappbordet ved å løfte hele platen opp og deretter senke den ned til horisontalt plan.

Fell sideklappbordet ned ved å løfte det opp og så la det gli ned mot bunnen. Se figur 1.

Høyden på sideklappbordet kan justeres både i oppfelt- og nedfelt posisjon. Justér høyden ved å samtidig trykke begge låsetappene opp. Låsetappene er plassert på fremsiden og baksiden. Når man slipper låsetappene låses sideklappbordet i sin nye posisjon. Se figur 2.



Figur 2

Skråstill sideklappbordet ved å trykke inn den nærmeste låsetappen og styr sideklappbordet nedover og oppover. Sideklappbordet fungerer nå utmerket som leseunderlag for bok og avis.

OBS! Husk å plassere sideklappbordet i horisontal posisjon før det felles ned.

Sengebordet kan plasseres på begge sider av sengen. For å bytte side; dra skuffen ut til den stopper, løft litt opp og dra helt ut. Trykk inn tappene på baksiden og løsne bakplaten. Se figur 3.



Figur 3

Løsne deretter midterste dør ved å skru ut det ene festet. Se figur 4.

Montér tilbake baksiden på motsatt side av sengebordet. Trepluggene øverst på baksiden må settes inn først. Trykk så trepluggene opp og plassér baksiden i rammen.

Sett tilbake festet til den midterste døren i sengebordets feste. Plassér så den midterste døren i det motsatte festet og senk døren til horisontalt plan. Ta bort det løse festet i dørplaten og sett tilbake skuffene.

Manual Invacare® Sonnet Dual



Figur 4

For å lettere komme til ved rengjøring, ta bort de to skuffene og sideklappbordet og vask sengebordet rent. Se figur 5.

Dra ut skuffen til den stopper, løft den opp og dra den ut. Løft ut innerskuffen. Sidedekkplaten er festet med låsefester. Løft sideplaten for å skru ut låsefestene på siden av sengebordet. Se figur 6.


Sett tilbake sideplaten og sett inn skuffene etter rengjøringen.



Figur 5

Ved rengjøring av sengebordet, bruk vanlig rengjøringsmiddel og svamp, klut, eller en myk børste. Vær nøye med å tørke det tørt etter avsluttet rengjøring. Bruk ikke rengjøringsmidler som acetone, løsemidler eller såpe som inneholder slipemidler.

Innerskuffene i plast kan håndvaskes eller vaskes i oppvaskmaskin. Unngå høytrykksspyling. De bevegelige delene i sengebordet behøver ikke smøring, men må holdes rene for å fungere tilfredsstillende.

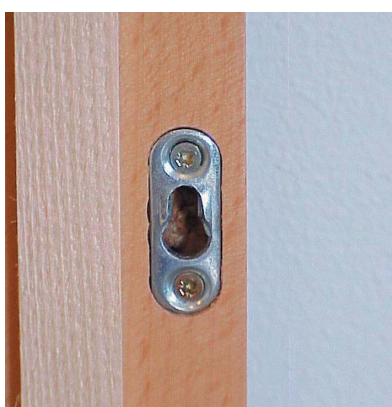

Figur 6

Invacare Sonnet Dual skal oppbevares i 10–80 % luftfuktighet og med romtemperatur på 0–50°. Rommet må være frostsikkert.

Under transport skal sengeklappbordet være felt ned og døren og skuffene være lukkede.



Customer Sales and Service

INVACARE A/S

Sdr. Ringvej 39
DK-2605 Brøndby
Phone: +45 36 90 00 00
Fax: +45 36 90 00 01

INVACARE N.V.

Autobaan 14
B-8210 Loppem, Brügge
Phone: +32 50 83 10 10
Fax: +32 50 83 10 11

INVACARE Poirier S.A.

Les Roches
F-37230 Fondettes
Phone: +33 2 47 62 64 66
Fax: +33 2 47 42 12 24

INVACARE AB

Fagerstagatan 9 / Box 66
S-163 91 Spånga
Phone: +46 8 761 70 90
Fax: +46 8 761 81 08

INVACARE B.V.

Celsiusstraat 46
NL-6716 BZ Ede
Phone: +31 318 69 5 757
Fax: +31 318 69 5 758

INVACARE S.R.L.

Via dei Pini 62
I-36016 Thiene (VI)
Phone: +39 0445 380059
Fax: +39 0445 380034

INVACARE AS

Grensesvingen 9
P.O. Box 6230 / Etterstad
N-0603 Oslo
Phone: +47 22 57 95 00
Fax: +47 22 57 95 01

INVACARE Deutschland GmbH

Dehmer Strasse 66
D-32549 Bad Oeynhausen
Phone: +49 57 31 754 0
Fax: +49 57 31 754 150

INVACARE LTD

South Road
Bridgend Industrial Estate
UK-Bridgend, CF31 3PY
Phone: +44 1 656 664 321
Fax: +44 1 656 667 532

Manufacturer:

INVACARE EC-Høng A/S

Østergade 3
DK-4270 Høng
Phone: +45 58 85 27 22
Fax: +45 58 85 43 86
www.invacare.com

