

KJØRERAMPE VR

Bruksanvisning

- Kontroller at ingen skader har oppstått på rampen under transporten. Den skal være enkel å slå opp/igjen.
- Les nøye igjennom bruksanvisningen og merkelappene som er påklistret før du bruker skinnene. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.
- På hver rampe finnes et merke som angir hvilken maksimal last den får belastes.
Maksimumslasten angis med dette tegnet:



- Merket angir også hvilken høyeste nivåforskjell rampen passer for. Vær forsiktig og bruk skinnene med omtanke.
Maksimumshøyden angis med dette tegnet:



- Slå opp rampen og plasser den med "leppen" hvilende stabilt på det øvre underlaget (se bilde). På undersiden av leppen er det påsatt sklisikring slik at rampen ikke sklir på underlaget. Vær likevel forsiktig ved anvendelse så ingen del av rullestolen hekter seg fast og drar med seg skinnene. Avstanden mellom skinnene bør tilpasses slik at rullestolens hjul kjør midt på skinnens bredde.
- Vær nøye med å holde i begge håndtakene når du bærer rampen.
- Skulle en skade oppstå på skinnene skal de ikke benyttes før skaden er reparert av en fagmann.

Vedlikehold og rengjøring

Rampen skal holdes fri fra smuss og snø slik at grepet på kjørebanelen opprettholdes. Skinnene kan rengjøres med alle normalt tilgjengelige rengjøringsmiddel. Høytrykksvask anbefales.

Demontering og kildesortering

Alt materialet på skinnene er 100% resirkulerbart. Demonter alle plastdetaljer fra skinnene og lever disse til gjenvinning av hardt plastmateriale. Aluminiumsdelene leveres som metallsrot.

