

Storm Thermobelte

Bruksanvisning

Storm Thermobelte er et oppladbart midjebelte som varmer korsryggen inntil 5 timer, alt ettersom batteriet belastes. Batteriet har en innebygd effektregulator i fremside.

Storm Thermobelte leveres med et Li-ion-batteri, samt en lader. Batteriet har 5 justerbare varmenivåer, 0 – 1 – 2 – 3 – 4. Du får det i størrelsene M/L – L/XL (75 – 110 cm - 100 – 125 cm). Batteriet er ferdig oppladet og klart til bruk. Du kobler batteriet til ledningspluggen, holder start-knappen på batteriet inne i 3 – 4 sekunder og et lys tennes på 100% effekt på batteriets front. Ønsker du lavere temperatur, så trykker du en gang til og lyset tennes nå på 75%, deretter 50% og 25%. Batteriet oppbevares med den tilkoblede ledningen i batterilommen. Denne har påsydd borrelås på baksiden og kan plasseres der du ønsker det. Alternativt plasserer du batteriet mellom huden og beltet, eller i bukselomme. Batteriet lades ved å sette laderen i en stikkontakt. Du kobler batteriet til laderens hannplugg. Lampene på batteriet vil nå blinke og lampen i laderen lyser rødt. Ettersom batteriet fylles opp, vil lysene slutte å blinke, og når batteriet er ferdig oppladet lyser alle lampene uten å blinke. Lampen i laderen lyser da grønt. Plasser beltet så nær huden som mulig, men bruk gjerne en tynn topp/T-skjorte mellom hud og belte. Når du føler for å vaske det, så tar du bort batteriet og håndvasker det på 30o. Ikke vri det, men la den drypptørre.



Storm Thermobelte

Varmer og Lindrer