


Bruksanvisning



LOW-UP

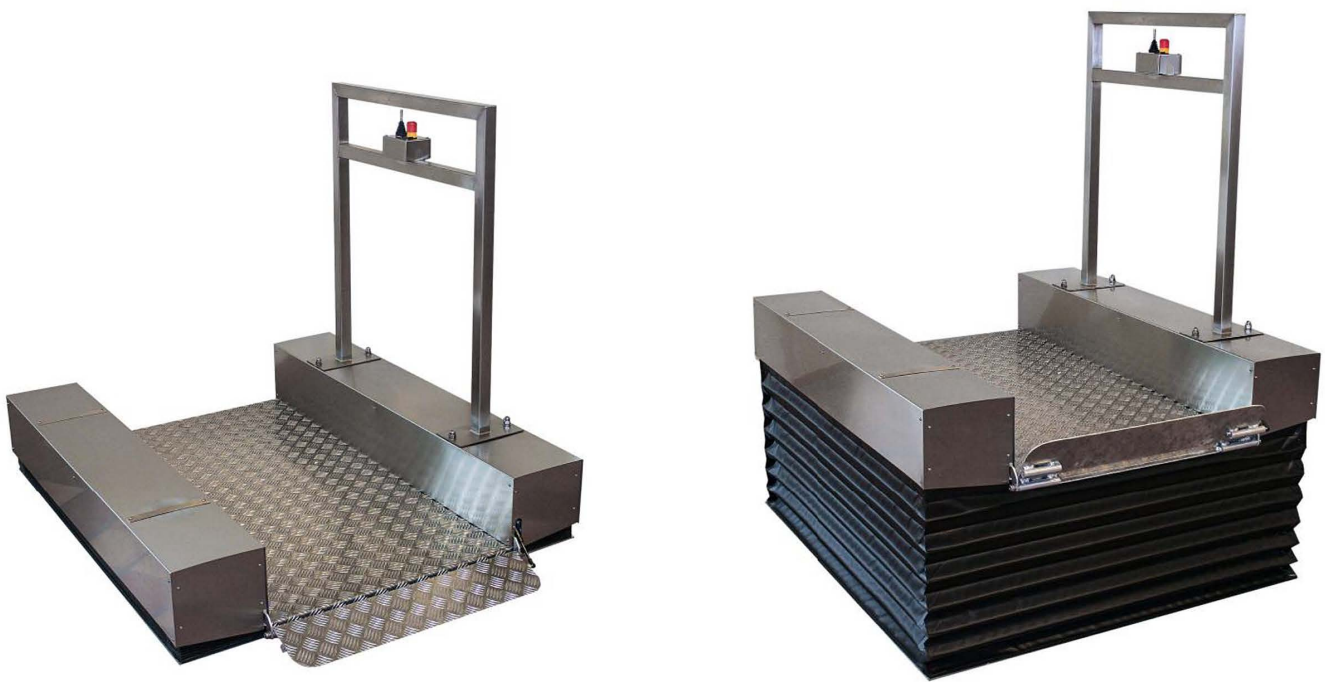

Low-Up

INNHOLDSFORTEGNELSE

Navn	Side
Beskrivelse av heisen.....	2
Risikoanalyse.....	2
Rampe.....	2
Joystick.....	2
Beskyttelsesbelg	3
Overbelastningsbeskyttelse.....	3
Vedlikehold og stell.....	4
Feilsøking.....	5
Demontering.....	5

Low-Up

Beskrivelse av løfteplattformen

Løfteplattformen er laget av korrosjonsbeskyttet materiale. Løftekapasitet er maks 250 kg og løftehøyden er begrenset til maks 500 mm. Heisen består av en bunnramme med dimensjonene 1320 x 1170 mm eller 1320 x 1370 mm avhengig av størrelse. På langsidene av denne rammen er det festet 2 elektrisk drevne løfteinnretninger - en på hver side. På toppen av denne ligger en plattform med dimensjoner lik bunnrammen der den øvre delen av løfteinnretningen er festet. For å la rullestoler eller lignende komme inn på plattformen er det en heve/senke rampe. Rampen legges ned når plattformen er i nedre posisjon og foldes opp til 45grader- regnet fra plattformen - denne manøveren starter umiddelbart når plattformen er hevet og er ferdig når plattformen er hevet ca. 70 mm. Når rampen har nådd sin øvre posisjon - 45 grader - låses den mekanisk inntil plattformen igjen når ca 70 mm over bakken.

Risikoanalyse under planlegging og montering

Det er nødvendig for hver installasjon å sørge for at heisen er plassert på en slik måte at det ikke kan oppstå personskade når personer passerer i nærheten av eller ved siden av heisen. Det må iverksettes egnede tiltak for å unngå personskade.

Rampe

For å beskytte mot klemfare ved nedsenking er rampen fjærbelastet.



Joystick

Langs den ene langsiden er det et rekkverk. Kontrollspakene er festet til denne skinnen. Plattformen styres av en joystick opp/ ned.

Nødstopp

På rekkverket er det også en knapp for nødstopp av heisen.



Side 2

Low-Up

Joysticken må være aktivert til enhver tid for at heisen skal bevege seg opp eller ned.



Overbelastningsbeskyttelse

Heisen er utstyrt med overbelastningsbeskyttelse. Hvis løfteplattformen er overbelastet, høres en summer og et rødt varsellys lyser, og heisen stopper.



Beskyttelsesbelg

For å beskytte mot klemskader forårsaket av løftemekanismen, er det montert en belg mellom bunnplaten og plattformen.



Low-Up

Vedlikehold og stell

Siden løfteplattformen i stor grad er laget i en korrosjonsbeskyttet utførelse, reduseres vedlikeholdet til et minimum.

Sjekk følgende regelmessig

- Belgen, at den er på plass og at den er hel og fri for sprekker.
Belgen skal ikke bare beskytte mot klemskader, den er også en beskyttelse mot vær og vind dersom heisen står ute. Belgen festes med borrelås og er lett å sette på plass igjen hvis den løsner
- Joystickens funksjon testes under drift og du lærer hvordan den fungerer.
- Sjekk at oppkjøringsrampen går opp til 45 grader eller mer, ellers stopper plattformen når den er mer enn 70mm over bakkenivå.
- Elektrisk tilkobling, hvis kabelen er synlig, inspisér den for skade på dens ytre kappe.
- Hold plattformen ren, ellers vil ikke antisklien fungere. Bruk rent vann til rengjøring. Om nødvendig kan håndvaskemiddel eller petroleumsbasert avfettingsmiddel brukes. Ikke bruk klorbaserte eller sterke alkaliske vaskemidler, de korroderer aluminiumet.
- En dråpe olje kan være nødvendig på innfestingen av rampen, en eller noen ganger i året, avhengig av om heisen er plassert innendørs eller utendørs.

Feilsøking

Hvis løfteplattformen ikke vil starte, sjekk følgende før du tilkaller servicepersonell.

- Kontroller at nødstopknappen ikke er trykket inn
- Er det strøm opp til løfteplattformen? Er bryteren på eller støpselet i stikkontakten.?
- At jordfeilbryteren ikke er utløst. Dersom den er utløst , prøv å tilbakestille den. Hvis det ikke fungerer - ring servicepersonell.
- Hvis løfteplattformen stopper etter en kort stund, kan dette skyldes at påkjøringsrampen ikke har gått i låst posisjon. Sjekk om rampen går tregt eller sitterfast på grunn av for lite olje i skjøtene. Smør leddene og test på nytt. Hvis det fortsatt ikke fungerer, ring servicepersonell.
- Hvis løfteplattformen ikke går helt ned, sjekk at ingenting sitter fast. Inspiser hele belgen!
- Hvis løfteplattformen går forbi sin øvre posisjon – ring servicepersonell.
- Hvis overbelastningsalarmen lyder og lampen lyser – ring servicepersonell.

Demontering

Det er et krav at heisen skal demonteres og eventuelt kasseres på en miljøvennlig måte, med hensyn til alle deler og komponenter som inngår i heisen.