

Flow2 stolheis

Enkel bruksanvisning



Dette er en forenklet bruksanvisning. Du må også lese den fullstendige bruksanvisningen, som inneholder viktige anbefalinger og instruksjoner.

Slå ned setet og ta plass

1



Slå ned setet.



Sitt ned.



Slå ned fotstøtten.



Fest sikkerhetsbeltet



Slå ned armlenene.

2 Betjening av stolheisen



Sett i joysticken.



Hold joysticken i kjøreretningen under hele turen.



Betjeningsmodul for ledsager (ekstrautstyr).

- Det er en kort forsinkelse etter at joysticken aktiveres før heisen beveger seg. Du vil høre et lydsignal som varsler at heisen skal til å bevege seg.
- Stolheisen stopper automatisk når den har kommet fram.
- Parker alltid stolheisen ved en ladekontakt. Det forhindrer at batteriene går tomme.
- Hvis du ikke parkerer stolheisen ved en ladekontakt, vil stolheisen gi fra seg et kontinuerlig lydsignal.


3 Reis deg og slå opp setet



Om ønskelig fjernes joysticken ved å skyve den forover.



Slå opp armlenene.

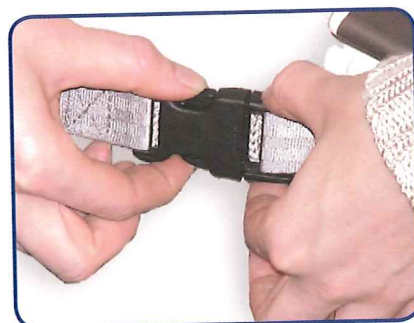

Løsne sikkerhetsbeltet.



Slå opp fotstøtten.



Reis deg.



Slå opp setet.

Bruk av svingsetet

4



Plassering av svinghåndtak.




Sving stolen ved å trekke opp håndtaket.



Lås svingsetet ved å skyve håndtaket hardt ned.

Bruk av tilkallings- og parkeringsmodulene

5

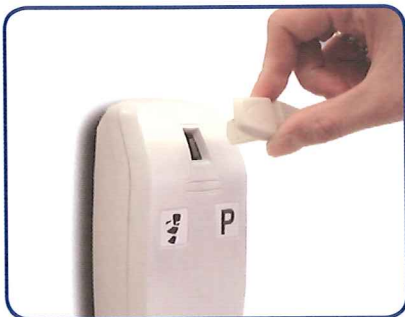

Sett i joysticken.



Tilkalling av stolheisen.




Parkering av stolheisen.

- Hold i joysticken under hele turen.
- Parker alltid stolheisen ved en ladekontakt.
- Hvis du har et automatisk svingsete (ekstrautstyr), vil setet automatisk snu seg i riktig retning før du setter deg ned eller sender det til en ladekontakt.

Hovedbryter

6

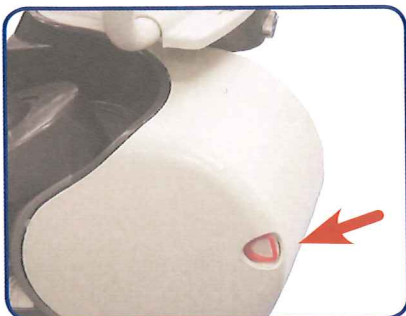

Skyv inn: Stolheisen er slått av.

Trekke ut: Stolheisen er slått på.



En tent lampe på kjøremodulens deksel indikerer at stolheisen er slått på.



Hvis det oppstår en feil, kan du la stolheisen kjøre ned ved å trekke ut hovedbryteren.

7

Signaler ved drift av stolheisen




Lampen på betjeningsmodulen gjengir stolheisens status.

Signal	Betydning
Konstant grønt lys.	Joysticken er aktivert og stolheisen beveger seg eller kommer til å bevege seg.
Konstant grønt lys + lydsignal fra motoren.	Etter at stolheisen har vært i drift, aktiveres heisen på nytt med en annen betjeningsmodul. Stolheisen vil starte bevegelsen innen 10 sekunder.
Blinkende grønt lys.	Batteriene i denne betjeningsmodulen er (nesten) flate og må skiftes.
Blinkende rødt lys + lydsignal fra motoren.	1. Stolheisen lades ikke. Kjør stolheisen til en ladekontakt. Eller: 2. Stolheisen har støtt på en hindring. Kjør stolheisen i motsatt vei av hindringen og fjern det som er i veien.
Konstant rødt lys.	Det er en feil ved stolheisen. Slå stolheisen av og på igjen. Hvis stolheisen fortsatt ikke virker, må du ta kontakt med leverandøren.

8

Skifte av batterier i betjeningsmodulen

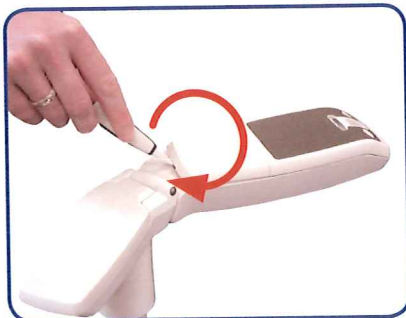

Fjern dekslet ved å sette joysticken i sporet under dekslet. Vri deretter en halv omdreining.



Bytt ut batteriene med reservebatteriene som ligger i det andre armlenet.



Sett på dekslet igjen.