

Bruksanvisning
Special Tomato Jogger

BANO LIFE

INNHold

Innledning	2
Om hjulene	3-4
Parkeringsbrems	5
Tilpasning av 5-punktssele	6
Regulering av rygg	7
Regulering av kjørebøyle	7
Ta av trekk / polster	8-9
Kalesje	10
Legge sammen / slå opp ST Jogger	11
Sprengskisse	12
Vedlikehold	13

Innledning

Gratulerer med din nye ST Jogger vogn.

Før du tar vognen i bruk er det viktig at du leser bruksanvisningen og setter deg inn i hvordan vognen fungerer.

Advarsel!

- Kun et barn skal sitte i ST Jogger
- Ikke la barnet sitte i vognen uten tilsyn
- Ikke heng vesker på kjørebøylen, dette kan gå utover stabiliteten på vognen
- Bruk alltid 5- punktsselen
- Bruk alltid sikkerhets stroppen rundt ditt eget håndledd
- Kontroller alltid at parkeringsbremsen er satt i lås før du forlater vognen

ST Jogger videre forhandles av Bano Life AS i Norge

ST Jogger produseres i USA og har en autorisert representant som har ansvaret for Europa lokalisert i Danmark.



T | 315 429 8407


F | 315 429 8862

© 2014 Bergeron By Design

The information contained herein is subject to change without notice.
Bergeron By Design shall not be liable for technical errors or omissions herein.

Om hjulene

Forhjul

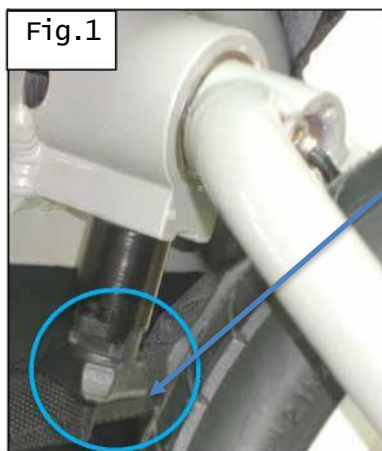

Figur 1:
Bak forhjulet sitter det en låsetapp for låsing av forhjul.
Trek ut låsetappen og roter for å låse / ikke låse hjulet.
Figur 1 viser posisjonen når hjulet ikke er låset.



Figur 2:
Slik skal låsetappen stå når hjulet er låst.

Bakhjul



Figur 3:

Bakhjulene kan tas av. Dytt spaken noe ut og dra av hjulet.



Figur 4:


Når du skal sette på hjulet igjen, skyver du akselen på hjulet inn i hullet i rammen, dytt spaken noe ut og skyv hjulet inn til du hører et klikk – da er hjulet på plass.

Parkeringsbrems

Press ned for å låse bremsen (1).

Se at bremsestangen er plassert i låsespor (2).

Løft opp for å løsne bremsen (3).

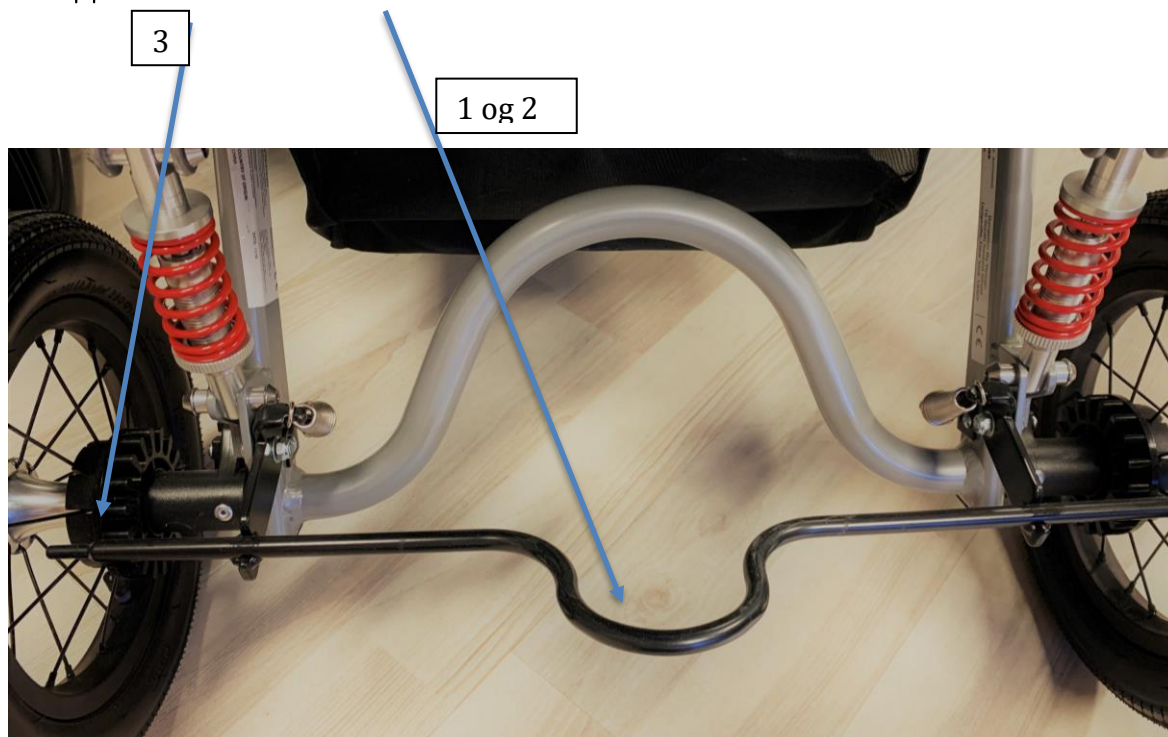

Tilpasning av 5 punkts-sele

Tilpasning av seler



Skulderpolstrene plasseres over spennene.

Brystspennen skal være i høyde med brystvortene.

Disse polstrene plasseres over hoftekammen.

Hoftebeltet har en quick-release spenne som løser ut begge sider av hoftebeltet samtidig.

Tilpass lengden på skrittstroppen slik at hoftebeltet blir liggende over bekkenet.



Hoftebeltet har cam lock som sørger for at innstilt lengde på stroppen ikke forandres.


Regulering av rygg



Juster ryggvinkelen ved å tilpasse lengden på stroppen bak på ryggen.

Regulering av kjørebøyle

Løsne hendelen på Hver side, reguler til ønsket høyde, lås deretter hendelen.

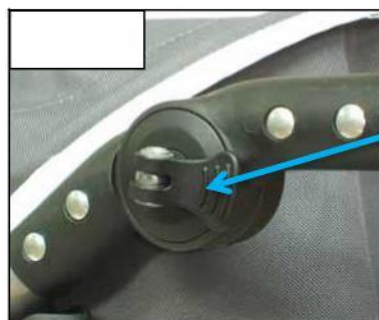


Løsne hendelen på hver side, reguler til ønsket høyde, lås deretter hendelen.




Ta av trekk / polster

Trekket/polsteret kan tas av og vaskes i maskin – se vaskeinstruks.

Figur 6 og 7: Bruk stjernetrekker for å skru ut skruene.

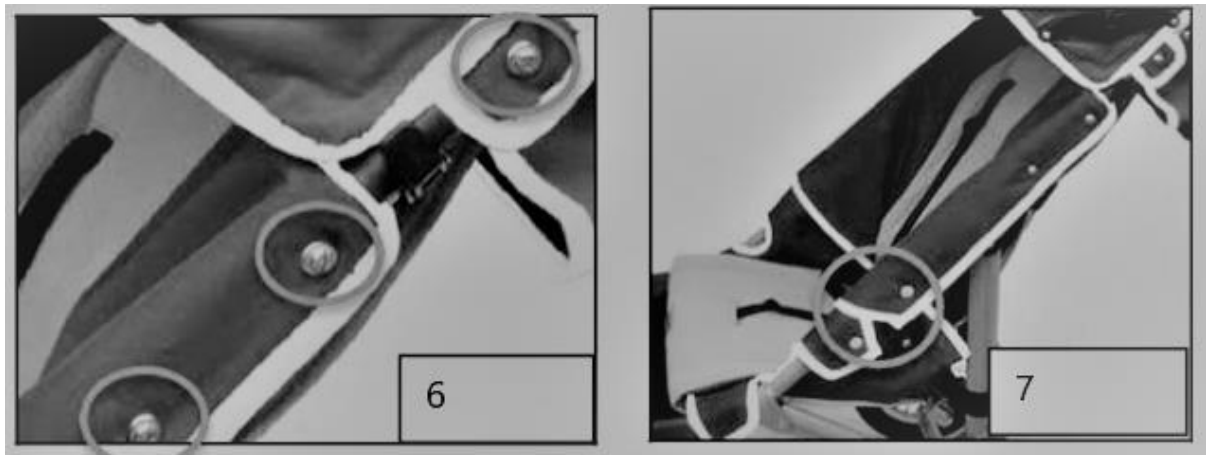

Figur 8: Løsne stroppen nede på baksiden av rammen på begge sider. Beltelåsen sitter midt på stroppen bak ryggen.

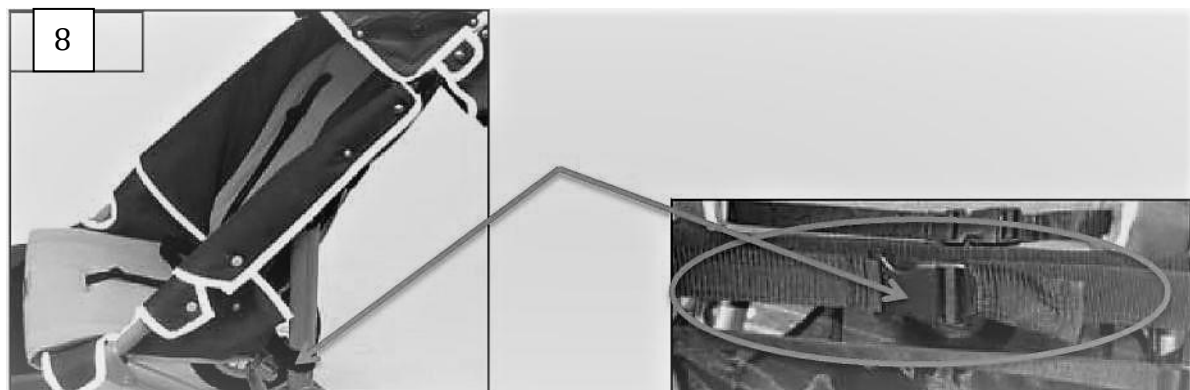

Ta av trekk / polster forts.




Figur 9: Løsne stroppen som går under fotbrettet.




Figur 10 – OBS!! Treplaten i ryggen må tas ut før vask av trekket. Øverst på ryggen er det glidelås som må åpnes for å få platen ut.


Kalesje

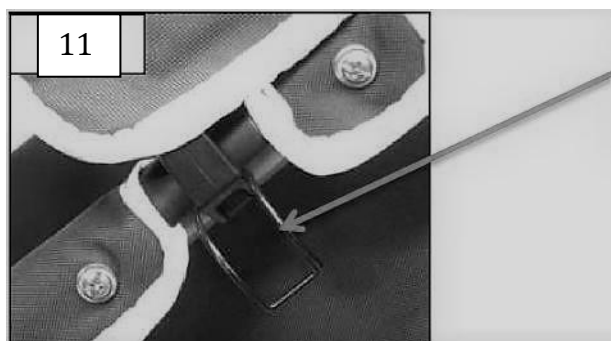

Figur 11: For å ta av kalesjen skal du løsne spennene på hver side der kalesjen sitter festet.

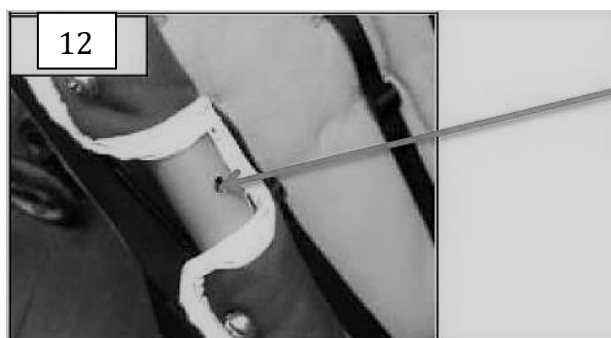


Figur 12: Når du skal montere kalesjene skal du passe på at plast tappene på innsiden av kalesjefestene passer inn i hullene på rammen.

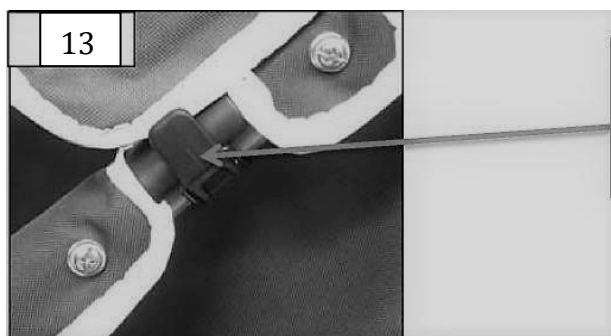

Figur 13: Tre kroken på kalesjefestene inn på Baksiden av festet og lås ved å presse hendelen fast mot rammen. **Ikke bruk makt!**

Legge sammen / slå opp ST Jogger

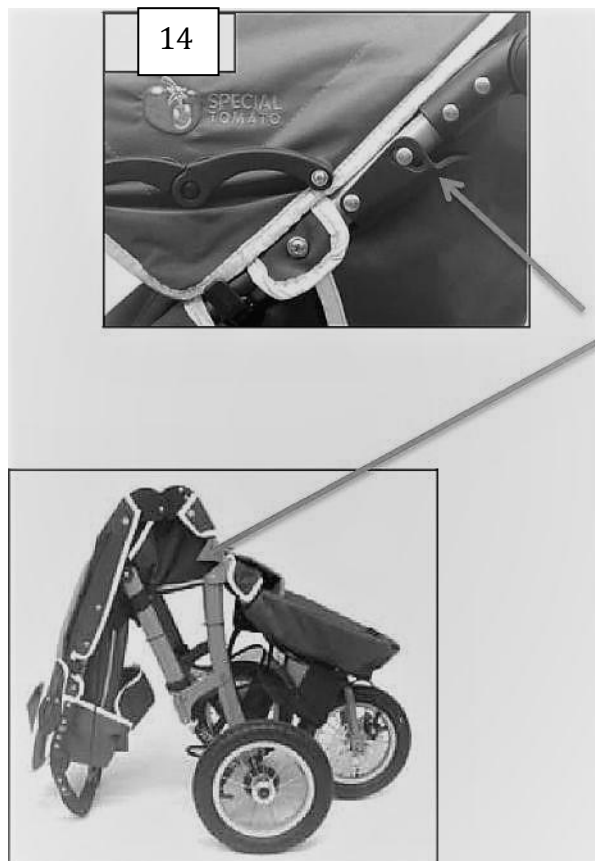

Figur 14: Press inn samtidig foldemekanismen på begge sider, fold vognen bakover og rett på svinghjulet for å få den flat.

Sprengskisse



Nr	Beskrivelse	Art.nr
1	Kalesje	RP62310000
2	Sele-/vest	RP77320109
3	Fleeceinnlegg	RP62300000
4	Sikkerhetssnor	RP72300001
5	Hodestøtte	62020000
6	Ramme	RP62360000
7	Kurv	62010000
8	Forhjulsoppheng	RP62330000
9	Framhjul 12"	RP62320000
10	Bakhjul 12"	RP62340000
11	Fotkasse	RP62350000
12	Vogntrekk	RP62370000
13	Regntrekk	5632-700

Vedlikehold

Følg anvisningene under og vognen din vil ha en lenger levetid.

- Kontroll hjulene før hver tur, se til at svinghjul fungerer på optimal måte.
- Kontroller ledsagerbrems samt parkeringsbrems før hver tur.
- Kontroller at seler-/vest fungerer optimalt og at låser fungerer som de skal.
- Tilbehør må brukes på forsvarlig måte

Materialer

Polster og trekk: Polyester, Polyurethane

Ramme: Aluminium, stål, plastikk

Vaskeinstruksjoner



IKKE BRUK TØYMYKNER



IKKE BRUK BLEKNINGSMIDDEL



SKAL IKKE STRYKES



SKAL IKKE RENSES

- Trekken kan vaskes på 30°. ikke bruk tørketrommel, trekkene skal lufttørkes.
- Ikke bruk løsemiddel. Bruk klut med vann og nøytral såpe. La det lufttørke.



BANO LIFE

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus
post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60

banolife.no