

# 3-hjuls XC piggestol



## BRUKERVEILEDNING

CE-merket og TÜV testet og godkjent i henhold til EN 12182:2012

3-hjuls XC piggestol

Versjon 1.02

01/06-2016

HandiNor as  
Rosenholmveien 22, N-1252 Oslo  
Tlf.: +47 63 88 72 40  
[www.handinor.no](http://www.handinor.no)

## 3-hjuls XC piggestol

Art.nr: \_\_\_\_\_

Serienr: \_\_\_\_\_

Dato: \_\_\_\_\_

Maks brukervekt: 110kg



HandiNor AS  
Rosenholmveien 22  
NO-1252 Oslo, Norway

**HandiNor** 



## Innledning

**3-hjuls XC piggestol** leveres ferdig montert fra leverandør, med unntak av drivhjulene

Piggestolen er beregnet for pigging med skistaver på asfalterte veier/områder. Den leveres standard med 28" drivhjul med hurtigkobling, 20" forhjul med hurtigkobling, oppvippbart styre, setepute, hoftereim, håndbrems, parkeringsbrems, høydejusterbar fotbøyle, skistaver med asfaltpigge og pro fit hemper for godt grep.

På grusveier anbefales å benytte 26" drivhjul med semislics (tilbehør).

Piggestolen er beregnet for ungdom og voksne.

For å få optimal utnyttelse av piggestolen, er det viktig å få den tilpasset korrekt i forhold til hver enkelt bruker.

Det er viktig å kjenne til piggestolens innstillingsmuligheter.

Les denne brukerveiledningen før piggestolen tas i bruk.

## Sikkerhet

- Advarsel!** Før du bruker 3-hjuls XC piggestolen må du forsikre deg om at stolen er i forsvarlig stand.  
Sjekk at alle skruer/muttere sitter godt fast og at setebeltet fungerer forsvarlig og ikke har rifter eller skade på spennen.  
Sjekk lufttrykket i alle 3 hjul. Fyll luft om nødvendig.  
Sjekk at bremsewire sitter godt og at bremsen fungerer.
- Advarsel!** Sjekk at asfaltpiggene på stavene er intakt.
- Advarsel!** Bruk alltid hjelm!
- Advarsel!** Kjør forsiktig i nedoverbakker, slik at du har kontroll på stolen.
- Advarsel!** Overflaten på piggestolen kan blir varm grunnet sollys, men du vil aldri kunne brenne deg.
- Advarsel!** Stolen er i standard utgave testet for maks brukervekt på 110 kg.

## Tekniske spesifikasjoner

|   | 3-hjuls XC piggestol | 3-hjuls XC piggestol | 3-hjuls XC piggestol | 3-hjuls XC piggestol |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Størrelse                               | 1                    | 2                    | 3                    | 4                    |
| Artikkelnummer                          | 500070-36            | 500070-38            | 500070-40            | 500070-42            |
| Egenvekt                                | 13,3 kg              | 13,4 kg              | 13,4 kg              | 13,5 kg              |
| Setebredde                              | 36 cm                | 38 cm                | 40 cm                | 42 cm                |
| Setedybde                               | 45 cm                | 45 cm                | 45 cm                | 45 cm                |
| Rygg høyde                              | 25 cm                | 25 cm                | 25 cm                | 25 cm                |
| Materiale hovedramme                    | Aluminium            | Aluminium            | Aluminium            | Aluminium            |
| Materiale sete-/ryggtrekk inkl. polster | Nylonstoff           | Nylonstoff           | Nylonstoff           | Nylonstoff           |
| Maks brukervekt                         | 110 kg               | 110 kg               | 110 kg               | 110 kg               |
| Estimert levetid                        | 3 år                 |                      |                      |                      |

## Montering av drivhjul

Før piggestolen kan tas i bruk må drivhjulene monteres.

Trykk inn hurtigkoblingen som sitter i midten på drivhjulet, og skyv hurtigkoblingen inn i hjulhylsen på piggestolen.

**VIKTIG!** Husk å sjekke at hjulene sitter fast. Forsøk å trekke hjulet ut ved å holde rundt hjulnavet, uten å trykke på hurtigkoblingsakslingen.



## Demontering av drivhjul

Trykk inn hurtigkoblingsbolten som sitter i midten på drivhjulet, og trekk hjulet ut.



## Demontering av forhjul

Forhjul kan demontering ved å løsne på spaken på forhjulet, skru det rundt og løfte ut forhjulet. Husk at parkeringsbremsen må være frikoblet.

**NB! SJEKK AT FORHJUL ER RIKTIG OG SIKKERT FESTET FØR PIGGESTOLEN TAS I BRUK!**



## Fastspenning og innstillinger

### Oppvippbart styre

Piggestolen leveres med oppvippbart styre som forenkler forflytningen inn og ut av piggestolen.




### Fastspenning i sete

Hoftereimen med fix-lock spenne festes. Dra godt til for å sitte godt fast i piggestolen.



### Innstilling av benlengde

Viktig at du finner riktig sittestilling og riktig lengde for bena ned til fotbøylen. Ved hjelp av en 6 mm umbraconøkkel løsnes rørklemmene og fotbøyle kan heves/senkes til ønsket høyde. Husk å skru godt fast rørklemmene igjen.

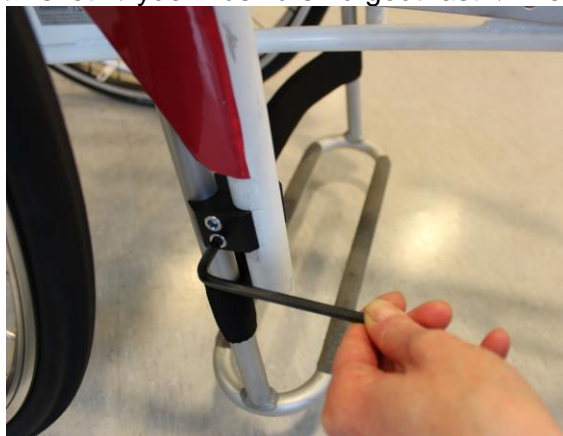

## Styrekorrigering

Piggestolen leveres med styrekorrigering som hjelper piggestolen å være retningsstabil, uansett dosering på veien.

Styrekorrigeringsspaken leveres fra leverandør i midtstilt posisjon. Ved å skyve spaken oppover / nedover endres vinkel på forhjulet.



## Håndbrems

Piggestolen er utstyrt med håndbrems påmontert styret.


Bremsen fungerer ved at man trekker bremsehendelen opp.



## Parkeringsbrems

Piggestolen leveres standard med parkeringsbrems påmontert forhjulet.

Når piggestolen står i ro, presses spaken på parkeringsbremsen nedover for å låse. For å frigjøre parkeringsbremsen trekkes spaken opp.

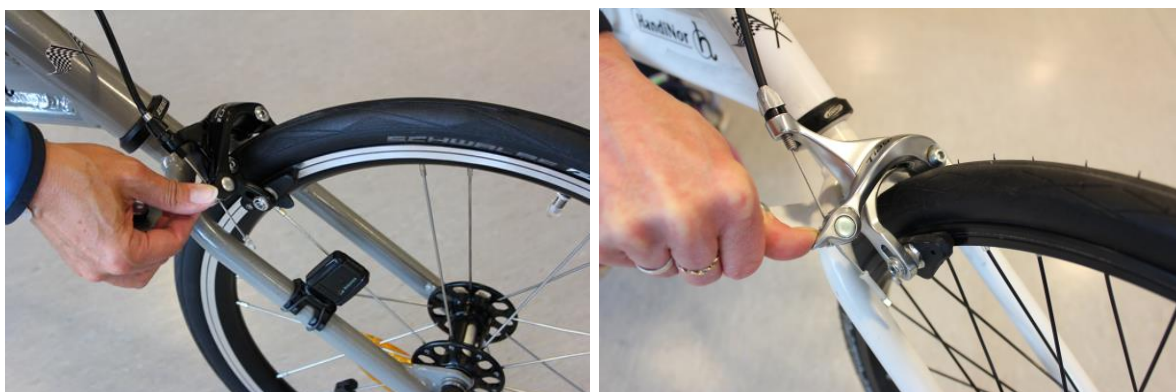

## Tilbehør

Som tilbehør leveres bl.a. 26" drivhjul med semislics (for pigging på grusveier), forhøyet oppvippbart styre, forlenget oppvippbart styre og magebelte.

**VIKTIG! PIGGESTOLEN KAN OGSÅ LAGES ETTER INDIVIDUELLE MÅL OG BEHOV.**

## Transport

Ved å ta av drivhjulene, og evt. forhjulet, kan piggestolen enkelt fraktes i bil.

## Vedlikehold

Før hver tur:

- Sjekk lufttrykk i alle tre hjul, etterfyll luft om nødvendig.
- Sjekk at alle skruepunkter sitter godt, etterstram om nødvendig.
- Sjekk at det ikke er slakk i bremsewire og at bremsen fungerer.

Jevnlig:

- Rengjør piggestolen med såpe og vann. Se også vaskeanvisning.
- Etterstram sete-/ryggtrekk om nødvendig.

## Service

Service skal kun utføres av kvalifisert personell.

Det skal kun brukes originale reservedeler, levert av produsent, eller en av produsentens godkjente leverandører.