

AudioKonf Konferanseromsystem

KonfMic mikrofoner HMS-nr.: 233375

KonfMixer lydprocessor HMS-nr.: 233373



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	3
AudioKonf Systemskisse	3
KonfMixer forsterker	3
3. Komme i gang	4
KonfMic mikrofoner	4
KonfMixer lydprosessor	4
Annet lydoverføringsssystem	4
Ekstern lydkilde	4
4. Daglig bruk	5
Lading	5
5. Avansert bruk	5
Lydbildet	5
Lydutgang	5
Mikrofonfølsomhet	5
Lydingang nivå	5
6. Viktig informasjon	5
7. Resirkulering	5
8. Tekniske data	6
9. Tilbehør	6
10. Feilsøking	7

1. Innledning

Konferansesystemet AudioKonf er spesielt utviklet for å hjelpe hørselshemmede i møteromsituasjoner uten å bryde andre møtedeltakerne. Systemet er enkelt i bruk og virker ikke sjenerende.

KonfMic bordmikrofoner er følsomme for tale og har liten mekanisk kobling til bordflaten. Opp til 3 KonfMic kan kobles i lenke, og KonfMix-forsterkeren har to innganger slik at opp til 6 KonfMic kan brukes samtidig. KonfMic settes ut på konferansebordet i det antallet man mener er nødvendig, og kobles til KonfMixer forsterkeren.

KonfMixer har 2 lydutganger der det kan tilkobles halsslynge og hodetelefon. Lydnivået justeres med volumkontrollen på KonfMix.


Alternativt kan sendere og streamere tilkobles, slik at lyden kommer rett til brukerens høreapparat.

2. Oversikt


AudioKonf Systemskisse




KonfMixer forsterker

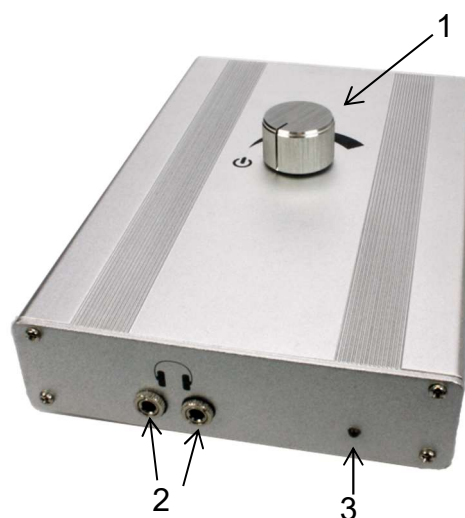

Figur 1 KonfMixer mot bruker

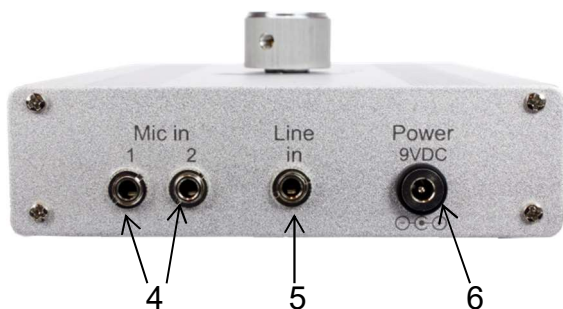

Figur 2 KonfMixer toppside

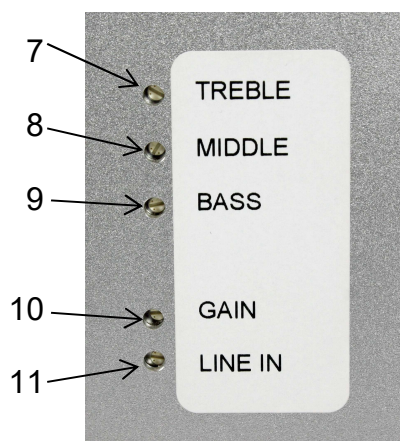

Figur 3 KonfMixer underside

1. På/Av-bryter m/ volumkontroll
2. Lydutganger
3. Indikator lys
Rød = lader
Grønt = på
Oransje = på og lader
4. Mikrofontilkoblinger
5. Inngang for ekstern lydkilde
6. Ladekontakt
7. Tonekontroll diskant
8. Tonekontroll mellomtone
9. Tonekontroll bass
10. Mikrofonfølsomhet
11. Nivå på lydinnang (5)

3. Komme i gang

KonfMic mikrofoner

Mikrofonene har tilkoblingsledningen praktisk snurret opp på undersiden.

Mikrofonen(e) plasseres ut på konferansebordet og kobles sammen. Opp til 3 i lenke.

Mikrofonkabelen tilkobles KonfMixer (4).

KonfMixer lydprosessor

KonfMixer er oppladbar, og den bør lades fullt før første gangs bruk. Se kapittel Lading. Den kan selvsagt også brukes med laderen tilkoblet.

Koble til hodetelefoner eller halsslynge, eller annet lydoverføringssystem, til "lydutgang" kontaktene (2).

Annet lydoverføringssystem

Koble lydoverføringssystemet som skal benyttes i KonfMixer lydutgang med 3,5mm jack plugg i (2).

Ekstern lydkilde

En ekstern lydkilde kan kobles til i kontakten "Line in" (5).

4. Daglig bruk

Koble til mikrofoner og halsslynge/hodetelefon i (2). (Eller et annet lydoverføringssystem.)

Slå på KonfMixer med ved å vri volumkontrollen (1) med klokken. Juster til passende lydnivå.

Lading

Koble den medfølgende laderen i ladekontakten på KonfMixer (6) og sette laderen i kontakten. Indikatoren (3) lyser rødt under lading og slukker når KonfMixer er ferdig ladet.

Indikatoren (3) vil lyse oransje hvis den brukes samtidig med lading.

5. Avansert bruk

Lydbildet

Lydprosessoren i KonfMixer har fabrikkinnstilling som bør passe ved første gangs bruk.

KonfMixer har en 3-bånds equalizer som kan justeres til å passe den individuelle brukeren. Justeringene er tilgjengelige på undersiden av KonfMixer (7), (8) og (9). Bruk en liten skrutrekker når du justerer.

Lydutgang

Lydutgangene (2) styres via volumkontrollen. Hvis det benyttes et lydoverføringssystem med lyd til høreapparat, må volumet på KonfMixer justeres slik at det passer med inngangsnivået på tilkoblet utstyr.

Mikrofonfølsomhet

Mikrofonfølsomheten (10) er fabrikkinnstilt og skal normalt ikke endres.

Lydinngang nivå

Nivået på lydinngangen er fabrikkinnstilt og skal normalt ikke endres. Hvis lydkilden er spesielt svak eller sterk, kan nivået innjusteres med (11).

6. Viktig informasjon

Det er ikke anbefalt å koble AudioKonf til et lydutfjenningsanlegg, da dette lett vil medføre "feedback" og hyling i høyttalerne.

7. Resirkulering

AudioKonf-produktene skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter. Riktig håndtert vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

8. Tekniske data

Frekvensområde:	100 – 12000 Hz
Bruksområde:	Innendørs
Driftsspenning:	9VDC
Brukstid på batteri:	10t
Ladetid fra tomt:	6t
Lydutgang:	0dB linje; 0,775V _{rms} nominelt
KonfMix	
Vekt	480g
Dim (HxBxD):	50x110x170 mm

9. Tilbehør



Hodetelefon/headset

Varenr. 1239
HmsNr: 160840
ProdNr: BE9122



Hals Slyng

Varenr. 1244
HmsNr: 160838
ProdNr: BE9159

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Ingen lyd og ikke grønt lys i "Indikator LED".	Batteriet er tomt.	Koble til strømforsyningen og se at Indikator LED lyser,
Ingen lyd i høyttaleren, men grønt lys..	Lydnivået står for lavt	Skru opp lyden med volumkontrollen.
Det lyser ikke rødt i når strømforsyningen er tilkoblet.	Lading er ferdig hvis lampen ikke lyser.	Alt er normalt.
	Strømforsyningen virker ikke.	Kontakt assistanse/service.
Dårlig/ingen lyd i lydutstyr tilkoblet lydutgangen.	Utgangsnivået er stilt for lavt eller høyt.	Juster nivået med volumkontrollen.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

