



Varslingshjelpemidler

P135AB – Fallvarsler med radiosender

P135E – Trådløs trygghetsalarm

Bruks- og Monteringsanvisning



Revisjoner

Når det gjøres endringer i dokumentasjonen vil denne bli datert og gitt en kort beskrivelse. Oversikten nedenfor lister opp dette.

Revisjonsoversikt

Dato	Navn	Beskrivelse
02.02.17	Bent-Håvard Sollid	Første versjon.

Innhold – PRODUKT

1	Innledning	3
2	Bruksanvisning	3
2.1	Slå på	3
2.2	Slå av	3
2.3	Plassering	3
2.4	Varsling av fall	3
2.5	Trygghetsalarm	4
2.6	Deaktivere utløst alarm.....	4
3	Monteringsanvisning	4
3.1	Oppstart og testing	4
3.2	Test av funksjon.....	4
3.3	Test av rekkevidde.....	4
3.4	Lavt batteri.....	4
4	Vedlikehold	4
4.1	Renhold.....	4
4.2	Batteribytte	4
5	Feilmeldinger	5
6	Teknisk informasjon	5
7	CE-merking	5

1 Innledning

Denne monteringsanvisningen er laget for produktene P135AB fallvarsler med radiosender og P135E trådløs trygghetsalarm som Picomed forhandler som et varslingshjelpemiddel. Dette er en fleksibel liten enhet som kan sende alarm til andre enheter fra samme leverandør.

- P135AB kan varsle fall, panikk, vandring og nedkjøling.
- P135E leveres med armbånd og er hovedsakelig ment som trygghetsalarm/påkallingsbryter.

Utstyret er vanligvis ferdig programmert når det sendes ut.

2 Bruksanvisning

2.1 Slå på

For å unngå at P135 aktiveres under transport blir den sendt ut med transportsikring aktivert. For å slå av transportsikringen: trykk og hold den oransje knappen til du får kvitteringstone. Etter batteribytte må en gjøre dette på nytt.

2.2 Slå av

For å slå av, deaktivere eller sette P135 tilbake i sovende modus brukes magneten som følger med. Dra magneten på venstre side av dekselet slik at en får et lite kvitteringsblink i alarm lampen. Nå er P135 deaktivert og den må aktiveres før den kan benyttes på vanlig måte igjen.



2.3 Plassering

P135AB er ment å henge rundt halsen eller klipses til klær med sikkerhetsnålen på et sted som gjør at den detekterer fall. Belte eller bukselinning er et anbefalt sted å feste den. Dette gir erfaringsmessig god deteksjon av fall og få feilvarslinger.



OBS: monteres loddrett. Når den blir liggende vannrett registreres dette som fall.

Sitter en ofte lent forover i stol anbefales det å feste den til overkroppen i stedet. Dette vil også gjøre det lettere å trykke på alarmknappen ved behov.

P135E er utstyrt med halssnor og armbånd slik at den kan bæres på håndleddet. Den kan som P135AB også klipses til klær med sikkerhetsnål.

2.4 Varsling av fall

Når P135A blir liggende horisontalt vil den etter 15 sekunder gi varsel til brukeren om dette med pipetoner. Varselet varer i 15 sekunder slik at man får anledning til å reise seg før alarmen videresendes. Etter at disse totalt 30 sekundene er over vil det gå alarm til en radiomottaker. P135 slutter å pipe mens lyset på den fortsetter å blinke for å indikere utløst alarm.

2.5 Trygghetsalarm

Fallvarsleren kan også brukes til trygghetsalarm ved at oransje knapp holdes inne i 2 sekunder til man får kvitteringstone. Da sender den alarm til en radiomottaker. Lyset på P135 blinker for å indikere utløst alarm.

2.6 Deaktivere utløst alarm

Dersom en alarm er aktiv (blinkende lys) kan en trykke og holde oransje knapp i 1 sekund, det vil da komme et dobbelt pip, alarmen deaktiveres og lyset stopper å blinke.

3 Monteringsanvisning

3.1 Oppstart og testing

P135 leveres ferdig programmert opp mot mottaker. Det er normalt ikke behov for parring mot de andre enhetene som leveres i settet. Se egne kapitler for å slå på og plassere enheten.

3.2 Test av funksjon

Hvis en vil teste funksjon gjøres dette med et kort trykk på alarmknappen. En må trykke kortere enn 1 sekund slik at den ikke begynner å pipe. Den sjekker batteriet og blinker med lyset samtidig som den sender signal til mottakeren. Mottaker viser det navnet som er programmert opp mot senderen.

- Dersom batteriet fungerer men bør byttes vil mottakeren vise «Batt-Low» (eventuelt koden FAULT30).
- Like før batteriet er tomt vil tekst endres til «Batt-End» (eventuelt koden FAULT31).
- Dersom det ikke kommer noen lysblink er batteriet tomt.

3.3 Test av rekkevidde

Utfør test av funksjon med senderen plassert i de rom som er lengst vekk fra mottakeren i huset for å teste rekkevidden.

3.4 Lavt batteri

Ved behov for å bytte batteri vil P135 vise dette ved å gi et rolig røde blink ca. hvert 8 sekund. Den vil dessuten sende beskjed om lavt batteri til radiomottageren. Bytte av batteri er omtalt i eget kapittel.


4 Vedlikehold

4.1 Renhold

Ved behov kan P135 rengjøres med en klut fuktet med mildt såpevann. Unngå å senke den ned i noen form for væske.

4.2 Batteribytte

Boksen åpnes ved å skru ut 4 skruer av typen Philips størrelse 0. Når den er åpnet tar en ut batteriet ved å bruke et lite flatt skrujern for å løsne de ut av holderen med. Vær obs på polaritet: «+» tegnet skal være synlig når en setter inn nytt batteri.

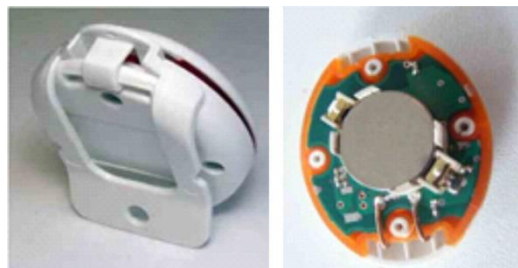

Ved montering må en passe på at topp og bunndel monteres riktig sammen og at pakningen ikke skades. Etter batteribytte aktiveres P135 ved å trykke & holde inne den røde knappen i 1 sekund til en hører et pip.

5 Feilmeldinger

Se kapittel 3.2.

6 Teknisk informasjon

Type	P135AB - Fallvarsler med radiosender P135E - Trådløs trygghetsalarm
Betjening	Knapp for trygghetsalarm. Innebygd fall- og temperatursensor.
Batteri	Litium knappecelle, 3 V, type CR2032.
Utganger	Ingen tilkoblinger. Varsler med radiosignaler til annen mottaker.
Mål	55 x 45 x 20 mm.
Vekt	25 g.

7 CE-merking

Produktet er underlagt lovgivning i EU og gjennom EØS-avtalen.

Produktet er i henhold til EØS/EU direktivene 2011/65 og 2014/53 med tilhørende Norske forskrifter CE-merket. Den tilhørende samsvarserklæringen er i engelsk utførelse og er tilgjengelig hos leverandør.

