

Lommy Personal Brukerveiledning



Gratulerer med din nye Lommy Personal.

Denne brukerveiledning gir deg en kort introduksjon i Lommy Personals mange funksjoner.

Lommy Personal overblikk



1. Lystårn viser status under oppladning



2. Lysindikator viser Lommy'ens status



3. Rød alarmknap med signal til en forprogrammert mottager




4. Mikrofon



5. USB-stikk til oppladning



6. Høyttaler

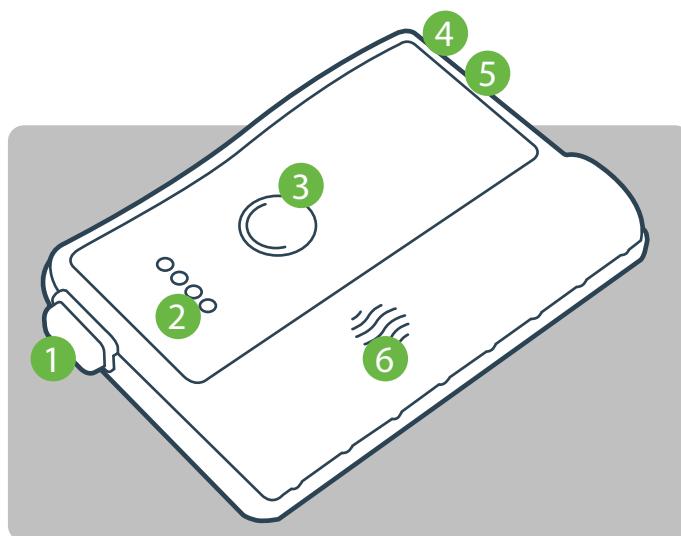

Cantec AS

Postadresse:
Postboks 626, 1411 Kolbotn
Besøksadresse:
Sofiemyrveien 2, 1412 Sofiemyr

Tlf: 66 99 60 00

bestilling@cantec.no
www.cantec.no

Slik kommer du i gang

Når du mottar Lommy'en er den slukket. Koble til laderen og vent til oppladningen er ferdig og Lommy'en lyser konstant grønt i toppen. Lommy'en er nå tændt og klar til bruk. Når laderen fjernes, kan den første utprøvingen gjøres.

Utfør utprøvingen som beskrevet under avsnittet "Utprøving"

Oppladning



Hver dag skal du sette Lommy'en til ladning inntil batteriet er fullt opladet, og Lommy'en lyser konstant grønt i toppen. Ved lavt batterinivå høres setningen "Battery low" fra Lommy'ens høyttaler.

Vanligvis holder oppladningen 12-14 timer. Er batteriet ikke fullt opladet når laderen fjernes, vil Lommy'en gi en advarsel, men kan naturligvis benyttes.

Under oppladning lyser batteriindikatoren på toppen av Lommy'en konstant og viser:

Rød lys	Gul lys	Grønt lys
Lav batteristand	Middel batteristand	Fullt opladet

Oppsett og overvåkning av Lommy Personal via din computer eller bærbare enhet



Du har mulighet for å sette opp og endre funksjoner på www.care4all.dk. Brukernavn og adgangskode er det 10-sifrede serienummer som finnes på baksiden av Lommy'en.

- Endre/legge til alarmmottakere
- Dødmannsalarm (alarm hvis det ikke jevnlig trykkes på den røde knappen)
- Bevegelses- eller fallsensoralarm
- Rapportintervall fra enheten (hvor ofte position sendes)
- Oppsett av telefonnumre hvor "røret" automatisk løftes av når Lommy'en ringes
- Oppsett av geofence (elektronisk gjerde)
- Tenn/slukk når lader tilkobles)

Når du er logget inn på hjemmesiden kan du overvåke Lommy'ens nåværende posisjon, både som posisjon og som visning på kart.

Har du spørsmål til de enkelte funksjonaliteter er du velkommen til å besøke ww.care4all.dk, eller kontakte support hos Cantec AS på telefon 66 99 60 00

Utprøving

For å sikre at Lommy'en reagerer som forventet ved alarm, aktiveres alarmer ved et trykk på den røde alarmknappen. Heretter skal Lommy'en avgi en alarm på den måten som tidligere er valgt. Dette testes ved å sjekke om det er det valgte nummer som mottar det valgte alarmsignal (SMS, email eller telefonoppringing).




Alarm



Når du trykker på den røde alarmknappen, avgir Lommy'en en alarm på en av følgende måter:

Sending av en SMS, email eller et telefonoppring til et

forutbestemt telefonnummer. Lommy'ens vibrator vil fortelle deg at alarmen er avsendt korrekt. Hvis du har valgt at det skal foretas et telefonoppring, åpnes det samtidig for telefonkontakt med mottageren via høyttaler og mikrofon. Oppsett foretas på www.care4all.dk (Les mer om dette i avsnittet om oppsett og overvåkning)

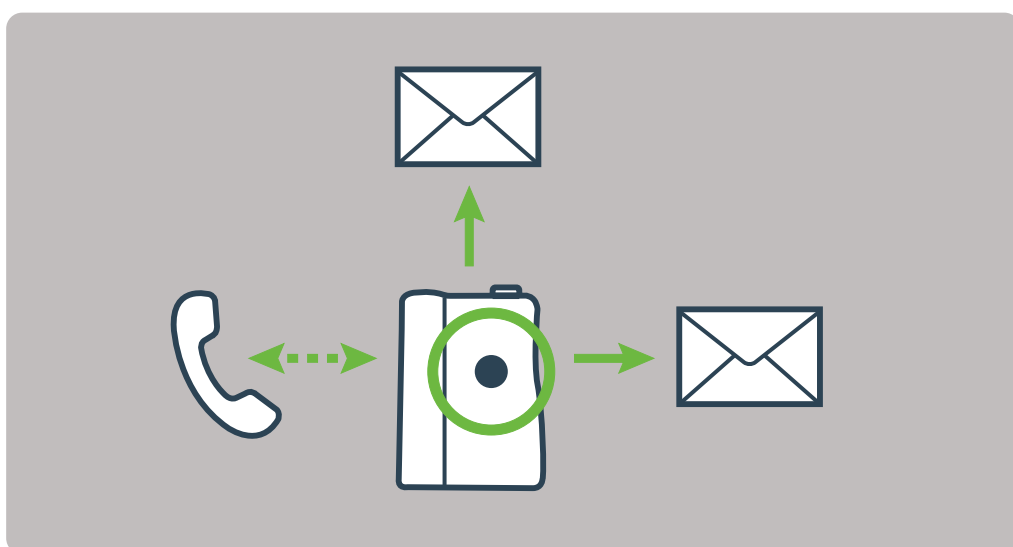

Vedlikehold

Rengjør Lommy'en med en lett fuktet klut. Bruk aldri sterke kjemikalier, eller rengjøringsmidler.



Programmerbare knapper



Lommy'en kan leveres med 6 funksjonsknapper ut over den røde alarmknappen. Funksjonsknapperne kan programmeres til å foreta telefonoppring til flere forhåndsvalgte telefonnummer ut over

det nummeret som den røde alarmknappen er programmert til. Dette gir en stor fleksibilitet og mulighet til å kunne tilpasse til den enkelte brukers behov.



Lysindikatorer på fronten

Lys	Grønn	Rød	Blå	Gul
Ikon				
Blinker	Søker GSM-nettverk.	2 korte blink. Lader.	Et blink. Ingen GPS-forbindelse.	2 korte blink. Kontakt til kontrolsentral.
Konstant	Sender oppdateringer til kontrolsentral.	Fullt oppladet. (Kun når oppladeren er tilkoblet)		Batterinivå lavt.
Annet	Blinker langsomt. Ingen GSM-dekning.	Blinker langsomt. Slukker pga. strømmangel.	Flere blink. GPS-forbindelse koblet til. Antall blink = antall tiloblede satellitter.	Blinker langsomt Ingen kontakt til kontrollsentral.