

Vekkerklokke, digital mod.2 VKD2



Brukerhåndbok

1. Innledning

VKD2 er en digital vekkerklokke med repetisjon, som benyttes sammen med FlexiBlink Sengevibratører. Klokkas har repetisjon / snooze-funksjon.

Vekkerklokke VKD2 viser tiden med tall i siferrute (display). Justering av tid og vekketidspunkt utføres med trykknapper på klokkes overside. På vekketidspunktet starter Sengevibratoren. På toppen av vekkerklokka er det en stor knapp som benyttes til midlertidig avstenging av alarm (snooze). Man avslutter vekkingen ved å vippe over alarm ON/OFF knappen på siden av klokken til posisjon OFF.

Vekkerklokke VKD2 har innebygd lydvarsling. Lydvarslingen kobles ut når den er tilkoblet sengevibrator.

Vekkerklokke VKD2 drives med strøm fra veggkontakten (230VAC). Den kan utstyres med reservebatteri (se avsnittet Reservebatteri).

2. Plassering og montering

Vekkerklokka plasseres på ønsket sted.


1. Sett om ønskelig inn reservebatteri i batterilomma under klokka

(Ikke inkludert. Se avsnittet Reservebatteri.)

2. Plugg nettkabelen i veggkontakten (230VAC).
3. Sett inn pluggen til Sengevibratoren.

Nå er Vekkerklokka klar for innstilling av tid.

3. Bruk av klokka

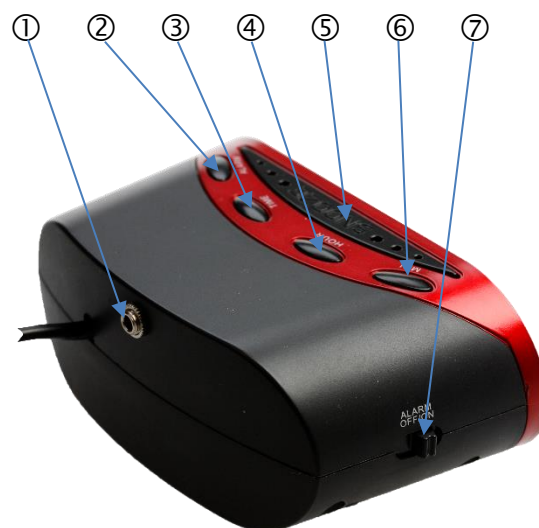

Tallene i oversikten nedenfor og videre i denne bruksanvisningen, viser til illustrasjonen i Brukerveiledningen for Vekkerklokke VKD2.

- ① Inngang for sengevibrator
- ② Justering av alarmtidspunkt
- ③ Justering av klokke
- ④ Justering av timer
- ⑤ Repetisjon/snooze
- ⑥ Justering av minutter
- ⑦ Alarm av/på knapp

Hvordan stille klokka

Når apparatet er tilkoblet strømmettet, vil et blinkende signal indikere at tiden må stilles.

1. Hold TIME nede mens du trykker HOUR. Timene vil da stilles.
2. Hold TIME nede mens du trykker MIN. Minuttene vil da stilles.

Hvordan stille alarmen

Hold ALARM nede mens du trykker TIME. Timene vil da stilles.

Hold ALARM nede mens du trykker MIN. Minuttene vil da stilles.

Sett ALARM OFF/ON til posisjon "ON". Da vil du automatisk bli vekket til innstilt tid.

I høyre hjørne av displayet får du en indikasjon på at alarmen står på(alarmindikator).

Repetisjons-(snooze-) funksjonen

Når du blir vekket om morgenen, og du trykker på SNOOZE på toppen av klokka, vil det være stille i 9 minutter før du på nytt får ny alarm. Alarmindikatoren i displayet vil blinke så lenge alarmen er i repetisjons-/ snooze-modus. Denne funksjonen kan repeteres inntil 1 time etter at alarmen første gang koblet inn.

Hvordan stoppe alarmen

Alarm ev. snooze kan stoppes ved å trykke på den lille ALARM knappen på toppen av klokka. Da vil alarmen avstilles for denne gang og den vil gjenta seg etter 24timer. Alarmindikatoren vil lyse konstant. Ønsker man å skru av alarmen permanent så settes ALARM OFF/ON knappen på siden av klokken i "OFF" posisjon. Alarmindikatoren slukker.

4. Reservebatteri

Vekkerklokke VKD2 har batterilomme for reservebatteri. Lokket til batterilommen sitter i underkant av klokka.

Reservebatteriet på 9 volt gir strøm til klokkas minnefunksjon ved strømbrudd. Vekkeruret vil da vise rett tid når strømmen kommer tilbake.

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk lett fuktet klut.
- Produktet er for innendørs bruk.
- Kast brukte batterier i henhold til instruksjonene.
- Temperatur: +10°C-+40°C

Resirkulering

Produktet og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



6. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	123x51x72mm
Driftsspenning:	230 VAC
Effektforbruk:	3W
Reservebatteri:	9V

7. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Viser ikke tiden i displayet.	Ingen strøm fra veggkontakten	Sett støpselet i kontakten
Vekkerklokka går, men får ikke vekking	Sengevibratoren får ikke strøm fra batterieliminatort	Sett kontakten til sengevibratoren i kontakten
	VKD2 er ikke koblet til sengevibrator	Koble til VKD2 til sengevibrator med kabel

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47

