



Hearing Products International Limited

EchoVoice® EV6™

Bruksanvisning

EchoVoice® EV6 er en kompakt og lett digital stemmeforsterker.
Dette produktet kan forsterke selv den svakeste stemme med minimal innsats.
EchoVoice® EV6 har kraftig styrke med maks 12 W output.




EGENSKAPER

- Klasse D digital forsterker teknologi for kraftig lyd og god lyd kvalitet.
- Innovativ AGI lyd forlengelses teknologi som forbedrer frekvensbånd og dynamisk respons.
- Innebygd oppladbart høykapasitets lithium-ion batteri.
- Innebygd MCU intelligent lade styrings sytem for å sikre sikker og pålitelig batteri drift.
- Elektronisk knappe-kontroll for lett betjening.
- AUX lydingang for bruk som høyttaler med annet utstyr.

SIKKERHETS INSTRUKSJONER OG FORHOLDSREGLER

- Vennligst følg instruksjonen nøye steg for steg.
- Ikke bruk utstyret i damp, fuktig, veldig varme og veldig kalde omgivelser.
- For å rengjøre EchoVoice® EV6, brukes kun en myk klut og uorganisk rengjøringsmiddel.
- Bruk kun den medfølgende godkjente strømadapter fra HPI. Ikke bruk noen annen strømadapter.
- Ikke koble til eksterne lydsignaler i MIC kontakten. Kun for bruk med mikrofon.
- Når en bruker EchoVoice® EV6 skal man følge grunnleggende sikkerhets og forholdsregler for å unngå elektrisk støt og person skade.
- Vennligst overlatt all service til kun kvalifisert personell. Ikke forsøk å åpne utstyret selv. Dette vil ugyldiggjøre garantien.
- Bemerk: Hvis serienummer og etiketter blir fjernet vil garantien utgå. Utsyret skal avhendes etter gjeldende regler.

FUNKSJON ILLUSTRASJON

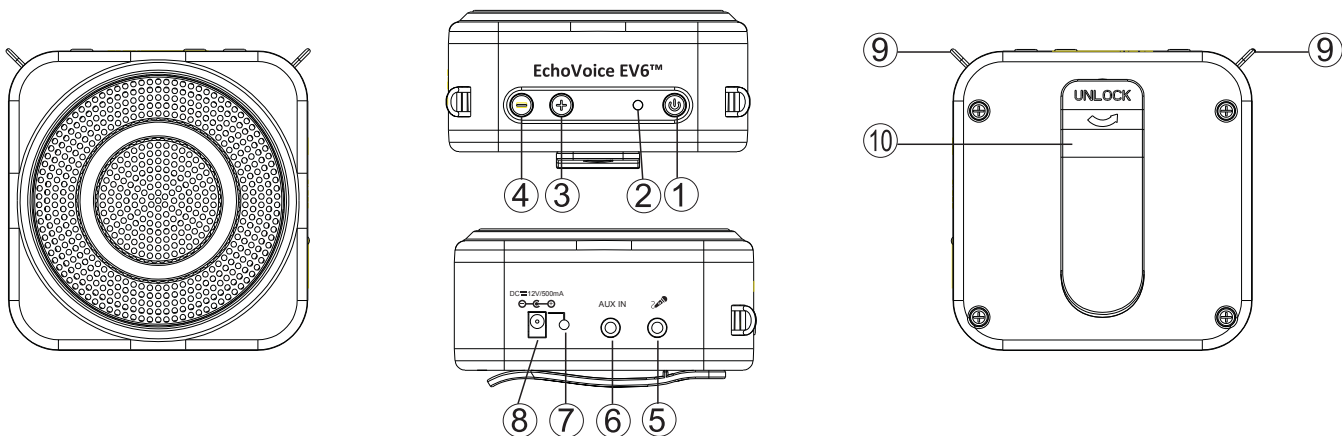

BRUK

- ① Strøm bryter: Trykk og hold nede i 1-2 sekunder for på/av.
 - ② Strøm indikator: Grønt lys indikerer at forsterkeren er på. Hvis batterispenningen er lav, vil lyset endres til rødt. Lyset vil blinke rødt når batterispenningen er for lav og indikere at utstyret trenger umiddelbar oppladning.
 - ③ Volumkontroll: Trykk for å øke styrken.
 - ④ Volumkontroll: Trykk for å senke styrken.
 - ⑤ Mikrofon inngang: Sett inn 3.5 mm mikrofon plugg i denne kntakten. **VENNLIGST BEMERK:** Når du snakker, unngå å peke mikrofonen direkte mot forsterkeren da dette kan forårsake tilbakekobling (hyling/piping).
 - ⑥ Aux inngang: Bruk den vedlagte ledningen for å tilkoble eksterne lydssignaler som DVD, radio og mp3 spiller.
 - ⑦ Lade indikator: Indikatoren vil lyse rødt når forsterkern blir ladet. Indikatoren vil lyse grønt når forsterkeren er fullt oppladet.
 - ⑧ Lade kontakt: Sett inn 12V DC/500mA strømadapter pluggen i ladekontakten for å lade forsterkeren. Lad batterier fullt opp hvis forsterkern ikke har vært i bruk på en stund.
- **BEMERK:** Dette produktet har en innebygd lav spennings beskyttelses funksjon for å øke levetiden på batteriet. Når strøm indikatoren er rød eller blinker rødt, kan utstyret slå seg av hvis i bruk.
 - For å plassere strupemikrofonen korrekt for best forsterkning plasser din pekefinger i øret, beveg pekefingeren mot halsen og når du når midt på nakken vil dette normalt være riktig punkt. Skru volumkontrollen ned til lavt opprinnelig og øk styrken gradvis.

ERSTATNINGSDELER

 4801	 481	 570-1000-01/ 910-1011-01	 482
Forsterker	Futural	Strømadapter/lader	Mikrofon
 480-1004-01		 910-1005-01	
Strupemikrofon	Snor	Audio ledning	Belte klipp

Hearing Products International Limited

Importør:
Medus AS
www.medus.no