



Kom i gang  
Grid Pad Go 8 and 10

## Vedlikehold av din Grid Pad

Plasser Grid Pad et trygt sted, uten harde objekter som lener eller presser seg mot skjermen, når du den ikke er i bruk.

### Rengjøring

Den beste måten å rengjøre trykkskjermen på er å bruke en mikrofiber-klut. For å minimere risikoen for at bakterier overføres mellom brukere bør enheten rengjøres regelmessig med en rensesklut.

For en dyp rengjøring kan du bruke en alkohol-basert klut etter at du har rengjort med renseskluten.


Enheden bør ikke dyppes i vann eller rengjøres med en våt klut, gelè, poleringsvæske, eller andre invaderende produkter.

### Protection

Grid Pad Go er klassifisert til IP-65 for beskyttelse mot sprut og dråper, med forseglede porter og et tøft eksteriør. Enheden er bygd for å motstå en dråpe på 1,2mol.


## Slå på Grid Pad

For å slå på Grid Pad trykker du på på-knappen, øverst på enheten.

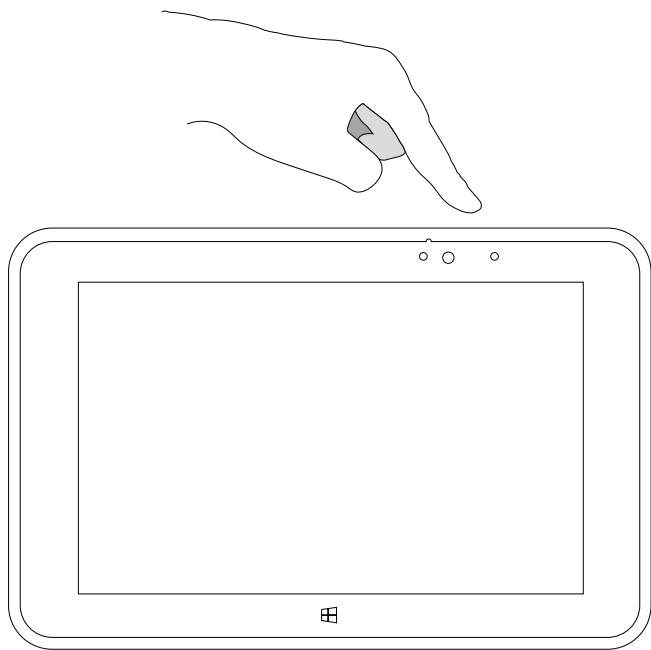

## Lade Grid Pad

For å lade Grid Pad plugges du ladekabelen i en kraftkilde og setter den inn i enheten som vist nedenfor.

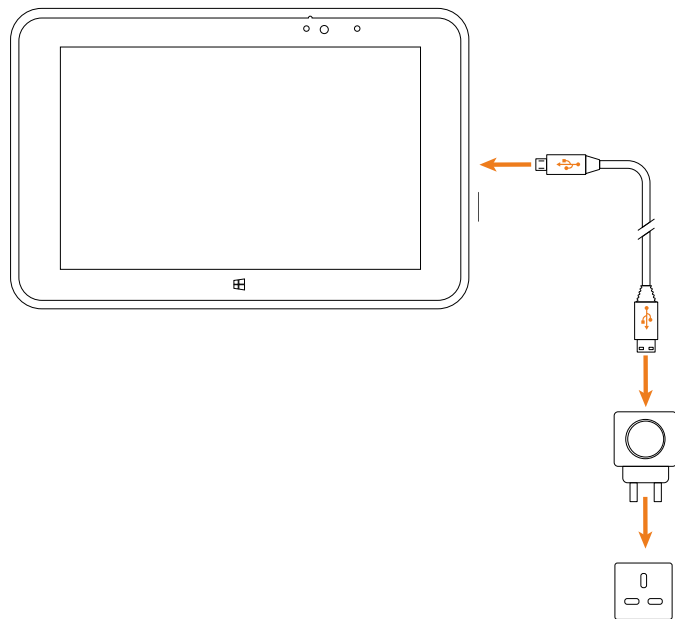

## Parre Bluetooth-høytaler

Følg trinnene nedenfor hvis du må parre Bluetooth-høytaleren med Grid Pad om igjen:

1. Følg instruksjonene som fulgte med høytaleren for å gå inn i paringsmodus.
2. På enheten går du til: PC-innstillinger > PC og enheter > Bluetooth > Bluetooth på. Nå søker den automatisk.
3. Velg høytaleren din fra listen du vil parre.

Høytaleren lades ved å koble USB-porten til Grid Pad PSU.

# Veiledning for batteri

## Få mest mulig ut av batteriet

Grid Pad Go-batteriet varer i gjennomsnitt 7 timer. Hver bruker vil bruke enheten på en annen måte. Intensiv bruk, inkludert bruk av Bluetooth, streaming av video og lytting til musikk i lange perioder, vil bruke batteriet raskere.

## Ladeveiledning

Det tar mellom 2,5 og 3,5 timer å lade batteriet på enhetene dine.

# Spesifikasjoner

## Go 10

Processor	Intel Atom E3940 Quad Core 1.6 GHz (1.8 GHz Turbo)
Minne	4GB
Hard drive	64GB
Grafikk-kort	HD 500 Base 400 MHz, Burst 600 MHz
Dimensjoner (mm)	269 x 180 x 12.5
Batteri	10 hours
Kamera	2 MP front and 8 MP rear
Skjerm	10.1" 2560 x 1600
Kobles til	Wi-fi and Bluetooth
Porter	1 x USB-C

# Spesifikasjoner

## Go 8

Processor	Intel Atom E3940 Quad Core 1.6 GHz (1.8 GHz Turbo)
Minne	4GB
Hard drive	64GB
Grafikk-kort	HD 500 Base 400 MHz, Burst 600 MHz
Dimensjoner (mm)	228 x 150 x 13
Batteri	7 hours
Kamera	8 MP rear
Skjerm	8.4" - 2560 x 1600
Kobles til	Wi-fi and Bluetooth
Porter	1 x USB-C









## Garanti

Grid Pad enheter er dekket av standar garanti på 2 år.

## Reparasjoner

Ikke forsøk å åpne Grid Pad, da det ikke er noen brukervennlige deler på innsiden. Hvis du vil diskutere en reparasjon kan du kontakte din lokale forhandler.

For mer informasjon kan du besøke [www.thinksmartbox.com](http://www.thinksmartbox.com).

## Erkløring om samtykke

Dette apparatet samsvarer med kravene til direktiv 93/42/EEC som omhandler medisinske enheter. Dette produktet er underlagt Direktiv 2002/96/EC av det Europeiske parlamentet og styret for den Europeiske Unionen om elektrisk avfall og elektronisk utstyr (WEEE), og skal ikke kastes som usortert kommunalt avfall. Benytt ditt lokale avfallsanlegg for å kvitte deg med dette produktet.



# Smartbox

## US Office

Smartbox Assistive Technology Inc  
2831 Leechburg Road  
Lower Burrell  
Westmoreland  
PA  
15068-2539

## UK Office

Smartbox Assistive Technology Ltd  
Ysobel House, Enigma Commercial Centre  
Sandys road  
Malvern, WR14 1JJ, UK  
  
+44 (0) 1684 578868  
info@thinksmartbox.com

[www.thinksmartbox.com](http://www.thinksmartbox.com)