

CLOVER 5

Håndholdt lese TV

Brukerveiledning

Versjon 1.0



Innehold

Forholdsregler definert.	Feil! Bokmerke er ikke
Quick Start definert.	Feil! Bokmerke er ikke
Kom igang.....	1
Oversikt.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Hva er med.....	2
Batteri og lading.....	3
Skrivestand.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Bruk definert.	Feil! Bokmerke er ikke
Av/på.....	4
Signal/lyd.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Forstørring.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Kunstige farger.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Lys styrke.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
To farge innstilling.....	6
Lys.....	7
Frys.....	7
TV tilkobling.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Minne.....	8
Automatisk strømsparing.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Tilbakestille.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Feilsøking definert.	Feil! Bokmerke er ikke
Kan ikke slå på enheten.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Sort eller hvit skjerm.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Bildet endrer seg ikke.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Uklarheter på skjermen.....	Feil! Bokmerke er ikke definert.
Spesifikasjoner	9

Forholdsregler



Før du bruker Clover 5 første gang, Så må batteriet lades. Ref. avsnittet for **Batteri og lading** for å se mer detaljer.



Bruk alltid apperattet på et sted hvor tempraturen er mellom 10° and 35°C.



Hold enheten borte fra områder med regn og andre våte kilder eller drikke. Ikke ha enheten I vann.



Ikke gjør forsøk på å reparere enheten dersom det er behov for det. Bare autorisert personell kan utføre dette. Garantien er ikke gyldig om dette gjøres. Kontakt leverandøren ved behov.



Bruk KUN vedlagt batteri og batterilader.


Kom igang

Oversikt


Takk for at du valgte CLOVER 5.

CLOVER 5 er en portable håndholdt lese TV. Den er utstyrt med en 5 tommers LCD skjerm. Dette gir skarpe og gode bilder ved forskjellige forstøringsnivåer og fargevalg.


Clover 5 lar deg se objekter eller tekst nært. Sett enheten ned på objektet for så å forstørre bildet. Bildet kan også frys for visning senere. En skrivestand er innebygd på baksiden av enheten. Clover 5 er ideell for å lese etiketter, en bok eller avis samt mye mer.

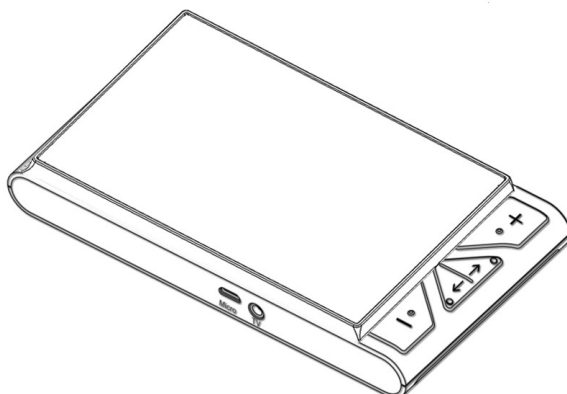


Oversikt

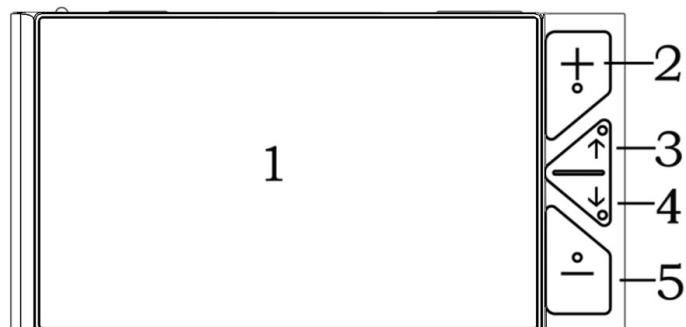


- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. LCD skjerm | 2. Zoom Inn |
| 3. Fargemodus opp | 4. Fargemodus ned |
| 5. Zoom ut | |

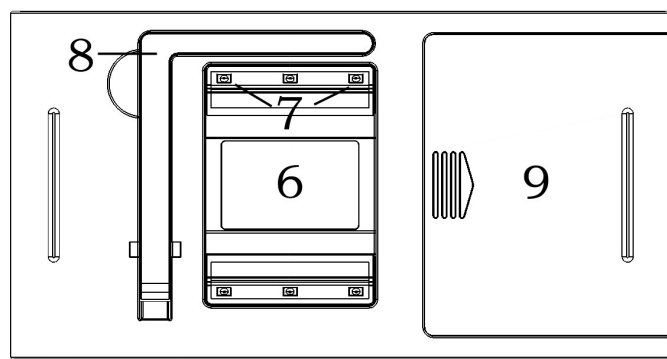

- | | |
|-----------------|-------------------|
| 6. Kamera | 7. LED lys |
| 8. Skrive stand | 9. Batteri deksel |

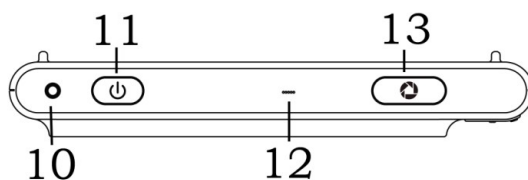



- | | |
|---------------------|-----------|
| 10. Lys for enheten | 11. Av/På |
| 12. Lyd | 13. Frys |

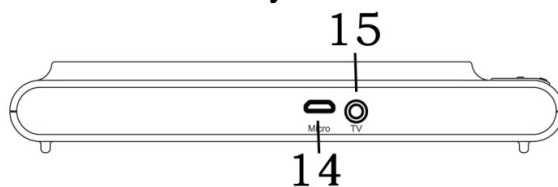

- | | |
|---------------|-------------|
| 14. Mikro USB | 15. TV port |
|---------------|-------------|

Hva er med

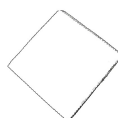

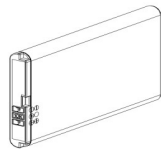

batteri



USB kabel




TV kabel

Batteri og lading

Batteri innstallasjon



1. Snu enheten med baksiden opp

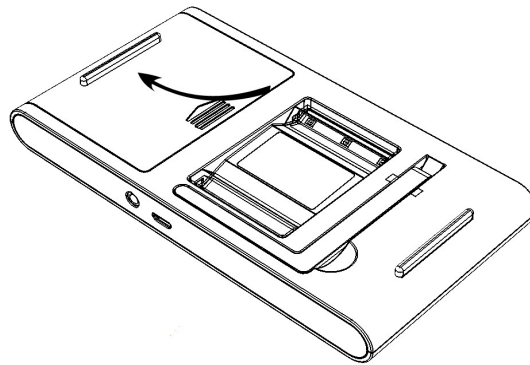

2. Trykk dekslet bakover som vist på bildet. Dekselet vil da bli fjernet og batteriet kommer til syne.
3. Sett inn batteriet i rett posisjon.
4. Sett tilbake dekslet.

Lading av Clover 5.

1. Koble til USB kabelen til strømforsyningen.
2. Plugg micro USB kontakten i enheten.
3. Sett strømforsyningen i et strømnettet.

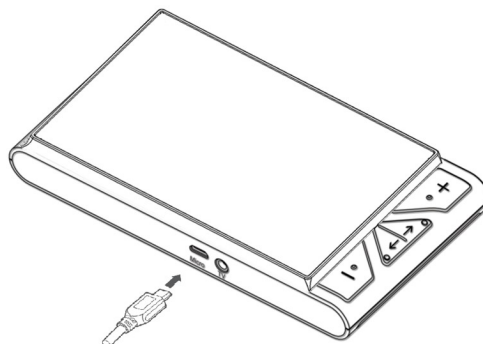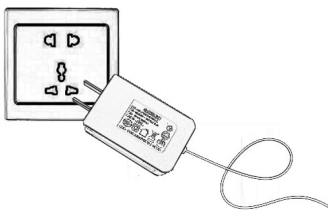


Status for LED indikator

- Lading når enheten er slått av, LED indikatoren vil lyse lyse grønt. Når enheten er full ladet vil lampen slukke. Det vil ta ca. 5 timer å full lade Clover 5. Du kan deretter bruke Clover 5 i 4 sammenhengende timer før den må lades på nytt.
- Når enheten er på, vil LED indikatoren være grønn når enheten er slått på.
- Når enheten er på og strømadapteret ikke er tilkoblet, så vil lampen lyse grønt når batteriet er fulladet. Når batterikapasiteten begynner å bli dårlig vil lampen lyse rødt. Når lampen begynner å blinke rødt må du lade enheten.
- Du kan sjekke batteristatus ved å trykke av/på knappen. Se instruksjoner for dette.




Skrivestand

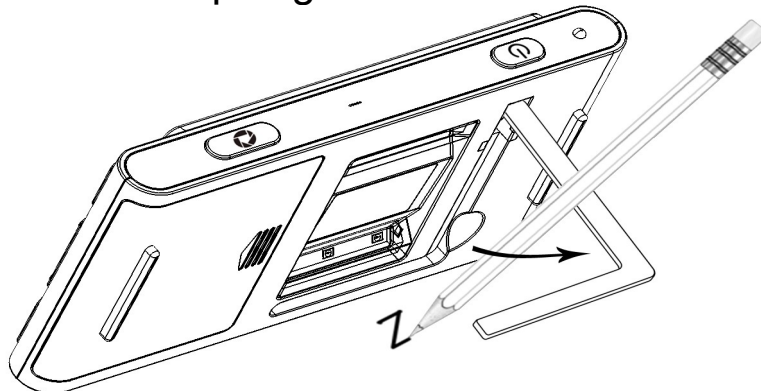Åpne skrivestanden som vist på figuren. Du kan nå skrive under kameraet.



Bruke enheten

Av/på knappen

- Trykk og hold av/på knappen  i 3 sekunder for å slå på enheten.
- Trykk og hold av/på knappen  i 3 sekunder for å slå av enheten.
- Trykk av/på knappen  for å sjekke batterikapasiteten, farge modus, frys og lyd.
- Trykk den andre knappen når du holder av/på knappen inne for å komme til kombi funksjonen. Referer til følgende instruksjoner for mer detaljer.







Lyd signal

- Lyd av/på
- Knappe lyd
- Lydnivå
- Lyd for lavt batterinivå

Lyd kontroll:





- Trykk og hold frys knappen  i 3 sekunder for å slå lyden på/av.

Forstørring

- Trykk og hold inne Zoom Inn knappen  for å øke forstørringen, og hold inne Zoom Inn knappen  for kontinuerlig å øke forstørringen.
- Trykk Zoom ut knappen  for å minske forstørringen. Hold Zoom Ut knappen inne  for kontinuerlig forminking av bildet.
- Hold Zoom knappen inne  sammen med Zoom ut knappen  i 5 sekunder for å veksle mellom normal forstørring og utvidet forstøringsnivå.
 - Normalt forstøringsnivå: 4x – 20x
 - Utvidet forstøringsnivå: 3x – 30x

Fargemodus

Fargemodus er en fârhândsdefinert farge kombinasjon. Normal farge visning fungerer best for å se bilder, kart osv. Når du ønsker å lese tekst kan det være fornuftig å velge en av de forhândsdefinerte fargekombinasjonene.

- Trykk knappen for fargemodus ned  for å sirkulere gjennom listen over fargekombinasjoner.
- Trykk knappen for fargemodus opp  for å sirkulere motsatt vei gjennom fargekombinasjonene
- Trykk fargemodus knappen opp  og fargemodusknappen ned  samtidig for raskt å bytte mellom normal farge og fargemoduset du er i.

- Ved å holde knappen fargemodus opp ↑ og fargemodus ned ↓ samtidig I 5 sekunder for å bytte mellom enkel fargemodus(færre fargevalg) og standard fargevalg.

Enkel fargemodus (6 valg):

- | | |
|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Full Farge | <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på sort |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sort på hvit | <input checked="" type="checkbox"/> Gul på sort |
| <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på blå | <input checked="" type="checkbox"/> Gul på blå |

Standard fargemodus (20 valg)

- | | |
|--|---|
| <input checked="" type="checkbox"/> Full Farge | <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på sort |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sort på hvit | <input checked="" type="checkbox"/> Gul på sort |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sort på gul | <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på blå |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blå på hvit | <input checked="" type="checkbox"/> Gul på blå |
| <input checked="" type="checkbox"/> Blå på gul | <input checked="" type="checkbox"/> Grønn på sort |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sort på grønn | <input checked="" type="checkbox"/> Fiolett på sort |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sort å fiolett | <input checked="" type="checkbox"/> Blå på sort |
| <input checked="" type="checkbox"/> Sort på blå | <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på grønn |
| <input checked="" type="checkbox"/> Grønn på hvit | <input checked="" type="checkbox"/> Hvit på rød |
| <input checked="" type="checkbox"/> Rød på hvit | <input checked="" type="checkbox"/> Rød på sort |



Lysstyrke

Justering av lysstyrken I skjerm for full farge og fargemodus. Fabrikk instilling er uthevet I grønt.

- kombinasjon: Av/på knappen  og zoom inn  øker lysstyrken
- kombinasjon: Av/på knappen  og zoom ut , minsker lysstyrken

To farge innstilling

Ved å finjustere kombinasjonen av forgrunns og bakgrunnsfargen I fargemodus, justeringen vil forbedre visningen av bilde på forskjellige trykt matriell. Standard oppsett er fremhevet I grønn farge.

- Kombinasjon: Av/på knappen  og fargemodus opp ↑ , fler bakgrunnsfarger.
- Kombinasjon: Av/på knappen  og fargemodus ned ↓ , fler forgrunnsfarger.


Lys av/på



- Kombinasjon: Av/På  og Frys knapp  , slår av/på LED lyset.



Frys


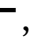
Å fryse et bilde på LCD skjermen kan være nyttig for videre lesing, eller forstørring av bilde. Man kan ikke juster lyset i fryst bilde.



Trykk frys knappen  for å låse det active bildet.

- Trykk frys knappen igjen  for å gå tilbake til normalvisning.
- Når forstørringen økes i frys modus så kan du navigere med følgende knappe kombinasjoner.

Av/På  og Farge modus opp  , navigerer oppover


Av/På  og Farge modus ned  , navigerer nedover




Av/På  og Zoom inn  , navigerer til venstre

Av/På  & Zoom ut  , navigerer til høyre

KOble til TV

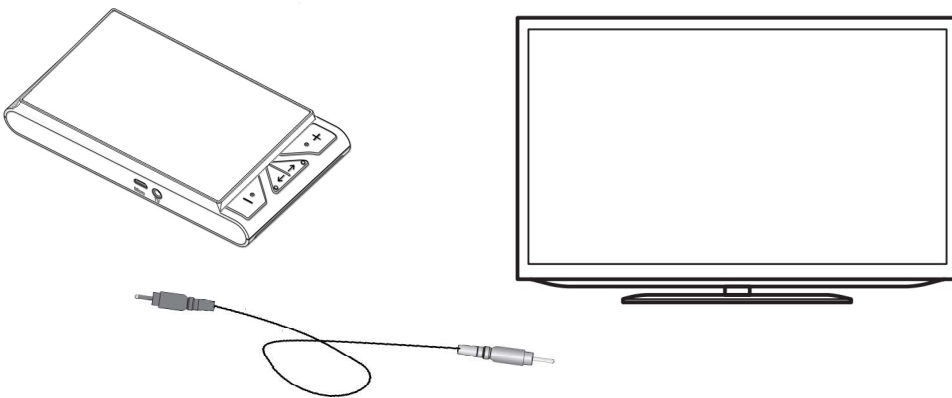Tilkoble til TV for å få et større bilde



- Når du plugges i medfølgende TV kabel til porten i TV, så trenger du å velge kilde på din TV (PAL or NTSC mode).
- Trykk zoom inn knappen  eller zoom ut knappen  for å velge mellom PAL eller NTSC, trykk deretter frys knappen  for å bekrefte ditt valg. Bildet vil nå vises på TV skjermen.
- Etter å ha koblet fra TV kabelen, så vil bildet automatisk komme frem igjen på LCD skjermen.



Minne

Enheten vil huske automatisk de siste innstillingene du brukt som fargemodus, forstørring etc, neste gang du slår den på.

Automatisk stømsparing

Enheten vil automatisk slå seg av etter 3 minutter ved inaktivitet.

Fabrikkinnstilling

- Ved å holde frys knappen  og Zoom ut knappen  inne samtidig i 5 , så vil enheten stilles tilbake til fabrikk innstillinger. Den vil automatisk slå seg av etter resetting er ferdig.

Feilsøking

Enheten kan ikke slås på

- Sett I strømadapteret
- Lade opp batteriet
- Ta u tog sett inn igjen batteriet

Sort eller hvit skjerm

- Dersom enheten ligger på en slett flate, så kan skjermen bli sort eller hvit, løft den opp for å se om bildet endres.
- Endre forstørringen
- Endre fargemodus
- Når enheten er tilkoblet en TV, så vil skjermen være sort
- Start omigjen enheten
- Ta u tog sett inn igjen batteriet.

Bildet endrer seg ikke

- Dersom enheten er I frys modus, så vil ikke bildet endre seg.
- Trykk Av/På knappen for å sjekk status.
- Restart enheten
- Reinstaller batteriet

Flekker eller merker på skjermen

- Juster lysstyrken
- Rengjør LCD skjermen og kamera

Spesifikasjoner

- **Skjerm:** 5 tommer wide screen LCD
- **Størrelse:** <=152*80*22mm
- **Vekt:** <210 gramm (Batteri inkludert)
- **Farge modus:** Enkelt modus 6 valg; Avansert 20 valg
- **Forstørring:** Normal 4x - 20x; Utvidet 3x - 30x
- **Batteri:** Ladbart og resirkulerbart Litium batteri; 4 timer kontinuerlig bruk; ladetid ca. 5 timer
- **Strøm Adapter:** Micro USB port; input: 110-240V; output: 5V/1A

Kontaktinformasjon:

SynSupport Nordic Eye

Folmovegen 16,

2150 ÅRNES

Tlf: +47 63825700

E-post: post@nordiceye.no