

Inspire vibrasjonspute



Hvordan slå på/av vibratoren: Slå på vibratoren ved å trykke på **ON/OFF** knappen. Den vibvibrerer et kort øyeblikk for å indikere at den er på. Slå på fjernkontrollen ved å trykke på **ON/OFF** knappen. Slå av vibratoren på samme måte, enten ved å trykke **ON/OFF** på selve vibratoren eller ved å holde inne **ON/OFF** knappen på fjernkontrollen i 3 sekunder.

Hvordan endre de ulike vibratorfrekvensene: Dette gjør du ved å trykke fortløpende på **ON/OFF** knappen på selve vibratoren (ikke holde inne), eller ved å trykke på det runde tegnet – **o** – midt på fjernkontrollen. Bruk **+** og **-** knappen til å øke/minske intensiteten. Vibratoren har 10 ulike vibrasjonsvarianter (trykk fortløpende på **o**) og disse har igjen 5 ulike styrker (som du regulerer med **+** og **-**).

Bruk: Ta litt vannbasert glidekrem på vibratoren, det gjør den mer behagelig å bruke. Slå på vibratoren. Legg vibratoren i trusen, under klitorisområdet. Bruk fjernkontrollen til å styre vibratoren og endre frekvens og styrke.

Etter bruk: Etter bruk kan vibratoren rengjøres med en mild, antibakteriell såpe eller et rengjøringsmiddel spesielt laget for å rengjøre vibratører.

Lading: Sett inn ladekabelen i utgangen på vibratoren (du finner denne ved siden av tegnet DC) og i utgangen på fjernkontrollen (langs siden). Ladekabelen er en USB ladekabel, og du kan lade vibrator/fjernkontroll via din PC eller via en USB-adapter i stikkontakten. Husk å lade vibratoren når den er tørr.

Spesifikasjoner:

Materialer:	Body-safe silikon
Størrelse:	10,25 cm x 5 cm
Batteri:	USB lader inkludert
Lading:	120 min
Brukstid:	Opptil 120 min
Vanntett:	ja

Produsent:

CALEXOTICS



Quintet AS ble etablert i 1999, og har siden oppstarten arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, faglig kompetanse og god veiledning og service innenfor produktområdene våre. Dette fokuserer vi på hver dag, noe som gir trygghet for våre kunder og samarbeidspartnere.

P.b.97 Bønes, 5849 Bergen • 55 98 15 55 • 55 98 15 56 (faks) • post@quintet.no • www.quintet.no

