

CALEXOTICS trusevibrator




Hvordan slå på og av vibratoren: Slå på vibratoren ved å trykke på **ON/OFF** knappen i 3 sekunder. Et rødt lys vil synes, og vibratoren vil gi fra seg en liten bevegelse. Du trykker på «**XO**»-tegnet på fjernkontrollen for å starte vibratoren. Du slår den av på ved å trykke 3 sekunder på «**XO**»-tegnet på fjernkontrollen. Selve vibratoren kan du også slå av ved å trykke 3 sekunder på **ON/OFF** knappen.

Hvordan endre de ulike vibratorfrekvensene: Dette gjør du ved å trykke kort på **ON/OFF** knappen på selve vibratoren eller ved å trykke kort på «**XO**» på fjernkontrollen. Vibratoren har **12** ulike vibrasjons-innstillinger.

Bruk: Ta litt vannbasert glidekrem på vibratoren, det gjør den mer behagelig å bruke. Slå på vibratoren (se at det røde lyset er på). Legg vibratoren i trusen, over klitorisområdet. Brett eller skyv «vingene» over trusekanten for å holde vibratoren på plass. Bruk fjernkontrollen til å styre vibratoren.

Etter bruk: Etter bruk kan vibratoren rengjøres med en mild, antibakteriell såpe eller et rengjøringsmiddel spesielt laget for å rengjøre vibratorer.

Lading: Sett inn ladekabelen i utgangen på vibratoren (du finner denne ved siden av tegnet DC, i den ene enden) og i utgangen på fjernkontrollen (i enden). Ladekabelen er en USB ladekabel, og du kan lade vibrator/fjernkontroll via din PC eller via en USB-adapler i stikkontakten. Husk å lade vibratoren når den er tørr.

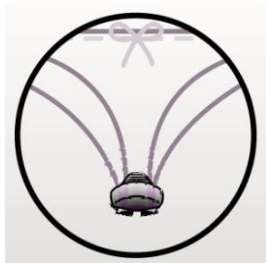

Spesifikasjoner:

Materialer: Body-safe silikon og ABS
Størrelse: 11,5 cm x 3,75 cm
Batteri: USB lader inkludert
Lading: 90 min
Brukstid: Opptil 80 min
Vanntett: Ja

Produsent:

CALEXOTICS



Quintet AS ble etablert i 1999, og har siden oppstarten arbeidet for å tilby kvalitetsprodukter, faglig kompetanse og god veiledning og service innenfor produktområdene våre. Dette fokuserer vi på hver dag, noe som gir trygghet for våre kunder og samarbeidspartnere.

P.b.97 Bønes, 5849 Bergen • 55 98 15 55 • 55 98 15 56 (faks) • post@quintet.no • www.quintet.no

