

# BRUKERINFORMASJON / BRUKSANVISNING STIMULITE® SITTEPUTER

## Innledning

StimuLITE® sitteputer er beregnet for bruk i rullestoler og produsert for å forhindre trykksår. Modeller med 2 lag StimuLITE-materiale, Slimline™, Sport, Smart og Silver, er primært beregnet for å forebygge trykksår. Modeller med 3 lag StimuLITE-materiale, Contoured, Classic og Classic Barriatric er beregnet for høyrisikobrukere. Alle StimuLITE-produkter er ventilierende og fuktavledende for å holde deg tørre og kjølig.



## Bruk av sitteputen

Puten er laget for bruk i hverdagen. Det er lett å bruke utenfor rullestolen, som i bilen eller i dusjen hvis behovet oppstår. Den tolererer også normale temperaturer fra -30 ° til +60 ° C. Før du bruker StimuLITE-produktet, må pakken fjernes. Trekket er festet til produktet når det leveres. Produktet fungerer best med trekket tiltrukket, men det er ikke farlig å sitte på det uten.

## Første bruk / testing.

Pass på at du har riktig størrelse for å passe rullestolen godt. Legg puten i stolen den skal brukes i. Legg puten med trekket på med den glatte stoffsiden opp og den avrundede siden med den hvite etiketten tilbake med ryggstøtten.



Borrelåset på trekket bør om mulig passe med borrelåsen på rullestolsetet. Glidelåsen på trekket skal være lukket og tilbake til ryggstøtten.

Produktet ditt leveres med et fuktoppsamlere. Det skal plasseres med den hvite siden opp inne i trekket og under puten.



Når puten er i stolen, bør du sette deg selv. Puten er veldig stabil og gir mulighet for forflytning i flere trinn. Husk at bukser med store baklommer og store dekorasjoner kan forårsake ubehag. Putens ventilierende og drenerende egenskaper holder deg tørt og kjølig. Vær oppmerksom på dette når du velger bukser for å få maksimal effekt av puten. Når du sitter over hele seteputen, bør du ikke føle ubehag.

## Trygt sittende

Kontroller regelmessig at du er komfortabel på puten din. Det er lett for deg å lene deg fremover og føle deg under dine sitte ben med fingrene. Hvis du føler bunnen, bør dette nøye undersøkes av en terapeut. Hvis du opplever ulempe med sitteputen eller hudrødhet, som vedvarer etter 5 minutter, avbryter bruken og kontakt legen eller terapeuten din.

## Produktinnhold

StimuLITE er laget av 100% TPU. Trekket består av Cordura® og polyester.

## Vasking / rengjøring

StimuLITE sitteputer kan vaskes enten for hånd eller i maskin. Bruk små mengder vaskemidler uten blekemiddel.



Maks 30 min

Maks 50°C

Vask puten og trekket separat i den medfølgende vaskeposen. Jo oftere du vasker puten, jo bedre er formen og egenskapene til puten.

## Kontroll av puten

Det anbefales at du regelmessig sjekker sitteputen din. Fjern deretter trekket og trykk på cellene med fingrene. Cellene skal være elastisk og smidige. Hvis de ikke er, er puten brukt opp og du bør da kontakte din terapeut for en ny test.

## Branssikkerhet

Alle StimuLITE sitteputer er branntestet og CE-merket.

## Garanti

2 års garanti gjelder StimuLITE sitteputer. Garantien inkluderer skader på grunn av produksjons- eller materialfeil. Garantien dekker ikke unormal håndtering eller slitasje.

## Når produktet er oppbrukt

For å kaste bort puten din, sett den inn i plastgjenvinning.



Lykke til med din StimuLITE sittepute!



GÖRAN SJÖDEN'S REHABSHOP NORGE AS

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: +47 48 50 32 97

e-post: [ordre@rehabshop.com](mailto:ordre@rehabshop.com)


[www.rehabshop.as](http://www.rehabshop.as)

# FORSKRIVERINFORMASJON STIMULITE® SITTEPUTER



## Innledning

StimuLITE® sitteputer er beregnet for bruk i rullestoler og produsert for å forhindre trykksår. Modeller med 2 lag StimuLITE-materiale, Slimline™, Sport, Smart og Silver, er primært beregnet for å forebygge trykksår. Modeller med 3 lag StimuLITE-materiale, Contoured, Classic og Classic Barriatric er beregnet for høyrisikobrukere. Alle StimuLITE-produkter er ventilerende og fuktavledende for å holde deg tørre og kjølig.

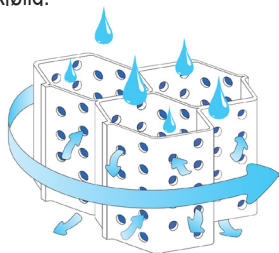

## Utprøvningsanvisning

Legg puten i rullestolen med glatt side opp og den avrundede siden med den hvite etiketten tilbake med ryggstøtten. Borrelåsen på trekket skal være på undersiden og glidelåsen skal være lukket og på baksiden. Tillat personen å sitte på puten i minst 30 minutter da den justerer seg under en første test. Hvis du vil endre en eksponeringsvinkel, bruker du kilstøtten våre (KIL3 og KIL5) for eksempel. Puten krever ingen annen innstilling. Du kan kutte pute slik at den passer i stolen som beskrevet nedenfor.

## Standard størrelser

36x36 cm	41x41 cm	46x41 cm
36x41 cm	41x43 cm	46x43 cm
36x46 cm	41x46 cm	46x46 cm
36x51 cm	41x51 cm	46x51 cm
38x41 cm	43x41 cm	51x41 cm
38x43 cm	43x43 cm	51x46 cm
38x46 cm	43x46 cm	51x51 cm
38x51 cm	43x51 cm	

Runde bunn for hengekøye sete (S)

- Standard bunn for flatt sete



Inkontinensbeskyttelsen som følger med, er plassert under puten inne i dekslet med den hvite siden opp.

## Putens vekt

Vekt 41x41 cm, Slimline™, Sport ca 1 kg, Classic og Contoured 1,5 kg. Bariatric 3 kg.

## Høyde:

Slimline™ (SM og SMXS)	6 cm
Sport (SP)	5 cm
Contoured (CD, CDBB, CDXS, CDBBXS)	8 cm
Classic (CL og CLXS)	6 cm
Silver (SI)	3 cm
SMART (SMRT)	5 cm
Pediatric Contoured (PDCD)	7 cm
Pediatric Corbee® (PD)	5 cm
Classic Bariatric (CLBA)	7 cm

## Maks Brukervekt

Bamputer (PD, PDCD)	50 kg
Voksenputer	130 kg
Classic Bariatric	360 kg

## Produktinnhold

StimuLITE er laget av 100% TPU. Trekket består av Cordura® Kevlar (brannteppe) og polyester.

## Vasking / rengjøring

StimuLITE sitteputer kan vaskes enten for hånd eller i maskin. Bruk små mengder vaskemidler uten blekemiddel.



Maks 30 min

Maks 50°C

Vask puten og trekket separat i den medfølgende vaskeposen. Jo oftere du vasker puten, jo bedre er formen og egenskapene til puten. Etter vask, dra på trekket med glidelåsen bakover mot rundrekken og de åpne cellene oppover.

## Rekondisjonering

Virkon-løsning kan brukes til å rense StimuLITE®-produkter fra MRSA-bakterien.

## Kontroll av puten

Det anbefales at regelmessig sjekker sitteputen. Fjern deretter trekket og trykk på cellene med fingrene. Cellene skal være elastisk og smidige. Hvis de ikke er, er puten brukt opp.

## Brannsikkerhet

Alle StimuLITE sitteputer er branntestet enligt ISO 7176-16 och SS-EN 1021 og CE-merket. Trekkets flammehemmende beskyttelse er et tynt strekk stoff i Kevlar, som er festet under toppen av trekket.

## Garanti

2 års garanti gjelder StimuLITE sitteputer. Garantien inkluderer skader på grunn av produksjons- eller materialfeil. Garantien dekker ikke unormal håndtering eller slitasje.

## Når produktet er oppbrukt

Når puten er forbrukt, sett den inn i plastgjenvinning.

Lykke til med din StimuLITE sittepute!



GÖRAN SJÖDEN'S REHABSHOP NORGE A/S

Postboks 157 1378 Nesbru

Tel: +47 48 50 32 97

e-post: [ordre@rehabshop.com](mailto:ordre@rehabshop.com)

[www.rehabshop.as](http://www.rehabshop.as)

## Du kan endre Stimulite sitteputer som følger, og fortsatt beholde CE-merking:

Puten er laget av 100% termoplastisk polyuretan. Det er kuttet med en skarp kniv eller båndsg. Men kan også med fordel bli kuttet med en kniv, hvor den varmer bladet. Puten er "reparert" ikke opp, men beholder sin form etter at den er kuttet

**SETEBREDDE:** Man må beskjære puten lengderetningen opp til 2,5 cm på hver side. Dermed maks 5 cm totalt.

**BAKKANTEN:** Vi må kutte ut for rullstolsrør. Kut hjørnet av puten så stort som røret har en diameter

**Du må ikke kutte hele bakkanten på sitteputen!**

**FORKANTEN:** Vi må kutte puten i dybden, og vi må kutte forskjellig måte for hver bein. Gjør det gjennom en vertikal 90° kuttet til snittflaten. Maks 5 cm total dybde.

**PUTE HØYDE:** Det er ikke lov til å endre eller kutte opp på overflaten eller på under-siden av puten. Det er kun lov til å kutte kantene, se ovenfor.

