

Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite madrass

Bruksområde

StimulITE madrasser er produsert for å forebygge og behandle trykksår

Bruksanvisning

Din StimulITE madrass kommer i to stykker: En overmadrass og en madrassbas. Madrassbasen består av enten termoplastisk polyuretan med store bikubeceller eller seksjoner av polyeter skum. Madrassbasen i bikubestruktur er grå og har store celler mens overmadrassen er tri-farget og har liten bikubeceller. Ta av emballasjen, velg ønsket trekk, åpne glidelåsen og legg den oppå sengegrind. Plasser deretter madrassbasen oppå trekket og rull overmadrassen oppa madrassbasen. Cellene i overmadrassen skal ha den åpne siden opp.

Overmadrassen har festeanordninger for å feste madrassen i sengegaveln. Disse finnes for at madrassen skal ligge stille, samt gi en mulighet til å evakuere en person som ligger i en nødsituasjon. Dra festeanordninger gjennom hullen i hygienetrekket. Fest båndene på madrasskjernen i sengegavlen. Juster ved behov.

Anvendelsesanvisning

StimulITE madrass er beregnet til bruk direkt oppå sengeramen og trenger ikke en annen madrass under. Vektklasse brukere 25-180 kg.

For beste behandlingseffekt. Bruk kun et løst spent laken over madrasskjernen. For å beskytte undermadrassen (mot kroppsvæsler osv.) kan man bruke vår fukttoppsamler (INMATT3227) som da plasseres mellom overmadrassen og madrassbasen.

Har man inkontinens, finnes et hygienetrek som puster, men som likevel tåler fuktighet (COVIN3380B, 3480B og 3680B for bruk med madrassbas i bikubestruktur, COVIN33801BH, 3480BH og 3680BH for bruk med skumbas. Ulike størrelser for ulike madrasskjerner.)

Hvis man har behov for ytterligere komfort, for eksempel øm hud, finnes et komforttrekk i bomull, (COVST4080. En størrelse passer til alle madrass konfigurasjoner.) Det slipper gjennom luft og gir ekstra komfort til ømme kroppsdeler.

Vaskeanvisninger

Madrass: løsne borrelåsene og ta madrassen ut av trekket. Hvis madrasskjernen er støvete, går det fint å støvsuge eller blåse den ren med trykkluft. Når man senere vasker i maskin, vend eller rull madrassen, slik at de åpne cellene kommer ut mot trommelen. Hvis du har en vaskepose, beskytter det madrasskjernen, men det går også bra å vaske uten vaskepose. Bruk vaskemiddel uten blekemiddel og vask madrassen alene i vaskemaskinen. Hvis madrassen er lett tilsmusset, vask på 40°. Ved sterkere tilsmussing tåler madrassen 85 grader i 10 minutter, alt 60 grader i 30 minutter. Madrassen kan også vaskes i badekaret, dusjes eller vaskes med slange. La madrasskjernen lufttørke. Hvis du behøver å tørke madrasskjernen hurtig, bruk håndduker, hårtørker, element eller torkskåp, ca. 30 minutter (maks varme 60°).

Madrasskjernen tåler desinfeksjon av typen Virkon. Sprut da på madrasskjernen, alternativt legg hele madrasskjernen i et kar i 10 minutter med fortynt løsning. Skyll etter med vann. Inkontinensovertrekkene (COVIN) kan vaskes i vanlig maskin 95 grader og tørketromles. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel. Inkontinensovertrekket kan også tørkes av med overflatedesinfeksjon for eksempel alkohol. Fukttoppsamleren (INMATT3227) kan vaskes i vanlig maskin 95 grader og tørketromles. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel.

Rekondisjonering / Klargjøring for lager

Overtrekk og madrass er utstyrt med artikkelnummer. Vask i henhold til instruksjonene ovenfor. Overflatedesinfeksjon (type Virkon) kan brukes for å ta bort uønskede bakterier. Legg madrassen i et kar i 10 minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite madrass

Flammesikkerhet

Overtrekket og madrasskjernen (overmadrassen og madrassbasen uansett hvilken versjon du har) er branntestet i henhold til EN 597-1 og EN 597-2. Kjernen i madrassen og madrassen er behandlet for å ikke brenne med åpen flamme. Samtlige StimuLITE-produkter er dessuten branntestet og godkjente i henhold til ISO 7176-16.

Garanti

Alle StimuLITE madrasskjerner er CE-merket og har 2 (to) års garanti. Garantien inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller materialfeil. Garantien dekker ikke unormal håndtering og slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse med vasking eller tørking hvis vaskeråd ikke har blitt fulgt.

Tekniske data

Overdrass: 100 % termoplastisk polyuretan TPU i bikubestruktur. Naturligt antibakteriell, absorberer ikke lukt etter vask. Egnet til bruk for allergikere

Madrassbas standard: 100 % termoplastisk polyuretan TPU i bikubestruktur. Naturligt antibakteriell, absorberer ikke lukt etter vask. Egnet til bruk for allergikere

Madrassbas ekstra myk: Polyeter skumplast, Øko-tex sertifisert, ftalat- og latex-fri.

	3-SONE Madrass	3-SONE Madrass Ekstra Myk
Vekt:	12 kg	17 kg
Høyde:	12 cm	19 cm
Bredde:	82,5, 85 eller 90 cm	82,5, 85 eller 90 cm
Lengde:	200 cm	200 cm

Artikkel	Artikkelnummer	Størrelse	Består av
3-SONE Madrass	3ZON82BF	82,5 x 200 x 12 cm	GSR00056 + FOUNDATION33F + COVIN3380B + BAG
	3ZON85BF	85 x 200 x 12 cm	GSR00067 + FOUNDATION34F + COVIN3480B + BAG
	3ZON90BF	90 x 200 x 12 cm	SRC00024 + FOUNDATION36F + COVIN3680B + BAG
3-SONE Madrass Ekstra Myk	3ZON82B	82,5 x 200 x 19 cm	GSR00056 + FOUNDATION33 + COVIN3380BH + BAG
	3ZON85B	85 x 200 x 19 cm	GSR00067 + FOUNDATION34 + COVIN3480BH + BAG
	3ZON90B	90 x 200 x 19 cm	SRC00024 + FOUNDATION36 + COVIN3680BH + BAG
Overmadrass	GSR00056	82,5 x 200 x 7 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	GSR00067	85 x 200 x 7 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	SRC00024	90 x 200 x 7 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
Madrassbas standard	FOUNDATION33F	82,5 x 200 x 5 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	FOUNDATION34F	85 x 200 x 5 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
	FOUNDATION36F	90 x 200 x 5 cm	100 % Termoplastisk polyuretan TPU
Madrassbas ekstra myk	FOUNDATION33	82,5 x 200 x 12 cm	Polyeter skum
	FOUNDATION34	85 x 200 x 12 cm	Polyeter skum
	FOUNDATION36	90 x 200 x 12 cm	Polyeter skum

2(3) 2016-05-20

Göran Sjädens Rehabshop Norge A/S
Postboks 157 1378 Nesbru
Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru
Tlf. +47 48 50 32 97
www.rehabshop.com goran@rehabshop.com



Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite madrass

Hygienetrekk til 3-SONE Madrass	COVIN3380B	Passer til 3ZON82BF	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3480B	Passer til 3ZON85BF	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3680B	Passer til 3ZON90BF	58 % polyuretan, 42 % polyester
Hygienetrekk til 3-SONE Madrass Ekstra Myk	COVIN3380BH	Passer til 3ZON82B	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3480BH	Passer til 3ZON85B	58 % polyuretan, 42 % polyester
	COVIN3680BH	Passer til 3ZON90B	58 % polyuretan, 42 % polyester
Fuktoppsamler (sengebeskyttelse)	INMATT3227)	(passer til alle madrasser 80 x 200 cm)	68 % polyester, 30 % bomull, 2 % polyoletin
Komforttrekk	COVST4080	(passer til alle madrasssekjerner)	91 % bomull, 9 % elastan
Veske til å bære madrassen	BAG	passer til alle madrasssekjerner)	52 % akryl, 42 % bomull og 6 % polyester
Vaskepose for madrasssekjerne	LDBAGBED	passer til alle madrasssekjerner)	

Hvis du opplever ubehag ved bruk av madrassen, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller terapeut.

Lykke til med ditt StimuLITE-produkt!

Göran & Brigitte Sjödén