

Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite sengpute

Bruksområde

StimuLITE sengpute er produsert for å forebygge og behandle trykksår. Hvis du opplever ubehag ved bruk av puten, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller terapeut.

Bruksanvisning

Din StimuLITE pute kommer i ett stykke. Ta av emballasjen og legg puten i sengen. Juster ved behov.

Anvendelsesinstruksjon

Ligg på valgfri side av sengputen. Legg på et trekk på puten. Den ene siden har stabiliserende kanter som man kan ha som nakkestøtte. Den andre siden er helt glatt.

Vaskeinstruksjoner

Overtrekkene og puten kan vaskes i vanlig maskin 60 grader og tørketromles. Ved sterkere tilsmussing tåler sengputen 85 grader i 10 minutter. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel.

Tåler desinfeksjon av typen Virkon. Sprut da på madrasskjernen, alternativt legg hele madrasskjernen i et kar i 10 minutter med fortynnet løsning. Skyll etter med vann.

Rekondisjonering / Klargjøring før lager

Overflatedesinfeksjon (type virkon) kan brukes for å ta bort uønskede bakterier. Legg puten i et kar i 10 minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

Flammesikkerhet

Overtrekket og kjernen i sengputen oppfyller brannstandard EN 597-1, EN 597-2. Kjernen i sengputen er behandlet for å ikke brenne med åpen flamme. Samtlige StimuLITE-produkter er branntestet og godkjente i henhold til ISO 7176-16 og SS-EN 1021-1 og SS-EN 1021-2.

Garanti

Alle StimuLITE-produkter er CE-merket og har 2 (to) års garanti. Garantien inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller materialfeil. Garantien dekker ikke normal håndtering og slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse med vasking eller tørking hvis vaskeråd ikke har blitt fulgt.

Tekniske data

Pute 49 cm × 38 cm × 9 cm
Art.nr. PILLOW

Materiale

100 % termoplastisk polyuretan TPU i bikubestruktur. Naturligt antibakteriell, absorberer ikke lukt etter vask. Egnert til bruk for allergikere

*Lykke til med ditt StimuLITE-produkt!
Göran & Brigitte Sjöden*



Göran Sjödens Rehabshop Norge AS
Postboks 157 1378 Nesbru
Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru
Tlf. 031-48 50 32 97
www.rehabshop.com, goran@rehabshop.com