

Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite SBS Teppe

Bruksområde

StimuLITE SBS Teppe er en trykkavlastende material produsert for å forebygge og behandle trykksår og smerter hvor den ekstra polstring eller ventilasjon er nødvendig. Hvis du opplever ubehag ved bruk av produkten, avbryt bruken og ta kontakt med lege eller terapeut.

Bruksanvisning

Din StimuLITE SBS teppe kommer i ett stykke. Ta av emballasjen, ta en vanlig saks og kutte teppen i ønsket form og størrelse. Borrelås eller knuteband kan være limt eller sydd til ved behovet for stabil festing. Hvis ønskelig, kan det legges til eller tas i SBS materialet i et trekk eller kuddvar. Bruk fortrinn en fleksibel og pustende materiale som bomull eller Cordura. Ved bruk i våtrom, slik som bad eller vannsport, bruk uten trekk for bedre hygiene og raskere tørking.

Anvendelsesinstruksjon

Kan brukes døgnet rundt overalt det trenges ekstra polstring for trykkavlastning, ventilasjon eller smertelindring. Noen eksempler er posisjonering applikasjoner eller langvarig liggende, i støpte seter, bade justeringer eller for pustende rygg. Materialet er slitesterkt og kan bli kuttet med en kniv eller saks i alle størrelser og følger alle former. For posisjonering nære kroppen kan brukes Stimulite Honeycomb matte med stofftrekk på en siden. Till i motsetning til mange andre materialer, påvirket dette avanserte materialer ikke av kroppsvæsker og er lukt motstandsdyktig etter vask. Hvis du er ekstremt følsomme for trykk, bruk Stimulite Honeycomb teppe i ekstra myk versjon.

Tekniske data

	60x60 cm	90x60 cm	120x60cm
To sider åpent 125mm tykk	SBS-1	SBS-1 90/60	SBS-1/48
Åpne en side 125mm tykk	SBS-2	SBS-2 90/60	SBS-2/48
Åpne en side 125mm tykk ekstra myk	SBS-2/XS	N/A	N/A
Åpne en side med stoff 125 mm tykk	SBS-3	SBS-3 90/60	SBS-3/48
Apne en side 170 mm tykk	SBS-4	SBS-4 90/60	SBS-4/48
Apne en side 250 mm tykk	SBS-5	SBS-5 90/60	SBS-5/48
Åpne en side 250 mm tykk ekstra myk	SBS-5/XS	N/A	N/A
Åpne en side 250 mm tykk to lager	SBS-6	N/A	N/A
Perforert film på begge sider, 200mm tykk	SBS-7	N/A	N/A

Vaskeinstruksjoner

Stimulite SBS teppe kan vaskes i vanlig maskin 60 grader og tørketromles. Ved sterkere tilsmussing tåler sengputen 85 grader i 10 minutter. Brukes med mildt vaskemiddel uten blekemiddel. Stimulite SBS teppe tåler desinfeksjon av typen Virkon. Sprut da på materiale, alternativt legg hele teppen i et kar i 10 minutter med fortynnet løsning. Skyll etter med vann.

Rekondisjonering / Klargjøring før lager

Overflatedesinfeksjon (type virkon) kan brukes for å ta bort uønskede bakterier. Legg produkten i et kar i 10 minutter. Når produktet er forbrukt, leveres det inn til plastresirkulering.

Flammesikkerhet

Stimulite SBS tepper oppfyller brannstandard EN 597-1, EN 597-2. Den er behandlet for å ikke brenne med åpen flamme. Samtlige StimuLITE-produkter er branntestet og godkjente i henhold til ISO 7176-16 og SS-EN 1021-1 og SS-EN 1021-2.

Garanti

Alle StimuLITE-produkter er CE-merket og har 2 (to) års garanti. Garantien inkluderer skader som er avhengig av produksjon eller materialfeil. Garantien dekker ikke normal håndtering og slitasjeskader, eller skader som har oppstått i forbindelse med vasking eller tørking hvis vaskeråd ikke har blitt fulgt.

Materiale

100% Termoplastisk Polyuretan TPU i bikubestruktur. Naturligt antibakteriell, absorberer ikke lukt etter vask. Egnet til bruk for allergikere



Göran Sjödén's Rehabshop Norge AS
Postboks 157 1378 Nesbru
Besøksadresse: Vogellund 31 1394 Nesbru
Tlf. 031-48 50 32 97
www.rehabshop.com, goran@rehabshop.com

Anvendelses- og bruksanvisning Stimulite SBS Teppe
