



DIGITAL

Bure™

Gåbord

Bure Double 2.0 56-303

GATE
REHAB DEVELOPMENT AB

Kära användare

Gratulerar! Du har införskaffat en Bure Double. I denna bruksanvisning får du viktiga upplysningar om hur du använder gåbordet samt hur det underhålls. Vi rekommenderar att denna bruksanvisning läses noga innan hjälpmedlet används.

Vi på GATE Rehab Development önskar dig lycka till med din produkt. Hör gärna av dig till oss om du har några kommentarer, frågor eller synpunkter.

Ytterligare information finns i dokument "Teknisk manual" som kan beställas från er lokala distributör eller laddas ned via www.gaterd.se alt www.gaterd.com.

Gåbord förenklar vardagen eftersom det kan användas på flera sätt
– som uppresningshjälp, vid förflyttning (med ståplatta) eller vid rehab/gåträning.

Ett gåbord är avsett att användas på plana ytor/inomhus. Tänk på att produkten behöver en årlig översyn av tekniker eller motsvarande.

Bure Double är ett traditionellt gåbord som förfinats med en elektrisk breddning av benstativet. Elbreddningen gör det enkelt att skjuta gåbordet ända fram till brukaren, oberoende av rullstolsbredd, sängkonstruktion eller stolsbredd. Detta underlättar också för personalen vid uppresning. Med benen i det yttre läget blir gåbordet extra stabilt och kan med fördel användas av brukaren själv. Detta underlättar också för patienter som behöver extra gångutrymme.

Den låga höjden över golvet minimerar problem med att komma intill brukaren exempelvis vid sängsittande.

Max brukarvikt är 150 kg.

Justering av höjd/bredd




Önskad höjd justeras med Pil <UPP> eller Pil <NED>
Breddning av bottenstativen justeras genom Pil <BREDARE> eller Pil <SMALARE>

Justering av handtag



Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.

Höger- och vänsterjustering av armstödsplattor

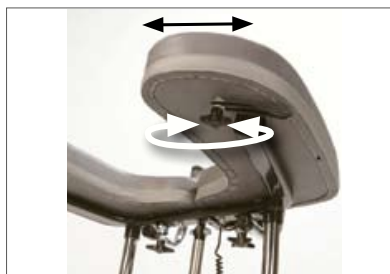

Handtagen justeras till önskad position genom att: Ratt lossas, handtagen justeras, ratt låses.

Låsning av hjul/ Upplåsning av hjul



Bure Double är utrustad med låsningsbara/bromsade hjul (grön pedalbroms). Hjulen låses genom att fotbromsen trycks nedåt och aktiveras. Vid upplåsning pressas den uppstickande delen av bromsen ned. Låsning påverkar både rullning och svängning.

Kopplingschema styrbox



För att hantera kopplingar enligt nedan så måste styrboxens täcklock tas bort. Detta görs med hjälp av en skruvmejsel eller liknande - se särskild märkning på styrboxen.

OBS! Var noga med att kontakter ansluts till rätt uttag eftersom detta annars kan skada ställdon.

1. Uttag för ställdon - höj/sänk.
2. Uttag för ställdon - breddning.
3. Uttag för fjärrkontroll.
4. Uttag för batterikontakt.
5. Uttag för stickpropp (OBS! För att IP-klassning ska gälla så ska stickpropp ALLTID vara ansluten till styrbox).

Laddning av batteri


- Stickpropp ansluts till 230V – vägguttag. Laddning påbörjas automatiskt och LED på batteriet blinkar grönt.
- Ladda batteriet i minst 8h.
- Om produkten ställs undan pga att den ej ska användas under en längre tid (mer än en vecka) så rekommenderar vi att batterikontakt lossas från styrboxen alternativt att batteriet stängs av med on/off knapp. På detta sätt elimineras risken att batteriet förstörs då styrboxen förbrukar en liten mängd ström även då bordet inte används.

LED på styrbox och batteri

- Styrbox – lyser grönt då spänning finns från batteri/nätuttag.

Batteri:

- Vid laddning lyser LED med blinkande grönt sken
- On/Off För att använda produkten - tryck på <ON>. Grön lampa börjar lysa/blinka. Med <OFF> knappen (håll in i 5s) kan man stänga av batteriet om produkten ej ska användas under en längre tid.
- Då batteriet är fulladdat så lyser LED med fast grönt sken
- Då batteri är i normalläge/drift så blinkar LED med grönt sken med OREGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.
- Då batteri behöver laddas (kvarvarande kapacitet <25%) blinkar LED med orange/rött sken med REGELBUNDET intervall enligt - 0,5 sek tänd, 4 sek släckt.

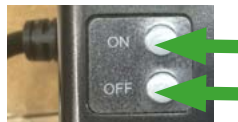

OBS! Batteriet har en inbyggd funktion som automatiskt stänger av batteriet då kvarvarande kapacitet <20%. LED är då släckt. Batteriet måste nu laddas fullt innan elektroniken på nytt kan användas.

Underhåll (Rekommenderas minst 1 gång/år.)

Kontrollera att/om

Åtgärd

Allmänt

Bordet känns stumt/glappfritt.
Bordet inte skramlar vid manövrering.
Bordet är plant och alla hjul är i kontakt med underlaget.
Bordet ej är smutsigt.

Rengör med ljum såpalösning/alkolbaserat rengöringsmedel (ej petroleumprodukter)

Armstödsplattor

Armstödsplattor är hela och rena.
Breddning armstödsplattor fungerar.

Rengör och byt om skador finns.
Byt låsratt.

Handtag

Grepp ej är skadade/smutsiga.

Handtagsinställning fungerar.

Rengör med ljum såpalösning (ej petroleumprodukter).
Byt handtagsgrepp.
Kompletera ev. låsrattar/brickor

Batteri

Kontrollera att laddkabel är ansluten till styrbox

Kontrollera att fjärrkontrollen är ansluten till styrbox

Kompletera med ny laddkabel, denna ska alltid vara ansluten till styrbox (IP65klassning).
Anslut ev. komplettera med ny fjärrkontroll.

Kontrollera att kopplingar är gjorda enligt kopplingschema

Se kopplingschema i Teknisk manual.

Kontrollera att batteri, ställdon och styrbox ej sitter/hänger löst.

Skruva åt, komplettera ev. med nya skruvförband.

Justering höjd/bredd

Höjning och sänkning fungerar.
Bordet känns stabilt vid maxinställning.
Inget glapp finns mellan vertikalt stativ och bottenstativ.

Byt ev. styrhylsa (i stativ) alt. ändpropp (i kromat rör).

Teknisk manual visar konstruktion samt vilka förband som ska kontrolleras. Kontakta distributören om glapp ej kan åtgärdas.

Klämmor för höjdjustering låser.
Infästning av elställdon ska vara glappfri.

Byt klämmor
Skruva åt resp. infästningsförband, komplettera med skruv/låsmutter.
Kontrollera så att batteri/fjärrkontroll/ställdon är rätt kopplad enligt schema. Ladda batteriet. Kontakta kundtjänst.

Reglering av höjd/breddning med fjärrkontroll fungerar.
Elställdonet ska löpa mjukt och med konstant hastighet.

Om skador finns - konsultera GATEs kundtjänst.
Kompletera med bättringsfärg.
Kompletera med nya ändskydd.

Stativdelar

Inga mekaniska skador finns.
Inga skrapmärken finns.
Ändskydd/bottenstaiv sitter på.

Hjul/broms

Hjul rullar lätt /slitbanan ej är skadad

Rengör alt. byt hjul (OBS! hjulen låses alltid i bottenstativ med kemisk lösning alt låsmutter. Hjulen är kapslade och vi rekommenderar inte att de demonteras. Byt istället ut hela hjulpaketet.

Hjulen är hårt åtdragna i bottenstativ.

Skruva åt hjulbult - komplettera med låsmutter alt. Kemisk lösning (modellberoende)

Blockeringsbroms fungerar på alla hjul.

Byt hjulpaket.

Handbroms fungerar.

Justera broms alt komplettera med nya hjul.


Generella skötselråd

- Torka av gåbord och armstödsplattor vid behov - använd tvållösning/alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel.
- Produkten kan rengöras i tvättunnel eller motsvarande då elektronik är IP65-klassad. Dock, produkten är ej rostfri vilket gör att rengöring i maskin kan förkorta produktens livslängd.
- Byt ut trasiga delar omedelbart – skall göras av kunnig personal.
- Produkten är endast avsedd för inomhusbruk.

Tekniska specifikationer

Mått anges för bord med 125 mm hjul.

Art. Nr.	Produkt Bredd	Max brukarvikt	Längd	Höjd	Vikt	Armstöd/ Innermått
56-303	58-89 cm	150 kg	87 cm	90-130 cm	40 kg	25-50 cm

 CE märkt enligt MDD 93/42/EEC

Testad och godkänd enligt EN-11199-3/2005



Vill du veta mer?

Kontakta oss på: tel 0371-318 00
Gate Rehab Development AB
Industrigatan 2 | S-330 21 Reftele
info@gaterd.se | www.gaterd.se



GATE COLLECTION