

Maks vekt: 140 g
Min vekt: 120 g
Maks lengde: 330 mm
Min lengde: 230 mm

Håndskinne
Lengde: 210 mm
Bredde: 88 mm

Grip en bryterholder montert på en håndskinne.

Den brukes til å sikre en bryter i en stabil stilling.

Grip er laget med tanke på personer som ikke er i stand til å bruke brytere med tradisjonelle monteringsløsninger .


Håndskinnen passer de fleste over ni år.

Bryter kjøpes separat.

Grip for Small switches



Ergo Contech 2017

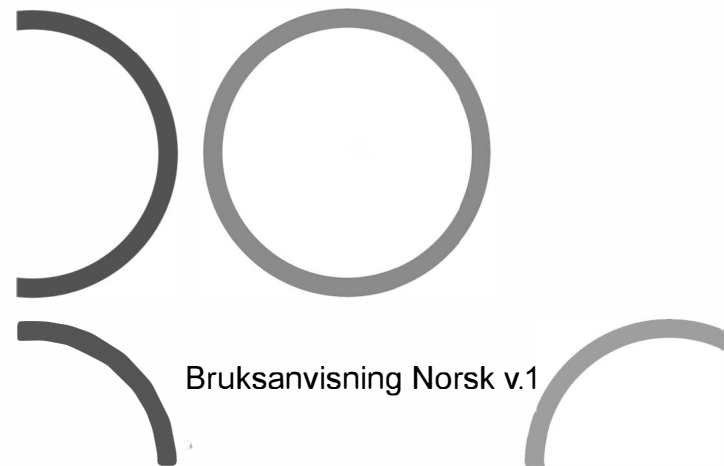

Bruksanvisning Norsk v.1

Merk!

* Bruk er ikke anbefalt for personer med ukontrollerte muskel - kontraksjoner som setter brukeren i fare for å skade seg selv. Likeså om feilstillinger i ledd utgjør en helseisisiko ved bruk av Grip.

* Håndskinnen er ikke ment for medisinsk bruk .

* Sjekk om det er behov for avlasting eller pute hvis brukeren hviler skinnen mot kroppen.

*Hvis den tiltenkte brukeren er følsom for nikkel og under bruk kan komme i kontakt med skruene, anbefales å dekke skruene med tape etc.

*Andre produktnavn enn Grip brukes til kun identifikasjonsformål og kan være varemerker for de respektive eierne. Ergo Contech frasier seg alle rettighetene til disse varemerkene.

platen skal peke mot håndleddstøtten og hull i platen skal passe med åpningene i bryterbraketten. Hvis en enkelt bryter skal brukes med plate D, skal trekantformen peke mot venstre i stedet for å peke mot håndleddstøtten.

Hvis bryteren skal brukes med en bryterplate, monteres platen til bryterbraketten (2) med de to M5 skruene (5). Fest bryteren til bryterbraketten eller bryterplaten med borrelås.

Hvis den valgte bryteren ble levert med borrelås anbefales det å bruke dette. Hvis ikke, klipp til medfølgende borrelås, til en passende størrelse for bryteren.

Fest borrelåssets krokside til bunnen av bryteren og borrelåssets løkkeside til bryterbraketten eller platen.

Tre bryter- eller enhets-kabelen gjennom åpningen i bryterbraketten og fest bryteren.

Etter at bryteren er montert, plasser hånden i håndskinnen (1) og fikser armen med de to reimene (4). Den kortere reimen brukes ved håndleddet.

Fikser reimene slik at håndskinnen gir støtte og komfort på samme tid. Dersom reimene er for lange, er det mulig å klippe de kortere med en saks.

Skyv bryterholderen (2) i en posisjon, som muliggjør god kontroll over bryteren, samtidig som fingrer ikke kan fastne i bryterholderen.

Bryterholderen kan monteres i tre forskjellige stillinger. Høyden av bryter blir deretter forandret. Bryterplatenes rotasjon kan justeres noe ved behov.

Det anbefales å prøve forskjellige stillinger for å få finne en som gir minst mulig leddbelastning.

Når en egnet innstilling er funnet, stram skruene (10,5) med en stjerne skrutrekker.

Det er ikke nødvendig å stramme skruene veldig hardt. Overdreven makt kan skade gjengene.




Plate A

Plate B

Plate C



Plate D

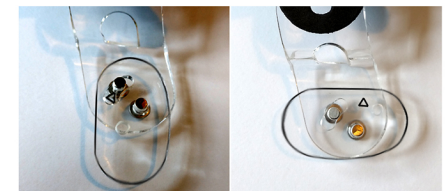

Montering:

Monter bryterbraketten (2) og håndleddstøtten (1) sammen som vist på bildet, og fest de 3 skruene (10) løst.

Identifiser valgt bryter og en passende bryterplate eller monteringsløsning som passer til bryteren.

Hvis bryterbraketten skal brukes med en av bryterplatene (A, B, C, D), skal trekantformen i

Viktig!

Når Grip brukes de første gangene, fjern håndskinnen fra hånden etter 10 minutter. Inspiser hånden og armen for trykkmerker og vurder om brukstiden kan økes.

Ikke bruk alkohol eller løsemidler til å rengjøre delene. Bruk såpe og vann.

