


Molift Quick Raiser 205

molift[®]
by Etac

BM13099 Rev. A 2021-03-02

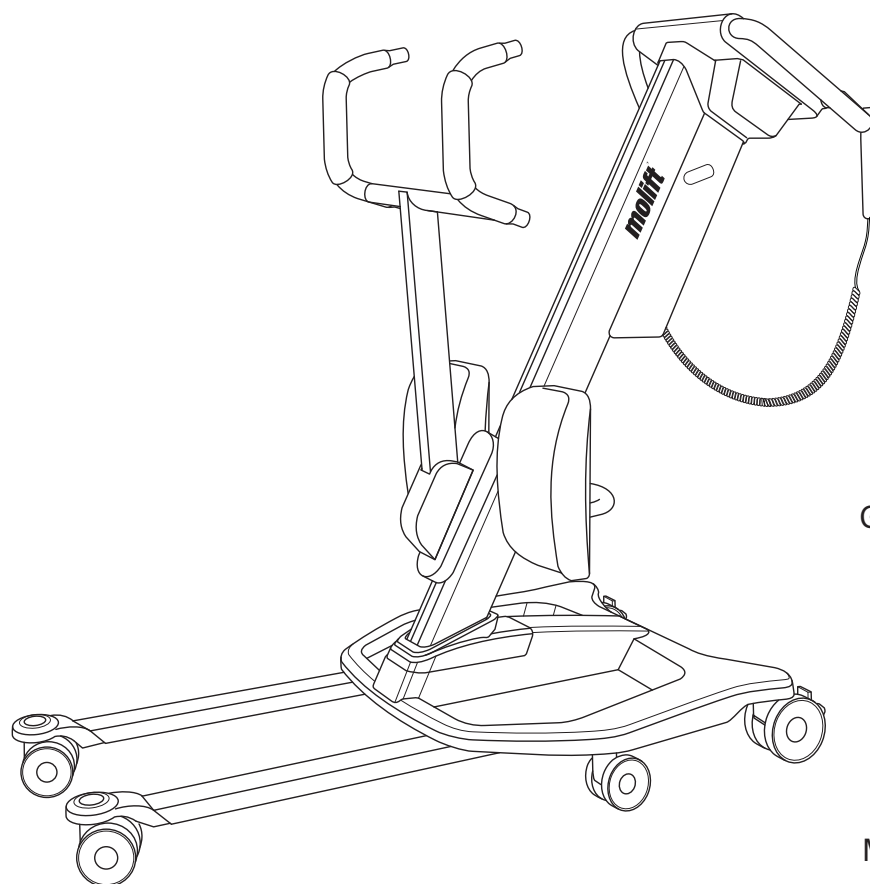

Contents

User manual - English - 3
Gebrauchsanweisung - Deutsch - 23
Brukermanual - Norsk - 43
Bruksanvisning - Svenska - 63
Käyttöohje - Suomi - 83
Manual utente - Italiano - 103
Manual d'utilisation - Français - 123
Manual de usuario - Español - 143
Handleiding - Nederlands - 163
Brugsvejledning - Dansk - 183

Molift Quick Raiser 205

NO - Brukermanual

molift[®]
by Etac

BM13003 Rev. D 2021-03-02



Norsk Manual

Viktig

Denne bruksanvisningen inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner og informasjon om bruk av løfteren og tilbehøret.

Brukeren i denne bruksanvisningen er personen som løftes.

Assistenten er personen som betjener løfteren.



Advarsel!

Dette symbolet indikerer viktig informasjon om sikkerhet. Disse instruksjonene må følges nøye.



Les bruksanvisningen før bruk!

Det er viktig å forstå bruksanvisningens innhold fullt og helt før utstyret betjenes.



Hvis nødsenk blir brukt skal løfteren merkes med "ikke i bruk" og service skal bestilles!




De roterende delene utgjør en klemfare!

Last ned dokumentasjon fra www.etac.com, slik at du har den nyeste utgaven.

"Manufacturer's Declaration" finner du i Molift Quick Raiser Teknisk Manual (TM13001)

Molift Quick Raiser 205

Komponenter:

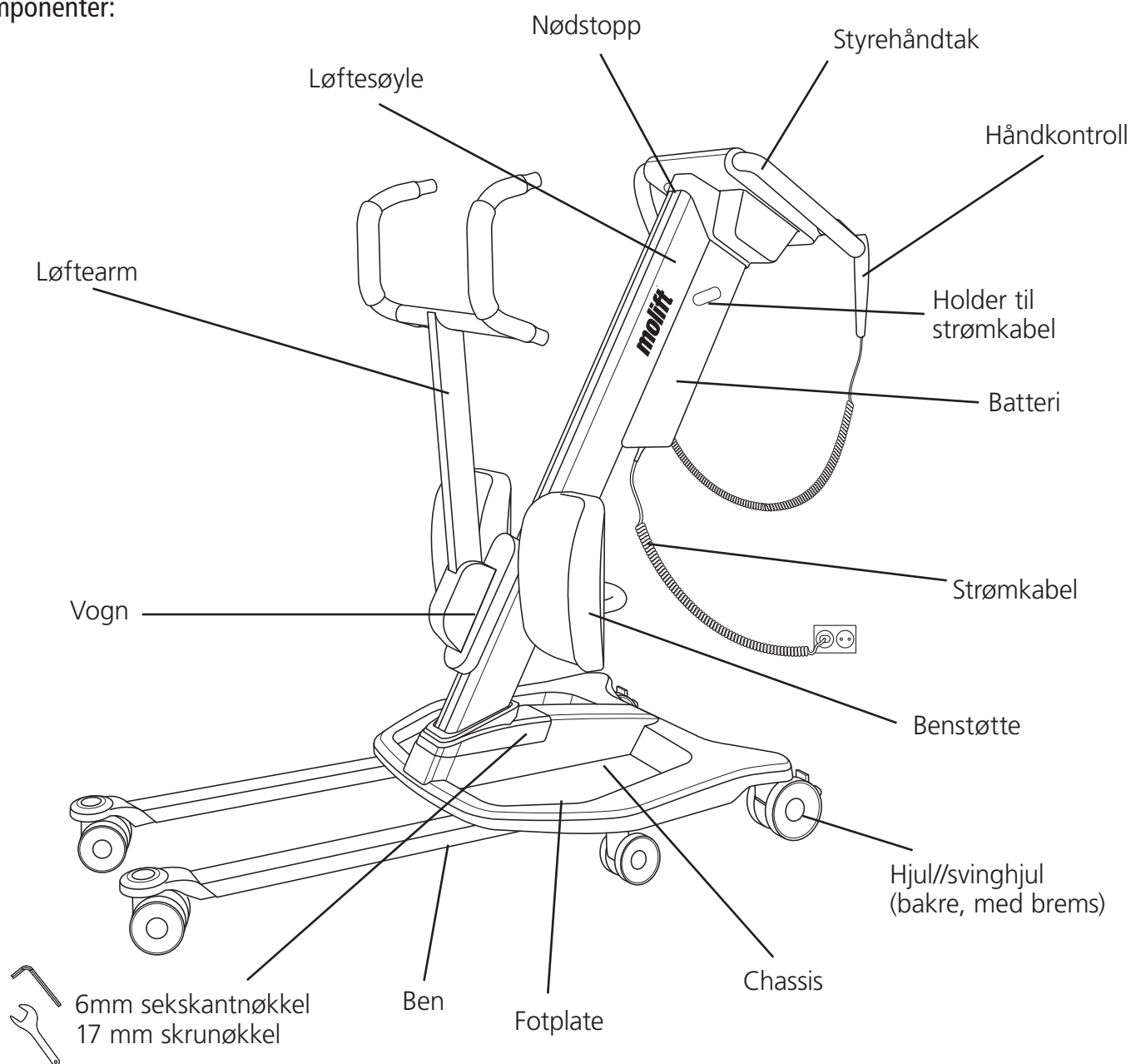

Om Molift Quick Raiser 205

Molift Quick Raiser 205 er en mobil løfter fra sittende til stående, som er ment for å reise opp og forflytte en person til/fra en stol, en rullestol eller et toalett med et seil. Løfterens utforming og løftebevegelsens geometri etterligner personens naturlige bevegelsesmønster. Molift Quick Raiser 205 er utformet for brukere som kan følge instruksjoner, har god stabilitet i overkropp og som kan bære sin kroppsvekt på minst ett av sine ben, men som trenger assistanse i stående posisjon. Løfteren er fremstilt av lette materialer, og er

utstyrt med hjul og en elektrisk motor som drives av et batteri. Løfteren betjenes med håndkontrollen eller kontrollpanelet på løfteren. Den har elektrisk regulerbare ben, og en løftekapasitet på 205 kg (451 lb).

Den er ideell for pleiesituasjoner på institusjoner, men kan også brukes i private hjem og pleiehjem. Løfteren skal bare brukes til forflytning over korte avstander, for eksempel mellom en stol og en seng eller inn til badetrom/hvilerom, og er ikke en erstatning for rullestol eller lignende.

Generelt

Samsvarserklæring



Molift Quick Raiser 205 og tilbehøret som er beskrevet i denne bruksanvisningen er CE-merket i samsvar med EU-rådsdirektiv 93/42/EEC om medisinsk utstyr i klasse 1, og er testet og godkjent av et uavhengig organ i samsvar med standardene IEC 60601-1, IEC 60601-1-2 og NS-EN ISO 10535:2006.

Bruksbetingelser

Løfting og forflytning av personer medfører alltid en viss risiko, og utstyret og tilbehøret som er beskrevet i denne bruksanvisningen skal bare brukes av kvalifisert personale.

Endringer og bruk av komponenter som er laget av andre produsenter.

Vi anbefaler at det kun brukes Etac Molift komponenter og reservedeler. Samsvarserklæringen blir ugyldig, og Etac står ikke ansvarlig for garantien dersom utstyret er utsatt for modifikasjoner. Etac har intet ansvar for eventuelle feil eller ulykker som kan oppstå ved bruk av komponenter fra andre produsenter.



Bare autorisert personale har tillatelse til å åpne løfteren eller tilbehøret for å utføre service eller reparasjoner. Fare for skade som følge av roterende deler og elektrisk støt.



Løfteren skal ikke betjenes av personen som løftes.


Garanti

2 års garanti mot feil i utførelse og materialer på våre produkter.
Se betingelser på www.etac.com

Produktidentifisering

Produktetikett / GS1-128

Strekkoden på etiketten inneholder EAN-nummer, serienummer og produksjonsdato.

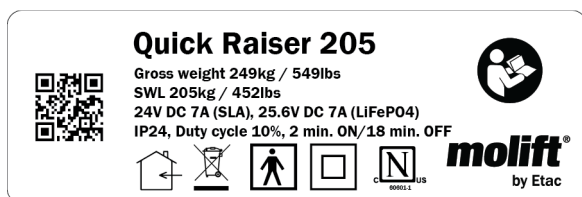

Advarselsetiketter og symboler

Detaljert forklaring av symboler på produktet:



Anvendt del type BF



Ladeindikator



CE-merket



Dobbelt isolasjon symbol



Se bruksanvisningen



Manufacturer



Kun for bruk innendørs



Date of manufacture



Skal ikke kastes som restavfall



Catalogue number



Nødsenking



Serial number



Serviceindikator



Medical Device



Batteriindikator

Tekniske data Quick Raiser 205

Sikker arbeidsbelastning (SWL):

205 kg (451 lbs)

Enhetens vekt:

Enhetens totalvekt: 41 kg/ 90.4 lb

Understell: 17.8 kg/ 39.2 lb

Løftesøyle m. batteri: 15.4 kg/ 34 lb

Benstøtte: 2.8 kg/ 6.2 lb

4-punkts løftearm: 5 kg/11 lb

Batteri:

SLA 24V 2.9 Ah

LiFePO4 25.6V 2.4 Ah

Batterilader:

Inngang: 100-240 VAC,

50-60 Hz, maks 0.35 A

Utgang: 29.4 VDC, 0,5 A

Batteri ladetid:

5 timer

Vurdert ytelse:

100 løft på: 75 kg og 500mm

Løftehastighet:

35 mm/sekund (1,4 tommer/sekund)

med 75 kg (165 lb) belastning

Beskyttelsesklasse:

IP24 (Komplett løfter).

Beskyttet mot faste gjenstander som er 12.5 mm i diameter eller større. Vannsprut mot løfteren fra hvilken som helst retning skal ikke ha noen skadelig effekt.

Betjeningskraft, knapp:

Knapper på kontrollpanelet: < 5 N

Knapper på håndsett: < 5 N

Materiale:

Aluminium, plast, stål

Motor:

Løftemotor: 24 V DC

Benspredemotor: 24 V DC

Svingdiameter:

1144 mm / 1300 mm
(45³/₆₄ tomme) / (51³/₁₆ tomme)

Forventet levetid:



Løfteren har en forventet levetid på 30 000 sykluser eller 10 år.

Applied parts:



Seil

Fotbrett

Håndhåndtak

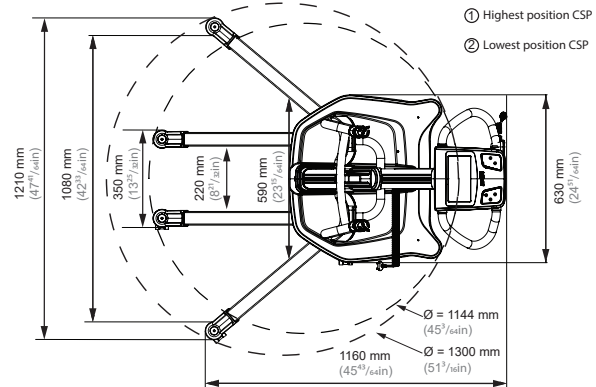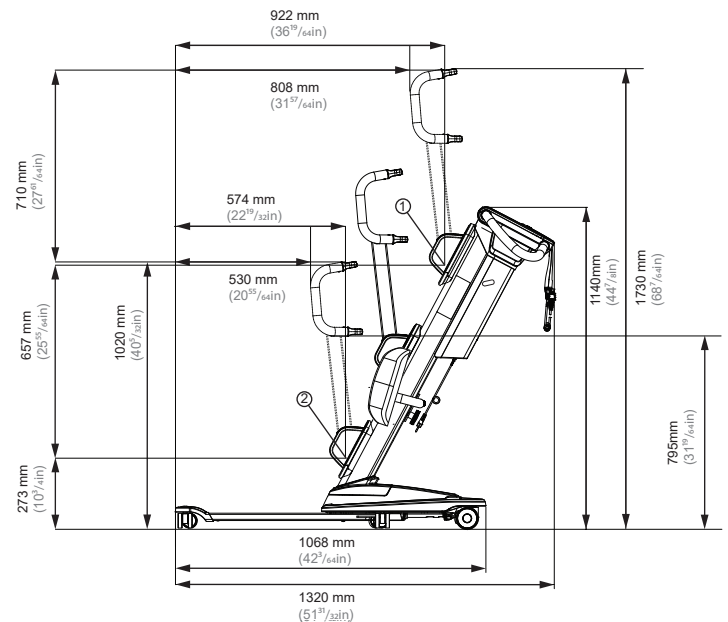


Measurements, QuickRaiser 205 with fixed legs:

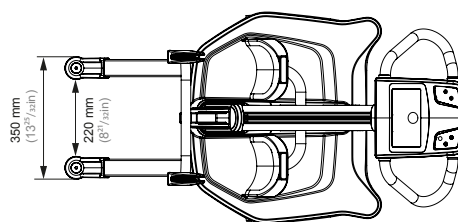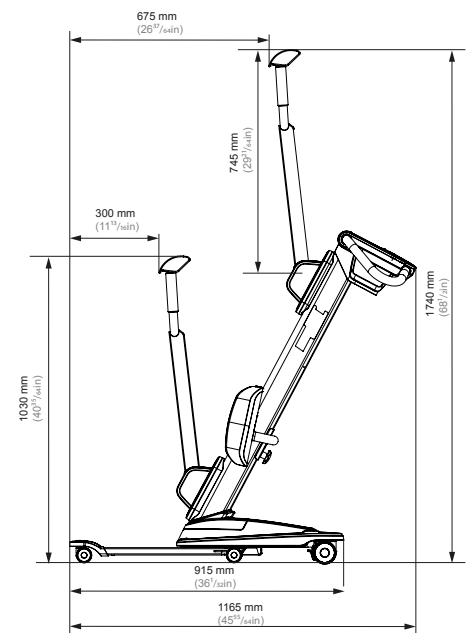


Montering

Før montering

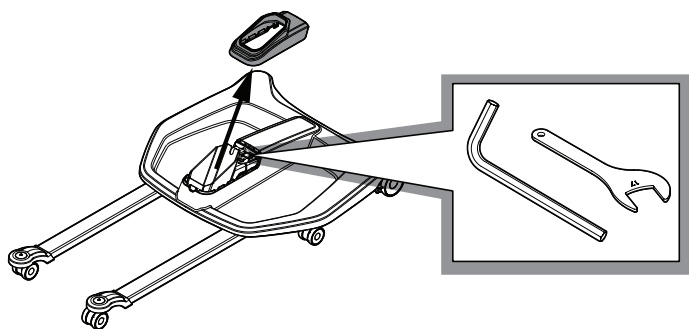


Finn monteringsverktøyene (5 mm sekskantnøkkel og 17 mm fastnøkkel)

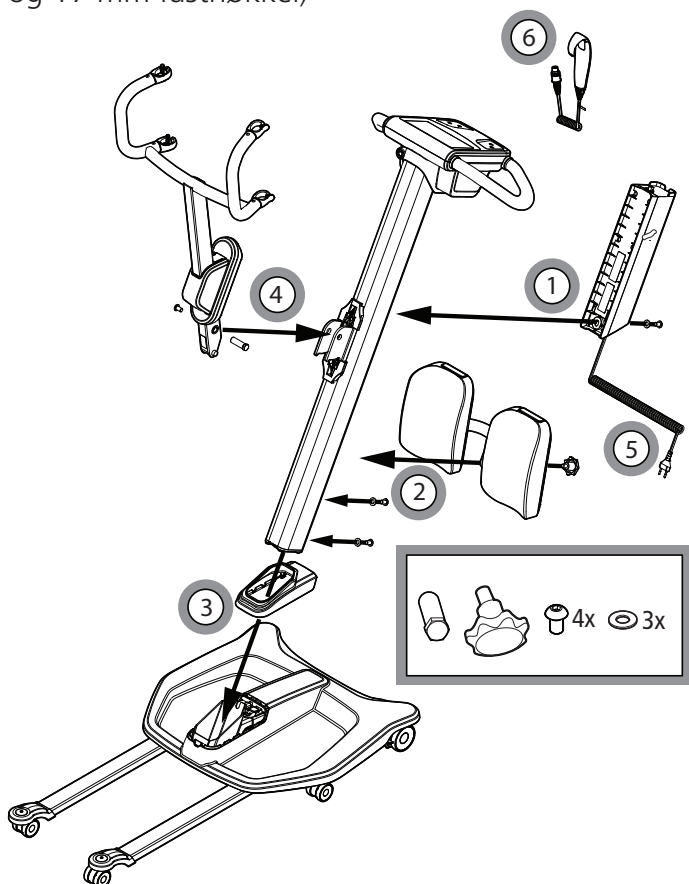


1. Batteri
2. Benstøtte
3. Søyle i understell
4. Løftearm
5. Strømkabel
6. Håndkontroll


1 - Batteri

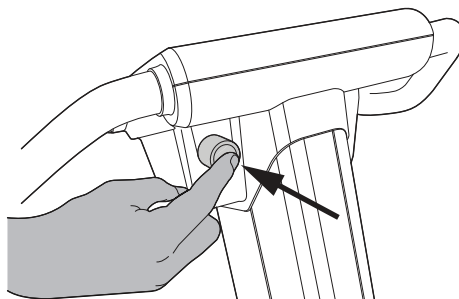

Trykk inn nødstopknappen før montering

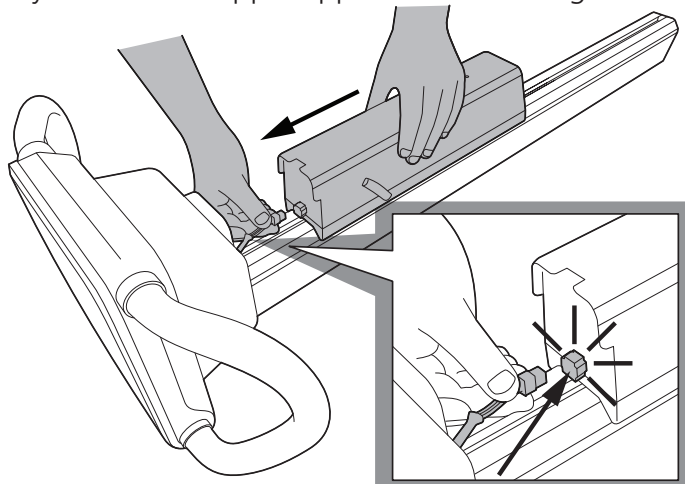


Sett søylen på et vannrett underlag. Kontroller at nødstopknappen er trykket inn. Koble ledningen fra kontrollpanelet til batteriboksen. Skyv batteriboksen på plass.

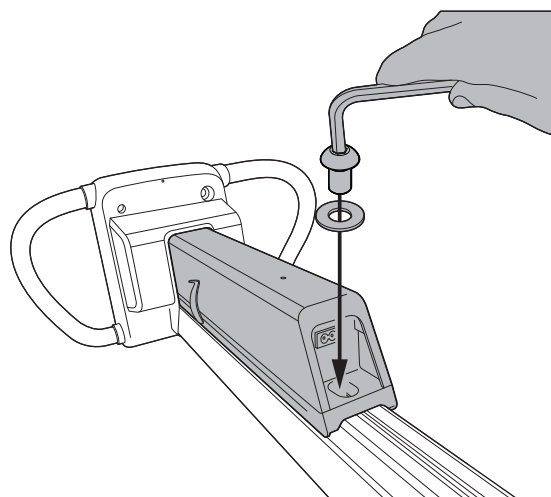

Stram skruen medurs med sekskantnøkkelen. NB! Husk å bruke skiven.



Montering av løfteren skal kun utføres av kvalifisert personell

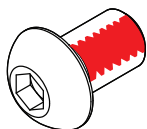


Alle skruer med gjengelås skal bare brukes én gang. Reservedel art.nr. 2920075




Sørg for at batteriet er ordentlig festet før søylen monteres i understellet

2 - Benstøtte

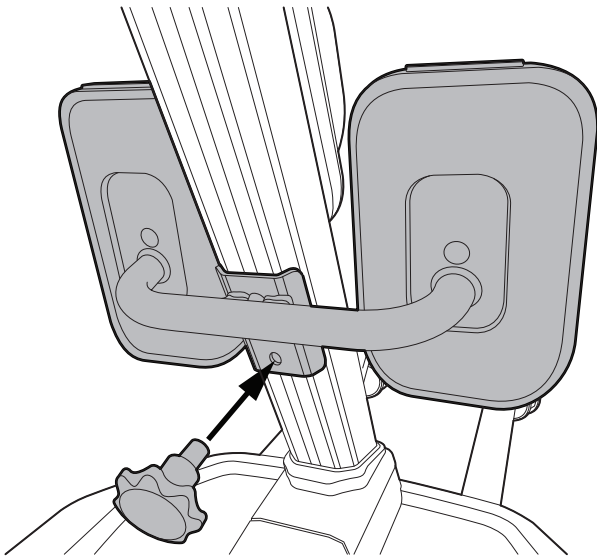


Monter benstøttebraketten.

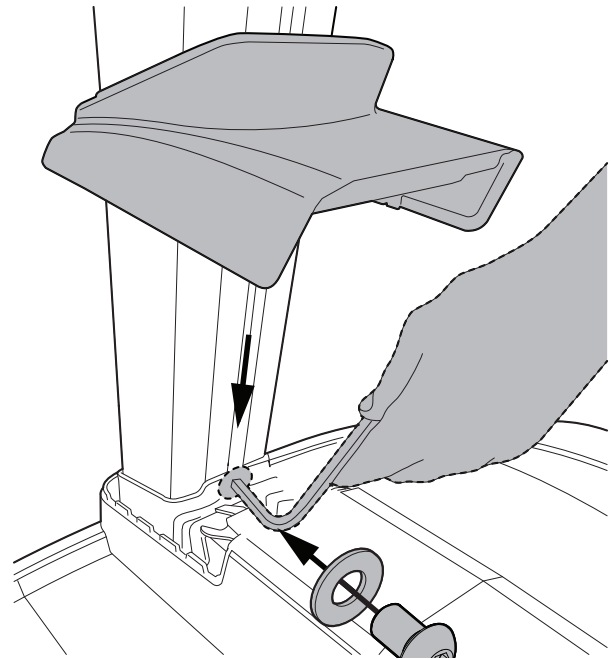


Monter skruen med skive på søylen. Skyv skruen ned til understellet, og stram skruen.

3 - Søyle i understell

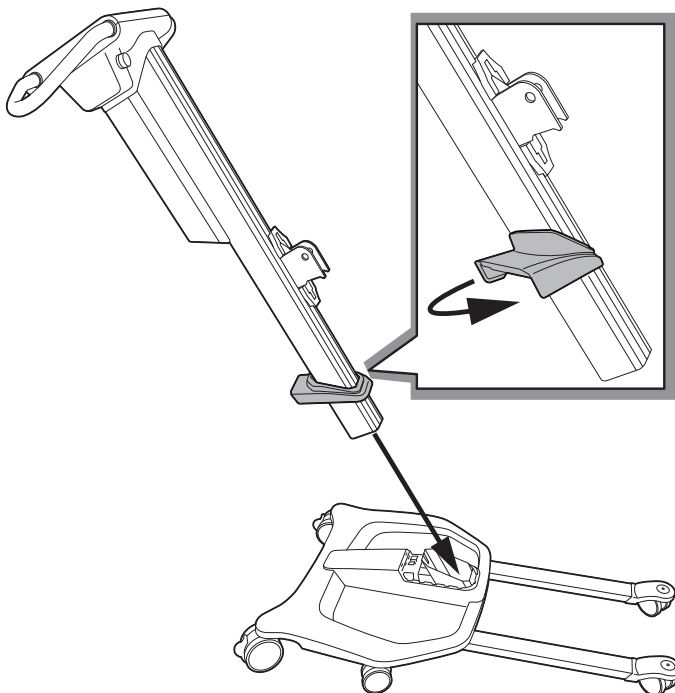

Sett dekselet på løftesøylen. Vri dekselet til siden for å feste det på søylen. Sett løftesøylen i understellet.

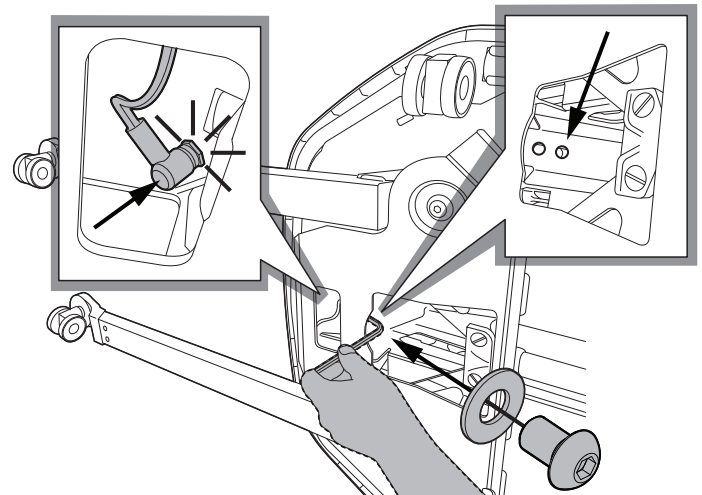


Legg løfteren på siden. Sett inn skruen og skiven i det øverste hullet, og stram skruen. Koble til kabelen mellom søylen og understellet.




Skrueene sørger for at søylen ikke kan trekkes oppover.
Løfteren må ikke brukes hvis ikke begge skruene er festet.


4 - Løftearm

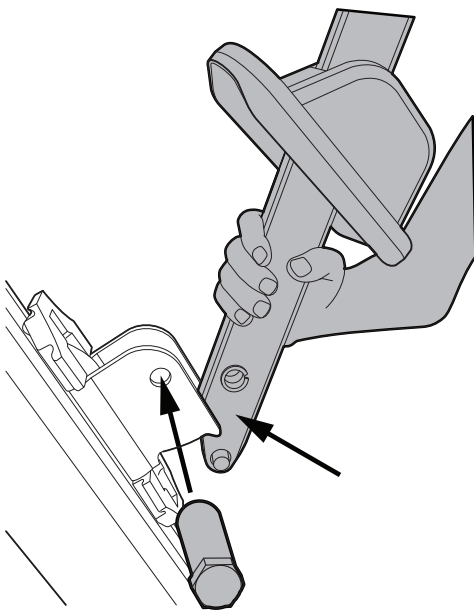

Sett dekselet på løftearmen. Sett løftearmen i vognen og sett inn bolten.

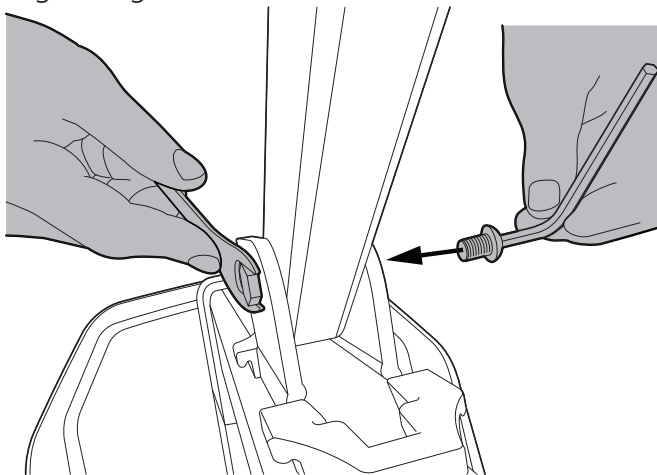


Sett inn bolten og stram skruen med en 17 mm fastnøkkel og en 6mm sekskantnøkkel. Sørg for at løftearmen er ordentlig festet til løftevognen på søylen.

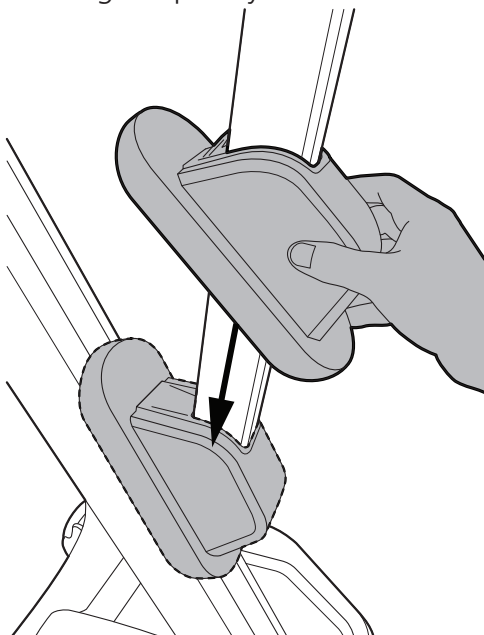


Sett det nedre dekselet på løftesøylen.

5 - Strømkabel

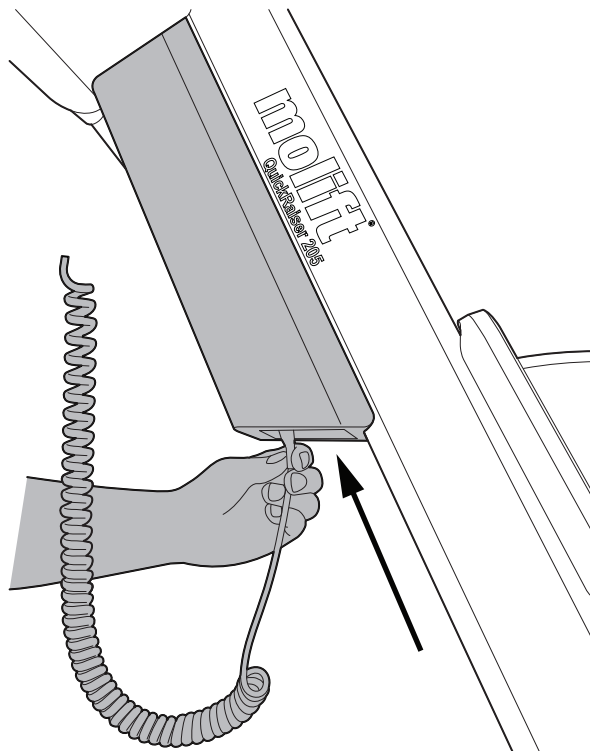


Koble ledningen til bunnen av batterienheten.

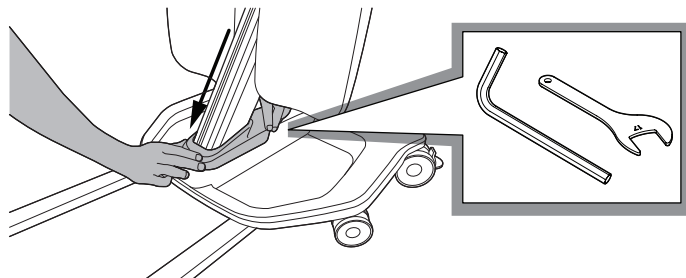

Monter det nedre dekselet på understellet. Husk å legge tilbake det medfølgende verktøyet.

6 - Håndkontroll

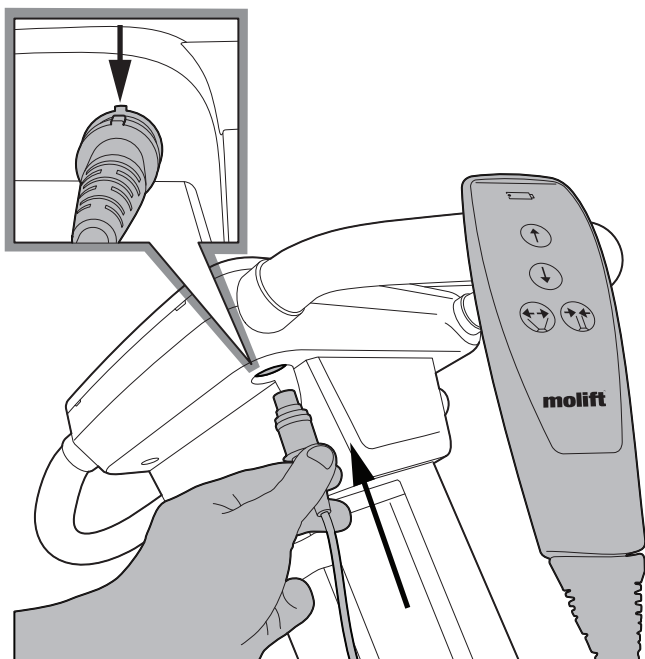

Koble håndkontrollen til kontrollpanelet.



Løfteren må ikke tas i bruk før monteringen er kontrollert ifølge sjekklisten.

Sjekkliste etter montering

Bruk denne sjekklisten til å kontrollere at løfteren er riktig montert og at den kan betjenes trygt.



Tilbakestill nødstoppekappen ved å dreie den medurs etter montering. Servicelampen skal nå lyse gult. Når sjekklisten er utført, tilbakestilles serviceindikatoren som beskrevet i monteringsanvisningen.

- ☐ Kontroller at benstøtten og løftearmen er riktig festet, og at det ikke finnes løse deler på løfteren.
- ☐ Kontroller at løftesøylen er riktig festet i understellet – og at begge skruene er strammet.
- ☐ Koble løfteren til et strømuttak for å kontrollere at den integrerte batteriladeren fungerer. Lad batteriet om nødvendig.
- ☐ Kontroller at løfteren ikke har synlige skader eller andre feil.
- ☐ Foreta ett løft med 50–100 kg belastning
NB! Løfteren kan ikke betjenes under lading.

Reset serviceindikator

Hvis serviceindikatoren lyser gult, må du kontakte din Molift-servicepartner for å få utført nødvendige tiltak.

Serviceindikatoren begynner å blinke gult igjen når det har gått 12 måneder og det er tid for periodisk inspeksjon.

Bruke Molift Quick Raiser 205

Generelle sikkerhetshensyn

Bruk bare tilbehør og seil som er justert slik at de passer til brukeren, type funksjonsnedsettelse, størrelse, vekt og type forflytning.

Driftspauser/driftssyklus.

Molift Quick Raiser 205 skal kjøres konstant i maksimalt 2 minutter (med maksimal last), deretter hvile i minst 18 minutter. Driftssyklus 10 %. (Intervaller i henhold til standarden ISO-EN 10535)

Sikker arbeidsbelastning

Løfteren er merket med sikker arbeidsbelastning (SWL)



Hvis den maksimale sikre arbeidsbelastningen for løfteren, opphenget og kroppsstøtten er forskjellig, skal den laveste maksimale lasten alltid brukes



Molift-løftere skal bare brukes til å løfte personer. Bruk aldri løfteren til å løfte eller flytte gjenstander av noe slag.

Før bruk/daglig kontroll

Inspeksjon som utføres daglig eller før bruk:

- ☐ Kontroller at det ikke finnes synlige skader, feil eller deformeringer på løfteren.
- ☐ Kontroller at løftearmfestet, benstøtten, batteriboksen og alle avtakbare deler er riktig montert og festet
- ☐ Test nødstopppknappen
- ☐ Kontroller batterinivåindikatoren og servicelampen

- ☐ Pass på at stroppene på seilet ikke har synlig skade eller slitasje.
- ☐ Kontroller at hjulene ruller fritt og at løfteren er lett å manøvrere
- ☐ Prøvekjør løfterfunksjonene og kontroller at det ikke kommer unormale lyder fra løfteren



Hvis det er feil eller skader på seilet, må løfteren tas ut av bruk og merkes med "i ustand".

Håndkontroll

Håndkontrollen har 4 knapper for løfting og senking av løftearmen og inn-/utfelling av bena. Håndkontrollen har en indikatorlampe som tennes når batterinivået er lavt og løfteren må lades

Håndkontroll, 4 knapper
Art.-nr. 2910010


Håndkontroll, 2 knapper
Art.-nr. 2910011

Løftearm - Opp / Ned

NB! Løfteren er mest ustabil i øverste stilling.

Ben - Inn / Ut

NB! Spre bena for høyere stabilitet og bedre tilgang til stolen eller toalettet.

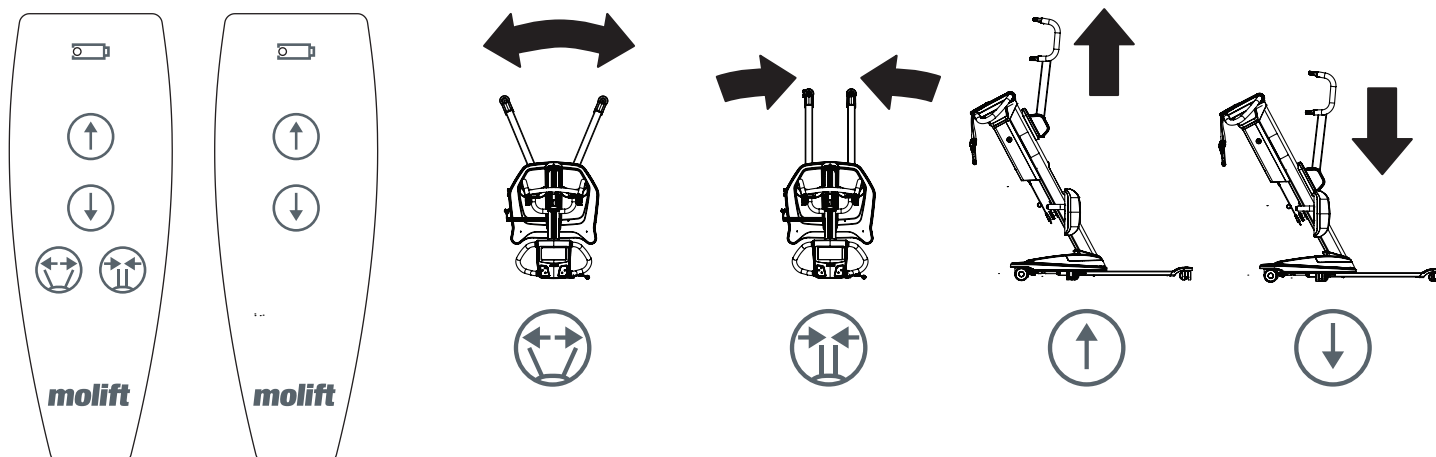

Sikkerhetsinnretninger

Molift Quick Raiser 205 er utstyrt med flere sikkerhetsinnretninger, som har til formål å hindre skade på personale og utstyr i tilfelle feil bruk eller feil på enheten.

Løfteren har en overbelastningsføler, som hindrer at løfteren kan brukes hvis lasten overstiger sikker arbeidsbelastning.

Opphenget er hengslet for å hindre at brukeren kommer i klem mellom armen og opphenget.

Elektronikken deaktiveres hvis den blir overopphetet. Vent til løfteren er kjølt ned før den brukes igjen.

Styrehåndtak

Bruk styrehåndtakene til å flytte løfteren.




Unngå å skyve eller trekke i brukeren, løftesøylen eller løftearmen. Det kan føre til stabilitetsproblemer, og løfteren kan velte.


Løfteren skal bare brukes til forflytning over korte avstander. Den er ikke en erstatning for en rullestol eller lignende.

Bremser

De bakre hjulene/svinghjulene er utstyrt med bremses. Tråkk på bremsen for å låse hjulet. Skyv opp eller tråkk på den øvre delen av bremsen for å frigjøre den.

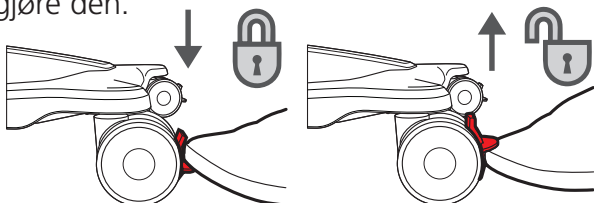


Nødstopp/nødsenkning

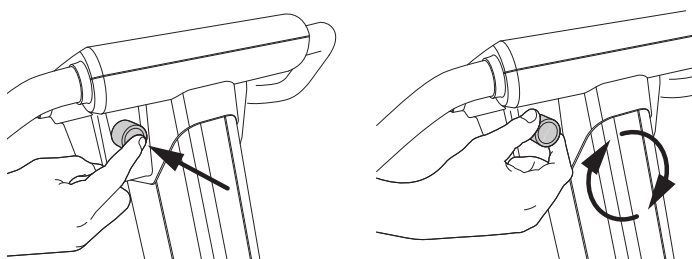

Nødstopp

Nødstopppknappen slår av strømmen når den trykkes inn. Drei den medurs for å tilbakestille den.


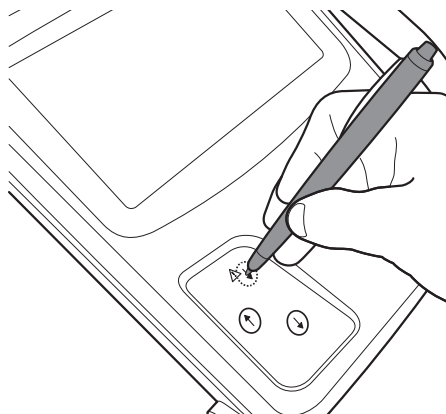


Elektrisk nødsenk

Bruk en penn eller en skarp gjenstand til å holde inne knappen for elektrisk nødsenkning for å senke opphenget. Den elektriske nødsenkfunksjonen fungerer ikke hvis nødstopppknappen er aktivert.



Bruk den elektriske nødsenkingen bare hvis ingen andre knapper fungerer.

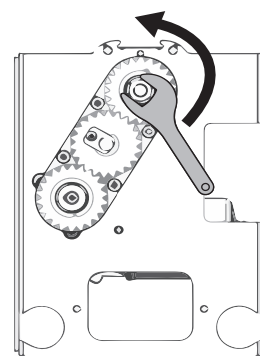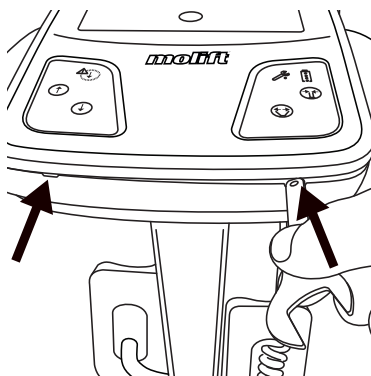

Manuell nødsenkning

Bruk fastnøkkel i det nedre dekselet til å vippe av dekselet på kontrollpanelet ved to punkter.



Trykk inn nødstopppknappen før dekselet tas av. Roterende deler medfører en klemfare!

Bruk den medfølgende 17 mm fastnøkkel til å dreie kuleskrue moturs til brukeren er senket ned. Den manuelle nødsenkfunksjonen skal bare brukes når elektrisk nødsenkning ikke fungerer.



Hvis nødsenk blir brukt skal løfteren merkes med "ikke i bruk" og service skal bestilles!

Elektronikk

Transport- og driftsbetingelser

Transport og lagring

Ved langtidslagring anbefales det å aktivere nødstopknappen (trykket inn).

Løfteren kan lagres og transporteres ved temperaturer mellom -25 - 70 °C.

Drift

Løfteren er konstruert for bruk ved vanlig romtemperatur (+5 til +40 °C).

Lufttrykk: 70 – 106 kPa

Relativ fuktighet: 15 - 93 %

Etter lagring eller transport i andre temperaturer må løfteren stå i et rom med egnet temperatur til den når sikker driftstemperatur.



Medisinsk elektrisk utstyr krever spesielle forholdsregler med hensyn til elektromagnetisk kompatibilitet (EMK). Flyttbart eller bærbart radiokommunikasjonsutstyr kan påvirke det medisinske elektriske utstyret, og skal holdes minst 25 cm (10 tommer) fra elektronikken på løfteren.

Batteri

Molift Quick Raiser 205 leveres med et 24V SLA batteri eller et 25.6V LiFePO4 batteri, hvor begge varianter har en integrert lader.

SLA batteriet har en estimert livslengde på omtrent 500 ladesykluser.

LiFePO4 batteriet har en estimert livslengde på omtrent 2000 ladesykluser



Lad batteriet når du mottar det, og deretter hvert halvår, for å unngå batterisvikt.



Batteriene må kastes som spesialavfall ifølge gjeldende bestemmelser. Skal ikke kastes som restavfall

Batteri- og serviceindikator

	Skrunøkkelsymbol/ serviceindikator
	Batterisymbol/ batteriindikator

Det elektriske systemet har en strømsparefunksjon som slår av det elektriske systemet fem minutter etter siste betjening. Alle indikatorer slukkes. Systemet aktiveres ved å trykke på en av betjeningsknappene

Batteriindikator på kontrollpanel

Når batteriindikatoren lyser gult, har løfteren tilstrekkelig strøm igjen til én fullstendig løftesyklus med maks. belastning. Når batterinivået blinker gult, er det bare mulig å senke løftearmen.

Batteriindikator		Batterinivå
	Grønn	80% eller mer
	Grønn	80 - 60%
	Grønn	60 - 40%
	Grønn	40 - 20%
	Gul eller gul blinking	20 % eller mindre (løfteren må lades)

Serviceindikator (fra 01.01.2018)

Elektronikken i løfteren registrerer løftet vekt og antall løft. Etter en bestemt driftsperiode vises et signal om at det er behov for service.

<i>Servicelampe</i>	<i>Modus</i>
Lyser ikke	Ikke behov for service
Blinkende grønn	Bestill service
Gul	Behov for periodisk inspeksjon
Rød	Utfør service

Serviceindikator (frem til 31.12.2017)

Elektronikken i løfteren registrerer løftet vekt og antall løft. Etter en bestemt driftsperiode vises et signal om at det er behov for service.

<i>Servicelampe</i>	<i>Modus</i>
Lyser ikke	Ikke behov for service
Gul	Bestill service
Gul blinking	Behov for periodisk inspeksjon
Rød	Utfør service




Ikke posisjoner løfteren på en måte som gjør det vanskelig å trekke ut strømkabelen



Løfteren må ikke lades på badet eller i rom med våte flater!



Trekk støpselet ut av stikkontakten før løfteren flyttes

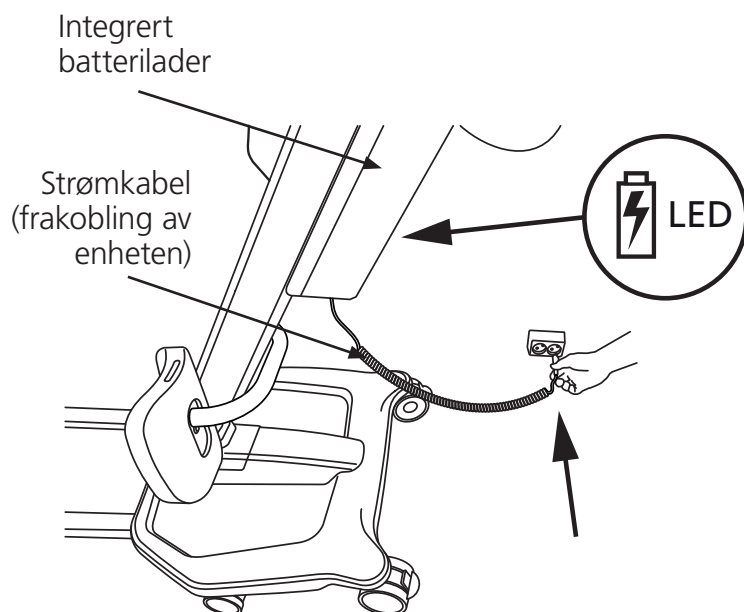Lading

Løfteren har en integrert lader. Parker løfteren og koble den til en stikkontakt for å lade batteriet. LED-lampen bak på batteriboksen lyser rødt under lading.

LED-lampen på batteribokset lyser grønt når løfteren er ferdig ladet.

LED-lampene på kontrollpanelet vil lyse hvert 10. sekund under lading.

Forflytning

Planlegg løfteoperasjonen på forhånd for å sikre at den foregår mest mulig trygt og uproblematisk. Husk å arbeide ergonomisk. Vurder risikoen og ta notater. Assistenten er ansvarlig for brukerens sikkerhet.

Bruke seil

Det er viktig å teste seilet med den individuelle brukeren og i den tiltenkte løftesituasjonen.



Les bruksanvisningen for seilet før bruk.




Ikke bruk seil som er skadet eller svært slitte.

Seil fra andre produsenter

Bruk bare Molift-seil. Etac har intet ansvar for eventuelle feil eller ulykker som kan oppstå ved bruk av seil fra andre produsenter.

Regulere benstøtten


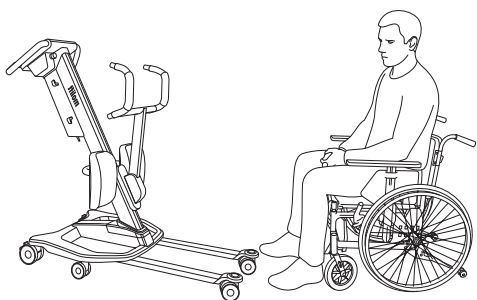


Plasser Quick Raiser 205 foran brukeren. Plasser føttene på fotplaten. Hjelp om nødvendig pasienten å plassere føttene riktig. Lås hjulene på løfteren før brukeren løftes. Optimal vinkel i brukerens ledd før løfting er 90 grader.




Pass på at høyden på benstøtten er riktig justert i forhold til den aktuelle brukeren. Toppen på putene bør være 2 cm under brukerens kne.

Bruk knotten til å justere benstøtten opp eller ned ved behov.

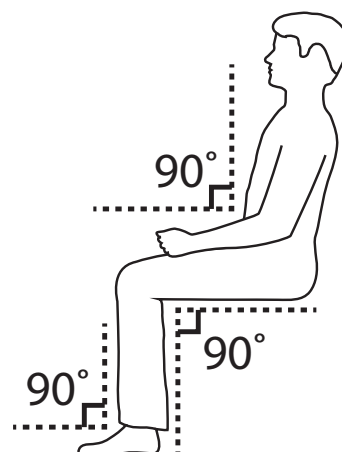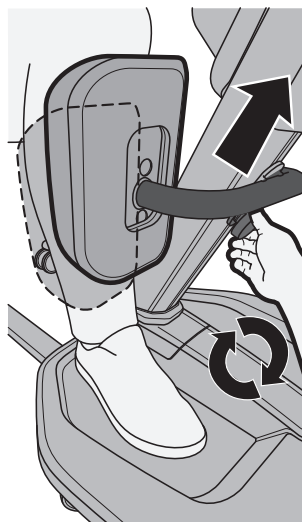


Sørg for at brukeren ikke lener seg frem eller svaier til sidene før og under løfting og senking av brukeren.

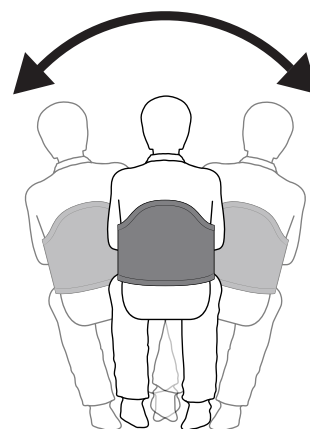


Alternative kneputer med stropper


Alternative kneputer kan tas av og vendes 180 grader for økt støtte på enten innside eller utside av brukerens ben.

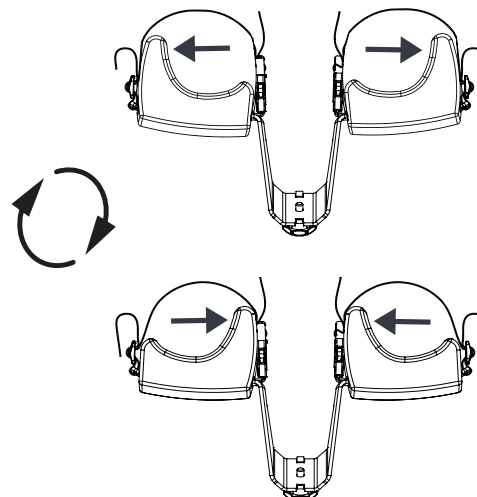

Bruke 4-punkts løftearm

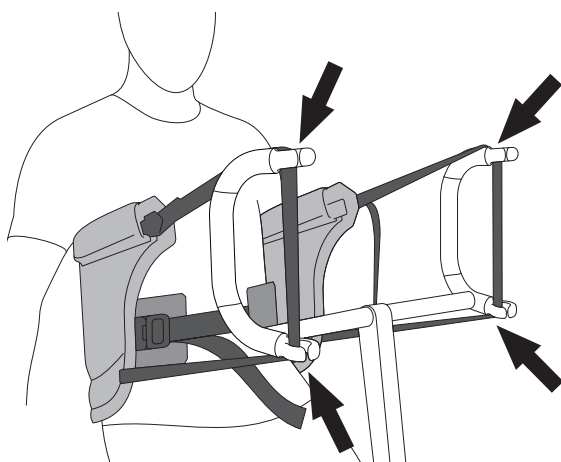


Fest seilet til løftearmen ved å føre stroppen inn i alle 4 krokene.

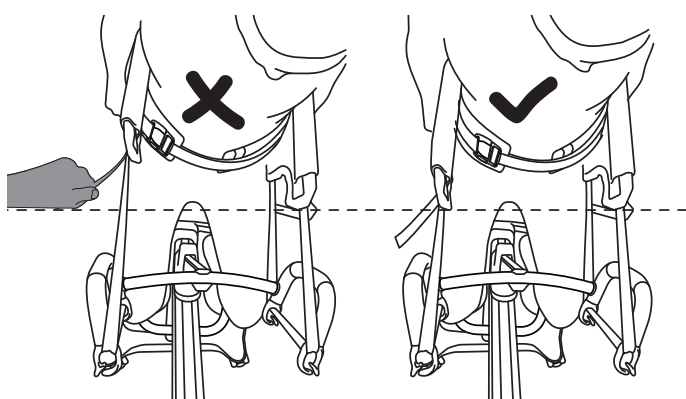

Trekk i den løse stroppen for å justere stropplengden. Pass på at begge sider har samme lengde.


Pasientens vekt sørger for at stroppen låses fast i løftearmen. Brukeren må lene seg litt bakover under løfting, og om mulig holde seg fast i håndtakene.

Fjerne seilet

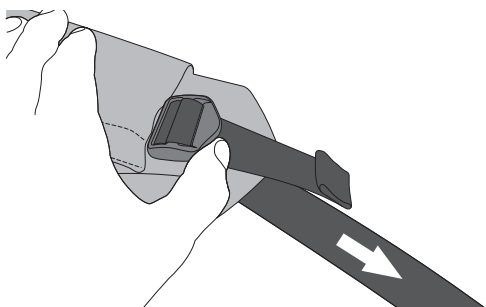


Løsne stroppen igjen ved å vinkle spennen og trekke ut stroppen.

Bruke 2-punkts løftearm

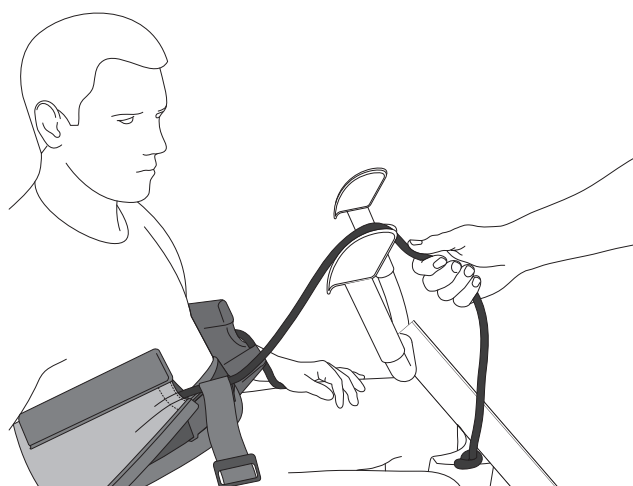

På 2-punkts løftearm festes tauene til løftearmen ved å stramme dem fra oversiden og trekke dem inn i taufestene.

Fjerne seilet

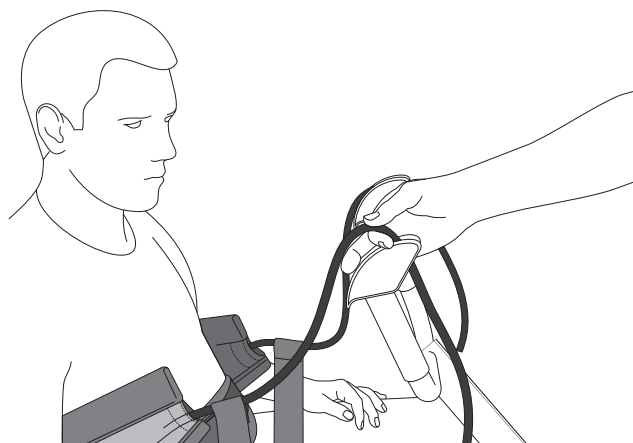

Løsne båndet ved å føre fingrene langs tauet bort fra pasienten.




RgoSling Active kan bare brukes med 4-punkts oppheng. RgoSling Stand Up kan bare brukes med 2-punkts oppheng.


Løfting/senking

Stå ved siden av personen du løfter når brukeren flyttes. Kontroller at armer og ben ikke kommer i veien for sete, seng osv. Oppretthold øyekontakt med brukeren, slik at vedkommende føler seg trygg.

Om mulig: Fell ut hjulunderstellet til full bredde før løftet, ved å bruke knappen for justering av understellsbredde på håndkontrollen.

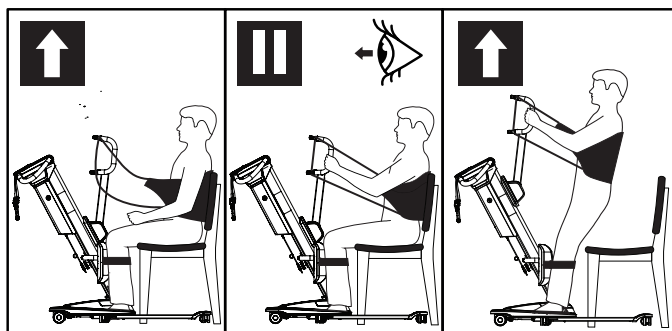


1. Kontroller at seilet sitter som det skal rundt brukeren og at stroppløkkene er festet riktig til krokene på opphenget.
2. Kontroller at brukeren har begge føttene godt plassert på fotplaten på løfteren.
3. Stram opp seilstroppene uten å løfte brukeren. Kontroller at begge løkkene på seilet er riktig festet, for å unngå at brukeren glir eller faller.
4. Kontroller at beltespennen sitter som den skal
5. Løft brukeren til stående stilling, og stram og juster seilet om nødvendig.

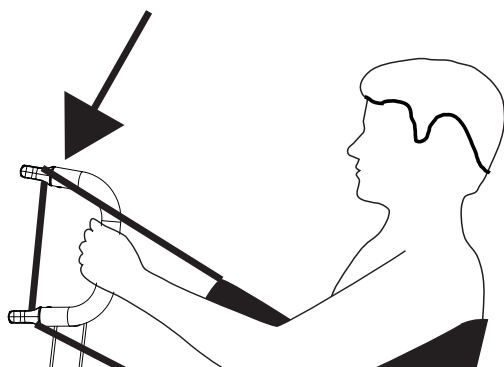

Sørg for at brukerens hender er plassert på riktig måte, slik at løfteselene ikke klemmer hendene og fingrene til brukeren.

Forflytning

Løft pasienten forsiktig til bakenden går klar av setet, og stram beltet. Lås opp hjulene på løfteren og flytt pasienten til neste sted.

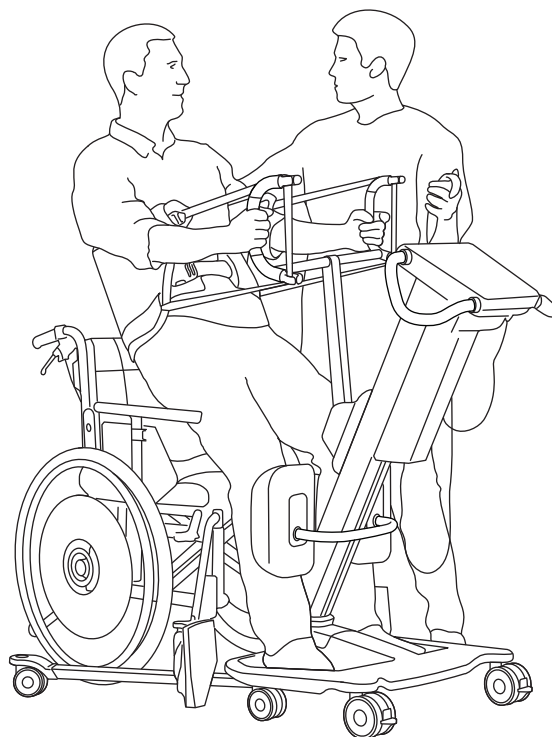

Vær forsiktig for å unngå kollisjon med møbler, vegger, dører osv. under forflytning.



Løfteren skal ikke brukes til å løfte eller flytte brukere på skrått underlag.

Unngå tykke tepper, høye dørterskler, ujevne overflater eller andre gjenstander som kan blokkere hjulene. Løfteren kan bli ustabil hvis den tvinges over slike hindringer, noe som øker risikoen for å velte.

Løfteren skal bare brukes til forflytning over korte avstander. Den er ikke en erstatning for rullestol eller lignende.

NB! Hjulene på gjenstanden som brukeren løftes fra eller til, må være i låst stilling.


Tilbehør

(Anbefalt) tilleggsutstyr og tilbehør til Molift Quick Raiser 205.

Tilbehør


Skjøteledning

Art.nr.: 2920117

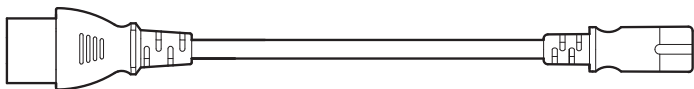


Antiskli Innlegg sett for fotbrett

Art.nr.: 2920151

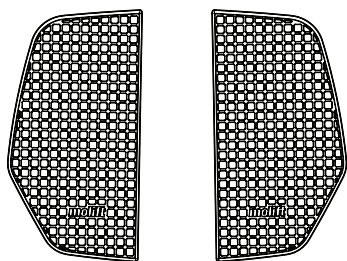

Fotbrett, forhøyet 10 cm

Art.nr.: 2910065

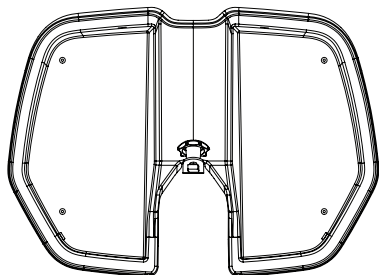

Komplett sett med brakett og store kneputer

Art.nr.: 2910056

Store kneputer


Art.nr.: 2910077

Komplett sett med brakett og små kneputer

Art.nr.: 2910059

Små kneputer

Art.nr.: 2910076


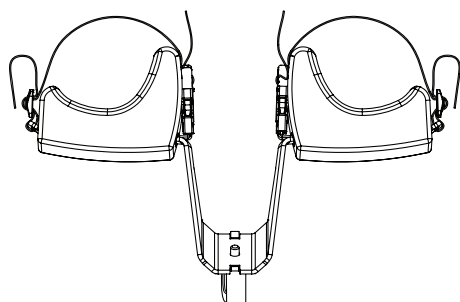


Løftearm og seil

4-punkts løftearm:

Quick Raiser Active løftearm

Art.nr.: 2910060

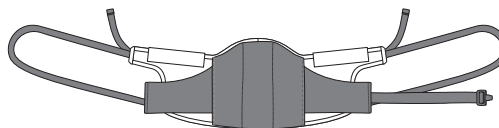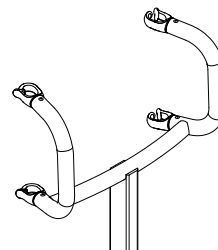

Rgosling Active

Art.nr.: 1720910

Art.nr.: 1720920

Art.nr.: 1720930

Art.nr.: 1720940

Art.nr.: 1720950

Størrelse XS

Størrelse S

Størrelse M



Størrelse L

Størrelse XL

2-punkts løftearm:

Quick Raiser Stand Up løftearm

Art.nr.: 2910061

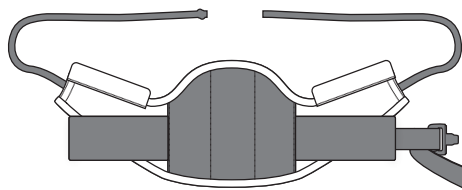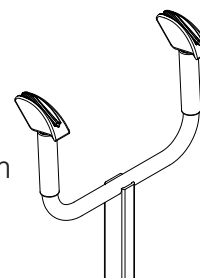

Rgosling Stand Up

Art.nr.: 1720710

Art.nr.: 1720720

Art.nr.: 1720730

Art.nr.: 1720740

Art.nr.: 1720750

Størrelse XS

Størrelse S

Størrelse M

Størrelse L

Størrelse XL

Rgosling Stand Up Padded

Art.nr.: 1720810

Art.nr.: 1720820

Art.nr.: 1720830

Art.nr.: 1720840

Art.nr.: 1720850

Størrelse XS

Størrelse S

Størrelse M

Størrelse L

Størrelse XL

Vedlikehold

Rengjøring og desinfeksjon

Vaskes regelmessig. Rengjør overflater med en fuktig klut og et egnet pH-nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk løsemidler eller sterke væsker. Det kan skade løfterens overflater. Ved nødvendig desinfeksjon: bruk isopropylalkohol. Unngå slipende rengjøringsprodukter.

- Fjern dekselet på løftearmen og rengjør under.
- Fjern om nødvendig benstøtten, slik at den kan rengjøres med rennende vann.
- Fjern hår og lo fra hjulene, og kontroller at hjulene roterer fritt.

Rengjør kontakt og håndkontroll med isopropylalkohol for å fjerne fett og smuss om nødvendig. Kontroller nødstoppfunksjonen etter rengjøring. Løfteren skal ikke utsettes for rennende vann.



Pass på at etikettene ikke blir skadet eller løsner under rengjøring.

Rekondisjonering

Følg prosedyren for rengjøring og montering, utfør periodisk inspeksjon og bruk sjekklisten etter montering for å rekondisjonere løfteren.

Gjenvinning

Se "Instruksjoner for gjenvinning" for riktig kassering av produktet. Se www.etac.com.

Reservedeler

En liste over reservedeler er tilgjengelig på forespørsel.

Periodisk inspeksjon

Periodisk inspeksjon, omfang

Periodisk inspeksjon er en visuell undersøkelse (særlig av løfterens bærende konstruksjon og løftemekanisme med festepunkter, bremses, betjening, sikkerhetsinnretninger og personløfterhater) ifølge den periodiske inspeksjonsrapporten for Molift Quick Raiser 205. Se www.etac.com.



Hvis det oppstår fare for sikkerheten, skal løfteren umiddelbart tas ut av bruk og merkes tydelig med "i ustand". Løfteren skal ikke brukes før den er reparert.

Ved periodisk inspeksjon skal personen som foretar inspeksjonen fylle ut inspeksjonsrapporten for Molift Quick Raiser 205. Inspeksjonsrapporten skal tas vare på av personen som foretar inspeksjonen. Dersom kontrollen avdekker defekter og skader, skal løfteren tas ut av bruk og merkes med «i ustand» til den er reparert. Etter den regelmessige kontrollen er gjennomført, tilbakestilles serviceindikatoren, se side 51.

Periodisk inspeksjon skal utføres minst én gang i året, eller oftere hvis det er påkrevd i lokale bestemmelser. Inspeksjonen skal utføres av servicepersonell som er autorisert av Etac. Kontakt Etac på molift@etac.com for opplæring og autorisasjon, eller for anbefaling av en godkjent servicepartner.

Feilsøking

Symptom	Mulig årsak/tiltak
Løftesøylen er ustabil	Låseboltene er ikke strammet eller løftesøylen står ikke riktig plassert i understellet / kontroller om søylen er riktig plassert i understellet og/eller stram boltene
Løfteren kan bare beveges én vei (opp eller ned) / bena kan bare beveges én vei (inn eller ut)	Feil på håndkontrollen / skift ut med alternativ styreenhet fra annen løfter og/eller ny håndkontroll
	Feil på elektronikken / kontakt den lokale servicerepresentanten
Løfteren beveger seg opp og/eller ned av seg selv / bena beveger seg av seg selv	Kortslutning mellom håndkontrollen og løfteren / rengjør kontaktene på håndkontrollen og understellet med sprit for å fjerne fett og smuss
	Håndkontrollen er defekt / skift håndkontrollen / kontakt den lokale servicerepresentanten
	Releene/elektronikken fungerer ikke som de skal / skift elektronikken/releene / kontakt den lokale servicerepresentanten
Løftearmen beveger seg ikke / bena beveger seg ikke	Utladet batteri / lad batteriet
	Nødstopp aktivert / dreie medurs for å tilbakestille
	Håndkontroll frakoblet / koble til håndkontrollen igjen
	Håndkontrollen er defekt / skift håndkontrollen / kontakt den lokale servicerepresentanten
	Funksjonsfeil på elektronikken / kontakt den lokale servicerepresentanten
	Feil på motoren / kontakt den lokale servicerepresentanten
	Kontroller kontakten mellom søylen og understellet





Etac A/S
Parallevej 3
DK-8751 Gedved
www.etac.com

molift[®]
by Etac