

# Bruksanvisning

Zitzi Starfish Pro dusj- og toalettstol



# Innholdsfortegnelse

<b>Sikkerhetsforskrifter.....</b>	<b>4</b>	<b>Monteringsbeslag.....</b>	<b>17</b>
Innledning.....	3	Montering/Justering/Etterkontroll.....	17
Bruksområde.....	3		
Korrespondanse.....	3	<b>Fotstøtte .....</b>	<b>18</b>
<b>Chassis.....</b>	<b>4</b>	Montere/Ta av/Vinkeljustering.....	18
Manuellchassis .....	4	Fast fotstøttebeslag .....	18
Høyderegulert chassis - hydraulisk .....	4	Fjærende fotstøtteadapter .....	19
Høyderegulerbart chassis - mekanisk.....	5	Oppfållbart fotstøttebeslag.....	19
		Kuleleddadapter.....	19
<b>Setedel.....</b>	<b>6</b>	<b>Leggstøtte.....</b>	<b>20</b>
Justering setedel .....	6	Montering.....	20
Justering setedybde/abduksjon.....	6	Høyedjustering.....	20
		Breddejustering.....	20
<b>Hjul.....</b>	<b>6</b>	<b>Potte.....</b>	<b>21</b>
Brems på hjul.....	6	Montering.....	21
<b>Abduksjons-/adduksjonstøtte.....</b>	<b>7</b>	<b>Urinskjerm .....</b>	<b>22</b>
Montering.....	7		
Justering.....	7	<b>Vedlikehold.....</b>	<b>23</b>
		Serviceintervall .....	23
<b>Hoftebelte.....</b>	<b>8</b>	Vedlikehold i hjemmet.....	23
Montering.....	8	Tiltsylinder.....	23
Justering.....	8	Verktøy.....	23
		Garanti.....	23
<b>Rygg.....</b>	<b>9</b>	Kombinasjoner.....	23
<b>Hofteinkel.....</b>	<b>10</b>	Reservdelar.....	24
		Resirkulering.....	24
<b>Setetilt.....</b>	<b>11</b>	Merking.....	24
<b>Hoftestøtte.....</b>	<b>12</b>	Gjenvinning.....	24
<b>Armstøtte.....</b>	<b>13</b>	<b>Sammendrag og etterkontroll ..</b>	<b>24</b>
Montering.....	13	<b>Tilpasning og spesialtilpasning.....</b>	<b>25</b>
Justering.....	13	Tilpasninger som kan gjøres.....	25
Dybdejustering.....	13		
Ta av/ta på.....	13	<b>Salgsvilkor.....</b>	<b>26</b>
		Garanti.....	26
<b>Armstøtte,chassis.....</b>	<b>14</b>	Reklamasjon.....	26
Montering på manuelt chassis .....	14	Returer.....	26
Montering på hydraulisk chassis .....	14	<b>Tekniske data .....</b>	<b>27</b>
Felle ned armstøtte.. ..	14		
<b>Kjørebøyle .....</b>	<b>15</b>		
<b>Hodestøtte.....</b>	<b>16</b>		
Montering/Justering .....	16		

# Säkerhetsföreskrifter

## Inledning

För att ni ska kunna utnyttja Zitzi Starfish Pro till fullo är det viktigt att ni läser igenom denna bruksanvisning ordentligt. Detta gäller alla personer som finns i brukarens närhet. Produkten är avsedd för brukare med sittproblematik och passar många olika typer av diagnoser.

Anpassning/inprovning av Zitzi Starfish Pro ska alltid utföras av medicinskt behörig person.

Om ni behöver kompletterande uppgifter är ni välkomna att kontakta Anatomic SITT AB.

## Användningsområde

Produkten är avsedd att användas som hygienestol. Om önskemål om annan användning finns, vänligen kontakta Anatomic SITT AB.

## Korrespondens

Zitzi Starfish Pro med dess tillbehör är en CE-märkt produkt.

Ett unikt serienummer är placerat på det bakre mellanröret

Detta serienummer ska anges vid all korrespondens gällande produkten.

## Produkten är tillverkad av Anatomic SITT AB

**Postadress** Anatomic SITT AB, Box 6137, 600 06 Norrköping

**Besöksadress** Anatomic SITT AB, Terminalgatan 1, 602 29 Norrköping

**Telefon** 011-161800

**Fax** 011-162005

**E-post** [info@anatomicsitt.com](mailto:info@anatomicsitt.com)

**Web** [anatomicsitt.com](http://anatomicsitt.com), [youtube.com/anatomicsitt](https://youtube.com/anatomicsitt)

Kryssa i rutan vid eventuell specialanpassning av produkten.


CE-märkningen **upphör** att gälla vid specialanpassad produkt.

Plats för etikett

# Chassi

## Manuellt chassi

Sittenheten kan justeras till önskad höjd innan patienten sätts i sitsen. Lossa spak (A) på båda sidor (position (B) är inte helt åtdragen, men hjälper till att styra vaggan i spåren). Lyft sitsen ur spåren och för in sitsen i spåren på önskad höjd. Se till att trycka ned sitsen ordentligt i spåren. Avsluta med att dra åt spak (A).

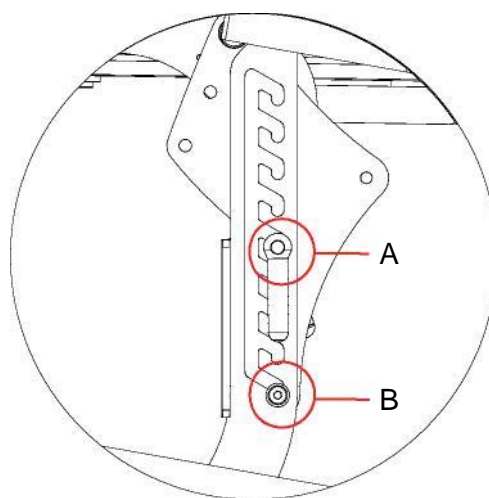


## Höj-/sänkbart chassi - gaskolv

Sittenheten kan höjas eller sänkas till önskad höjd. Detta görs genom att pumpa på pedalen (C). Se till att pumpa med mjuka rörelser för att höjningen ska bli behaglig för patienten. För att sänka enheten så placeras en fot under pedalen och trycker den uppåt.



**OBS!** Var uppmärksam på eventuell klämrisk!

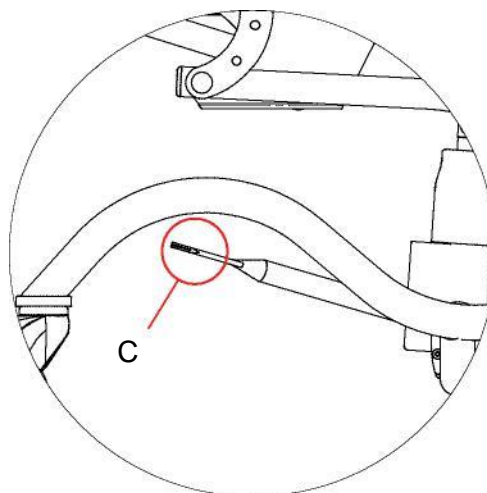


# Setedel


## Justering sittdel

Støtdybde, benlengdeforskjell og abduksjon justeres enkelt. Ta bort polsteret for å komme til skruene.

## Justering setedybde/abduksjon:

Løsne skruene (A) slik at setedelene kan justeres for hånd.  
Justér setedelene. Lås skruene (A).

 **OBS!** Var noga så att du inte skruvar ur skruvarna helt!

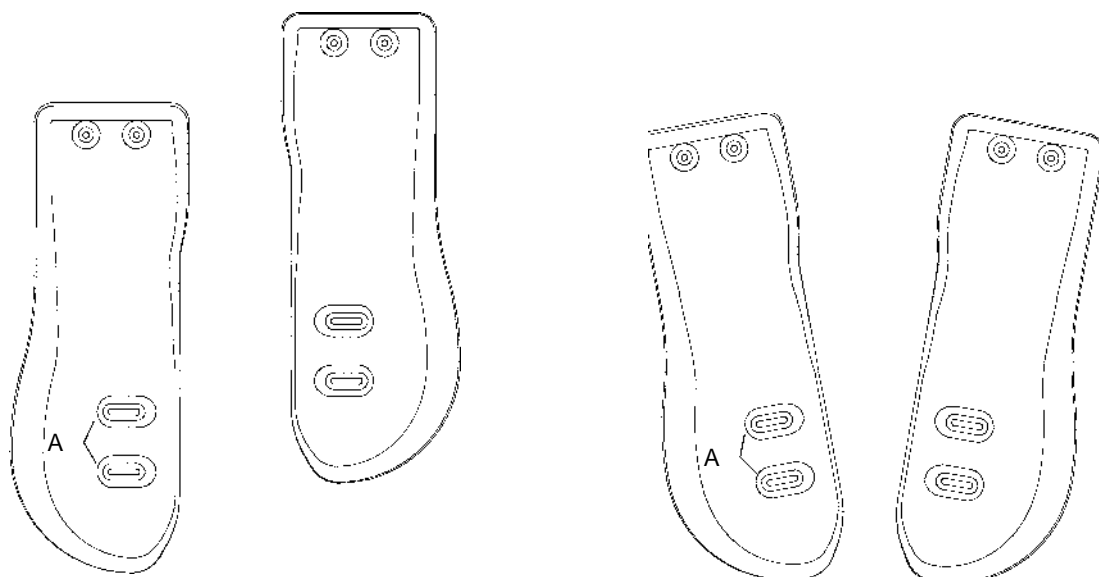


# Hjul

## Brems på hjul

Trykk ned bremsepedalen (A) med foten for å låse hjulet (se bildst).

Løft opp pedalen for att frigjøre hjulet.

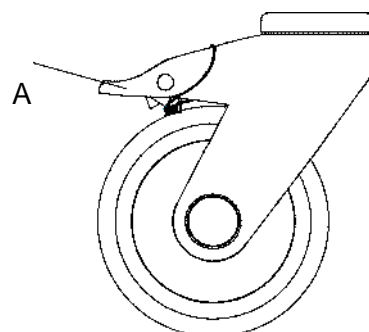


# Abduksjon-/adduksjonsstøtte

## Montering

Løsne skruene (A) og plassér støttene slik at du ser hullene gjennom sporene på støtten. Skru i skruene gjennom sporene og inn i hullene for å feste støttene.

## Justering

Løsna litt på skruene (A) slik at du kan skyve støtten i sideveis. Justér dem til ønsket posisjon og skru til skruene.

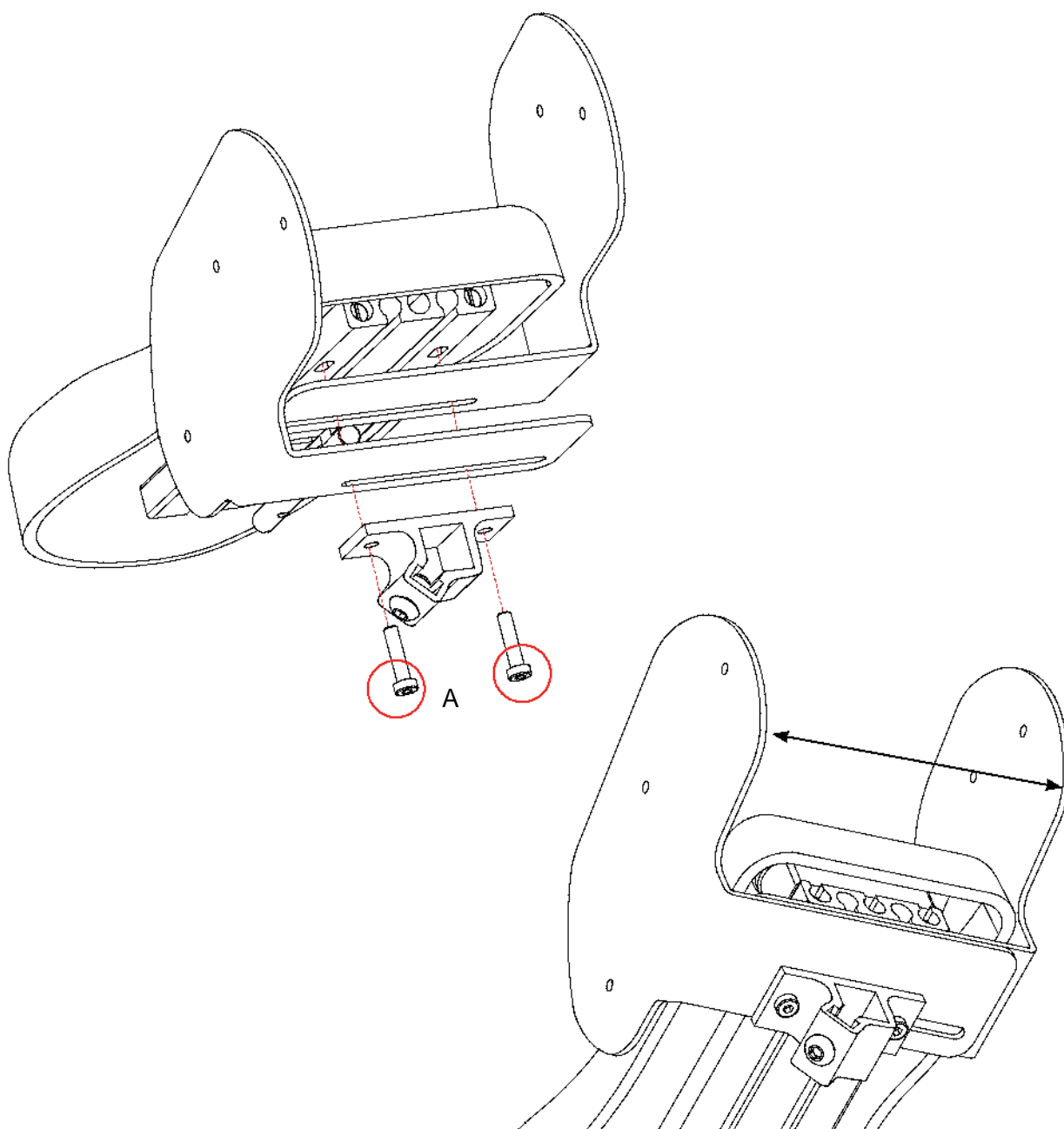


# Hoftebelte

## Montering:

Montér båndene i respektive sløyfer.

## Justering:

- \* Stram beltet på begge sider om spennen for å få det sentrert.
- \* Justér pløsene for å oppnå optimal trykkavlastning.
- \* Hvis båndene er for lange, klipp av overflødig bånd og brenn endene.

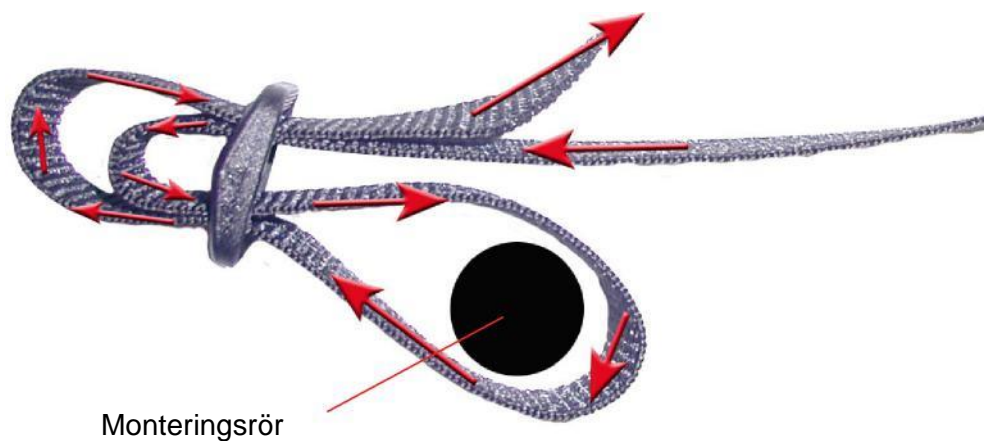


# Rygg

For å justere ryggen (A), løsne på de fire skruene (B) som fester ryggen på ryggprofilen. Justér til ønsket høyde og skru til skruene (B).

Grovjustér høyde for bolstdøttebeslag ved å løsne på de fire skruene (C) som fester beslaget på ryggprofilen. Justér til ønsket høyde og skru til skruene (C).


Bolstøttene kan nå finjusteres ved å løsne på låsespaken (D). Justér bolstøttene til ønsket posisjon og skru til låsespaken (D).

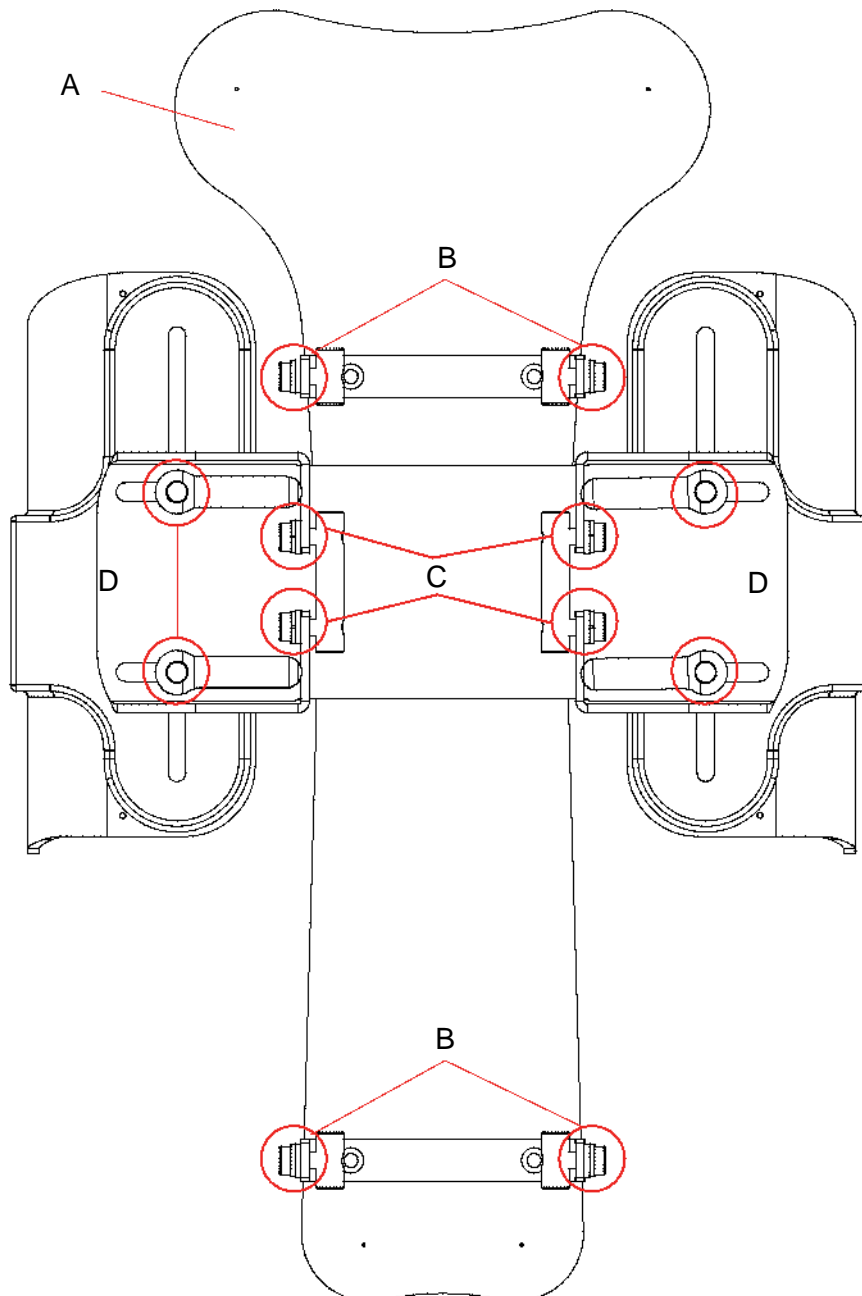



# Hoftevinkel


Når hoftevinkel skal justeres: begynn med å løsne på sikkerhetsspaken (A). Pass på at du har et stabilt grep om kjørebøylen samtidig som utløseren for tilten (B) trykkes inn. Justér ryggen til ønsket vinkel og slipp utløseren (B). Avslutt med å skru til sikkerhetsspaken (A).

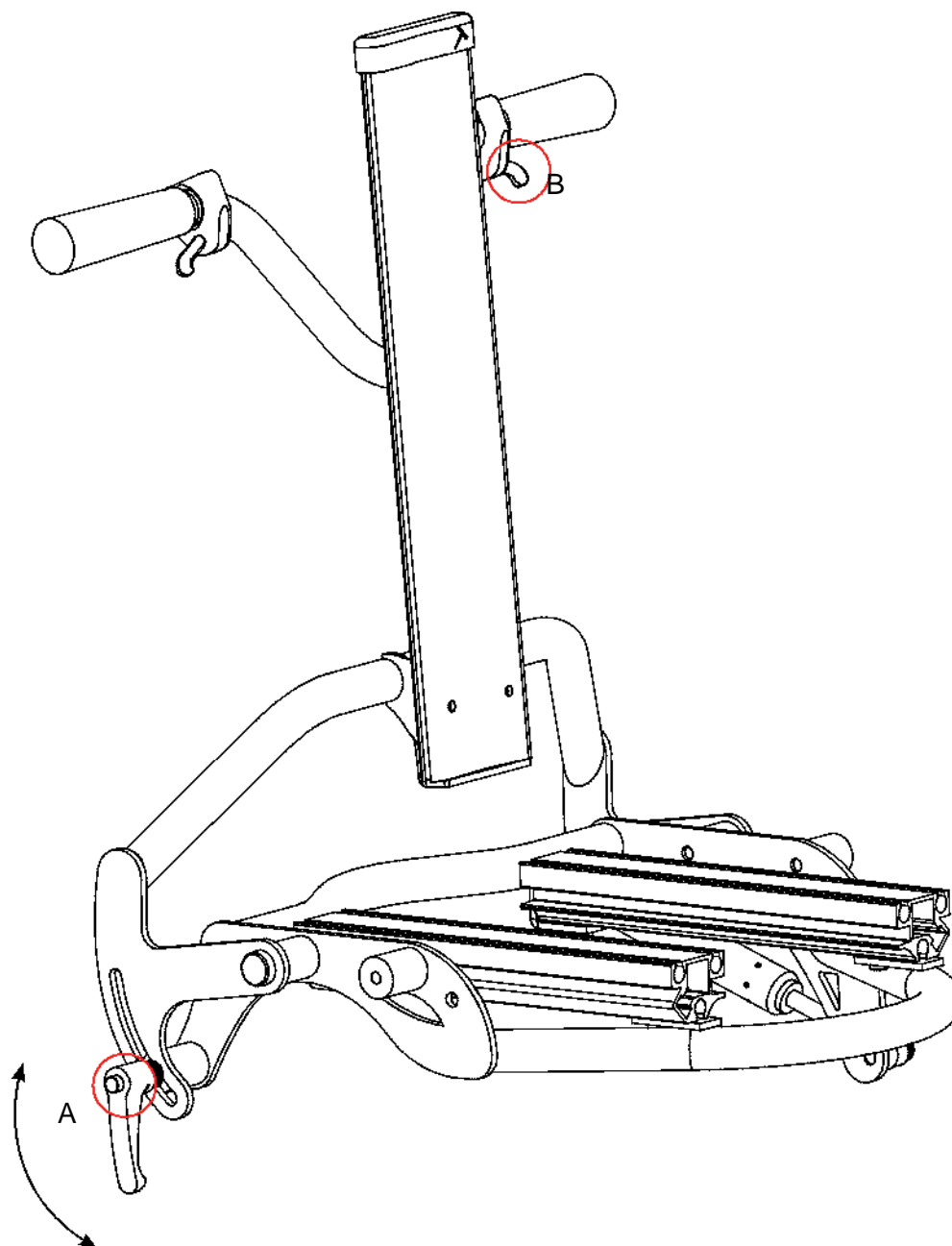

**OBS!** Pass på at vaier for utløseren for tilten alltid er fri etter justering og husk å skru til sikkerhetsspaken!

## Tilt av sitteenhet


Når setetilten skal justéres, må du ha et stabilt grep om kjørebøylene samtidig som utløseren for tilten (A) trykkes inn. Justér setet til ønsket vinkel og slipp utløseren (A). Følg med brukeren og sørg for at ikke noe kommer i klemme eller på annen måte skader brukeren..

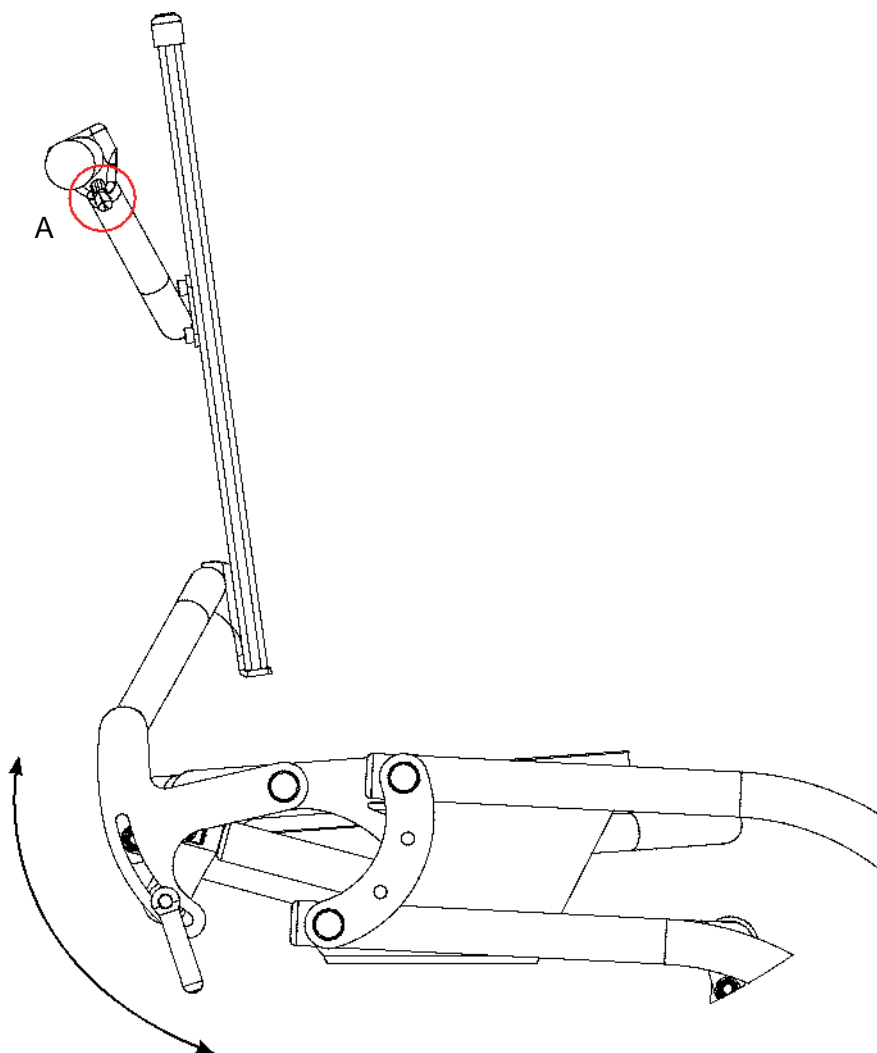

**OBS!** Pass på at vaier for utløseren for tilten alltid er fri etter justering!

# Hoftestøtte

Hoftestøtten monteres inn i nederkant av ryggprofilen. Før inn (A) og skyv opp hoftestøtten til ønsket høyde. Skru til skruene (B). Justér vinkelbeslaget til ønsket posisjon sideveis. Skru til låserattet (C). Justér hoftebeslaget til ønsket dybde, skru til skruerattet (D).

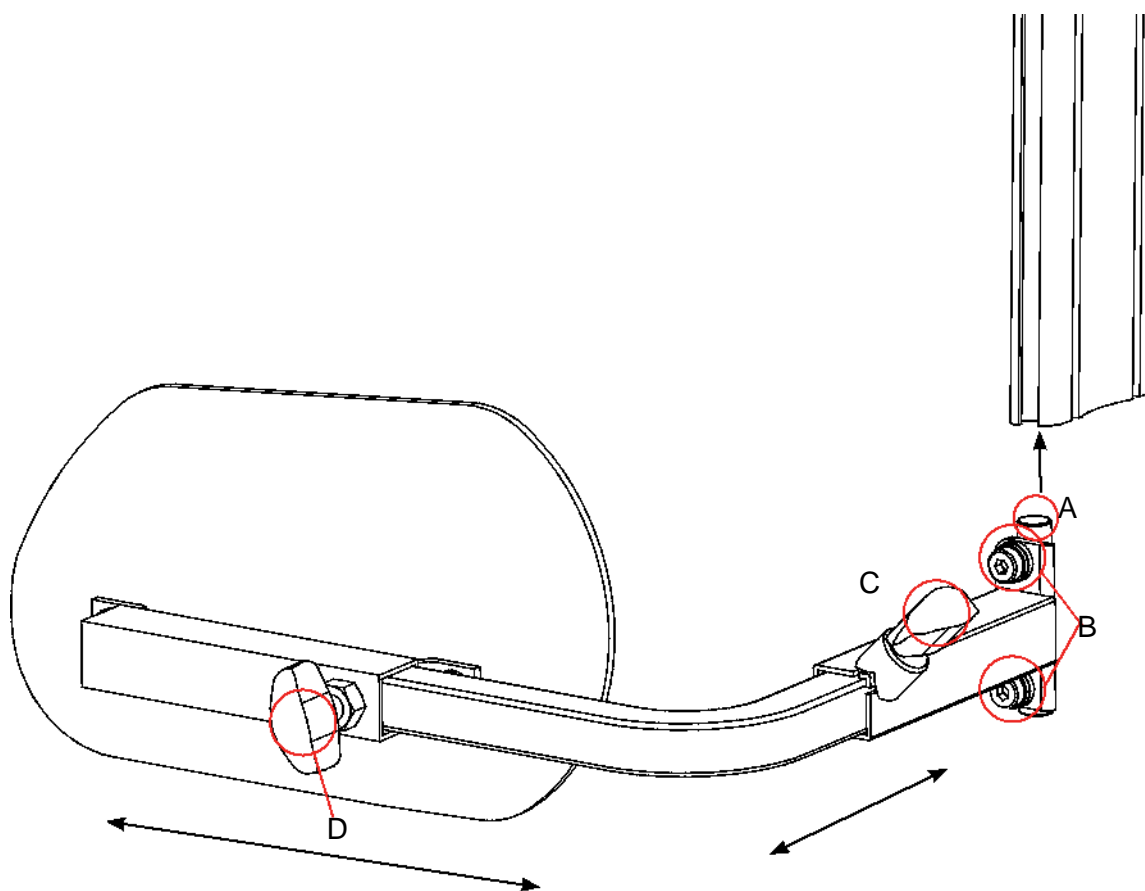

# Armstøtter ryggmontert

## Montering, armstøtter

Armstøtten skal monteres på ryggstaket. Monter armstøttefestet som vist på bildet. Justér til ønsket høyde. Skru til skruene (A)

## Justering av armstøttebredde


Løsne skruerattet (B). Justér til ønsket bredde. Skru til låserattet.

## Dybdejustering, armstøtte

Løsne skruerattet (C). Justér til ønsket posisjon. Skru til låserattet.

## Av/på armstøtten

Løsne skruerattet (B). Dra ut armstøtten sideveis.

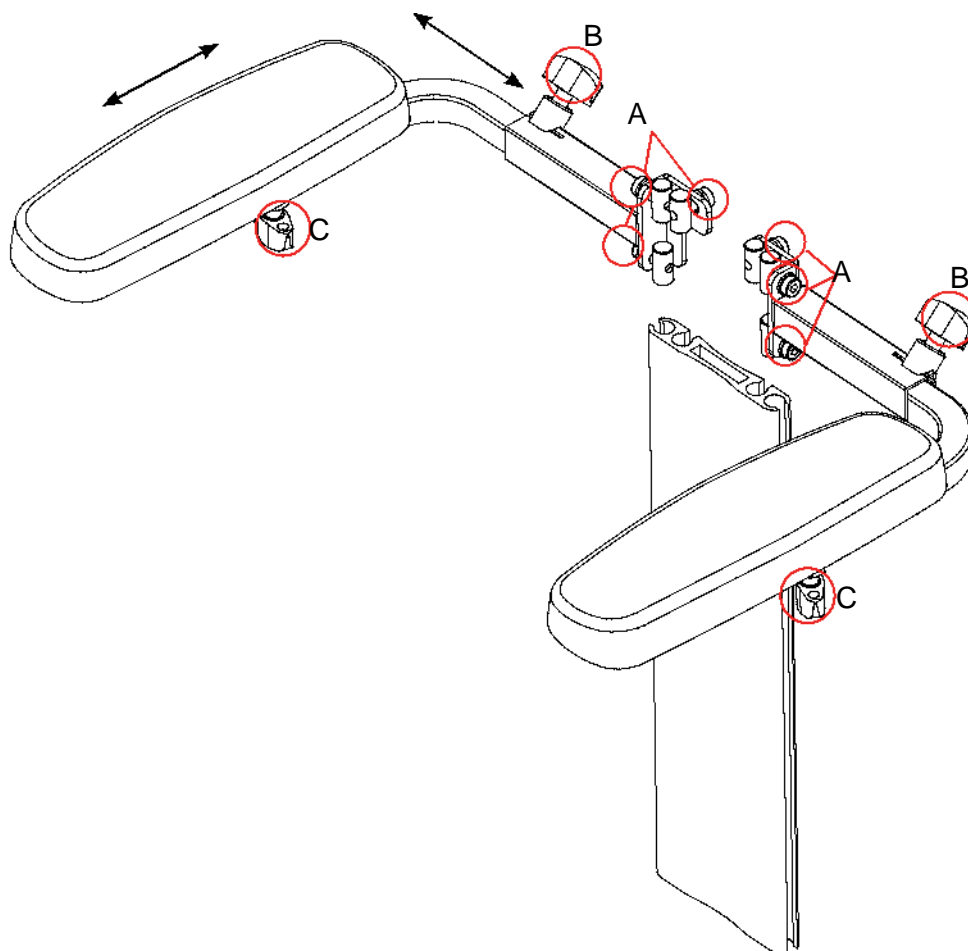


## Armstøtte, chassis

### Montering på manuelt chassi

Armstøtten skal monteres på sidblekket (A).  
Montér skruene (B) gjennom de forsenkede hullene i blekket, gjennom distansplaten (C) og inn i de gjengede hullene på armstøtten.

### Utfellbar armstøtte

Armstøtten kan felles ut og ned. Dra armstøtten på skrå opp- og bakover. Vri deretter armstøtten vekk fra chassiset til armstøtten fester i neste hakk.

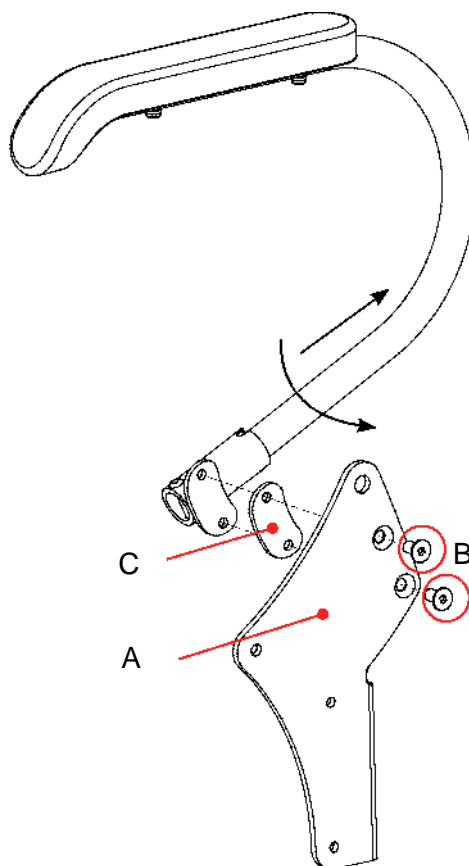


### Montering på hydraulisk chassi

Armstøtten skal monteres på det ytre sideblekket (A). Montér skruene (B) gjennom de sentrale hullene på blekket og inn i de gjengede hullene på armstøtten.


### Utfellbar armstøtte

Armstøtten kan felles ut og ned. Dra armstøtten på skrå opp- og bakover. Vri deretter armstøtten vekk fra chassiset til armstøtten fester i neste hakk.

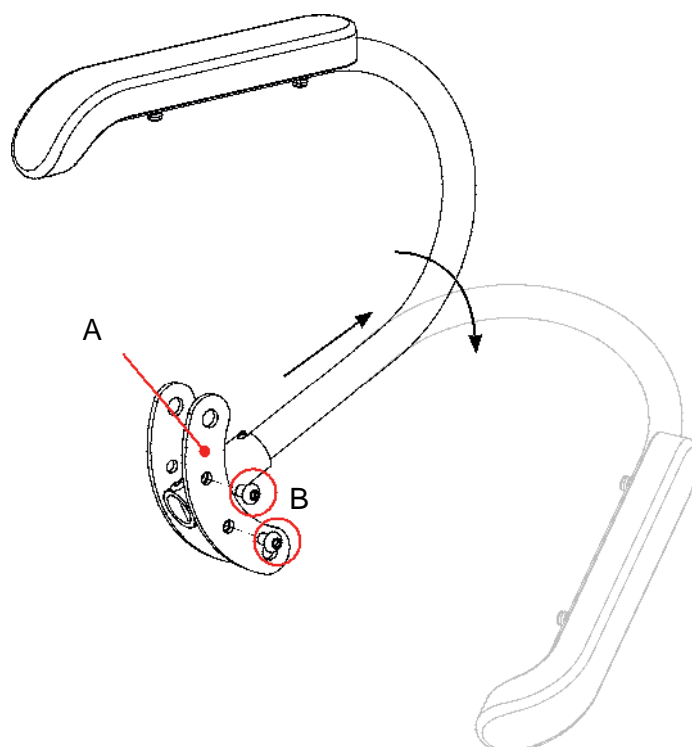

# Kjørebøyle

Løsne skruene (A) akkurat for å kunne tre inn (B) i profilen (C). Justér til ønsket høyde og skru til skruene (A).

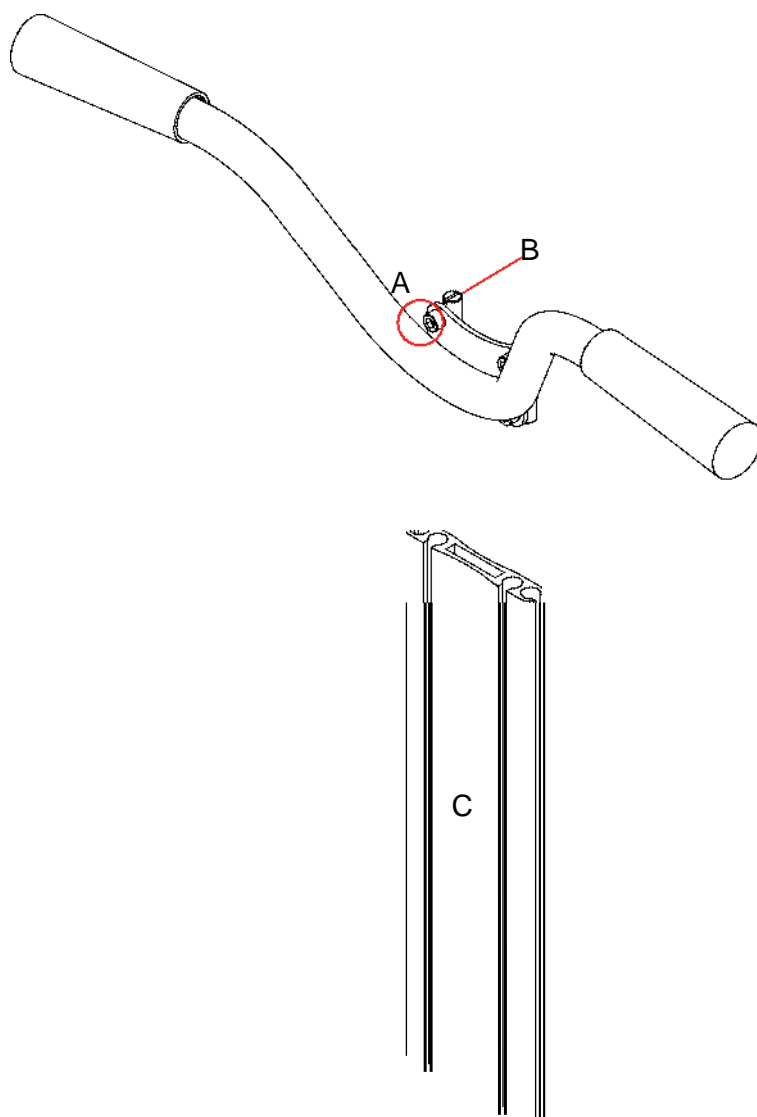

**OBS!** Pass på at vaier for utløseren for tilten alltid er fri etter justering!



# Hodestøtte

## Montering / justering av hodestøtte

- \* Ta vekk plastproppen på ryggstaget.
- \* Montér hodestøttefestet (B) på ryggstaget.
- \* Løsne skruene (A) akkurat passe slik at det kan justeres med hånden.
- \* Sett brukeren i stolen og justér til ønsket posisjon.
- \* Skru til alle skruer og skrueratt og sett på plastproppen.

## Det er enkelt å ta av hodestøtten:

- \* Løsne skruerattet (C) for å ta av hodestøtten.

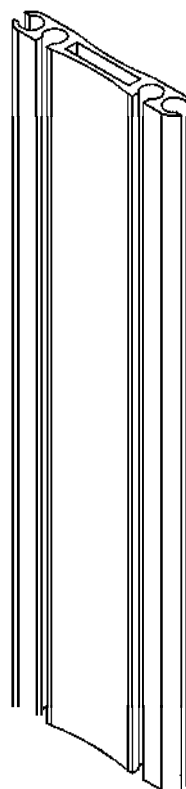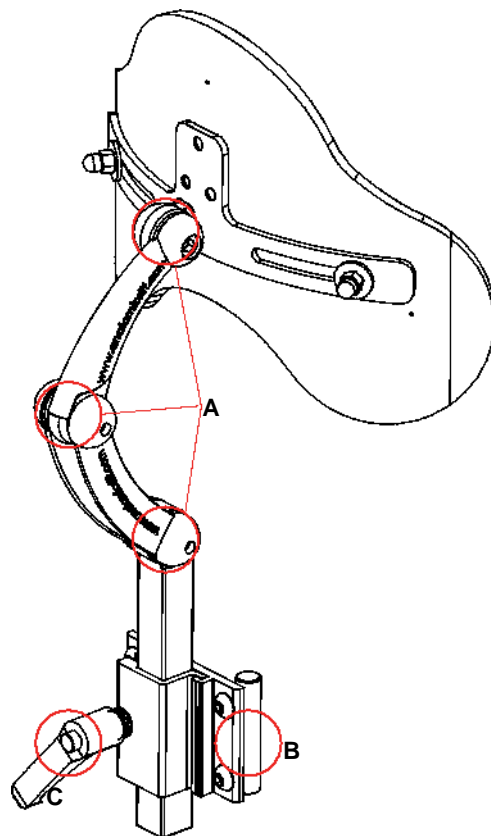


# Monteringsbeslag

## Montering / justering av seler (Sternumstøtte, H-sele)

### Montering:

Øverste feste: (Bilde 1)



- \* Ta vekk plastproppen på ryggstaget.
- \* Monter øvre festestag som på bilde 1.
- \* Åpne spennen (A), tre inn festebåndene gjennom hullet i beslaget og gjennom spenne og lås spennen.

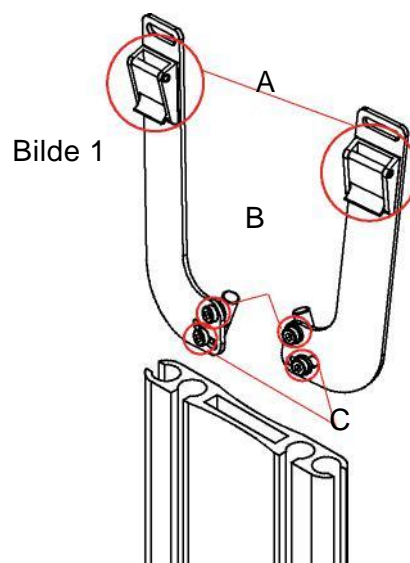

### Nedre feste til H-sele, sternumstøtte: (Bilde 2)

Nedre festet kommer ferdig montert og er standard.

Lås båndet ved hjelp av "Tri-glide" spenne som på bilde 3.

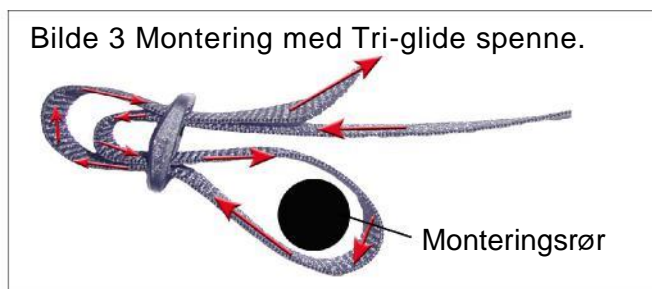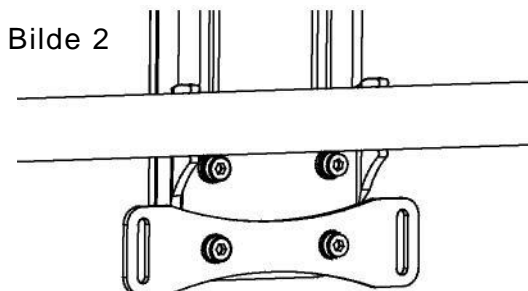

### Justering:

Sett brukeren i stolen og løsne insexskruen, se pos. B & C, bilde 1.

Justér armene slik att dreretningen for de øvre festepunktene havner i samme høyde som skulderpartiet.

- Skru skruven, se pos. B, bilde 1.
- Justér til ønsket bredde ved å vinkle staget til høyre eller venstre. (Sørg for at det er god plass for halsen.)
- Lås skruen, se pos. C, bilde 1.
- Justér beltepolstrene i høyden for å gi optimal trykkavlastning.

### Etterkontroll:

- Sørg for at det er god plass for halsen.
- Trykket på båndet.
- Plasseringen av beltepolstrene.




- **OBS!** Sørg for at det er god plass for halsen.



# Fotstøtte

## Montere / Ta av fotstøtte

- Skyv inn fotstøtten, se bildet.
- Skru til skruerattet (A). Ønskes et mer permanent feste så kan skruerattet byttes mot skruer (C) (som kommer med stolen ved levering).
- Man tar av fotstøtten ved å løsne skruerattet(A) og fotstøtten trekkes ut.

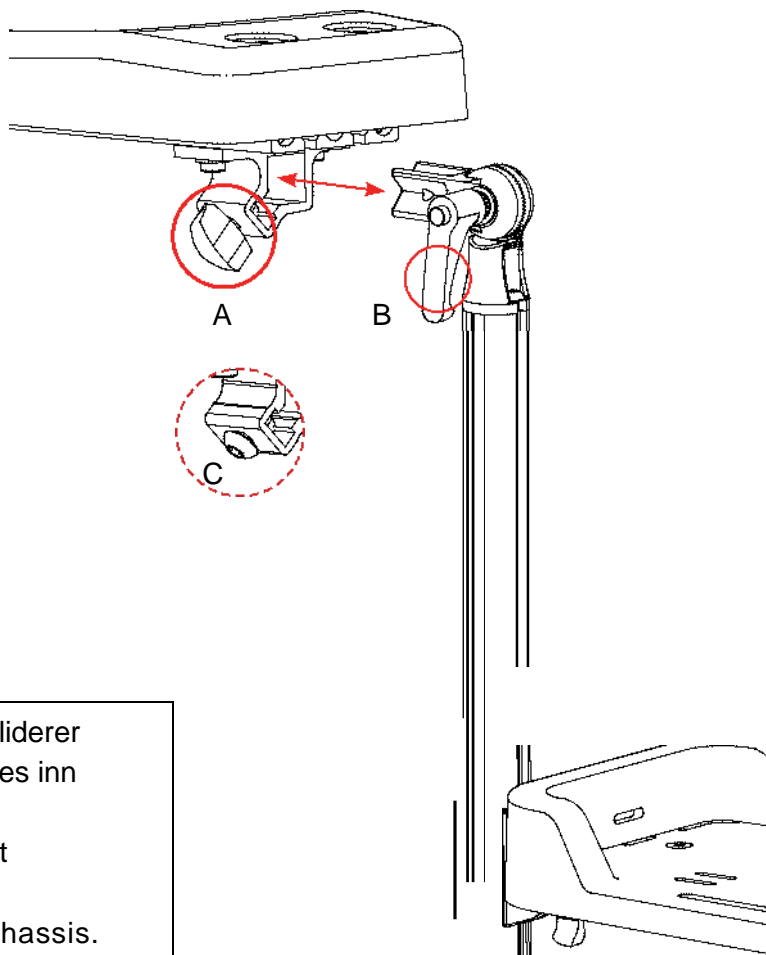

## Vinkeljustering ved kneleddet

- Løsne skruerattet (B).
- Justér til ønsket vinkel.
- Skru til skruerattet.




**Tips!** For å unngå at fotstøtten kolliderer med chassiet så bør fotstøtten stilles inn når stolen er:

- I lavest mulige posisjon og tiltet framover for hydraulisk stol.
- Tiltet framover for manuelt chassis.

## Fast fotstøttebeslag

For å høydejustere fotstøtten løsner man låsespaken (A) litt for å justere til ønsket høyde. Skru fast låsespaken.


For justering av vinkelen for fotstøtten skal skruen (B) løsnes litt. Justér til ønsket vinkel og skru til skruen (B).

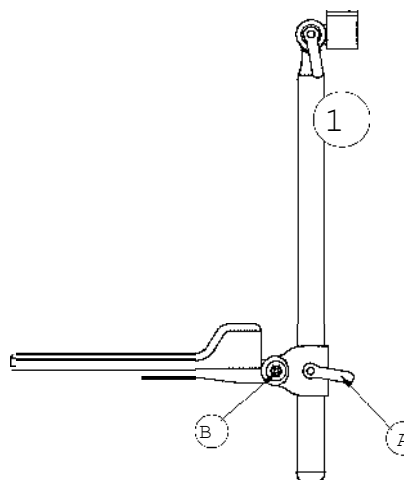

### Fjærende fotstøtteadapteradapter

For å høyjustere fotstøtten løsner du skruen (D) litt for å justere til ønsket høyde. Skru til skruen (D).

For justering av vinkelen på fotstøtten løsnes skruen (C) noe. Justér til ønsket vinkel og skru til skruen (C).

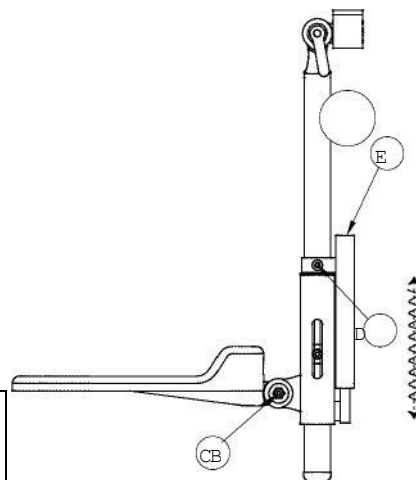

### Oppfellbart fotstøttebeslag




Skruen E løser motstanden i hjøeren ved å skru på skruen E

B

For å høydejustere fotstøtten løsne låsespaken (A) litt for å justere til ønsket høyde. Skru til låsespaken.

For å bruke den oppfellbare funksjonen, løft fotstøtteplaten i forkant.

For justering av vinkelen av fotplaten løsnes skruen (B) litt. Justér til ønsket vinkel og skru til skruen (B).

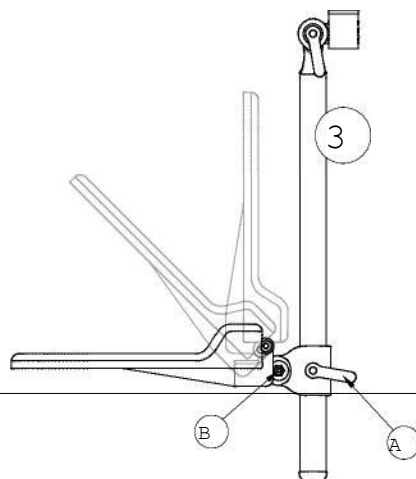


### Kuleleddadapter

For å høydejustere fotplaten løsne låsespaken(A) litt og justér til ønsket høyde. Skru til låsespaken.

For att bruke kuleleddfunksjonen løsne først skruene (B) og (C) og justér til ønsket posisjon. Skru til skruene (B) og sikkerhetslås posisjonen med skruen (C).

For justering av fotplate i dybde løsne skruene (D) litt. Justér til ønsket posisjon og skru til skruene(D).

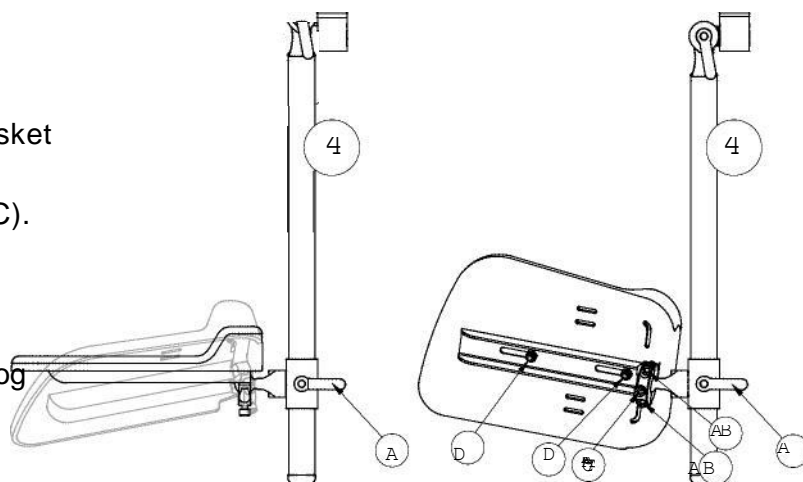

# Leggstøtte

## Montering

Før montering av leggstøtte kan utføres må man først ta bort eventuelle fotstøtter. Løsne låsespak (F) som holder fotstøtten på plass på fotstøttestaget. Dra så fotstøtteplaten og beslaget ned.


Montér leggstøtten ved å skyve inn (C) i fotstøttestaget, justér til ønsket høyde og skru til skruene (E). Montér deretter fotstøtten.

## Høydejustering

For å høydejustere leggstøtten løsnes skruene (E) litt for så å justere til ønsket høyde. Skru så til skruene (E).

## Breddejustering

For å breddejustere leggstøtten løsnes skruene (A) litt for så å justere til ønsket bredde. Skru til skruene (A).

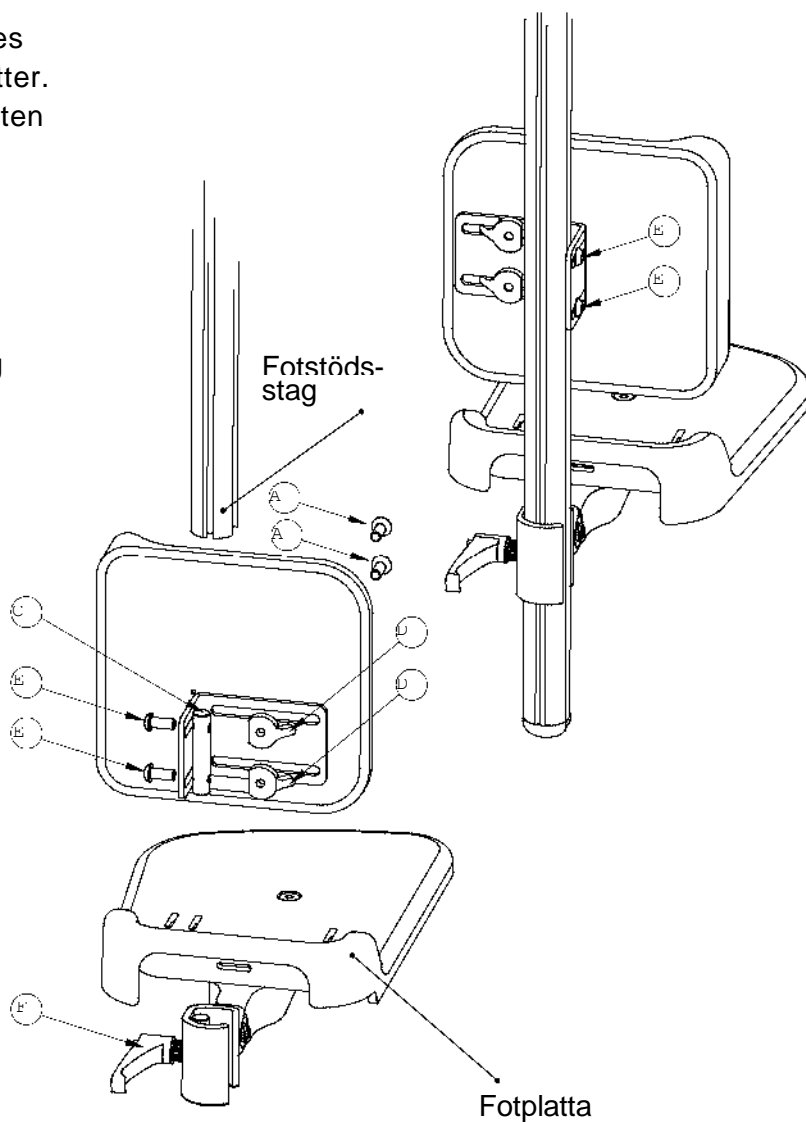


# Potte

## Montering

Monter potten ved å skyve inn kantene i sporene (A) bak under setet.  
Skyv potten til den støter mot røret i framkant.




**OBS! IKKE** tilt stolen ved bruk av potte!

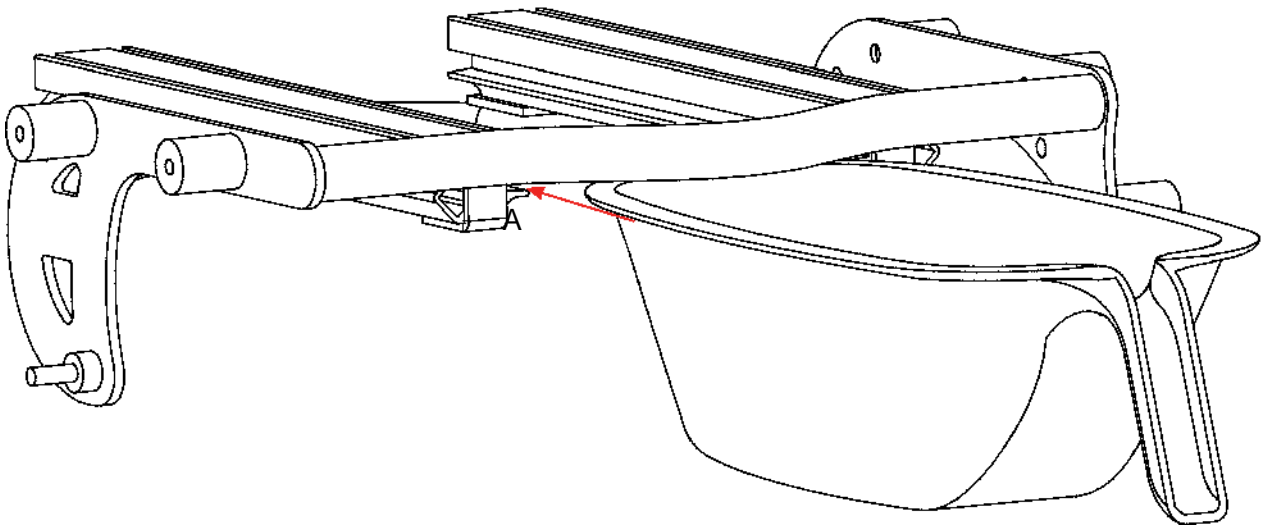

## Urinskjerm

Monter urinskjerm ved att kile det ned mellom bendelerne. Tilpass høyden på urinskjermen slik at det passer brukeren. Ved bruk av potte bør man kappe til urinskjermen nederst slik att nederkant hviler mot bunnen av potten.

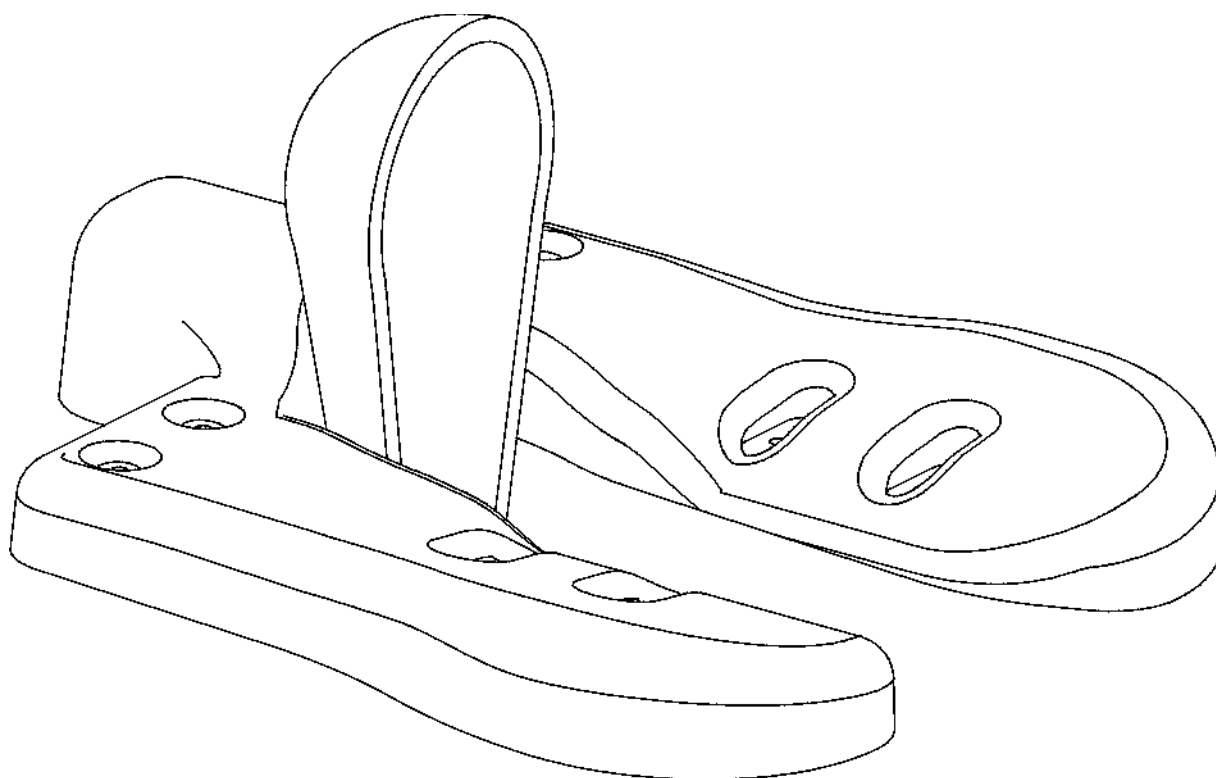

# Vedlikehold

## Serviceintervall

For at hjelpemiddelet skal fungere trygt og sikkert bør det utføres regelmessig service og kontroll. Behovet av service varierer og må vurderes fra stol til stol avhengig av bruk og slitasje. Kontroller alle bevegelige deler og fester med tanke på slitasje. Arbeidet skal alltid utføres av kvalifisert personell. Ta gjerne kontakt med [www.bardum.no](http://www.bardum.no).

## Regelmessig vedlikehold i hjemmet

Etter bad/dusj, løsne alle polstre for kortere tørketid. Da holder polstrene lenger. Bruk svamp og såpe ved rengjøring av stolen, eller milde antibakterielle rengjøringsmiddel.

Polster er forbruksvarer og skal byttes ut ved behov.

Belter og seler kan vaskes i 60°C finvask, men skal ikke tørketromles eller tørkes i tørkeskap. Bruk vaskepose.

<b>Kontroller stolen regelmessig.</b>
---------------------------------------

## Tiltsylinder må aktiveres regelmessig

Tiltsylinderen bør brukes regelmessig for å opprettholde sin funksjon.

Hvis produktet ikke brukes må tiltsylinderen aktiveres minst en gang var 6:e måned.

Dessuton bør stolen lagres slik at sylinderstangen peker ned.

Ellers kan sylinderens tetning gå ødelegges og sylinderen slutte å virke.

## Verktøy

Verktøyet (4 mm insexnøkkel) du trenger er integrert i toppen av ryggprofilen.

## Garanti

1 år mot fabrikkasjonsfeil.

## Kombinasjoner

Zitzi Starfish Pro er et CE-merket produkt som kan kombineres med samtlige tilbehør som beskrives i denne bruksanvisning. For andre kombinasjoner vennligst kontakt [www.bardum.no](http://www.bardum.no).

### Reservdeler

For att Zitzi Starfish Pro ska behålle sin CE-merking skal det kun brukes originale reservedeler fra produsenten Anatomic SITT AB.

### Resirkulering

Rengjør stolen med svamp og vaskemiddel, eller mildt antibakterielt rengjøringsmiddel.

Använd inga rengöringsmedel som innehåller slipmedel eller frätande ämnen.

Zitzi Starfish Pro kan rengjøres i vaskekabinett:

Starfish Pro Manuell – 90°C i 3 minutter

Starfish Pro Hydraulisk – 60°C i 3 minutter

Ta av polster og belter. Polster er forbruksvarer og skal byttes ut ved behov. Belter og seler kan vaskes i 60°C finvask, men skal ikke tørketromles eller tørkes i tørkeskap. Bruk vaskepose. Etter tørking kontrolleres produktet for skader og slitasje.

Ødelagte, slitte eller sprukne skiftes. Bruk kun original deler fra Anatomic Sitt AB.

Funksjonstest og smør alle bevegelige deler som ledd, vaier, håndtak, hjul, skruer, låsespaker mm.

Bruk passende olje eller smøremiddel (t.ex. CRC 5-56, teflonspray etc.)

### Märkning



**OBS!** Kontroller alltid at stolen ikke er spesialtilpasset ved resirkulering, før det sendes til ny bruker.

Zitzi Starfish Pro med tilbehør er et CE-merket produkt.

Et unikt serienummer er plasertt på det bakre mellomrøret.

Dette serienummer skal oppgis ved alle henvendelser angående produktet.

### Gjenvinning

En forbrukt del eller produkt demonteres og vrakes. Delene skal deretter sorteres etter materialtype, metall (ramme, mellomrør, stag, sete-/rygggramme, kjørebøyle m.m), plast (sete-/ryggdel, bord, potte m.m) og brennbart (polstring, belter, seler m.m). Gaskolv sorteras som farligt avfall.

# Sammendrag og etterkontroll

## Etterkontroll

Fortsett kontinuerlig å utføre etterkontrollene som angitt under respektive punkter. Du bør kontrollere punktene hver gang brukeren skal bruke hjelpemiddelet.

- Kontroller regelmessig at alle skruer er skrudd til.
- Kontroller regelmessig slitasje på bånd og trykkavlastende belteputer.
- Kontroller at balansering på understøtten er korrekt.
- Kontroller innstillingene på tillbehøret slik at brukeren har en korrekt sittestilling..
- Pass på å ikke vinkle stolen for langt fram når brukeren sitter i stolen.

# Tilpasning og spesialtilpasning

## Anbefalinger

Hver gang det gjøres en endring på Zitzi Starfish Pro skal det vurderes om det er en tilpasning eller en spesialtilpasning.

En tilpasning er en endring som gjøres innenfor rammene for produktets CE-merke. Alt annet er spesialtilpassning. Tilpasninger skal bare utføres av den som er kvalifisert for dette og skal alltid utføres profesjonelt. At produktet er CE-merket innebærer at det oppfyller alle relevante europeiske sikkerhetskrav. Merk at en risikovurdering alltid bør gjøres, både ved tilpasning eller spesialtilpassning av produktet. Produktet skal aldri være farlig for brukeren.

Produktet bør merkes med opplysning om at det er tilpasset til en spesifikk bruker, slik at det viser at det ikke er et produkt i standardversjon.

## Tilpasninger som kan gjøres på Zitzi Starfish Pro:

### Kapp fotstøtteprofiler

Fotstøtteprofilens lengde kan kortes ned for å passe bedre til brukeren.

### Kappe armstøtteprofiler

Armstøtteprofilens lengde kan kortes ned for å passe bedre til brukeren

### Kappe ryggprofilen

Ryggprofilens lengde kan kortes ned. Profilen skal aldri være kortere enn at samtlige fester til ryggplaten kan monteres på denne.

### Kappe urinnskjermen

Urinnskjermen kan kappes til ønsket lengde.



# Salgsvilkår

## Garanti

Garanti gjelder et (1) år for fabrikkfeil fr.o.m. leveringsdato. Garanti gjelder ikke for ytre påverkning eller "unormal" bruk. Ved garantibehandling skal produktet sendes i retur og alltid med følgeseddel.

## Reklamasjon

Beskriv feilen og årsak så nøye som mulig. Fortell om det er garantireparasjon eller eventuelt garantiutbytte. Legg ved en kopi på fakturaen og fortell om produktet skal tilbake til deg etter reparasjon. Oppgi leveringsadresse, kontaktperson og telefonnummer.



Pakk produktet godt for å unngå skader ved transport.

Notér sendingsnummer eller lignende på dine dokumenter. Dette for at du skal kunne spore sendingen hvis noe skulle hende under transporten.

 **Spesialtilpassede produkter tas ikke i retur.**

# Tekniska data Starfish Pro

	Storlek 1	Storlek 2	Storlek 3
Passar brukarlängd	ca. 120-145 cm	140-175 cm	170-200 cm
<b>Chassi med hel sittdel</b>	<b>Sittdel hel stl. 1</b>	<b>Sittdel hel stl. 2</b>	<b>Sittdel hel stl. 3</b>
Sittdjup (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sittbredd (med foder) (B)	365-395 mm	435-465 mm	495-525 mm
Storlek hygienuttag (C)	80-110 mm	100-130 mm	125-155 mm
<b>Chassi med delad sittdel</b>	<b>Sittdel delad stl. 1</b>	<b>Sittdel delad stl. 2</b>	<b>Sittdel delad stl. 3</b>
Sittdjup (A)	300-380 mm	360-470 mm	450-550 mm
Sittbredd (B)*	350-480 mm	380-510 mm	390-520 mm
Bredd bändel m foder (D)	165 mm	185 mm	200 mm
Storlek hygienuttag (C)	50-180 mm	40-170 mm	30-160 mm
Frigång toalett, Man. chassi	41-51 cm	41-51 cm	41-51 cm
Frigång toalett, Hydraulisk/EI	41-66 cm	41-66 cm	41-66 cm
Sitthöjd, Man. chassi**	50-63 cm	50-63 cm	50-63 cm
Sitthöjd, Hydraulisk/EI**	50-78 cm	50-78 cm	50-78 cm
Tilt	-5-30 grader	-5-30 grader	-5-30 grader
Höft-/ryggvinkel	-10-35 grader	-10-35 grader	-10-30 grader
Chassi, bredd (H)	540 mm	540 mm	590 mm
Chassi, längd (I)	690 mm	690 mm	790 mm
Hjul	100 mm	100 mm	100 mm
Frigång	65 mm	65 mm	65 mm
Ca. vikt inkl. huvudstöd, fotstöd, armstöd	31 kg	33 kg	35 kg

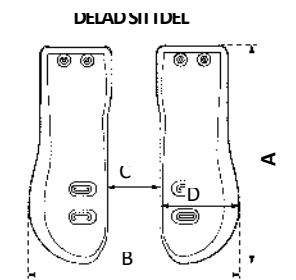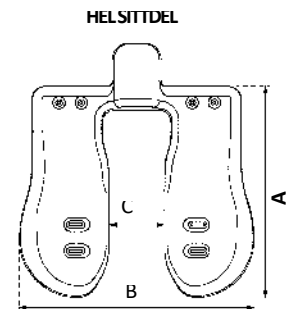


Max brukarvikt Man. chassi:	150 kg	150 kg	150 kg
Max brukarvikt Hydraulisk/EI:	150 kg	150 kg	150 kg

\* Max sittbredd fås när sittdelarna är monterade i ytterspår på sittplattan \*\* exkl. foder

FOTSTOD	mått B x D	RYGG	BÄLSTÖD
		Höjd (E)	Bredd (F) Djup (G)
Helt stl. 1	345 x 225 mm	Stl. 1 460 mm	210-300 mm 140 mm
Helt stl. 2	380 x 255 mm	Stl. 2 560 mm	240-340 mm 170 mm
Helt stl. 3	380 x 310 mm	Stl. 3 660 mm	300-400 mm 200 mm
Delat stl. 1	160 x 220 mm		
Delat stl. 2	180 x 255 mm		
Delat stl. 3	180 x 305 mm		

Bälstödsjustering +/- 85 mm

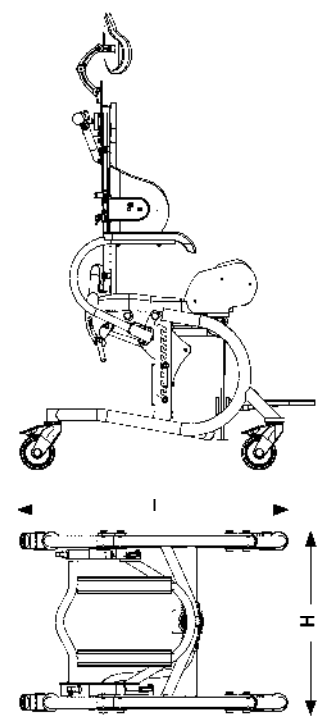

## Produsent

Anatomic Sitt AB  
Terminalgatan1  
603 61 Norrköping  
Sverige  
Tlf: +46 011-16 18 00  
E-post: [info@anatomicsitt.com](mailto:info@anatomicsitt.com)  
Nettside: [www.anatomicsitt.com](http://www.anatomicsitt.com)

## Videreforsandler

Bardum AS  
Håndverksveien 8, 1405 Langhus  
Norge  
Tlf: +47 64 91 80 60  
E-post: [Post@bardum.no](mailto:Post@bardum.no)  
Nettside: [www.bardum.no](http://www.bardum.no)

The logo for Bardum, featuring the word "Bardum" in a dark blue, serif font. The letter "y" is stylized with a curved underline that extends to the right.

[bardum.no](http://bardum.no) • [post@bardum.no](mailto:post@bardum.no) • tlf. 64 91 8 0 60

Håndverksveien 8, 1405 Langhus

A decorative graphic in the bottom right corner consisting of a light blue, curved shape that resembles a page curl or a stylized wave.