



medemagruppen



medemagruppen
HTS dusj- og toalettstol



Kjære kunde,

Jeg vil gjerne takke deg for den tilliten du viser selskapet vårt ved å kjøpe dette produktet.

Vi ber deg lese brukerveiledningen nøye før du begynner å bruke produktet, og å følge dem. Vær oppmerksom på at veiledningene og eksemplene i brukerveiledningen kan avvike fra ditt produkt pga. forskjellig utstyr.

Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.

Viktig informasjon!

Påse at brukerveiledningen oppbevares med produktet.

Innhold

1. Klargjøring av hygienesystemet til bruk	5
1.1 Transport.....	5
1.2 Sikkerhetstiltak før bruk	5
1.3 Sikker kassering	5
1.3.1 Emballasje.....	5
1.3.2 Produktet.....	5
1.4 Oppbevaring av bruksanvisningen	5
2. Produktbeskrivelse	6
2.1 Generell informasjon.....	6
2.2 Håndtering/transport.....	6
2.3 Bruksområder, bruk i henhold til det tiltenkte formålet.....	6
2.4 Bruk som ikke samsvarer med tiltenkt formål/retningslinjer for varsomhet.....	7
2.5 Utstyr til basismodellen.....	8
2.6 Liste over tilbehør	8
2.7 Produktoversikt	8
3. Innstillinger	9
3.1 Justering av ryggvinkelen	9
3.2 Understell standard.....	10
3.3 Justering av oppfellbar armstøtte	10
3.4 Justering av setedybd.....	11
3.5 Hodestøtte	11
3.6 Hoftebelte	11
3.7 Puter.....	12
3.8 Toalettbøtte	12
4. Tilbehør	13
4.1 Understell.....	13
4.1.1 Understell High-Low hydraulisk.....	13
4.1.2 Understell stasjonær	14
4.1.3 Understell badekar	15
4.1.4 Understell reise	15
4.2 Sideputer	16
4.3 Brystbelte.....	16
4.4 Bryst/-skulderbelte.....	17
4.5 Lårstøtter	18
4.6 Fotbrett	18
4.6.1 Montering på toalettsetet.....	19
4.6.2 Høydejustering for fotbrett.....	20
4.6.3 Innstilling av vinkelen på fotbrettet	20
4.7 Leggstøtte.....	20
4.8 Ankelstropper.....	21
4.9 Bord/armstøtte	21
4.10 Festestang	22
4.11 Abduksjonskloss	22
4.12 Sprutskjerm	23
4.13 Skyvehåndtak.....	23
4.14 Justering av avtakbar armstøtte	23

5. Reperasjon og rengjøring	24
5.1 Pleie.....	24
5.2 Reparasjoner.....	24
5.3 Reservedeler.....	24
5.4 Bruksvarighet og gjenbruk.....	24
6. Tekniske data	25
Dimensjoner – basismodell	25
7. Garanti	26
8. Identifikasjon	27
8.1 EU-samsvarserklæring.....	27
8.2 Serienummer/produksjonsdato.....	28
8.3 Produktversjon.....	28
8.4 Utstedelse av dokumentet.....	28
8.5 Produsentens navn og adresse, spesialforhandler som leverer produktet.....	28

1. Klargjøring av hygienesystemet til bruk

1.1 Transport

Når du mottar produktet må du kontrollere at det er helt, feilfritt og ikke er blitt skadet under transport.

Varene skal kontrolleres med speditøren til stede

Dersom det har oppstått transportskade må du kontrollere varen (fastlegge av feil) i speditørens nærvær. Send skriftlig klage til ansvarlig spesialforhandler.

1.2 Sikkerhetstiltak før bruk

Korrekt bruk av hygienesystemet krever presis og omhyggelig innføring av ledsager. Vi ber deg lese brukerveiledningen nøye før du begynner å bruke toalettet og dusjstolen, og å følge dem.

1.3 Avfallshåndtering

Vennligst følg avfallshåndteringsinstruksene i 1.3.1 og 1.3.2, for å bevare og beskytte miljøet, og å unngå forurensning og forbedre gjenvinning av råmaterialer.

1.3.1 Emballering

Produktets emballasje må lagres i tilfeller produktet må transporteres igjen. Dersom du må returnere produktet til reparasjon og i tilfelle av krav på garanti, ber vi deg bruke den originale kartongen slik at produktet er best mulig pakket.

Sorter pakkematerialet til gjenvinning i henhold til klassifisering. Ikke la emballasjen være utilsiktet, da det kan være en farekilde.

1.3.2 Produkt

Sorter råmaterialene brukt i produktet til gjenvinning i henhold til klasifisering (se informasjon om materiale på 2.1)

1.4 Hvor skal brukerveiledningen oppbevares

Ta godt vare på brukerveiledningen og påse at den oppbevares med produktet i tilfelle av gjenbruk.

2. Produktbeskrivelse

2.1 Generell informasjon

Alle enkelte ståldeler (mutre, bolter og skruer osv.) er laget av rustfritt stål. De polstrede delene er laget av vanntett polyuretanintegrert skum. Rammen er laget av aluminium og rustfritt stål og er pulverlakkert.

Stroppene er laget av polypropylenfibre med hurtigtørkende blandede avstands fibre til polstring. Plastikkdelen er injeksjoner fylt med forskjellig syntetisk harpiks. Alle materialer er fri for lateks, bly og ftalater.

2.2 Håndtering/transport

Hygienesystemet er ikke designet for å bæres. Dersom du har et standard understell, er HTS utstyrt med trinser. Hvis du må bære utstyret pga. hindringer, må du påse at alle bevegelige deler er festet. Så stiller du deg ved siden av hygienesystemet, griper på begge sider under støttehodet og bærer den dit den skal.

For å transportere hygienesystemet reduserer du alle justeringer til kompakt størrelse (fold opp fotplaten, innstill setet i laveste høyde, osv.)



Stram alle bevegelige deler før du bærer!

2.3 Bruksområder, bruk i henhold til tiltenkt bruk

Som toalettstol kan HTS brukes med toalett eller som en standardinretning med toalettbøtte. Det kan også brukes som toalettsete på toalettet, som dusjstol og dusjsete. Følg følgende retningslinjer:

Over toalettet

HTS enkelt skyves over toalettet. Høydeinnstillingen gjør at det kan tilpasses til å passe toalettet.

På toalettet

HTS kan brukes som et toalettsete på toalettet ved hjelp av en festestang.

Frittstående toalettstol/dusjstol

HTS seteenheden kan brukes som frittstående toalettstol/dusjstol kombinert med en understell High-Low - hydraulisk (se 4.1) .

Som dusjstol

HTS seteenheden kan brukes som dusjstol kombinert med en understell badekar.

2.4 Ikke tiltenkt bruk / advarsel retningslinjer



FORSIKTIG!

- Korrekt bruk av hygiesystemet krever presis og omhyggelig innføring av ledsager.
- Hygiesystemet kan kun brukes på stabilt og flatt underlag.
- Les "Teknisk data" i denne brukerveiledningen for hva som er maksimal tillatt pasientvekt.
- Hygiesystemet skal ikke brukes uten tilsyn.
- Hygiesystemet skal ikke brukes til å transportere folk.
- Bruk kun tilbehør og reservedeler som er laget av Schuchmann, ellers setter du barnet i fare.
- Bruk kun hygiesystemet hvis alle deler er korrekt montert og tilpasset.
- Brukere som har nedsatt syn eller leseevne må få brukerveiledning opplest, slik at de kan bruke produktet sikkert.

2.5 Utstyr for basismodell


- Sete og ryggenhet med hoftesele inkl. ryggpute og setepute (åpnes bak) bekken, hodestøtte og armlene som kan svinges ut.
- Mobil underramme

2.6 Liste over tilbehør

- Understell stasjonær
- Understell Hig-Low hydraulisk
- Understell badekar
- Sidestøtter
- Bryststropp/ bryst-skulderstropp
- Lår/leggstøtte
- Bord/armlene
- Løstsittende armlener
- Sprutskjerm
- Abduksjonskloss
- Fotplate
- Ankelstropper
- Festebøyle
- Leggstøtte
- Understell reise
- Skyvehåndtak

2.7 Produktoversikt

Bildet under skal vise deg de viktigste komponentenes tildeling og termene som du finner i brukerveiledningen.

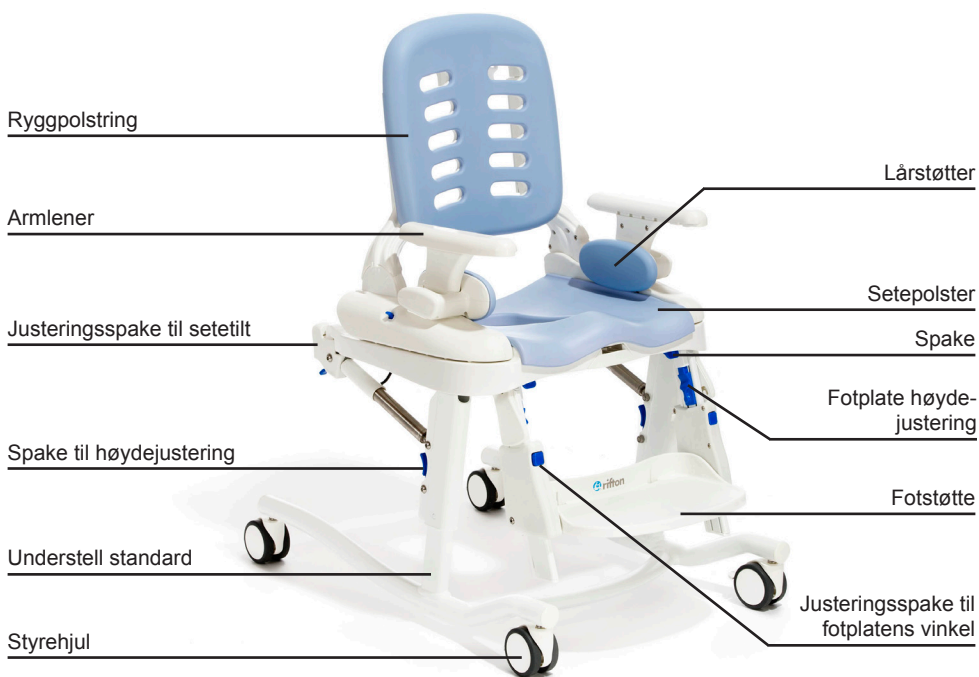


3. Innstillinger

Innstillinger og tilpassninger til produktet eller tilbehør kan kun gjøres av personer som har fått nødvendig opplæring av konsulent for medisinsk utstyr. Påse at ingen av brukers ekstremiteter er i det området når du gjør tilpasninger av alle slag for å redusere risikoen for skade.

3.1 Justering av ryggvinkelen

Ryggvinkelen kan justeres 6° fremover (A), 6° bakover (B), og 18° bakover (C). For å innstille ryggvinkelen trekker du begge sider av ryggen opp, sett i ønsket posisjon og slipp spakene. Du skal høre at de klikker på plass.

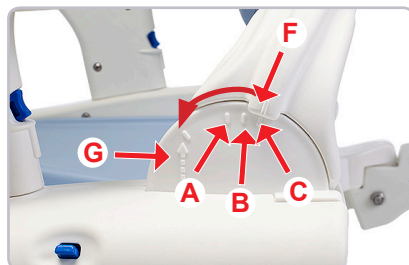

Montering/demontering av rygg:

For å demontere ryggen fjerner du armlenene (E - se 4.14 dersom tilgjengelig) og lårstøtter (dersom tilgjengelig, se 4.5). Trykk på spaken (d) og vipp ryggen helt tilbake til F og G markeringene er over hverandre. Nå kan du ta hele ryggen av monteringen.

For å montere ryggen plasserer du bare ryggen i monteringen slik at F + G markeringene er over hverandre igjen. Så trekker du ryggen tilbake til den klikker på plass i første posisjon.




Ryggen må bare monteres/demonteres når den ikke er i bruk!

3.2 Standard understell

Høyden på standard understellet kan tilpasses.


For å senke setet trykker du begge spakene for å justere høyden (A) på de langsgående stengene på rammens, **mens du støtter vekten på setet**. Senk begge sidene jevnt slik at setet ikke blokkerer.

Fell opp fotplaten (se 4.6) for å heve setet, plasser en fot på rammens underramme (B) og løft opp seterammen (spake for høydejustering må ikke utløses).

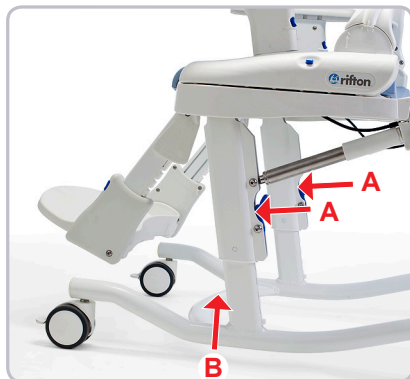

Høyden må alltid tilpasses når den ikke er i bruk!

Det er mulig å innstille setetilt på standard understell. Trykk på justerings-spaken (C) til høyre bakside på setet for å utløse de to gasstrykkfjærene. Setet kan tiltes 15° fremover og 15° bakover eller 5° forover og 25° bakover. HTS kan tiltes enkelt med brukeren i setet ved å bruke litt kraft.


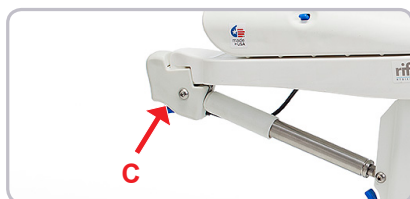


For å bruke bremsen må du trykke bremse-spaken (D) nedover. Dra spaken opp igjen for å utløse bremsen.



3.3 Justering av oppfellbare armlen

Armlenet kan felles opp. For å gjøre det må du først ta vekk bordet, hvis tilgjengelig (se punkt 4.9) Så folder du de svingbare armlenene, trykk knapp (E) og skyv de svingbare armlenene opp til stiften (F) klikker på plass i utløseren (G).

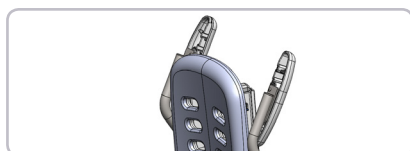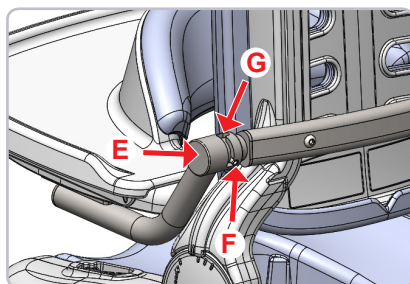

3.4 Justering av setedybden


Du kan tilpasse setedybden på seteenheten. For å gjøre dette trekker du den blå spaken (A) opp på begge sider, innstill ønsket setedybde og påser at setet klikker tilbake på plass. Sidedelene på seteenheten kan tas helt av foran slik at overflaten under kan rengjøres.



3.5 Hodestøtte

For å feste og tilpasse hodestøtten, må du trykke knappen for høydejustering (B). Sett hodestøtten inn i åpningen (C) og innstill ønsket høyde.

Nå kan du slippe knappen (B) og innstille ønsket høyde til du hører den klikke på plass. For å tilpasse dybden og vinkelen til hodestøtten må du utløse den ovale vri spaken (C), innstille hodestøtten i ønsket posisjon og stramme spaken igjen.

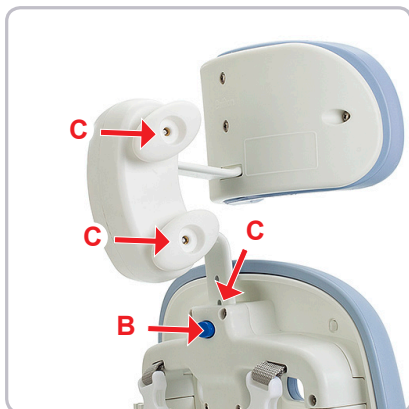

3.6 Bekkensele

For å kunne bruke bekkenselen må du feste låsen i åpningen bakpå sidestykket. Kontroller at bekkenselen klikker godt på plass.



Det er mulig for brukere som sklir litt frem på setet å føre bekkenselen forbi innsiden av støtene på rygglenet. For å sikre at små, aktive brukere sitter sikkert kan man også feste bekkenselen på HTS str. 1. Før selen gjennom krokene bak på seteområdet.



Bruk alltid bekkenselen for å unngå ulykker.

3.7 Polstre

Alle polstre kan fjernes til rengjøring. Trekk trykkfestet (A) ut av utløseren (B) for å fjerne. Polstrene er laget i polyuretan med holdbart integrert skum. Det fins tre forskjellige typer setepolster. Ett har en litt større åpning og er åpen bak (C) for å gjøre hygienepleie lettere. Åpningen på den andre typen er noe mindre og lukket bak (D), slik at brukeren har enda bedre støtte. Den tredje (E) er et setepolster uten hull. Hvert polster er festet med trykkfeste (A) som trykkes inn i utløseren (B).

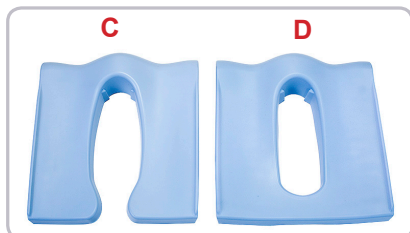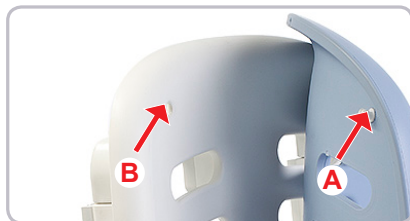

3.8 Toalettbøtte

Med toalettbøtte kan HTS brukes som en individuell toalettstol. Sett toalettbøtten i sporene under toalettsetet bakfra. Skyv helt til det klikker på plass. Fjern det igjen ved å trekke det ut bak.




4. Tilbehør

4.1 Understell

Felles for alle understell er at sete kan taes av og på.

For å feste setet på underrammen må du plassere begge krokene (A) bak på sete-enheten i hengslene (B) på gjeldende under-ramme. Trykk så forsiden av setet på rammen med litt styrke til du hører at det klikker på plass (C).

For å ta sete-enheten ut av rammen trekker du i begge uttrekkspakene (C) under hjørnet foran på setet og løfter det ut av rammen forfra mens du bøyer deg over setet.


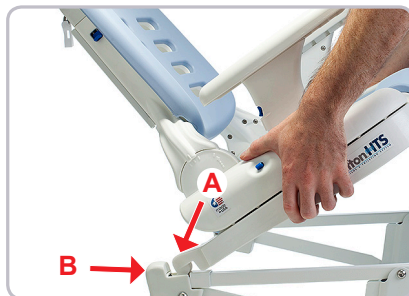


Påse at begge setekrokene er satt på hengslene (B) på underrammen og at du hører at begge uttrekksspakene (C) klikker på plass for å unngå skader!

4.1.1 Understell High-Low hydraulisk

Understell High-Low hydraulisk kan tilpasses i høyden. For å tilpasse høyden på rammen til overføring og pleie trykker du ned pedalen (D) på venstre eller høyre side på under-rammen med foten til underrammen er i ønsket posisjon.

For å senke underrammen løfter du opp pedalen (D) nedenfra med foten. Trykk på justeringsspaken (C) til høyre bakside på setet for å utløse de to gasstrykkfjærene. Setet kan vippes 5° forover og 25° bakover HTS kan vippes enkelt med brukeren i setet ved å bruke litt kraft. For tilpasning av den fastmonterte fotplaten, se punkt 4.6.2 og 4.6.3.

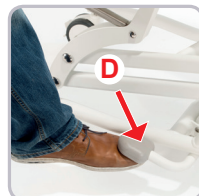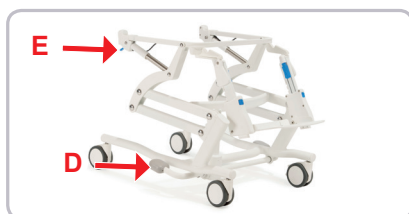


4.1.2 Understell stasjonær

Høyden på det stasjonære understellet kan tilpasses.

For å senke setet trykker du begge spakene for å justere høyden (A) på de langsgående stengene på rammen, **mens du støtter vekten på setet**. Senk begge sidene jevnt slik at setet ikke blokkerer.

Brett opp fotplaten (se 4.6) for å heve setet, plasser en fot på rammens underramme (B) og løft opp seterammen (spake for høydejustering må ikke utløses).

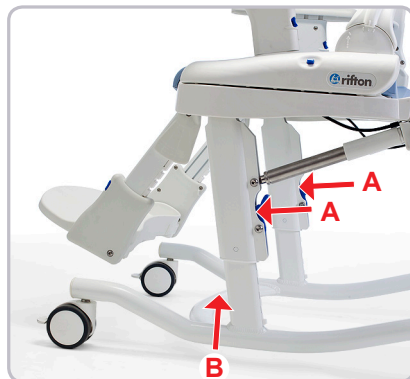

Høyden må alltid tilpasses når den ikke er i bruk!

For å bruke bremsen må du trykke bremse-spaken (C) nedover. Dra spaken opp igjen for å utløse bremsen.



4.1.3 Understell badekar

Badekar understellet skal brukes i et badekar slik at brukeren kan bade eller dusje (se 4.1 for montering av seteenheten på underammen).



4.1.4 Understell reise

Reise understellet er en lett, ramme som kan foldes med passende veske (A) Rammen passer i det bakerste rommet på bagen (B). Setet, ryggenet, armlenene og annet tilbehør kan lagres i det fremste rommet i bagen (C). For å kunne montere rammen må du brette begge deler av underammen fra hverandre og sette den firkantede enden av en del i det firkantede røret på en annen del av underammen (D).



Reiseunderammen kan ikke brukes for HTS str. 3!


4.2 Sidestøtter

Sidestøttene fås med eller uten bryststropp og sikrer at overkroppen er posisjonert sikkert.

De kan tilpasses separat i høyde vinkel og vidde med vri spaken (E) bak på rygglenet.

For å feste og/eller innstille sideputene (F) løsner du vri spaken (E) og fester dem over sporet bak på ryggen.

Innstill høyden, vinkelen og vidden på sideputene for pasienten ved å skyve pelottene opp og ned, mens du beveger åpningen frem og tilbake ved å vri på klipsen (G) rundt vri spaken. Stram tvistspaken (E) når du har nådd ønsket posisjon. Se 3.6 for fjerning av putene.

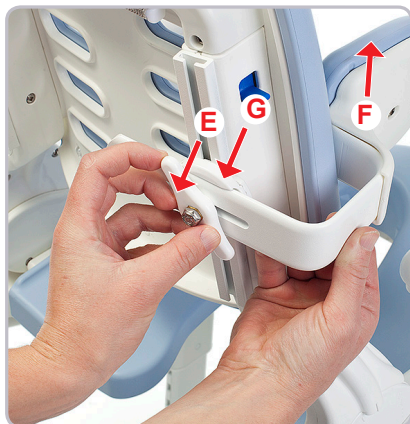

4.3 Brystrem (stropp)

Brystremmen er festet til sideputene. Brystremmen går inn i innsiden på sideputene.


Demonter sideputene (se 4.2) først, tre så endene gjennom løkken (A) og fest sideputene igjen.



4.4 Bryst-skuldersele

Midtdelen av bekkenselen (A) må fjernes først for å feste bryst-skulderselen.

For å gjøre dette må du bruke bryst-skulderstroppen (B) med det integrerte bekkenselen. Stram bekkenselen og sett skulderremmene inn i festet på rygglenet. Du kan også trekke skulderselene gjennom den øvre åpningen på rygglenet for mindre brukere.


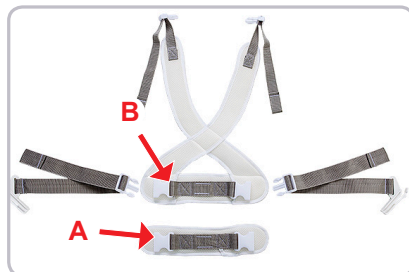


Stram hofteselen på bryst-skulderselen før du strammer de øverste selene. Kontroller at selen sitter etter innstilling.

4.5 Lårstøtter

Bredden på setet kan tilpasses med lårstøtterne. Setebredden reduseres med 5 cm i første posisjon (A) og med 10 cm i andre posisjon (B).

For å endre setebredden trekker du først ut lårstøtten (C) med festet (D). Trekk så festet (D) ut av lårstøtten (C). Skyv nå festet (D) inn i ønsket posisjon (A eller B) og stett det så, sammen med lårstøtten tilbake i setet.

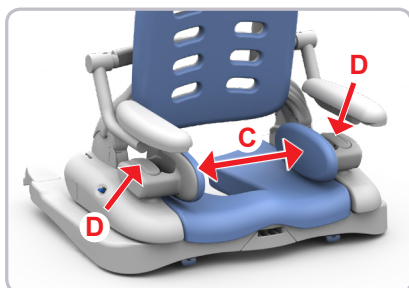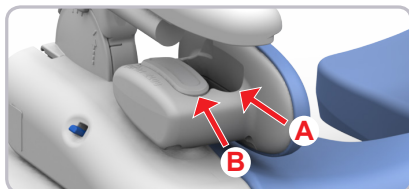

Når du bruker det alternative armlenet

Her tilpasses lårstøtten (C) til armlenene (E). For å endre setebredden trekker du ut armlenene (E- se punkt 4.14). Endre så posisjonen på lårstøtten som beskrevet over og sett armlenene tilbake i setet.

Se punkt 3.7 for fjerning av putene.



4.6 Fotplate



Fotplaten kan monteres som tilbehør på toalettsetet eller er alt festet på den mobile underrammen.



4.6.1 Montering på toalettsete

Følg disse rådene når du fester fotplaten på HTS seteenheden.

1. Sett de små metallfestene (A) på enden av rammen (B) inn i utløseren (C) bak på seteenheden.
2. Press fotplaten hardt ned slik at du hører rammen klikke på plass i de blå festene (D).
3. Fest HTS seteenheden på festebøylen (se 4.10). Fotplaten er en del av tilbehøret til mobile underrammer.

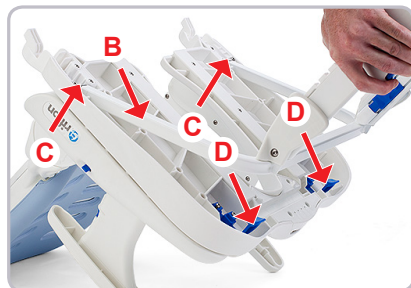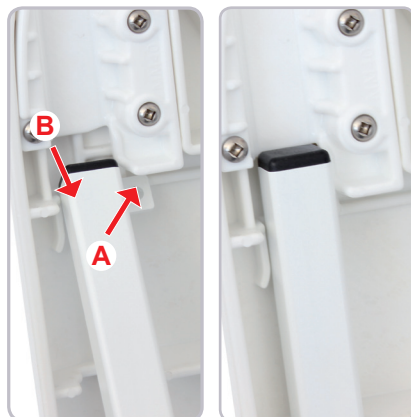

4.6.2 Fotplate høydejustering

For å tilpasse høyden på fotplaten trykker du begge knappene for høydejustering (A), innstiller fotplaten i ønsket høyde og lar knappen klikke på plass i ønsket posisjon.


4.6.3 Fotplate vinkelinnstilling

Vinkelen til fotplaten kan tilpasses ved å skyve begge spaker (B) opp og innstille fotplaten til en av fire vinkler. Fotplaten kan også brettes inn når du transporterer den på bakkenivå.



4.7 Leggstøtte

Leggstøtten (C) er festet over fotplaten (D). Den skal fjernes hvis fotplaten er innstilt i en av de øvre posisjonene. Leggstøtten er festet til de lange støttene på fotplaten. Snurr selen pekende bakover og de runde hjørnene nedover rundt de lange støttene og skyv den gjennom metallringen forfra. La kroken klikke på plass og fest selen stramt rundt de lange støttene.

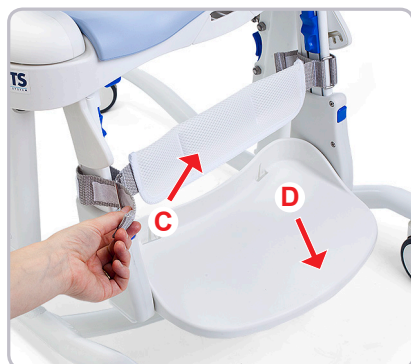

Leggstøttealternativet må ha fotplate!



Lasten på fotplaten må ikke overskride 68 kg for å unngå fall, velt eller andre skader.

4.8 Ankeltrapper


Skyv løkken på beltet gjennom den horisontale åpningen bak på fotplaten for å feste ankelmansjettene. Snu beltet og skyv det inn i den vertikale åpningen. Stram det til det klikker på plass. Beltene hos Velcro kan vaskes på 30 ° C. Forsegl Velcro før vasking. Må ikke strykes.



Dette alternativet må ha fotplate!

4.9 Bord/armlene

Bordet er skjøvet på armlenene. Bordet har et polstret stort magekontaktområde, der brukeren kan støtte seg (se punkt 3.7 for fjerning av puten). Dette gir en behagelig posisjon, litt foroverbøyd til dusjing eller når en skal bruke toalettet. Overkroppen og armene støttes av bordet. Trekk spaken (A) under bordet for å tilpasse bordets dybde.

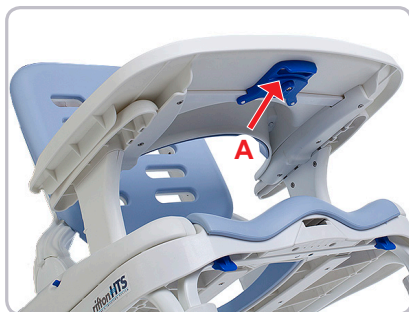

4.10 Festebøyle

Det fins to typer festebøylar til å feste runde standardtoaletter eller lengre toaletter.

Festebøylen er festet med holdeskruer som brukes til å feste toalettlokket og setet. De gir et sikkert festepunkt for setet og enhetene bak.

For å finne ut hvilken type festebøyle du trenger må du måle fra midtaksen på festeskruene til kanten foran på toalettskålen. Dersom avstanden er mindre enn 43 cm bruker du standard festebøyle (A), hvis ikke bruker du den lange festebøylen (B)-

For å feste toalettsetet på festebøylen skyver du rygglenet forover (se 3.1) så plasserer du begge krokene (C) på monteringen (D) på festebøylen og senker setet på toalettskålen.



For å unngå fall og skader må du påse at toalettet er sikkert festet til gulvet og at festeskruene er i god form før du fester festebøylen. Kontroller toalettets stabilitet og festeskruene jevnlig mens du bruker festebøylen.

411 Abduksjonkloss



Den polstrede abduksjonkloss er festet til forkanten på toalettsetet. Fjern det igjen ved å trykke på den blå spaken (E) og trekke abduksjonsklossen ut forover.

Hygienesystemet skal desinfiseres etter hver gangs bruk med engangskluter eller en løsning med opp til 10 % klor. Bruk kraft for å fjerne polstringene (se 3.7) og rengjør med såpevann eller mild desinfeksjon.




4.12 Sprutskjerm

Sprutskjermen (A) settes inn i setets polsteråpning med den hule siden mot brukeren. Sprutskjerm stor (B) sikrer bedre dekning. Den er monteret med hoftebelte eller bryst-skuldersele. Bruk av abduksjonskloss sammen med sprutskjerm gjør sprutskjermen ekstra stabil.

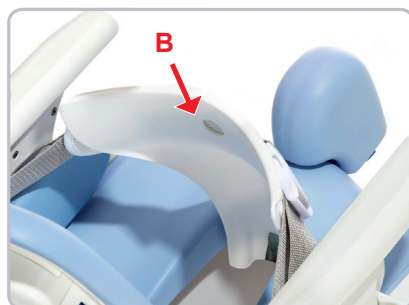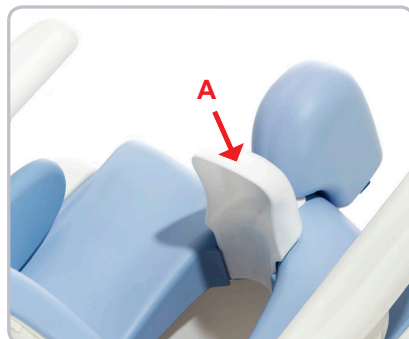

4.13 Skyvehåndtak


Skyvehåndtak gjør det enklere å skyve brukeren. Skyvehåndtakene er festet på HTS bakre enhet. Skyv håndtakene (C) inn i utløseren (D) på bakre enhet og stram vingskruene (E).

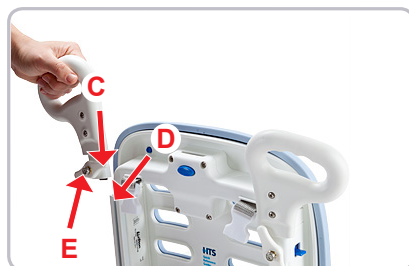

4.14 Justering av avtakbart armlene

For å feste det avtakbare armlenet (F) setter du nedre side av armlenet inn i den ovale åpningen (G) i setet og skyver det hardt ned til det klikker på plass.

For å fjerne det avtakbare armlenet trykker du på utløseknappen (H) og trekker det avtakbare armlenet opp.

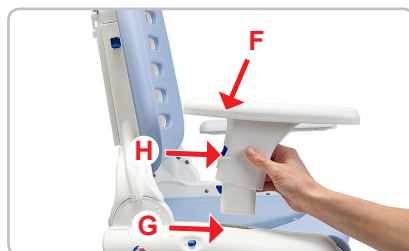

5. Reparasjon og rengjøring

5.1 Pleie

Hygienesystemet skal desinfiseres etter hver gangs bruk med engangskluter eller en løsning med opp til 10 % klor. Beltene hos Velcro kan vaskes på 60° C. Forsegl Velcro før vasking. Må ikke strykes. Putene er laget av polyuretan og er enkle å fjerne slik at de kan rengjøres godt og tørke på undersiden. De kan rengjøres med såpevann og mildt desinfeksjonsmiddel. Setet og basen må rengjøres skikkelig på 80° i et vaske og desinfeksjonssystem. Demonter stolen slik: Ta seteenheten av underrammen, løft bakdelen opp og fjern setets sidedel ved å skyve det fremover. Vær også obs på våre generelle rengjørings og hygieneråd. Du finner dem på www.schuchmann-reha.com/HTS.



Ikke bruk sterke rensedmidler som løsemiddel, harde børster osv.

5.2 Reparasjoner

Visuell kontroll må utføres daglig og kontroller hygienesystemet for sprekker, brudd, manglende deler og feil. Ved feil eller feilfunksjon må du kontakte spesialforhandler som leverte produktet til deg. (Se punkt 8.5)

5.3 Reservedeler

Dersom du ønsker å bestille reservedeler må du kontakte reservedelsforhandleren som leverte hygienesystemet til deg, og oppgi serienummer på chassis. (Se punkt 8,5)

Nødvendige reservedeler og tilbehør må kun installeres av opplært personale.

5.4 Varighet ved bruk og gjenbruk


Forventet levetid for bruk av produktet, avhengig av brusintensitet og mengde gjenbruk er "8 " år, dersom bruken foregår i henhold til informasjonen i denne brukerveiledningen. Det kan være mulig å bruke produktet lengre dersom det er trygt. Forventet levetid viser ikke til slitasjedeler som deksler, hjul, batterier...

Vedlikehold og vurdering av tilstand, hvis det vurderes gjenbruk må avgjøres av spesialforhandler.

Hygienesystemet egner seg til gjenbruk. Vennligst følg rengjørings og desinfeksjonsinstruksene i kapittel 5.1. Veldlagt dokumenter, som denne brukerveiledningen er en del av produktet og må overføres til den nye brukeren.

Det trengs ingen demontering før gjenbruk. Ved lagring anbefales det å folde produktet til smaleste mål for å spare plass.

6. Tekniske data

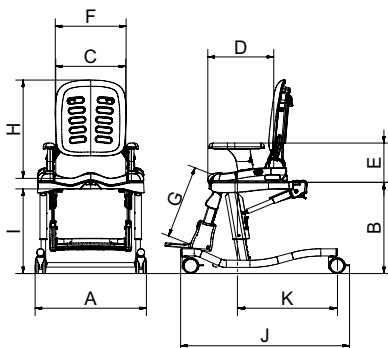

Mål basismodell

		Str.1	Str.2	Str.3	
A	Bredde	Understell standard	53 cm	53 cm	57 cm
		Understell stasjonær	51 cm	51 cm	53 cm
		Understell High-Low hydraulisk	67 cm	67 cm	71 cm
B	Setehøyde	Understell standard	39 - 55 cm	39 - 55 cm	44 - 58 cm
		Understell stasjonær	33 - 43 cm	36 - 44 cm	38 - 48 cm
		Understell High-Low hydraulisk	51 - 78 cm	51 - 78 cm	51 - 78 cm
C	Setebredde	20* / 25* / 30 cm	25* / 30* / 36 cm	33* / 38* / 43 cm	
D	Setedybde	20 / 23 / 25 / 28 cm	29 / 32 / 34 / 37 cm	37 / 40 / 42 / 44 cm	
E	Armlene høyde	13,5 cm	17 cm	20 cm	
F	Ryggbredde	29 cm	34 cm	41 cm	
G	Laveste benlengde toalettsete	22 - 34 cm	27 - 39 cm	34 - 44 cm	
H	Ryggghøyde	42 cm	50 cm	62 cm	
I	Maks. posisjon over toalettshøyde	Understell standard	52 cm	52 cm	52,5 cm
		Understell stasjonær	38 cm	38 cm	42 cm
J	Lengde	Understell standard	79 cm	79 cm	86 cm
		Understell stasjonær	71 cm	71 cm	74 cm
		Understell High-Low hydraulisk	84 cm	84 cm	87 cm
K	Forkanten på hygieneåpning til bakre hjørne på understell	48 cm	48 cm	48 cm	
	Ryggvinkel	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	(-)6°, 6°, 18°	
	Setevinkel	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	(-)5° - 25°	
		(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	(-)15° - 15°	
	Maks. last.	34 kg	68 kg	113 kg	

* kan tilpasses med valgfri lårstøtte

7. Garanti

Det gjelder to års lovbestemt garanti for alle produkter. Denne garantiperioden skal begynne når leveransen leveres til kunden. Dersom det skulle oppstå en bevise-
lig materiell eller produksjonsfeil innen denne tiden skal vi, etter at returfrakten er
betalt oss, se på den påståtte skaden og hvis tilfelle, enten reparere eller levere et
nytt produkt etter vårt skjønn.

8. Registrering

8.1 EF konformitetserklæring

Company **Schuchmann GmbH & Co.KG**
Dütestr. 3
D-49205 Hasbergen
Tlf.: +49 (0) 54 05 / 909 - 0
Faks: +49 (0) 54 05 / 909 - 109



Erklærer eneansvar for at produktet nevnt under er klassifisert som produkt klasse 1

"HTS" - universelt hygiesystem

Art. No.: 57 01 000/M18-1 (str. 1)

57 02 000/M18-1 (str. 2)

57 03 000/M18-1 (str. 3)

Relevante regulativer i regulativene og retningslinjene oppført under er i henhold med:

- EF direktiv 93/42/EEC om medisinske produkter av 14. juni 1993
- DIN EN 12182 Tekniske hjelpemidler for funksjonshemmede
- EN ISO 14971 Medisinske produkter - Anvendelse av risikostyring for medisinske produkter
- ISO 7176-8 Rullestoler - Del 8: Krav og kontroller på statikk styrke, press og tretthetsstyrke

Denne konformitetserklæring gjelder kun for produkter med artikkelnumre over og er gyldig til 31.12.2019.

Dato 27.08.2014



Signatur

Navn Torsten Schuchmann

Rolle Sikkerhetsrepresentant for medisinske produkter

8.2 Serienummer / produksjonsdato

Serienummer, produksjonsdato og annen informasjon er på typeskiltet som er plassert på alle våre produkter (A).

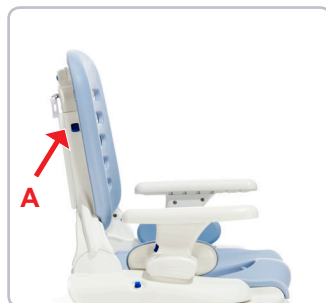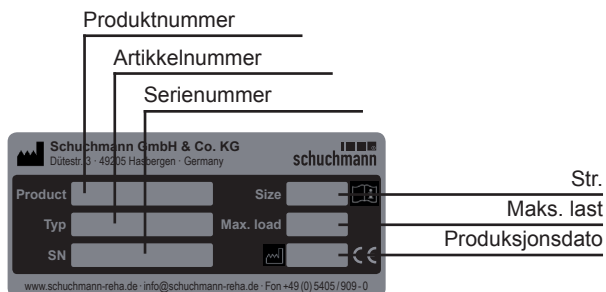

8.3 Produktversjon

Dette HTS hygiesystemet fås i tre størrelser og kan suppleres med en serie variert tilbehør (se punkt 4).

8.4 Utstedelse av dokument

Brukerveiledning for hygiene systemer HTS endre status A; i utgave 02.2018

8.5 Navn og adresse på produsent, spesialforhandler som distribuerer produktet

Dette produktet er produsert av:

Schuchmann GmbH & Co. KG
Dütestraße 3 · 49205 Hasbergen
Tlf. +49 (0)5405/909-0 · Faks +49 (0)5405/909-109
info@schuchmann-reha.de · www.schuchmann-reha.de

Dette produktet er levert av følgende spesialforhandler:

Medema Norge A/S
Stamveien 6
1481 Hagan
Tlf +47 67 06 49 00
firmapost@medema.no
www.medema.no