

BADBRÄDA TRYGG

Artikelnummer: 142910

Avsedd användning: Badbräda Trygg är avsedd att sitta på vid duschning i badkar.

Leveranskontroll: Kontrollera att alla delar finns med vid leverans och är hela. Använd inte produkten om den är skadad.



Säkerhetsanvisningar:

- Produkten bör ej brukas på annat sätt än vad som är avsett.
- Kontrollera att hela anläggningsytan, delen under badbrädans handtag, ligger mot badkarskanten.
- Kontrollera regelbundet att brädan är korrekt monterad på badkaret.
- Före varje användningstillfälle ska benen spännas fast för hand.
- Badbrädan får ej förflyttas med brukaren sittandes på den.
- Se till att inga tvålrester finns på badkarskanten (halkrisk!)
- Max brukarvikt 150kg

Montering:

1. Fäst de justerbara benen med medföljande skruvar, men bara så mycket att benen kan röra sig fritt i spåret.
2. Fäst handtaget med medföljande skruvar och skruva fast handtaget ordentligt.
3. Placera badbrädan tvärs över badkaret med handtaget mot väggen. Badkarets innermått ska vara 49-59 cm. Kontrollera att hela anläggningsytan, delen under badbrädans handtag, ligger mot badkarskanten.
4. Skjut benen mot badkarskanten så att de ligger an utan att de stramar.
5. Spänn därefter fast benen mot kanten genom att skruva in fötterna i brädan.



Teknisk specifikation

Brädans längd: 69 cm
Brädans största bredd: 37 cm
Vikt: 2 050 g
Material: HDPE (sits)

Skötselanvisningar: Rengörs regelbundet och vid behov (min 1ggr/månad) med tvållösning, ph 5-9. Kontrollera att anti-halk skydd sitter fast ordentligt.

Symboler: Förklaring av symbolerna på produkten och i bruksanvisningen.



Max 150 kg

Max säker brukarvikt.



Kan tvättas med alkalisk tvållösning, ph 5-9.



Produkten följer EU direktiven 93/42/EEG och 2007/47/EG för medicintekniska produkter.

Swereco ; fci d AB

Barnhusgatan 4
SE-111 23 Stockholm
Tel: +46 8 444 38 20
Fax: +46 8 754 30 80
www.swereco.se
info@swerecogroup.se