



**COBI REHAB**<sup>®</sup>  
The Positioning Company

# Kelvin kørestol

En unik kørestol til de individuelle løsninger

**Anvendes med fordel til**

**Max 125 kg**

**Brugsanvisning**

- Smertepatienter.
- Bevægelseshæmmede.
- Hjerneskadede.
- Neurologiske patienter.
- Sclerose patienter.
- Patienter med pareser.
- Patienter med knoglekræft.
- Brugere med ufrivillige bevægelser såsom parkinson og huntingtons sygdom.
- Demens.



# ADVARSEL

**Dette produkt må ikke anvendes uden grundig instruktion fra uddannet personale.**

**Bruges produktet til personer, der vejer mere end den maksimale brugervægt, er der risiko for at beskadige produktet.**

**Cobi Rehab påtager sig intet ansvar for eventuelle skader på produktet eller personskader forårsaget af forkert installation, forkert montering eller forkert anvendelse af dette produkt.**

**Hvis dele er beskadiget eller mangler, kontakt Cobi Rehab med det samme. Brug IKKE erstatnings reservedele.**

**Cobi Rehab kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller ulykker, der opstår efter reparationer uden skriftlig tilladelse fra Cobi Rehab.**

**⚠ For at sikre korrekt brug af Kelvin kørestol skal brugsanvisningen læses grundigt før brug. Der skal rettes opmærksomhed specielt mod advarselne mærket med ⚠.**

**Desuden må stolen kun betjenes af uddannet personale eller af personer, der har fået instruktion i dens brug, da der ellers er fare for, at brugeren kan komme til skade.**

## Anvendelse

Kelvin kørestolen kan med fordel anvendes i hjemmet, i hjemmeplejen, på institutioner, på hospicer og til voksne som er alvorligt hæmmet i deres daglige liv.

### Konstruktion

Kelvin kørestolen er opbygget af moduler af puder fyldt med latex og Krøyer kugler. Indstillingsmulighederne i hofte-, knæ, og ankelled, kombineret med stolens 45° tilt, gør det let at tilpasse stolen til den enkelte brugers behov, trods deformiteter, kontrakturer og smerter. Brugeren vil opnå en optimal støtte fra isse til hæl.

Kørestolen er konstrueret med flexarme, som giver brugerens arme mulighed for at blive understøttet og skaber tryk, ro samt en høj grad af komfort.

### Større livskvalitet

Når brugeren først er liftet over i Kelvin kørestolen, er det nemt at bringe brugeren rundt i stuen eller andre steder i hjemmet eller institutionen. Kelvin kørestolen er derved medvirkende til at give en højere grad af fleksibilitet og livskvalitet, samt er med til at opretholde sociale relationer.

## Fleksibelt modulsystem

Det komplette Kelvin system er opbygget af moduler, og alle komponenterne er koordinerede med hinanden og passer sammen uden generende sømme. Desuden er det muligt at tilvælge en abduktionspude, swing-away fodstøtter, højde-regulerbare armlæn og bord, samt flere størrelser og typer af nakkestøtter. Serien af tilbehør kan uden besvær og efter behov påsættes og tilpasses den enkelte bruger.

Genbrugsværdien af Kelvin kørestolen er høj, da stolens store sortiment af tilbehør og modulopbygningens fleksibilitet gør det nemt at gentilpasse stolen til en anden bruger. Dette kan gøres i samarbejde med Cobi Rehabs erfarne konsulenter.

⚠ Bruges produktet til personer, der vejer mere end 125 kg kan der opstå risiko for at kørestolen vælter eller bliver beskadiget.

Brugervægt max.	125 kg
Vægt	Ca. 47 kg
Sædetilt bagud	0 - 45°
Nakkestøtte	Ja, flere typer
Fodstøtter	Ja, flere typer
Hjælpe motor kan eftermonteres	Ja
Indstillelige skubbehåndtag	Ja
Indstillelig i hofte-, knæ, og ankelled	Ja
Åndbart- og vaskbart betræk	Ja
Stel	Lakeret aluminium
Hjul	Massive
Pude overflade	PU
Pudefyld	Latex og Krøyer kugler

## Sikkerhedsvejledninger

⚠ Personale skal vurdere om brugeren af sikkerhedsmæssig årsag skal fastspændes i Kelvin kørestolen under transport i huset.

⚠ Brugere skal altid lufte ind og ud af Kelvin kørestolen.

⚠ Hverken bruger eller personale må stå på fodstøtten.

⚠ Benyt altid tiltfunktionen forsigtigt så ryk undgås.

⚠ Kelvin kørestolen er beregnet til én person med max brugervægt på 125 kg.

# Før brug

De bolte der skal løsnes for at kunne indstille Kelvin kørestolen til brugeren sidder gemt væk (undtagen 4 og 8). Når der skal justeres på kørestolen skal man da finde boltene under en lynlås, svarende til den placering der vises ovenfor.

## Kontrollér følgende:


- At alle skruer og bolte er forsvarligt spændt efter indstilling af stolen.
- At kørestolen glidende kan tiltes, og kan stoppe i hvilken som helst stilling / vinkel.
- At bremsene virker.

1. Håndbremse
2. Beslag til justering af hoftevinklen
3. Beslag til justering af knævinklen
4. Beslag til justering af ankelvinklen
5. Beslag til justering af benlængden
6. Nakkestøtte
7. Flex arme
8. Beslag til justering af skubbehåndtagenes højde




Scan koden og få flere produktinformationer.



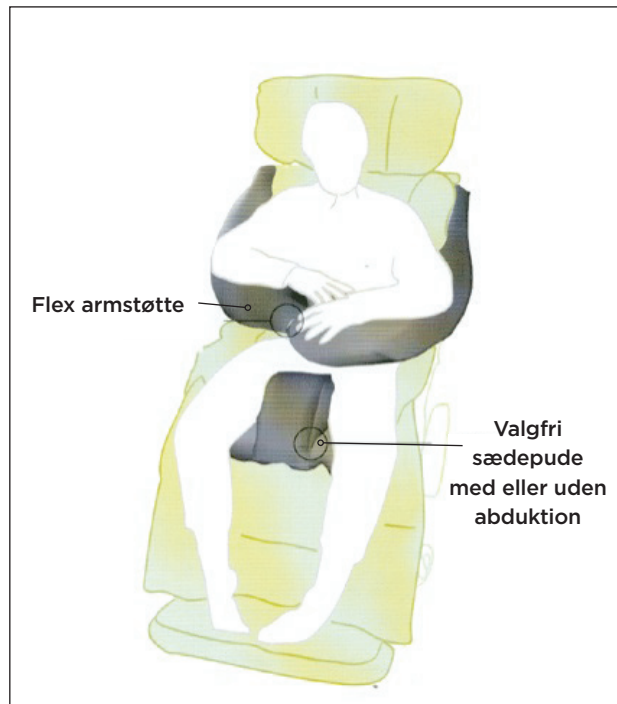

- 8. Beslag til justering af skubbehåndtagenes højde
- 9. Beslag til justering af skubbehåndtagenes vinkel
- 10. Betjening af tiltfunktion
- 11. Skruer til justering af hoftevinkel
- 12. Beslag til isætning af nakkestøtte
- 13. Anti-tip
- 14. Fodbremse

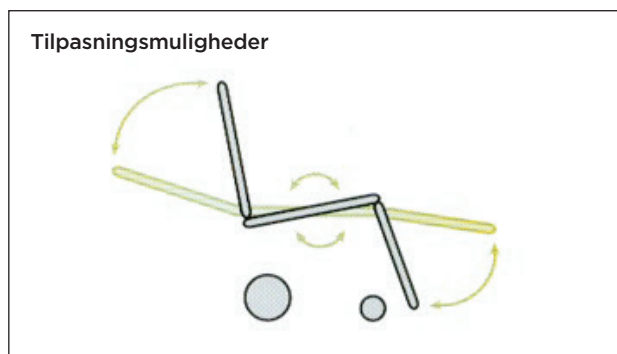

# Tilpasningsmuligheder

Ved alle indstillinger af stolen er det vigtigt kun at løsne de skruer som skal indstilles, da det ellers ikke er muligt at indstille stolen alene.

## Hovedstøtten

Ved hjælp af hovedstøttens skruer er det muligt at stille dybde og vinkel på hovedstøtten.

Hold hovedstøtten med den ene hånd, og løs de nødvendige skruer med den anden. Indstil hovedstøtten, hold den i stillingen med den ene hånd, og stram skruerne igen med den anden hånd.

## Højdejustering af hovedstøtten

Højden på hovedstøtten kan stilles ved at holde hovedstøtten med den ene hånd og løsne skruen med den anden. Hæv eller sænk hovedstøtten og stram skruen til igen.

## Edison nakkestøtte


Kelvin stolen fås også med Edison nakkestøtte, som er nem at tilpasse med det multijusterbare greb. Nakkestøtten kan tilpasses i lodret, sideværts samt fremadrettede positioner.

## Hoftevinkel

Når hoftevinklen skal stilles er der flere steder der skal løsnes skruer:

1. Løs de to skruer bag på stolen markeret som nr. 11 på tegningen side 4.
2. Derefter skal skruerne markeret som nr. 2 på tegningen side 3 løsnes - og endelig kun løsnes. Husk at løsne i begge sider.

Nu kan man ved samtidigt skub på markering nr. 2 på tegningen side 3 rette stolen mere op eller ved at trække op ved markering nr. 2 på tegningen side 3 åbne vinklen mere i hoften.

 Se til at der ikke er risiko for at sædet rammer den tværgående stang nedenunder når brugeren kommer i stolen.

## HUSK

- at stramme skruerne begge steder igen.

## Knævinkel

Knævinklen kan justeres ved at løsne skruerne i begge sider svarende til markering nr. 3 på tegningen side 3. Hold fodstøtten med den ene hånd, og ved at trække op i den eller skubbe ned, findes den ønskede knævinkel. Spænd skruerne til én af gangen, imens den anden hånd fastholder fodstøtten i stillingen.

## Forlængelse af fodstøtten

Fodstøtten kan forlænges ved at løsne skruerne svarende til markering nr. 5 på tegningen side 3 (4 skruer i alt). Løs alle 4 skruer, træk ud i fodstøtten svarende til hvad der er nødvendigt, og stram skruerne til igen.

## Ankelvinkel

Ankelvinklen indstilles ved at løsne skruerne svarende til markering nr. 4 på tegningen side 3, indstille vinklen og stramme skruerne igen.

# Skubbehåndtag

Skubbehåndtagenes højde kan indstilles ved at løsne fingerskruen markering nr. 5 på tegningen side 3, og derefter løsne skruerne til det er muligt at trække skubbehåndtaget længere op. Det er samtidig muligt at stille vinklen, så et optimalt greb opnås. Se markering nr. 8 og nr. 9 på tegningen side 4. Stram skruerne til igen, og sikre at rillerne passer sammen.

# Betjening af tilt-funktionen


Når brugeren af Kelvin kørestolen skal lænes tilbage kan man aktivere tiltfunktionen ved et tryk på det lille håndtag på højre skubbehåndtag markering nr. 10 på tegningen side 4.

Vægten af brugeren vil hjælpe til med at lægge stolen ned. Det lille håndtag aktiveres også når brugeren skal sættes op igen.

# Tilpasning af puderne

Alle puder på kørestolen kan åbnes og fyldes med mere Kelvin fyld eller man kan fjerne fyld fra puderne.

For at åbne puderne skal man åbne den gule lynlås. Vær forsigtig da fyldet nemt flyver ud. Det er en god idé at lave en tragt af et stykke papir, som man så kan hælde fyldet igennem og ned i puden.

 Ved fjernelse af fyld skal man være opmærksom på at der ikke må fjernes for meget, så brugeren "går igennem" puden.

# Vedligeholdelse og rengøring

## Af stolen

Kelvin kørestolen er beregnet til indendørs brug, men tåler dog også at blive brugt udendørs. Skulle Kelvin kørestolen blive våd, bør den hurtigst muligt tørres af med en tør klud.

Hvis stellet er snavset kan det tørres af med en klud opvredet i mildt sæbevand.

⚠ Det anbefales, at stolen aftørres/støvsuges mindst én gang om ugen, og hjulene tjekkes for snavs.

Kelvin kørestolen leveres med betræk på hovedstøtten, på selve stolen og på Flex armene. Disse betræk af bomuld kan vaskes ved 60° C, men må ikke tørretumbles. Disse betræk bør vaskes efter behov.

Ved almindelig daglig brug er der sjældent brug for at vaske puderne helt, men man kan da nøjes med at aftørre puderne med en klud opvredet i mildt sæbevand.

## Af puder

Alle puder kan lynes af (sort lynlås) og vaskes ved 40° C. Puderne behøver ikke blive tømt for fyld ved vask. Puderne kan slynges ved 700 omdrejninger. Puderne må ikke tørretumbles. Når puderne lægges til tørre, læg dem da med det elastiske bomuldsbetræk nedad, så vandet kan rende fra.




## Af betræk

Betrækket kan tages af og maskinvaskes ved max. 60° C.

⚠ Må ikke tørretumbles.

⚠ Betrækket skal være helt tørt, før det igen sættes på stolen.

# Pudenumre

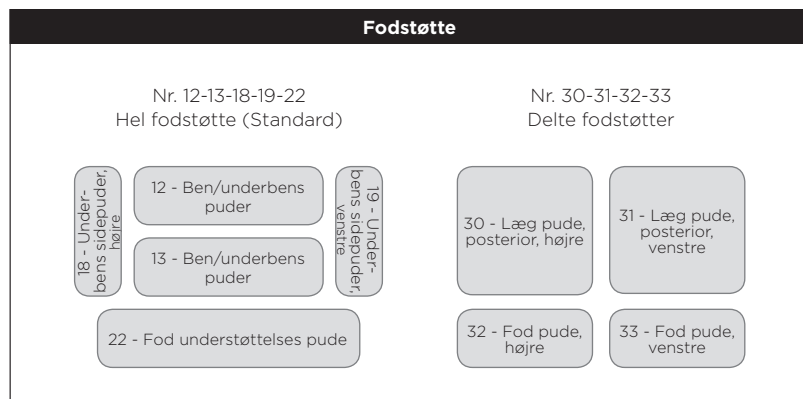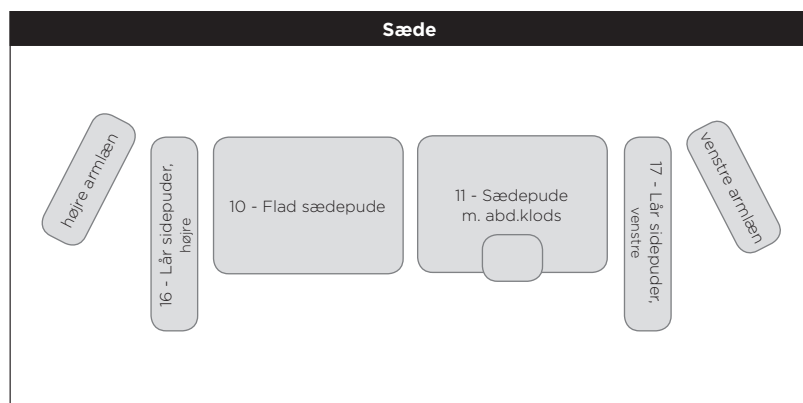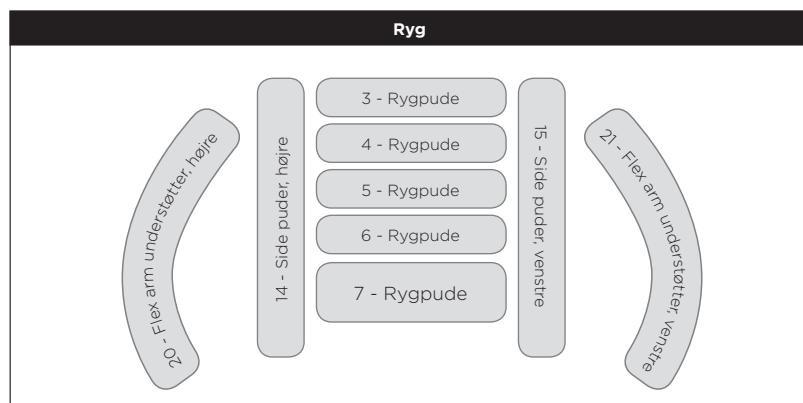

Pudennr	Pudebeskrivelse
1	Kelvin hovedstøtte
2	Ryglænsforlænger
3 - 8	Rygpuder
10	Flad sædepude
11	Sædepude m. abd.klods
12 - 13	Ben/underbens puder
14 - 15	Side puder
16 - 17	Lår sidepuder
18 - 19	Underbens sidepuder
20 - 21	Flex arm understøtter
22	Fod understøttelses pude
23 - 24	Hårde armlæn med puder
28 - 29	Læg støtter, side
30 - 31	Læg pude, posterior
32 - 33	Fod pude

## Mål og specifikationer

Størrelser	Sæde- bredde cm	Sæde- dybde cm	Ryg- højde cm	HMI	Bruger- vægt
Kelvin 1 S40	34-40	40-48	55	36013	125 kg
Kelvin 1 S48	34-40	48-56	55	64586	125 kg
Kelvin 2 M40	40-46	40-48	55	64587	125 kg
Kelvin 2 M48	40-46	48-56	55	36496	125 kg
Kelvin 2 M56	40-46	56-64	55	64588	125 kg
Kelvin 3 L48	46-52	48-56	55	36497	125 kg
Kelvin 3 L56	46-52	56-64	55	64589	125 kg

## Garanti

Stolen leveres uden fejl eller mangler. Der ydes 1 års garanti for produktionsfejl og / eller defekter i materialet på stolens ramme.

Der ydes 1 års garanti for produktionsfejl og / eller defekter i materialet på betræk, sæde-, ben - og rygpuder, hjul, cylinderlåse, kabler, håndtag, beslag, og fodstøtte.

Enhver reparation må kun udføres af personer autoriseret af Cobi Rehab ApS. Hvis reparationer foretages af anden end en af Cobi Rehab ApS autoriseret person, bortfalder garantien.

Ved enhver fejl, kontakt da forhandleren Cobi Rehab ApS. Send ikke en stol tilbage til forhandleren uden at have snakket med en konsulent først.

### Garantien bortfalder hvis:

- stolen er misligholdt eller har været ude for uheld.
- stolen er blevet repareret af anden end en person autoriseret af Cobi Rehab ApS
- garantien omfatter ikke slid efter normal brug
- man agerer modsat henvisningerne i brugsvejledningen.

### PRODUCENT

Life & Mobility B.V.  
Logistiekweg 7  
7007 CJ Doetinchem  
Holland

### FORHANDLER

Cobi Rehab  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf.: +45 70 25 25 22  
www.cobirehab.com

04/2018/JP



**COBI REHAB<sup>®</sup>**  
The Positioning Company

**COBI REHAB**  
Fuglebækvej 1D  
DK-2770 Kastrup  
Danmark  
Tlf. +45 7025 2522  
[www.cobirehab.com](http://www.cobirehab.com)