

# Bruksanvisning

## Røykvarsler – Optisk med ID

### RVA7



2018-08-29  
Dok. nr.: 5805A

---

Vestfold Audio  
Sandefjord

## Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse .....	2
Teknisk informasjon.....	2
Innledning.....	3
Plassering og montering.....	3
Etter montering av røykvarsleren.....	4
Test og vedlikehold .....	4
Enkel feilsøking / Funksjonskontroll .....	4

---

### Teknisk informasjon

**Produsent**

Vestfold Audio AS  
3241 Sandefjord

**Tekniske spesifikasjoner**

Bruksområde: Innendørs.  
Driftsspenning: 9 V høykapasitets  
litiumbatteri  
Frekvens: 142.475 MHz  
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.

**Rengjøring som kan utføres av bruker**

Du kan tørke av røykvarsleren med en fuktig, godt oppvridd klut med mildt såpevann. Hjelpemiddelet må ikke utsettes for søl eller sprut med vann. Røykvarsleren bør støvsuges *utvendig* to ganger i året.

**Vedlikehold som kan utføres av bruker**

Batteriet må byttes når røykvarsleren indikerer at det er på tide med et nytt.

**Lagring når ikke i bruk**

Oppbevares på et tørt sted.

---

## Innledning

Røykvarsler BRVA7 (optisk) er en del av FlexiBlink systemet. Den har innebygd radiosender og vil starte FlexiBlink mottakere med samme huskode når den detekterer røyk..

Blant våre mest brukte mottakere er displayet **IRIS**, lommevibratoren **Junior** og **AURORA**.

## Plassering og montering

Finne et egnet sted for røykvarsleren. Vanligvis blir den montert i taket, minst 50 cm fra vegg. Flere røykvarslere i boligen, og fornuftig plassering av dem, kan gi økt sikkerhet.

### Monteringsanvisning:

1. Vask bort støv og fett med spritservietten.
2. Vent noen minutter til flaten er blitt tørr.
3. Velg en kode. Se avsnittet *Koding*.
4. Velg evt. en ID (identitet). Se avsnittet *Identitet*.
5. Plugg på batteriet. Se avsnittet *Batteri*.
6. Fest Røykvarsleren med borrelåsen.
7. Test røykvarsleren sammen med FlexiBlink anlegget.

Nå er Røykvarsleren klar til bruk.



## Koding

Røykvarsleren bør kodes når den tas i bruk. Da unngår du at den starter mottakere i nabolaget. Huskodebryteren er plassert på **undersiden** av røykvarsleren. Velg en tilfeldig huskode. Husk imidlertid på at alle sendere og mottakere i boligen må stilles på samme huskode for å kunne virke sammen.





**Huskodebryteren**  
(fabrikkinnstilling)

## Batteri

### Innsetting av batteriet

1. Trekk ut batteriskuffen.
2. Legg batteriet på plass i batteriskuffen.
3. Skyv skuffen tilbake i røykvarsleren.

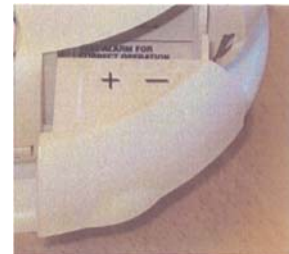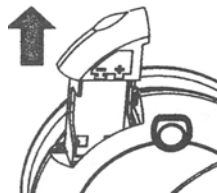

### Batteritype

Røykvarsleren blir levert med et 9 volt Litiumbatteri. Det vil normalt vare i flere år. Ved batteriskift kan du bruke vanlige 9 volt batterier, men da må du regne med å bytte det oftere.

## Identitet

Merk: Du behøver ikke ta hensyn til dette avsnittet dersom boligen bruker kun én FlexiBlink røykvarsler.

I boliger med mer enn én FlexiBlink røykvarsler kan det være nyttig å vite hvilket rom eller etasje varslingen kommer fra. Med ID-velgeren (identitetsvelgeren) bestemmer man hvordan varslingen skal vises i FlexiBlink mottakere med display og/eller tale.

ID-velgeren er synlig på undersiden av røykvarsleren.

### Valg av ID når kun en Røykvarsler

ID-velgeren er plassert på **undersiden** av røykvarsleren. Med en liten skrutrekker dreier du ID-velgeren til **0**.

Når denne Røykvarsleren varsler, vil displayet IRIS vise brannsymbolet.

## Valg av ID på øvrige Røykvarslere

Åpne toppdekslet. Med en liten skrutrekker dreier du ID-velgeren til **1,2,3,4, osv.**

Røykvarsleren vil da identifisere seg i FlexiBlink mottakere med display og/eller tale med hvor alarmen har gått. Dette vil ikke komme fram når testknappen benyttes. ID-velger



- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 0. Kun brannsymbol | 8. Gang               |
| 1. Kjeller         | 9. Soverom            |
| 2. Underetasje     | A. Barnerom           |
| 3. 1.etasje        | B. Gjesterom          |
| 4. 2.etasje        | C. Hobbyrom           |
| 5. 3.etasje        | D. Kontor             |
| 6. Stue            | E. Teknisk rom        |
| 7. Kjøkken         | F. <i>Ikke i bruk</i> |


## Etter montering av røykvarsleren

Trykk på Testknappen (1) og hold den inne til

FlexiBlink anlegget varsler.

**Sjekk at røykvarsleren starter mottakerne i FlexiBlink anlegget.**

Om nødvendig kan FlexiBlink repeatere installeres for å få økt rekkevidde.

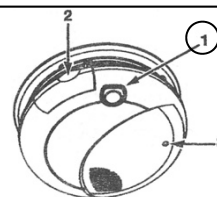

## Test og vedlikehold

Røykvarsleren skal testes regelmessig, minimum en gang pr. måned.

Trykk inn Testknappen (1) (se illustrasjonen ovenfor) og hold den inne til FlexiBlink-anlegget varsler.

Testknappen har forøvrig felles funksjon med Hysj-knappen. Når testknappen benyttes, vil mottakerne kun varsle «Brannalarm», og de vil ikke fortelle hvilken ID/Rom-innstilling røykvarsleren har.

Dersom det ønskes å teste hvilken ID røykvarslerne er innstilt på, må en benytte testgass for testing.

Da vil mottakerne varsle hvilket rom/etasje røykvarsleren er innstilt på (Se tabell over).

## Hysj-funksjonen NB!

Hysj-funksjonen kan brukes dersom røykvarsleren starter mens du f.eks. lager mat. Trykk på Hysj-knappen (1) og alarmen stopper.

**Den vil nå være stille i ca. 15 minutter.** I denne perioden gir røykvarsleren hvert minutt et kort "pip" som indikerer at den er i hysj-tilstand. I hysj-perioden vil røykvarsleren ha nedsatt følsomhet. Skulle den da bli utsatt for tettere røyk, vil den på nytt gi alarm.

Hysj-knappen har forøvrig felles funksjon med testknappen.

## Enkel feilsøking / Funksjonskontroll

### Svakt batteri

Svakt batteri blir varslet med korte "pip" i røykvarsleren en gang i minuttet.

Mottakeren IRIS vil med symbol og tekst fortelle at røykvarsleren trenger nytt batteri. Andre

FlexiBlink lampetter indikerer at en sender har svakt batteri ved å blinke to ganger i minuttet.

Mottakere med aktivert tale vil melde om svakt batteri i røykvarsler.

### Tiltak:

Sett inn nytt batteri og test deretter Røykvarsleren som beskrevet ovenfor.

## Dersom du trenger hjelp til feilretting

I fall du ikke klarer å rette feilen selv, bør du kontakte det sted hjelpemiddelsentralen eventuelt har gitt deg opplysninger om, eller til:

*Fylles ut av hjelpemiddelsentral eller montør*