



Bruksanvisning
IPAI REHA-NXT bilsete

BANO LIFE

Innholdsfortegnelse

1. Generell informasjon	
1.1 Innledning	3
1.2 CE-deklarasjon	3
1.3 Formål	4
1.4 Garanti	4
1.5 Service og reparasjon	4
1.6 Opplæring	4
2. Sikkerhetsinstruksjon	5
3. Bruk av setet	6
3.1 Regulering av hodestøtte	6
3.2 Bruk av trepunktssele	7
3.3 Regulering av fempunktssele	9
3.4 Individuell selestramming	9
3.5 Regulering av rygg høyde	10
3.6 Regulering av ryggvinkel	10
4. Isofix og stabiliseringsbøyle	
4.1 Isofix	11
4.2 Stabiliseringsbøyle	12
5. Tilbehør	13
5.1 Sikkerhetsbord	13
5.2 Sidestøtter	13
5.3 Abduksjonskloss	13
5.4 Vinkelregulering	14
5.5 Fotstøtte / fotrulle	14
5.6 Dreiefunksjon	14
5.7 Belte for å redusere skulderbredde	15
5.8 Beskyttelsestrekk	15
6. Vedlikehold	16
7. Tekniske data	17

1. Generell informasjon

1.1 Innledning

Gratulerer med ditt nye IPAI REHA-NXT bilsete!

Før du tar bilsetet i bruk er det viktig at du leser bruksanvisningen og setter deg inn i hvordan bilsetet fungerer, samt sikkerhetsrutinene som alltid må følges.

Har du spørsmål vedrørende produktet skal du ta kontakt med din forhandler Bardum AS.

Vi gjør deg oppmerksom på at det kan komme tekniske forandringer til versjonen beskrevet i denne bruksanvisningen.


Før du monterer bilsetet i bilen ber vi deg lese og følge monteringsinstruksjonen. Sørg for at bruksanvisningen alltid følger bilsetet.

Vi håper du får glede av bilsetet og at produktet innfrir dine forventninger.

Videreforsandler, Norge:



Produsent

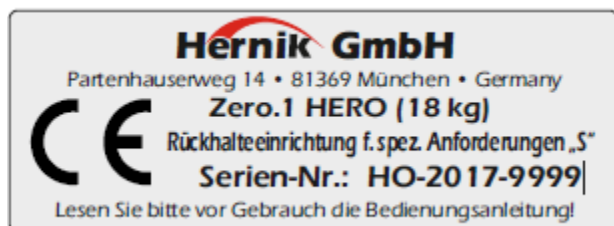

1.2 CE- Deklarasjon

Produsent Hernik GmbH bekrefter at IPAI REHA-NXT oppfyller Direktivet EEC 93/42 og er CE godkjent.

1.3 Formål

IPAI REHA-NXT er utviklet for å sikre transport av barn i bil med spesielle behov. Barn med redusert hodekontroll eller nedsatt kontroll av kroppen vil med IPAI REHA-NXT få ekstra og god støtte ved bruk av lateralstøtter og hodestøtte. Det kan følge med flere ulike typer tilbehør for å ivareta barnets behov, slik som abduksjonskloss, sikkerhetsbord og mye mer.

1.4 Garanti

Garanti gjelder kun dersom produktet brukes som beskrevet i bruksanvisningen. Produsenten er ikke ansvarlig for skade forårsaket av tilpasninger gjort av andre.

1.5 Service og reparasjon

Service og reparasjoner av IPAI REHA-NXT skal kun utføres av kyndig fagpersonell. Henvend deg til Bardum AS dersom du har spørsmål om dette. Det skal kun benyttes originale deler.

1.6 Opplæring

Bilsetet leveres klart til bruk. Bardum AS kan være behjelpelig med opplæring i bruk av setet og montering i bil.

2. Sikkerhetsinstruksjoner

Før du bruker IPAI REHA-NXT skal du sjekke at setet og belter er i orden.

- Ditt barns sikkerhet garanteres kun når setet er montert på riktig måte og når barnet sitter godt i setet og belter er plassert som beskrevet over.
- Beltene skal være stramme og ikke vridd.
- Bilens trepunktssesele skal være festet som beskrevet over og ikke være vridd.

Sjekk også:

A) At setebeltet er festet skikkelig.

B) At beltelåsen er låst.

C) At tekstiler ikke er ødelagt.

- Pass på at ingen harde deler, f.eks. beltelåsen er plassert mellom barnet og beltet. Dette kan gi skader ved en ulykke.
- Vær forsiktig når du tar setet inn og ut av bilen slik at det ikke ødelegges.
- Ikke forlat barnet alene i setet.
- Setet skal helst ikke brukes i etterkant av en ulykke da det kan være ødelagt og sikkerheten ikke god nok.

3. Bruk av setet

Plassér IPAI REHA-NXT i bilens sete. Sørg for at ryggen på IPAI REHA-NXT ligger godt inntil bilens rygg (07).

NB! Hvis bilens nakkestøtte er i veien for bruk av IPAI-NXT kan denne tas av.




3.1 Regulering av hodestøtte

Riktig justert hodestøtte (05) sikrer riktig føring av bilens trepunktsbelte og gir barnet den beste beskyttelsen. Hodestøtten (05) må reguleres slik at det er plass til to fingre mellom barnets skuldre og hodestøtten (05). Dermed kan du regulere hodestøtten etter barnets høyde.

1) Ta tak i justeringshendelen (06) på baksiden av hodestøtten (05) og trekk den opp. Nå er hodestøtten ikke fiksert/låst.

2) Nå kan du plassere hodestøtten (05) i riktig høyde. Når du slipper justeringshendelen (06) låses hodestøtten (05).

3) Sjekk høyden når barnet er plassert i IPAI REHA-NXT. Gjenta dette til hodestøtten (05) er i riktig høyde.

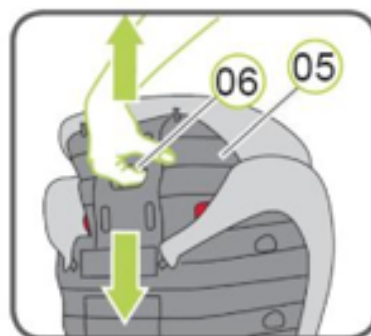


3.2 Bruk av trepunktssele

For å absorbere de enorme kreftene ved en ulykke, må IPAI REHA-NXT festes med bilens trepunktssele i henhold til ECE 44, R14 and R16.

Kun bruk av ISOFIX festene alene er IKKE nok!

1) Plassér barnet i IPAI REHA-NXT. Det enkleste er å dreie setet 90° (tilbehør: dreiefunksjon).

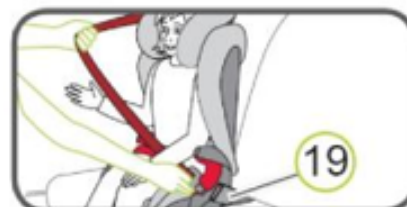

2) Trekk ut bilens trepunktsbelte, plasser det FORAN barnet og fest det i beltelåsen(19).

NB! Pass på at bilens trepunktsbelte ikke er vridd. Et vridd belte fungerer ikke som det skal.

3) Beltet skal låses (19) med et hørbart klikk.



4) Plasser bilens trepunktsbelte (18) og hoftebelte (17) på siden av beltelåsen (19) i den røde belteføringen (01) på seteputen.

NB! Bilens beltelås (19) må ikke være mellom den røde belteføringen(01) og armstøtten.

5) Plassér hoftebeltet (17) på hver side i den røde belteføringen (01).

NB! Hoftebeltet (17) må gå så lavt som mulig over hoftene.



6) Plassér diagonaldelen av bilens belte (18) i den røde belteføringen (02) på hodestøtten (05). Sørg for at hele selen går inn i belteføringen (02).


NB! Dersom ryggen (07) dekker beltholderen (02), justeres hodestøtten (14) opp.

Etter at diagonaldelen er plassert (18) kan hodestøtten (05) plasseres i riktig høyde.




7) Pass på at diagonaldelen av bilens belte (18) går over barnets kragebein. Pass også på at det IKKE går over halsen.

NB! Du kan justere høyden av hodestøtten (05) også når IPAI REHA-NXT er plassert i bilen.

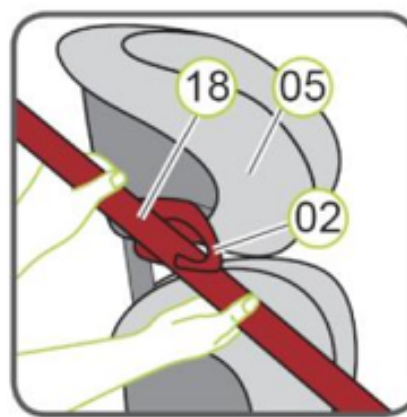

Kontrollér følgende før du kjører

1. Barnets sete er festet skikkelig.
2. Hoftebeltet (17) går gjennom begge røde belteføringer (01).
3. Diagonaldelen (18) er plassert korrekt i belteguiden (19) samtidig som beltet går gjennom belteføringen på setedelen.
4. Diagonaldelen (18) går gjennom den røde belteguiden (02) på hodestøtten.
5. Beltene er stramme og ikke vridde.
6. Bilens beltelås (19) skal ikke ligge mellom armstøtten og den røde belteføringen (01).

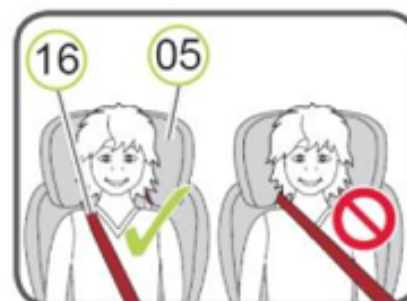

3.3 Regulering av fempunktssele

Velg én av to mulige posisjoner for beltelåsen. Polsteret på bilsetet må løsnes for å komme til på undersiden. Deretter setter du inn barnet. Sørg for at barnet plasseres helt inntil ryggen på bilsetet.


Legg selen over skulderen til barnet. Hvis selen virker for kort løfter du polsteret og trykker forsiktig på metallspennen slik at skulderselene kan tilpasses. Ikke press for hardt! Deretter plasseres de to metalledene ned i beltelåsen og låses med et hørbart klikk.

Stram selene ved å trekke i den korte stroppen i front av setedelen. Stram til selene slik at de ligger godt på barnet.



3.4 Individuell selestramming

Man kan også stramme selene over skuldrene individuelt. Press inn de grå knappene på skulderselene og justér dem individuelt.

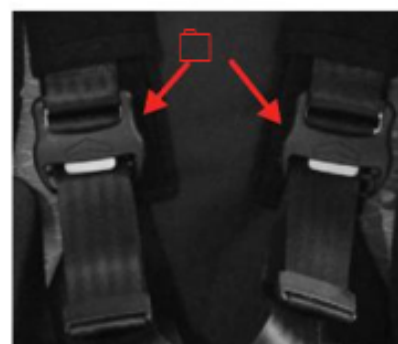

3.5 Regulering av rygghøyde


Trykk inn utløserhåndtaket og trekk opp.
NB! Toppen av barnets hode skal IKKE kunne sees over ryggen.

Juster fempunktsbeltet slik at det går horisontalt.
Løsne de fire skruene (merket) for å få korrekt høyde.
Fest skruene når du har riktig høyde.



3.6 Regulering av ryggvinkel



Ryggvinkelen har trinnløs justering og kan låses i ønsket posisjon. På denne måten er setet stabilt i enhver stilling. Åpne de to røde quick-release-hendlene og still ryggen til ønsket stilling. Husk å låse hendlene.

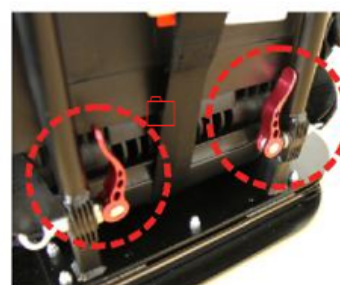

4. ISOFIX

Montering

1. Følg bruksanvisningen.
2. Åpne skruene på venstre og høyre side og trekk adapteret bakover.
3. Justér bilens seterygg slik at du enkelt kan bruke ISOFIX. Skyv adapteret bakover og inn i ISOFIX-festene til du hører et klikk.
4. Skyv setet bakover mot bilens seterygg slik at de har god kontakt. Dermed unngås vibrering under kjøring.
5. Lås skruene på venstre og høyre side.
 7. Forsikre deg om at adapteret er låst ved å prøve å tekke det ut.

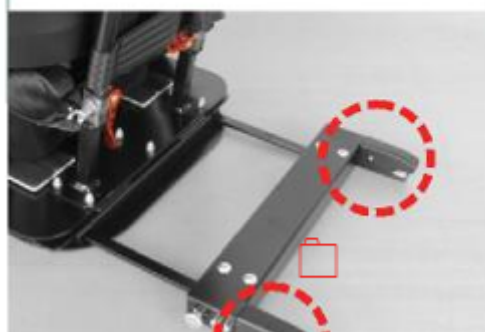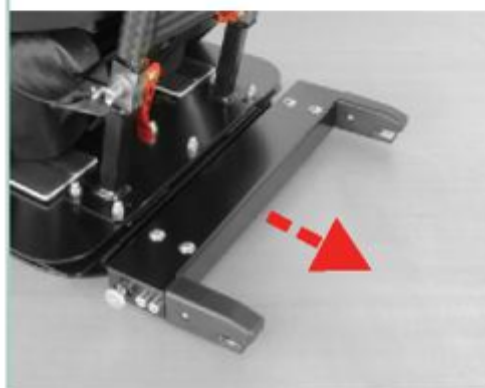

Demontering

7. Åpne de to skruene.
8. Trekk adapteret fremover.
9. Frigjør setet fra ISOFIX-festene.

4.1 Stabiliseringsbøyle

Montering

1. Følg bruksanvisningen.
2. Åpne skruene (0) på venstre og høyre side og trekk bøylene bakover.
3. Justér bilens seterygg i ønsket stilling. Skyv bøylene bakover slik at den kommer inn under bilens seterygg.
4. Skyv setet bakover mot bilens seterygg slik at de har god kontakt.
5. Lås skruene (0) på venstre og høyre side.
6. Om buen på bøylene skal vende opp eller ned avhenger av hvordan bilens sete er konstruert.

Demontering

7. Trekk ut setet, inkludert bøylene.



5. Tilbehør

5.1 Sikkerhetsbord

Montering:

1. Sett barnet inn i setet og stropp fast bordet. Bordet festes med medfølgende borrelåsbånd.
2. Barnet kan legge armene på bordet. Dette hjelper til med å stabilisere overkroppen.
3. Ikke bruk skarpe gjenstander eller leker som kan ødelegge bordet!



5.2 Sidestøtter

NB! Sidestøttene festes med velcro.

For å endre stillingen på sidestøttene, skal man vri forsiktig på velcro båndene slik at du kan vri på sidestøttene.

Ende stillingen på sidestøttene ved å vri forsiktig på velcrobåndene slik at sidestøttene kan vris.

Press velcrobåndene godt sammen slik at de festes godt.



5.3 Abduksjonskloss

1. Abduksjonsklossen hjelper til med å holde barnets bein i riktig posisjon. Klossen må fjernes for å justere selene i setet.
2. Abduksjonsklossen skal plasseres helt inntil setet som på bildet. Den kan dybdejusteres ved å løsne begge skruene under setet.
3. Abduksjonsklossen bør være på plass og brukes når du har montert den. Den monteres FØR barnet plasseres i setet.
4. Den røde hendelen kan settes i ønsket posisjon ved å trekke den forsiktig mot deg uten å løsne skruen. Den røde hendelen skal plasseres som på bildet.



5.4 Vinkelregulering

1. Justér ryggvinkelen ved å løsne skruene på venstre og høyre side og velg et annet hull. Lås deretter skruene.
2. Det er ingen quick-release her for å ivareta sikkerheten.



5.5 Fotstøtte / fotrulle

Fotstøtten er festet med skruer under setet og kan dybdejusteres.

1. Vinkelen kan justeres ved å løsne hendlene på hver side. Plassér hendlene slik at de ikke skader noen!
2. Høyden på fotstøtten justeres trinnløst ved å løsne hendlene på hver side av fotstøtten. Plassér hendlene slik at de ikke skader noen!



5.6 Dreiefunksjon

1. Det anbefales å bruke dreieplate for å gjøre det enklere å ta barnet inn og ut av setet.
2. Setet kan dreies 90° og kan kun dreies én vei. Man velger retning ved bestilling av setet.
3. Husk å bruke ISOFIX!

2. For å dreie setet løfter du opp hendelen () og dreier setet i samme bevegelse. Den valgfrie fotstøtten kan kollidere med B-stolpen i bilen når du dreier setet. Pass på beina til barnet når du dreier setet!

3. Når barnet er plassert i setet dreier du setet tilbake til du hører et klikk. Da er setet last.



5.7 Belte for å redusere skulderseler

1. Plassér beltet i høyde med brystet til barnet. Beltet skal ikke komme opp i halsen. Beltet har velcro på baksiden for bedre feste.

2. Nå kan du justere bredden på beltet () før du låser det fast. Putt løse belteender inn i spennen.



5.8 Beskyttelsestrekk

1. Plassér matten slik at ISOFIX-festene ikke dekkes.
2. Plassér setet midt på matten og fest setet.



6. Vedlikehold




Bruk kun originalt setetrekk. Setetrekket er en integrert del av setet og er essensielt for at setet skal fungere optimalt. Reservetrekk får du hos din leverandør Bardum AS.

- Setetrekket kan tas av og vaskes i maskin på 30°C. Bruk skånsomt vaskemiddel. Se vaskeanvisning på setetrekket.
- Polstringen kan vaskes på samme måte som setetrekket. Ta ut alle skumdeler før vask. Disse skal ikke vaskes.
- Skulderpløsene kan håndvaskes.
- Plastikkdelene og seler kan tørkes med mildt såpevann. Ikke bruk sterke vaskemidler.

NB! Bilsetet skal ikke brukes uten trekk.

Ta av trekket

1. Flytt hodestøtten til øverste posisjon.
2. Løsne krokene (20) bak på ryggen (07).
3. Ta av øvre del av trekket.
Løsne løkkene (21) nede på baksiden av ryggen (07).
4. Ta av trekket på hodestøtten og trekket på setet.
5. Løsne løkkene (21) på baksiden av hodestøtten (5)
6. Løsne krokene (20) foran på hodestøtten (07)
7. Ta av trekket (05). Nå kan du vaske trekket.

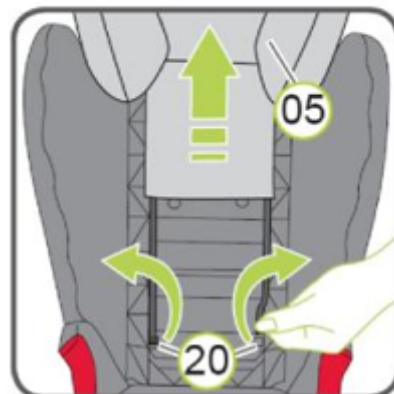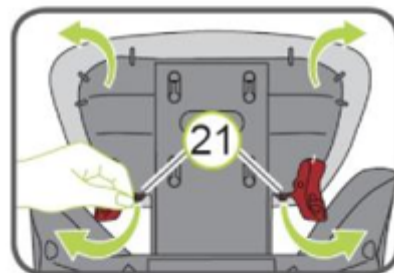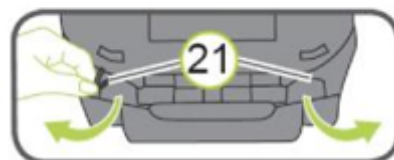

7. Teknisk data

Teknisk data	Uten putesett	Med putesett
Setebredde, bekken	31 cm	26 cm
Setebredde, knær	34 cm	34 cm
Setedybde	30 cm	27 cm
Rygghøyde	41 - 54 cm	38 - 51 cm
Total rygghøyde inkl. hodestøtte	59 - 74 cm	56 - 71 cm
Min. høyde bolstøtter	20 cm	17 cm
Maks høde bolstøtter	33 cm	30 cm
Bredde mellom bolstøtter	20 - 33 cm	17 - 30 cm
Vinkel	85° - 160°	
Brukervekt	15 - 36 kg	
Total høyde	68 - 88 cm	
Total bredde	51 cm	
Total dybde	42 cm	
Vekt	12 kg*	



BANO LIFE

Sammen ønsker vi å gjøre en forskjell!

Med spesialtilpassede hjelpemidler ønsker vi å gjøre en forskjell i hverdagen for barn, ungdom, voksne og eldre med forskjellig funksjonsnivå.

Bano Life
Berghagan 7, 1405 Langhus
post@banolife.com
tlf. 64 91 80 60

banolife.no