

Audiodetektor

LYD9-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	<u>3</u>
<u>2. Oversikt</u>	<u>3</u>
Utvendig	3
Under lokket	3
Batteriet	4
<u>3. Komme i gang</u>	<u>4</u>
Sette inn batteriet	4
Sammenkoble enheter	5
Sammenkoble første gang	5
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	5
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	6
Velg funksjon (ID-velger)	6
Mikrofon på ledning	6
Justering av følsomhet	6
Montering	6
<u>4. I bruk</u>	<u>7</u>
<u>5. Viktig informasjon</u>	<u>7</u>
Bruksbegrensninger:	7
<u>6. Resirkulering</u>	<u>7</u>
<u>7. Sikkerhet</u>	<u>7</u>
<u>8. Tekniske data</u>	<u>7</u>
<u>9. Samsvarserklæring</u>	<u>7</u>
<u>10. Feilsøking</u>	<u>8</u>

1. Innledning

Audiodetektor LYD9-L er en universell sensor laget for viderevarsling av lydvarslere i andre produkter til FlexiBlink LIFE mottakere. LYD9-L passer gjerne der det ikke finnes andre standard sendere.

Audiodetektor LYD9-L detekterer varslingslyd ved hjelp av en mikrofon på ledning. Mikrofonen monteres så nær lydkilden som mulig. *Daglige signaler* utløser varsling med lydvolument som er innstilt i FlexiBlink LIFE varslingsmottakere, mens *Alarmer* alltid varsler med full lydstyrke. LYD9-L benytter et spesialbatteri med svært lang levetid.




Figur 2 Bakside



Figur 3 Bunn med mikrofon på ledning


2. Oversikt

Utvendig

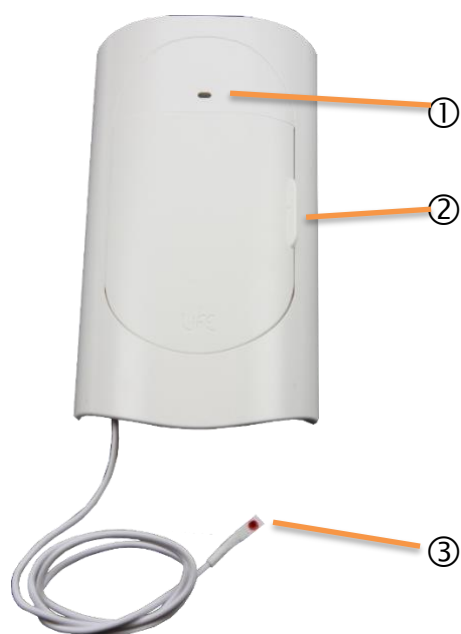

Figur 1 Framside

Under lokket

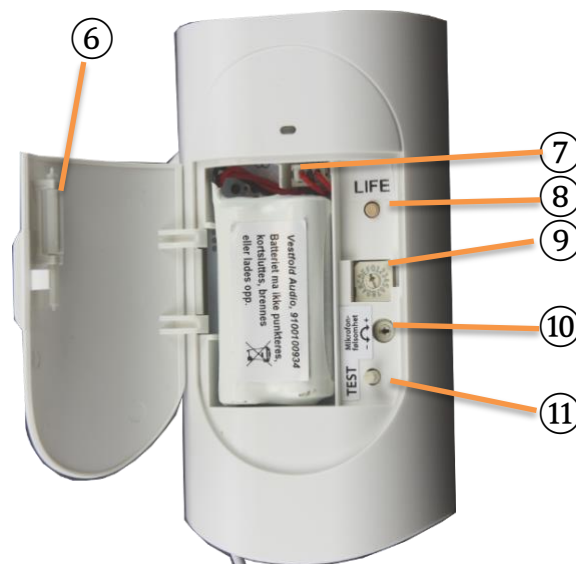

Figur 4 Under lokket

Betydning:

- ① Lysindikator
- ② Lokk
- ③ Mikrofon på ledning
- ④ Borrelås-tape
- ⑤ Hull for skruefeste
- ⑥ Verktøy for innstillinger
- ⑦ Batterikontakt
- ⑧ LIFE-knapp (sammenkobling)
- ⑨ Funksjonsvelger (ID-velger)
- ⑩ Følsomhetsjustering
- ⑪ Testknapp

Batteriet

Det medfølger et høykapasitets litium-batteri (Varenr. 9100100934), som vil sikre drift av enheten i mange år. Batteriet må ikke lades opp.



3. Komme i gang

Sette inn batteriet

Sett inn batteriets kontakt som vist i figuren til høyre.

Ved tilkobling av batteri kan LYD9-L blinke grønt i opptil et par minutter mens batteriet klargjøres for langtids bruk.



Før ledningen i en bue inn i åpningen og legg inn batteriet.



Tips

Trykk på testknappen for å verifisere at enheten fungerer og at det varsler i mottakerne som tilsiktet.



Forsiktig

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes eller brennes.


Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles ved å trykke på LIFE-knappen.


Den finnes under lokket foran på LYD9-L. Se figur 4 på side 3.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

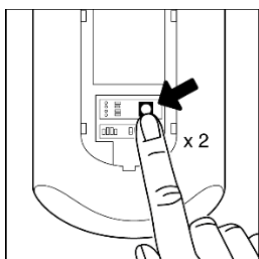

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

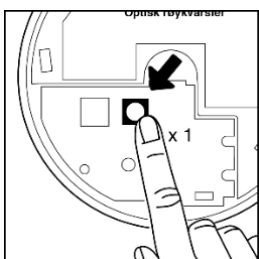

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

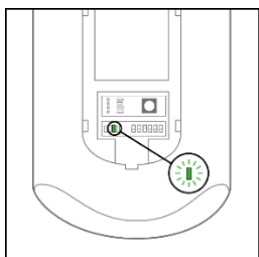

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk én gang på LIFE-knappen.

Velg funksjon (ID-velger)

LYD9-L har innebygget mange varslinger.

Vri på Funksjonsvelgeren til den posisjonen som passer til det som skal varsles i mottakerne.

Benytt gjerne den korte enden på det medfølgende verktøyet som sitter i lokket.



Funksjonsvelger
(fabrikkinnstilling)

ID	Mikrofon	Signal-type
0	Telefon	Daglig
1	Timer	Daglig
2	Sykesignal – Kom snart	Daglig
3	Sykesignal – Kom Nå	Alarm
4	Passasjealarm	Alarm
5	Komfyrvakt	Alarm
6	Tyverialarm	Alarm
7	Gassalarm	Alarm
8	Epilepsialarm	Alarm
9		
A		
B	Lukk igjen kjøleskapet	Daglig
C	Lukk igjen fryseren	Daglig
D	Generell (*1)	Stille
E	Generell	Daglig
F	Generell	Alarm

Mikrofon på ledning

LYD9-L reagerer på lyd av en viss styrke (regulerbar følsomhet). Det er meget viktig at den lille mikrofonen settes fast tettest mulig inntil lyd-kilden på apparatet som skal overvåkes og med den røde ringen innover.

Mikrofonen festes med medfølgende tape.

Justering av følsomhet

Følsomheten ⑩ til mikrofonen innstilles, om nødvendig, til minste nivå for sikker deteksjon. For økt følsomhet, vri hjulet med klokka. For lavere følsomhet, vri hjulet mot klokka.



Viktig

Følsomheten bør være lavest mulig slik at ikke LYD9-L bruker opp batteriet for tidlig ved at den "hører" støy.

Montering

LYD9-L monteres normalt på vegg med den medfølgende borrelås-tapen. Benytt den medfølgende spritservietten for å rengjøre vegg. Trykk limflatene hardt på plass i minst 10 sekunder.

Alternativt kan enheten festes med skrue til veggen gjennom festehullet under batteriet.



Forsiktig

Vær forsiktig når du skrur inn skruen slik at den omkringliggende hvite platen ikke skades.



Viktig

Test alltid at audiodetektoren varsler som tiltenkt ved å aktivere lyd-kilden den er tilkoblet.

4. I bruk

Når enheten er i drift, vises status i lysindikatoren på framsiden:

<i>Slukket</i>	Stand-by
<i>Grønt</i>	Varsel sendes
<i>Blinkende rødt/grønt</i>	Bytt batteri
<i>Blinkende Oransje</i>	Mikrofonen hører lyd, men litt for lavt til å sende varsel

5. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder. Produktet må ikke skrus fra hverandre.
Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.
Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd):	69x133x27mm
Vekt m/ batteri:	140 g
Batteri:	Litium 3 V
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Radiofrekvens:	868.1–869.85 MHz

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	LYD9-L fanger ikke opp lyden fra kilden / det lyser ikke grønt	Trykk på Test-knappen og sjekk om varselet kommer fram.
	LYD9-L fanger ikke opp lyden fra kilden	Sett mikrofonen tett opp til lyd-kilden, eventuelt skru opp følsomheten. Se kap. 3.
	Batteriet i LYD9-L er tomt / det blinker rødt.	Bytt batteri.
	LYD9-L mangler batteri	Sett inn batteri.
	Avstanden mellom LYD9-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	Enhetene er ikke sammenkoblet	Utfør sammenkobling.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet med noen	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Det lyser/blinker oransje lys	Mikrofonen hører lyd, men ikke godt nok til å varsle	Plasser mikrofonen nærmere lyd-kilden. Eventuelt øk følsomheten. Se kap. 3.
Falsk varsling	Følsomheten er for høy	Reduser følsomheten – Se kap. 3.
Det varsles med feil signal i mottakere.	Funksjonsvelger (ID) står i feil posisjon.	Skru funksjonsvelgeren til riktig posisjon.
Det blinker rødt/grønt i LYD9-L	Batteriet i LYD9-L er snart tomt.	Bytt batteri

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

