

FlexiBlink LIFE Putevibrator med nødstrømbatteri og trådløs ladefeilvarsling PUTEV-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	3
<u>2. Oversikt</u>	3
I pakken	3
Under frontlokk	3
<u>3. Komme i gang</u>	4
Plassering	4
Tilkobling	4
Sammenkoble enheter	4
Sammenkoble første gang	4
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	4
Sammenkobling mislykkes	5
Avbryte sammenkobling	5
Nullstille sammenkoblingen	5
<u>4. Daglig bruk</u>	5
Varsling	5
<u>5. Utvidede funksjoner</u>	5
Velge funksjoner	5
Velge modus	6
<u>6. Viktig informasjon</u>	7
Resirkulering	7
<u>7. Sikkerhet</u>	7
<u>8. Tekniske data</u>	7
<u>9. Samsvarserklæring</u>	7
<u>10. Feilsøking</u>	8

1. Innledning

PUTEVIBRATOREN er en mottaker/varsler som tar imot trådløse signaler fra FlexiBlink LIFE detektorer/sendere montert i boligen din. Putevibratoren vil varsle deg om daglige hendelser og forhold av mer sikkerhetsmessig art, alt avhengig av hvilke detektorer/sendere som er installert og hvordan putevibratoren er konfigurert. Til daglige hendelser regner vi blant annet varsling av dørklokke og telefon. Sikkerhetsalarmer kan for eksempel være komfyrvakt og røykvarslere.

Putevibratoren kan tilkobles vekkerklokke eller du kan benytte vekkefunksjonen i IRIS LIFE som fungerer trådløst. Putevibratoren vil vekke ved å vibrere med samme styrke som ved daglige signaler. Vibreringen avsluttes automatisk etter 2 minutter dersom vekkerklokken ikke slås av.

Putevibratoren har innebygget nødstrømbatteri og vil dermed fortsette normal drift i minimum 16 timer ved bortfall av strøm. Den har også innebygget trådløs ladefeilvarsling, og vil varsle i FlexiBlink LIFE mottakere ved bortfall av ladestrøm.


2. Oversikt

I pakken



Putevibrator med tilkoblet ledning for vekkerklokke og strømforsyning.

Under frontlokk

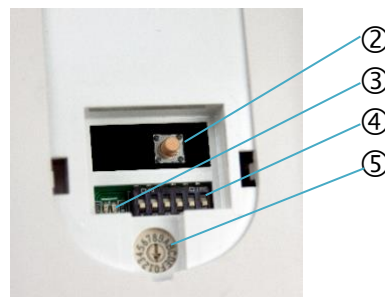

Figur 2 Under frontlokk

- ① Åpne lokket her
- ② LIFE-knapp
- ③ Lysindikator
- ④ Funksjonsbrytere
- ⑤ Modusbryter

3. Komme i gang

Plassering

Putevibratorens hoveddel kan monteres på sengegavl, vegg eller nattbord.

Vibratoren legges normalt under overmadrass i høyde med hodeputen eller bare under hodeputen. Den kan med fordel legges inn i et putetrekk som festes med sikkerhetsnåler til madrassen.

Pass på at ledningen til vibratoren ikke utsettes for strekk.

Tilkobling


Sett strømforsyningen i kontakten på veggen. Dersom vekkerklokke skal benyttes, kobles vekkerklokkeledningen fra putevibratoren til vekkerklokka.

Sammenkoble enheter


LIFE-knappen finnes under frontlokket på putevibratoren. Se figur 2 på forrige side.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

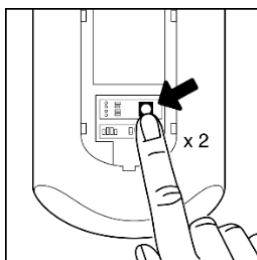

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

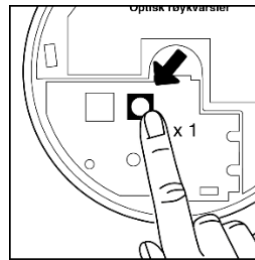

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

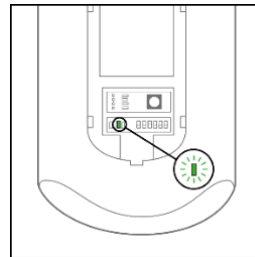

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet fra eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Vennligst nullstill enheten før du sammenkobler på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

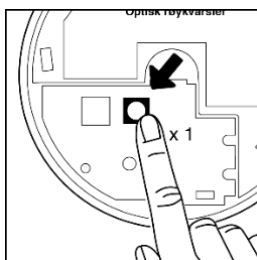

Nullstille sammenkoblingen

Trykk **fem** ganger på LIFE-knappen på enheten hvor sammenkoblingen skal slettes. Dette bekreftes med røde og grønne blink.

Dersom du ønsker å endre funksjoner i produktet, se kapittel 5.

4. Daglig bruk

Varsling

Hendelser som oppstår i boligens FlexiBlink LIFE-anlegg varsles automatisk med vibrasjon.

5. Utvidede funksjoner

Putevibratoren er utstyrt med en funksjonsbryter og en modusbryter bak frontlokket. Du trenger ikke endre på fabrikkinnstillingen med mindre du har behov for de funksjonene som blir forklart i dette kapitlet.



Funksjonsbryter
(fabrikkinnstilling)



Modusbryter
(fabrikkinnstilling)

Velge funksjoner



Nabovarsling – bryter 1

For å få nabovarsling i FlexiBlink LIFE-systemet, må det benyttes en IRIS LIFE for oppsett. Da settes alle varslingsmottakerne opp til å varsle ved brann eller innbrudd hos aktuelle naboer. Dersom du ikke ønsker at putevibratoren skal varsle fra naboer, kan du skyve *bryter 1* opp.

Putevibratoren blir da koblet fra nabovarsling.

NB! *Nabovarsling går kun på alarmsignaler, og ikke for daglige signaler som for eksempel telefon og dørklokke.*



Trådløs vekking – bryter 2 og 3

IRIS LIFE kan sende vekkesignal trådløst til putevibrator. Det finnes mulighet for to kanaler (A og B). Det vil si at om man har to IRIS kan disse sende vekkesignal til hver sin sengevibrator. Bryter 2 styrer kanal A og bryter 3 styrer kanal B. Begge kanaler er som standard aktivert.

Dersom du ønsker å deaktivere trådløs vekking, kan du vippe bryter 2 og/eller bryter 3 opp.



Tvungen driftsstans – bryter 6

Dersom putevibratoren skal slås helt av, for eksempel ved transport, vippes bryter 6 opp eller ned (kun endring av bryterens stilling nødvendig) før strømkontakten tas ut. Det kan også gjøres etter at strømkontakten er tatt ut. Putevibratoren går da i fullstendig dvale, og kan kun vekkes opp igjen ved tilkobling med strømkontakt.

NB! Hvis bryteren vendes mens putevibratoren står med ladespenning på, vil den gå tilbake til normaldrift dersom batterieliminatoren ikke trekkes ut av kontakten på veggen innen 2 minutter.

Kombinasjoner av funksjonene kan gjøres fritt etter behov med bryter 1 til 3. Bryter 4 og 5 er reservert for fremtidige behov.

Velge modus



Vibrasjon ved alle signaler (0)

Dette er fabrikkinnstilling. Putevibratoren varsler nå for alle signaler – både daglig og alarm.



Vibrasjon kun ved alarmer (1)

Dersom du ønsker at putevibrator ikke skal varsle deg om dørklokke og telefon, kan du sette venderen i posisjon 1. Putevibratoren vil nå kun varsle alarmer – forhold av sikkerhetsmessig karakter (komfyrvakt, røykvarsler o.l.).



Vibrasjon kun ved brann (2)

Dersom du ønsker at putevibrator kun skal varsle ved BRANN, kan du sette venderen i posisjon 2. Putevibrator vil nå kun varsle brannalarmer (røykvarsler og brannklokkesender).

6. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut
- Produktet er for innendørs bruk
- Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Resirkulering

Produktet skal ikke kastes sammen med restavfall. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



7. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrues fra hverandre.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

8. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 92x150x37mm
Vekt: 600 gram
Radiofrekvens: 868.1 – 869.85 MHz
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.
Driftsspenning: 15 VDC

Temperatur: -10 °C - +40 °C

9. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

10. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Får ikke sammenkoblet – indikatorlampe lyser rødt	Sammenkobling mislykkes pga. for lang avstand	Flytt enhetene nærmere hverandre og prøv igjen
	Enheten er allerede sammenkoblet med andre enheter.	Nullstill sammenkobling. Vennligst prøv igjen.
	Feil rekkefølge på sammenkoblingen	Trykk to ganger på LIFE-knappen på en enhet i det eksisterende system, og kun én gang på den nye enheten
Indikatorlampen fortsetter å blinke grønt etter sammenkobling	Er det trykket to ganger på den ene enhetens LIFE-knapp?	Trykk en gang til på LIFE-knappene for å avbryte. Prøv igjen.
	Leter fortsatt etter nye enheter.	Trykk en gang til på LIFE-knappen for å avbryte. Prøv igjen.
Varsling mottas ikke	Ikke sammenkoblet	Koble ut siste enhet og koble sammen igjen
	Modusbryter er satt i modus 1 eller 2	Sett modusbryter i riktig posisjon
	Manglende dekning	Forsøk å flytte enhetene nærmere hverandre
	Manglende dekning	Sett opp repeater
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender virker ikke	Les bruksanvisning til sender
	Tomt batteri i sender	Bytt batteri i sender
	Sender virker ikke	Les bruksanvisning til sender
Putevibrator varsler hendelser, men ingen sendere er aktivert i boligen.	Enheten er sammenkoblet feil.	Nullstill sammenkoblingen på enheten og legg til igjen.
	Nabovarsel	Kontroller at funksjonsbryteren for nabovarsel står korrekt.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddelsentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse. For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord



www.vestfoldaudio.no

Tlf.: +47 33 47 33 47