

Talevarsler uten sensor

TALEV-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	4
I pakken	4
Utvendig	4
Baksiden	5
Under lokket	5
3. Komme i gang	5
Sett inn batteriene	5
Koble til en sensor	5
Montering	5
Funksjonstest	6
Sammenkoble enheter	6
Sammenkoble første gang	6
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	7
Sammenkobling mislykkes	7
Avbryte sammenkobling	7
4. I bruk	7
Innstilling	7
5. Avanserte valg	8
Varsling til FB mottakere	8
Varsling med lys	9
Systeminnstillinger	9
6. Viktig informasjon	9
Bruksbegrensninger:	9
7. Resirkulering	9
8. Sikkerhet	9
9. Tekniske data	10
10. Samsvarserklæring	10
11. Feilsøking	11

1. Innledning

Talevarsler LIFE uten sensor (TALEV-L) er et produkt for personer med behov for påminnelser og beslutningsstøtte.

Ved å spille inn en egen beskjed direkte på TALEV-L, vil man kunne få avspilt en talebeskjed med kjent stemme.

Beskjeder spilles av på ønsket tidspunkt dersom en dør åpnes, eller en person beveger seg i en bevegelsessensors (PIR) "vindu".

Det kan spilles inn to beskjeder som kan avspilles ved forskjellige tidspunkt når TALEV-L startes.

Om ønskelig kan TALEV-L sende varsling til FlexiBlink LIFE mottakere.



2. Oversikt

I pakken



Talevarsler



2 stk. Litium AA batterier




Låsebrakett for vegg



Festebrett for vegg


Utvendig

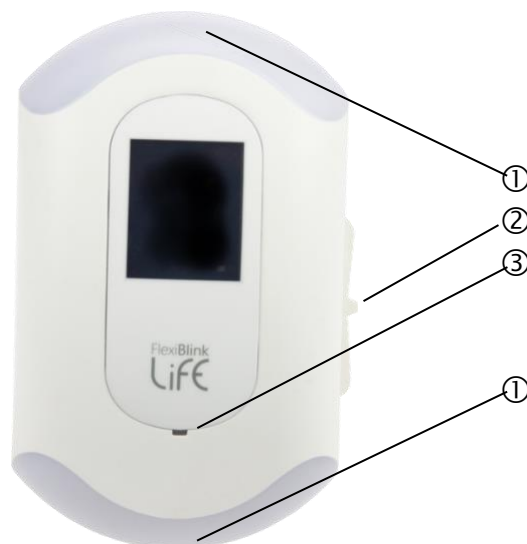

Figur 1 Framsiden

- ① Lys (valgfritt på/av)
- ② Volumkontroll
- ③ Åpning av lokket for innstillinger

Baksiden

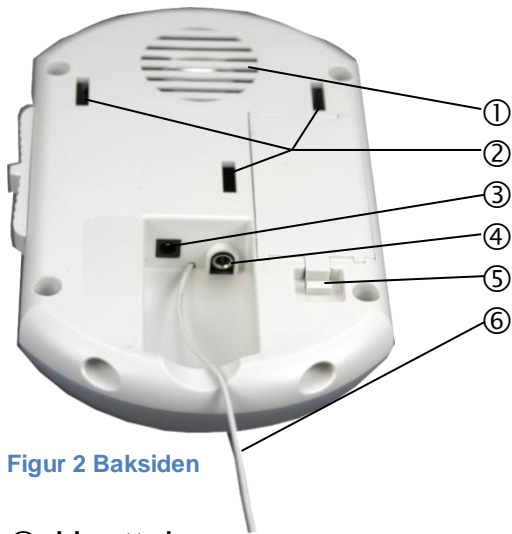

Figur 2 Baksiden

- ① Høytaler
- ② Festehull til braketten
- ③ Tilkobling strømforsyning
(Opsjon. Kjøpes separat.)
- ④ Tilkoblingspunkt for sensor
(PIR / magnetkontakt / bryter)
- ⑤ Åpning av batterilokket
- ⑥ Antenne
(Benyttes bare ved varsling til
FlexiBlink LIFE mottakere)

Under lokket



Figur 3 Under lokket på forsiden

- ① Touch-skjerm
- ② LIFE-knapp (sammenkobling)
(For varsling til FlexiBlink LIFE
mottakere)
- ③ Funksjonsvelger
- ④ Mikrofon

3. Komme i gang

Sett inn batteriene

Sett inn begge de medfølgende batteriene i TALEV-Ls batterilomme på baksiden. Den flate siden av batteriene (minus) skal vende oppover.

Begge batteriene skal monteres samme vei.



Figur 4
Batterirommet

Koble til en sensor

TALEV-L kan benytte trykknapper, brytere, magnetkontakt på dør og Vestfold Audios PIR-sensorer. Sensorer må bestilles separat og de kobles til TALEV-L på baksiden i kontakten ④ på figur 2.

Montering

Koble til aktuell sensor i tilkoblingspunktet ④ bak på TALEV-L.



Viktig

TALEV-L skal monteres på vegg med medfølgende veggbrakett.

Benytt enten de medfølgende borrelåsene eller skruer. Hvis du skal bruke borrelåsen, må flatene rengjøres med den medfølgende spritservietten. Vent minst 1 minutt tørketid før montering.

TALEV-L henges så opp på krokene på braketten.



Figur 5 Låse med braketten



TALEV-L kan eventuelt låses fast med låsebraketten, som skrues fast i veggen over TALEV-L etter at denne er hengt opp på braketten.

Funksjonstest

TALEV-L er nå klar til bruk. For å teste om TALEV-L reagerer på sensoren, gjør du slik:


- Ta av frontlokket på TALEV-L
- Det vises et rødt symbol (§) oppe i venstre hjørne på skjermen når sensoren reagerer.
(Dør åpen / bevegelse under PIR-gardinsensor)

Sammenkoble enheter


Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Det betyr at du må utføre en sammenkobling med en mottaker hvis du vil at TALEV-L skal varsle i en FlexiBlink LIFE mottaker. Sammenkobling gjøres ved å trykke på LIFE-knappen. Den finnes under lokket foran på TALEV-L. Se figur 3.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

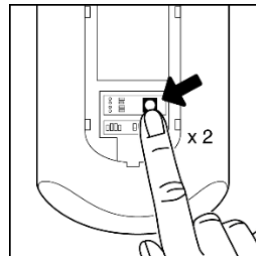

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

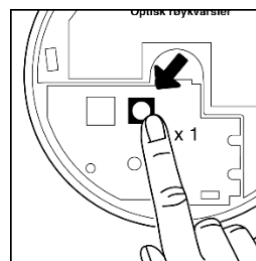

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

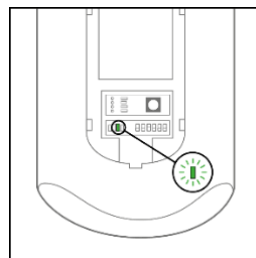

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

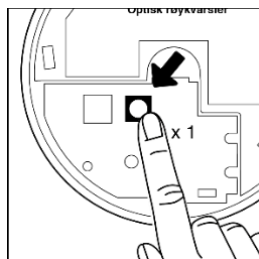

4. I bruk

TALEV-L har to separate meldingsinnstillinger: A og B. Hver av disse kan ha en talemelding med opptil 10 sekunders varighet.

TALEV-L leveres med følgende fabrikkinnstillinger:

Varsling A

Tidsrom: 22:00 – 06:00
Aktivert: Ja
Talebeskjed: "Det er natt, gå til sengs"

Varsling B

Tidsrom: 06:00 – 22:00
Aktivert: Nei
Talebeskjed: "Lås døren når du går ut"





Innstilling

Du kan selv endre tidsrommene, slå på og av varsling A og B og prate inn egne talemeldinger.

1. Ta av frontlokket.
Touch-skjermen lyser opp.
2. Trykk på «Innstilling».
3. Du får nå valget mellom å sette opp «Varsling A» og «Varsling B».
4. Trykk f.eks. «Varsling A».
5. Velg klokkeslett for varslingsperiodens start.
Trykk pilene opp/ned.
6. Trykk «Neste»
7. Velg klokkeslett for varslingsperiodens slutt.
8. Trykk «Neste».

9. Du ser nå oppsett for «Varsling A»:



10. Trykk på  for å spille av gjeldende talebeskjed.
11. Trykk på  for å slå varsling av eller på. Strek over klokken betyr at varsling er AV.
12. Trykk på  for å spille inn ny talebeskjed. Følg instruksjonene på skjermen. Tal klart og tydelig med normalt stemmenivå i avstand 5-10cm fra mikrofonen for best resultat.
13. Spill av og lytt til talebeskjeden. Sett volumkontrollen til et passende nivå mens talen høres. (Indikasjon på lydnivå vises også som en volumsøyle øverst til venstre i displayet.)
14. Trykk  for å komme tilbake til startbildet
15. Gjenta om ønskelig for «Varsling B».
16. Sett på frontlokket og TALEV-L er klar.



Viktig

Pass på at skjermen slokker når frontlokket settes på, for å unngå at batteriet brukes opp!



Tips

For å justere lydvolument må frontlokket tas av og nivået justeres med skyvebryteren på høyre side.

5. Avanserte valg

TALEV-L har funksjoner som kan slås på med funksjonsvelgeren under frontlokket.

Varsling til FB mottakere

TALEV-L kan også sende varsling til FlexiBlink LIFE mottakere. De vil varsle «Vandring, inne».

Vipp funksjonsbryter nr.1 opp for å slå funksjonen PÅ.



Viktig

Husk å sammenkoble med mottakeren(e) når denne funksjonen benyttes.



Tips

Varlingsmottakerne vil også varsle om lavt batteri-nivå i TALEV-L.

Varsling med lys

TALEV-L har en lampe med hvitt lys i hver ende, som kan lyse samtidig med varslingen.

Vipp opp funksjonsbryter nr. 2 for å slå PÅ denne funksjonen.



Systeminnstillinger

For å:

- Stille klokken
- Stille dato
- Kalibrere touch-skjermen
- Tilbakestille til fabrikkinnstilling

1. Vipp opp bryter 4.
2. Sett på og ta av lokket igjen for å komme til Innstillingsmenyen.
3. Trykke «Innstilling» på skjermen og velg fra menyen.
4. Når du har justert ferdig, vipper du bryter 4 ned.
5. Sett på lokket.



6. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

7. Resirkulering

Produktet og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



8. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skruses fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

9. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 95x150x40mm
Batteri: 2xAA Litium
Temperatur: -10 °C - +40 °C
Vekt m/ batteri: 240 g
Radiofrekvens: 868.1–869.85
MHz
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.




10. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

11. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
TALEV-L aktiveres, men ingen lyd høres.	Lydvolumet er for lavt.	Åpne frontlokket og forsøk å justere volumet. Kontroller at volumsøylen vises øverst til venstre.
	Klokken er utenfor varslingsperioden(e).	Velg varsling A eller B og tilpass varslings-perioden.
	Ingen talemelding er tatt opp.	Velg varsling A eller B og spill av. Spill inn talebeskjed.
	Varslingen er slått AV.	Velg varsling A eller B og slå på: 
TALEV-L viser ikke bilde når frontlokket tas av.	Batteriene er tomme for strøm eller mangler.	Bytt batterier. Bruk 2 stk. AA Litium.
Klokken viser feil tidspunkt		Still klokken. Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
	Klokkebatteriet er tomt for strøm.	Kontakt leverandøren.
Klokken viser feil dato		Still dato. Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
	Klokkebatteriet er tomt for strøm.	Kontakt leverandøren.
Det varsler ikke i FlexiBlink LIFE mottakeren	Ikke sammenkoblet	Koble sammen.
Etter TEST-trykk, lyser senderen rødt	Enheten er ikke sammenkoblet	Koble enheten til en mottaker
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Hvordan slette innspillinger og tilbakestille innstillinger?		Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
Produktet varsler lavt batteri/trenger vedlikehold selv med helt nye batterier.	Forsinkelse i batterimåling.	Ta av frontlokket. Sjekk at det ikke står «Bytt batteri» på skjermen. Sett deretter lokket på igjen.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS
Nordre Fokserød 12, 3241 Sandefjord



www.vestfoldaudio.no

tel. +47 33 47 33 47