

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler AKTIV-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

1. Innledning	3
2. Oversikt	4
I pakken	4
Utvendig	4
Baksiden	4
Under lokket	4
3. Komme i gang	5
Sett inn batteriene	5
Koble til en sensor	5
Montering	5
Sammenkoble enheter	6
Sammenkoble første gang	6
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	6
Sammenkobling mislykkes	6
Avbryte sammenkobling	7
Funksjonstest	7
4. I bruk	7
Velg varslingsfunksjon	7
5. Avanserte valg	9
Varsling av fravær	9
Antall repetisjoner	9
Systeminnstillinger	9
6. Viktig informasjon	9
Bruksbegrensninger:	9
7. Resirkulering	9
8. Sikkerhet	9
9. Tekniske data	10
10. Samsvarserklæring	10
11. Feilsøking	11

1. Innledning

Tidsstyrt Aktivitetsvarsler (AKTIV-L) varsler hendelser i valgte tidsrom og med en gitt varighet til FlexiBlink LIFE mottakere. Dette kan være nyttig for egenmestring der man for eksempel kan få en påminnelse om at kjøleskapet har stått oppe lenge. Den kan også være til hjelp for pårørende for å varsle at en person har vært ute av senga en viss periode. I tillegg kan den benyttes for å varsle foreldre om at barnet har gått ut av rommet sitt om natta.

AKTIV-L kan benyttes sammen med alle sensorer fra Vestfold Audio. Dette kan for eksempel være PIR Gardinsensor, PIR Mini, Magnetkontakt eller Sengesensor.

Ved aktivitet sendes meldinger trådløst til FlexiBlink LIFE mottakere som er sammenkoblet med AKTIV-L. På denne måten kan talebeskjeder/påminnelser aktiveres i boligen eller varsling kan gå til pårørende.



Lukk fryseren.
Lukk kjøleskapet.
Lukk døra.
Lukk vinduet.
Opplest klokke



Det er natt - gå til sengs.



Barnet har stått opp.



Passasjealarm.



Vandring ute.



Vandring inne.

2. Oversikt

I pakken



Tidstyrt
Aktivitetsvarsler



2 stk. Litium AA
batterier



Låsebrakett for
vegg



Festebrakett for vegg


Utvendig



① Åpning
av lokket for
innstillinger

Figur 1 Framsiden

Baksiden

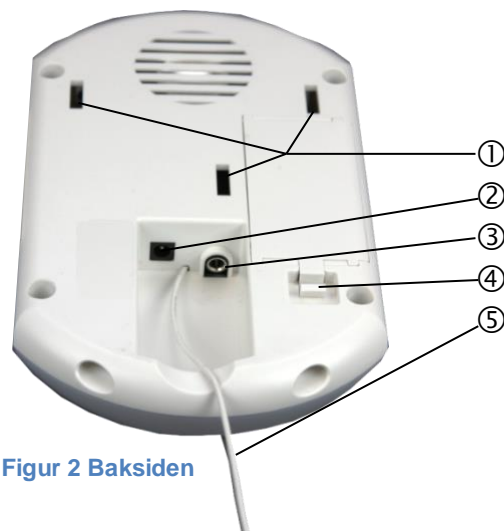

Figur 2 Baksiden

- ① Festehull til braketten
- ② Tilkobling strømforsyning
(Opsjon. Kjøpes separat.)
- ③ Tilkoblingspunkt for sensor
(PIR-Gardin / Dørkontakt)
- ④ Åpning av batterilokket
- ⑤ Antenne

Under lokket



Figur 3 Under lokket på forsiden

- ① Touch- skjerm
- ② LIFE-knapp (sammenkobling)
- ③ Funksjonsvelger

3. Komme i gang

Sett inn batteriene

Sett inn begge de medfølgende batteriene i batterilommen på baksiden. Den flate siden av batteriene (minus) skal vende oppover.

Begge batteriene skal monteres samme vei.



Figur 4
Batterirommet

Koble til en sensor

AKTIV-L kan benytte trykknapper, brytere, magnetkontakt på dør, senge- og stolmatter og Vestfold Audios PIR-sensorer.

Sensorer må bestilles separat og de kobles til AKTIV-L på baksiden i kontakten ③ på figur 2. Se egen bruksanvisning på valgt sensor for mer informasjon om montering av denne.

Montering

Koble til aktuell sensor i tilkoblingspunktet ③ på figur 2 bak på AKTIV-L.




Viktig

AKTIV-L skal monteres på vegg med medfølgende veggbrakett.

Benytt enten de medfølgende borrelåsene eller skruer. Hvis du skal bruke borrelåsen, må flatene rengjøres med den medfølgende spritservietten. Vent minst 1 minutt tørketid før montering.

AKTIV-L henges så opp på krokene på braketten.

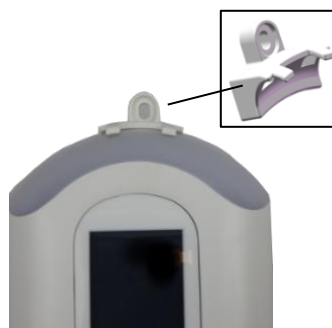

Figur 5 Låse
med braketten


AKTIV-L kan eventuelt låses fast med låsebraketten, som skrues fast i vegg over AKTIV-L etter at denne er hengt opp på braketten.

Sammenkoble enheter


Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles. Det betyr at du må utføre en sammenkobling med en mottaker hvis du vil at AKTIV-L skal varsle i en FlexiBlink LIFE mottaker. Sammenkobling gjøres ved å trykke på LIFE-knappen. Den finnes under lokket foran på AKTIV-L. Se figur 3.

Sammenkoble første gang


1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene.

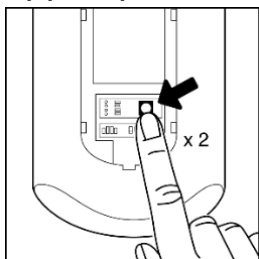

2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den andre enheten.

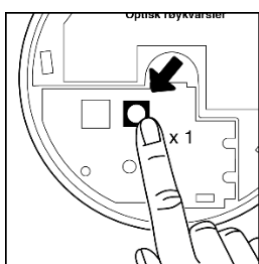

3. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

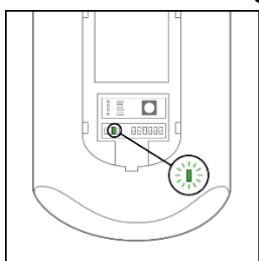

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
5. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen på en sender for å kontrollere sammenkoblingen.

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på enhet i eksisterende system.
2. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten.
3. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.
4. Enhetene er klare til bruk. Trykk på «Test»-knappen for å kontrollere sammenkoblingen.


Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen.

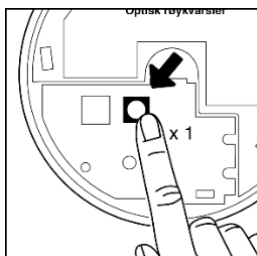

Funksjonstest

Etter tilkobling av sensor og sammenkobling med mottaker(e), er AKTIV-L klar til bruk. For å teste om produktet reagerer på sensoren, gjør slik:

- Ta av frontlokket
- Det vises et rødt symbol (S) oppe i venstre hjørne på skjermen når sensoren reagerer.
(Dør åpen / bevegelse sett av PIR eller lignende)


4. I bruk

Velg varslingsfunksjon

Åpne lokket på fremsiden. Nå vises gjeldende tidspunkt og dato.



Trykk «Innstillinger» for å slå PÅ eller AV varslingsfunksjonen.

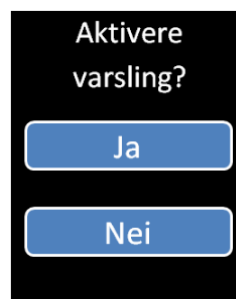

Ved å trykke «Nei» settes produktet inaktivt og vil ikke bli aktivert av sensor. Trykk «Ja» for å slå PÅ varsling samt for å endre/se varslingsfunksjon og oppsett.

Nå vises varslingsfunksjonene, og du kan bla fra en til neste inntil du finner den du vil bruke.




Klikk «Neste» for å velge annen funksjon og «Bekreft» for å velge.

Alle funksjoner kan varsle med lyd, lys, symbol, tekst og tale i FlexiBlink LIFE varslingsmottakere, avhengig av mottakeren. Varslinger kan også mottas på mobiltelefon med FlexiApp.

Følgende funksjoner finnes:

Ved varighet	Straks
Seng	Barn stått opp
Kjøleskap	Passasjealarm
Fryser	Vandring Inne
Dør	Vandring ute
Vindu	Klokke

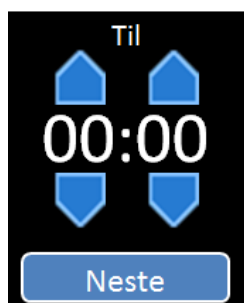


Etter valgt type funksjon velges tidsrom funksjonen skal være aktiv. Velg samme tidspunkt i til/fra for varsling hele døgnet.

Enkelte funksjoner kan man sette at hendelsen skal vare en viss tid før varsling sendes.



Her kan tiden stilles inn. Dette fungerer kun dersom det benyttes en sensor som er aktiv mens hendelsen pågår, som for eksempel magnetbryter for dør eller sengesensor. Dersom varsling skal iverksettes straks hendelsen oppdages (dør åpnes o.l.), settes tiden til 0 minutter.

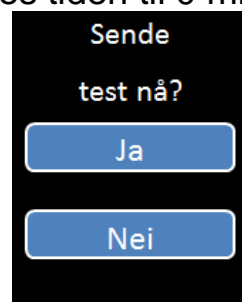

Avslutningsvis får man anledning til å sende en test-melding.

Produktet aktiveres først når lokket settes på igjen.



Viktig

Pass på at skjermen slukker når frontlokket settes på, for å unngå at batteriet brukes opp!

5. Avanserte valg

Varsling av fravær

Ved bruk som sengevakt vil AKTIV-L først aktiveres etter at brukeren har lagt seg i senga i aktiveringstidsrommet. Dersom det er ønskelig å varsle dersom bruker *ikke* har lagt seg, kan bryter 1 vippes opp.



Antall repetisjoner

AKTIV-L sender normalt alarm opp til 5 ganger etter hverandre dersom alarmsituasjonen er opprettholdt (dør åpen for eksempel). Ved å vippe bryter 2 opp vil den kun sende én gang selv om alarmen er opprettholdt.



Systeminnstillinger

For å:

- Still klokke
- Stille dato
- Kalibrere touch-skjermen
- Tilbakestill fabrikkinnstilling



1. Vipp opp bryter 4.
2. Sett på og ta av lokket igjen for å komme til Innstillingsmenyen.
3. Trykke «Innstilling» på skjermen og velg fra menyen.
4. Når du har justert ferdig, vipper du bryter 4 ned.
5. Sett på lokket

6. Viktig informasjon

Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.

Produktet er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.

Produktet vil varsle til mottakerne om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

Bruksbegrensninger:

Kun tillatt benyttet innen EU/EØS.

7. Resirkulering

Produktet og batterier skal ikke kastes sammen med restavfall.

Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.



8. Sikkerhet

Unngå å eksponere enheten for flammer og andre direkte varmekilder.

Produktet må ikke kortsluttes eller skrus fra hverandre.

Brukerinnstillingene finnes ved å åpne lokket.

Batteriet må ikke punkteres, kortsluttes, brennes eller lades opp.

9. Tekniske data

Dim. (bxhxd): 95x150x40mm
Batteri: 2xAA Litium
Temperatur: -10 °C - +40 °C
Vekt m/ batteri: 240 g
Radiofrekvens: 868.1–869.85
MHz
Sendereffekt: 10 mW e.r.p.



10. Samsvarserklæring

Vestfold Audio AS erklærer at produktet er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU.

Samsvarserklæringen i fulltekst er tilgjengelig på følgende internettadresse:

www.vestfoldaudio.no/samsvar

11. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
AKTIV-L aktiveres, men ingen respons i mottaker.	Ikke sammenkoblet med mottaker(e).	Koble sammen.
	Klokken er utenfor varslingsperioden(e).	Kontroller at klokken går riktig og at riktige varslingsstidspunkt er satt opp.
	Varslingen er slått AV.	Gå inn i innstillinger og aktiver varslingen.
	Det er for lang avstand mellom sender og mottaker.	Flytt enhetene nærmere eller benytt en FlexiBlink repeater/videresender.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Trykk 5 ganger på LIFE-knappen på den enheten som skal legges til.
Etter TEST-trykk, lyser senderen lenge grønt, deretter lenge oransje	Ingen mottaker er sammenkoblet med senderen	Sjekk at det er en mottaker i systemet. Nullstill enheten. Koble til på nytt. Prøv igjen
Klokken viser feil tidspunkt eller dato		Still klokken / dato. Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
	Klokkebatteriet er tomt for strøm.	Kontakt leverandøren.
Hvordan tilbakestille innstillinger?		Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.
Produktet varsler lavt batteri selv med helt nye batterier.	Forsinkelse i batterimåling.	Ta av frontlokket. Sjekk at det ikke står «Bytt batteri» på skjermen. Sett deretter lokket på igjen.
Berøring på skjerm registreres ikke	Touch må kalibreres	Se kapittel SYSTEMINNSTILLINGER.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. +47 3347 3347

