

Armbåndssender og -mottaker ARM-L



Brukerhåndbok

Innholdsfortegnelse

<u>1. Innledning</u>	<u>3</u>
<u>2. Oversikt</u>	<u>3</u>
I pakken	3
<u>3. Komme i gang</u>	<u>4</u>
Lading	4
Sette inn ARM-L	4
Ta ut ARM-L	4
Lysdiodene og knapp	4
Lysdiodene og vibrasjoner	5
Varslingsmønster generelt:	5
Sammenkoble enheter	6
Sammenkoble første gang	6
Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system	6
Sammenkobling mislykkes	6
Avbryte sammenkobling	6
Nullstille sammenkoblingen	6
Velg funksjon (ID-velger)	7
Forlenge rekkevidden	7
<u>4. Daglig bruk</u>	<u>7</u>
Sende et varsel	7
Motta et varsel	7
<u>5. Viktig informasjon</u>	<u>7</u>
<u>6. Resirkulering</u>	<u>7</u>
<u>7. Tekniske data</u>	<u>7</u>
<u>8. Feilsøking</u>	<u>8</u>

1. Innledning

ARM-L er en assistansealarm for personer som har behov for å kunne tilkalle assistanse eller sende varslinger til andre. Den bæres diskret på håndleddet.

ARM-L er en kombinert sender med trykk-knapp og mottaker. Den sender varsling til andre ARM-L og FlexiBlink LIFE mottakere, og den varsler (med lys og vibrasjon) ved mottak av varslere fra andre ARM-L og FlexiBlink LIFE sendere.

Det vibrerer med varierende vibrasjonsmønster når varsel mottas.

ARM-L kan også tilpasses for å starte fjernstyrt opplasing av klokke på produktene IRIS LIFE, MÅNE LIFE og SOL LIFE, og for en rekke andre varslinger.

ARM-L vil vibrere når den mottar varslinger fra FlexiBlink LIFE sendere.

Nøkkeldata

- Enkel installasjon og bruk.
- Sprutsikker (dusj - ikke bad)
- Signalrekkevidde innen normal husstand
- Enkelt å tilpasse lengde på armbåndet
- God batterilevetid
- Oppladbar

2. Oversikt

I pakken



3. Komme i gang

Lading

Før du begynner å bruke ARM-L, bør den lades helt opp.


En fullt oppladet enhet har batterilevetid på 2-3 døgn avhengig av bruken.

Press ARM-L ut av armbåndet og sett den inn i ladekontakten, som igjen settes inn i den medfølgende laderen.

Lysdioden blinker rødt så lenge ladingen pågår.



Lysdiodene og knapp

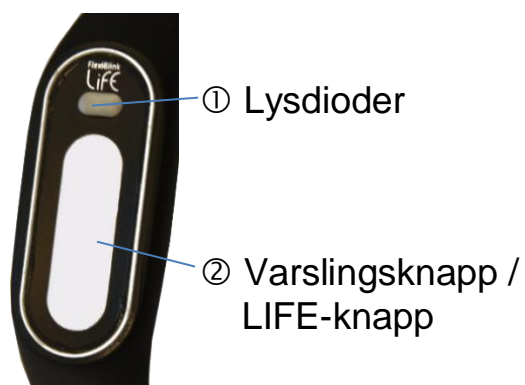

NB! Du kan ikke sende eller motta varslinger når enheten lades.

Sette inn ARM-L

ARM-L settes inn i armbåndet "ovenfra" - altså trekkes ned med bunnen først. Begynn med den enden som har lysdiodene.



Ta ut ARM-L

ARM-L tas ut ved å presse den ned gjennom armbåndet som vist på figuren.



Lysdiodene og vibrasjoner

ARM-L har to lysdioder, en grønn og en rød, og en vibrator som sammen gir informasjon. Alle ARM-L kan benyttes som både sender og mottaker.

Varslingsmønster ved sending:

Grønn blink + vibrasjon	Sender varsel
Grønt lys etter sending	Sendt varsel er mottatt
Grønn blink + vibrasjon	Varsel er bekreftet, «Hjelp kommer», av annen enhet
Rød blink+ 10 x vibrasjon	Varslingen kom ikke fram.



Varslingsmønster ved mottak:

Grønn blink + vibrasjon	Varsel er mottatt fra annen enhet
Ved trykking mens varsel mottas	«Hjelp kommer» svares varslingssender
Grønt lys etter sending	Sendt varsel er mottatt
Rød blink+ 10 x vibrasjon	Svaret kom ikke fram.

Varslingsmønster generelt:

Rød og grønn blink	Lavt batteri.
Rød blink	Enheden lades

Sammenkoble enheter

Alle FlexiBlink LIFE enheter som skal fungere sammen, må sammenkobles med noen enkle knappetrykk.


Sammenkoble første gang

1. Trykk og hold varslingsknappen på ARM-L inne i 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.

2. Trykk **én** gang på ARM-L varslingsknappen.

3. Trykk **to** ganger på LIFE-knappen på en av enhetene som den skal kobles til.

(Dersom dette er en ARM-L,

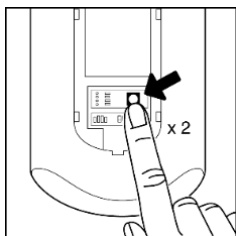


må du først trykke og holde varslingsknappen inne på denne i 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner. Deretter trykkes to ganger på varslingsknappen)

4. Indikatorlampene på begge enhetene blinker grønt.

5. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene i begge enheter lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

6. Enhetene er klare til bruk. Trykk på varslingsknappen for å teste sammenkoblingen.

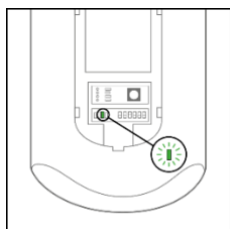

Sammenkobling av ny enhet til eksisterende system

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.

2. Trykk **to** ganger på varslingsknappen på ARM-L.

3. Trykk **én** gang på LIFE-knappen på den *nye* enheten eller på varslingsknappen til ny ARM-L (Etter å ha holdt knappen inne i 10 sekunder).

4. Sammenkoblingen bekreftes ved at indikatorlampene lyser fast grønt i 2-3 sekunder.

5. Enhetene er klare til bruk.

Trykk på varslingsknappen for å teste sammenkoblingen.

Sammenkobling mislykkes

Dersom du får rødt lys i den nye enheten ved sammenkobling, mislykkes den.

Da må du nullstille enheten for å sammenkoble på nytt.

Avbryte sammenkobling

For å avbryte sammenkoblingen, trykk **én** gang på LIFE-knappen / varslingsknappen på ARM-L.

Nullstille sammenkoblingen

1. Trykk og hold varslingsknappen inne i 10 sekunder, inntil du kjenner 3 vibrasjoner.

2. Trykk **fem** ganger på varslingsknappen på ARM-L.

3. Nullstilling bekreftes med røde og grønne blink.

Velg funksjon (ID-velger)

ARM-L kan settes opp til å sende andre varslinger enn "Assistanse ønskes".

Dette må gjøres ved hjelp av en IRIS LIFE varslingsmottaker.

Vennligst se brukerhåndboken til IRIS LIFE. Dette kan også bestilles ferdig satt opp fra Vestfold Audio AS.

Forleng rekkevidden

I større bygg eller institusjoner hvor man har behov å forleng rekkevidden mellom en ARM-L og andre FlexiBlink LIFE produkter, må det benyttes en eller flere videresendere av typen REPEATER-L.

4. Daglig bruk

Sende et varsel

Når du trykker på varslingsknappen, sendes varsel til alle mottakere som er sammenkoblet din ARM-L. Det lyser grønt og gis en vibrasjon på at varslingen er sendt.

Standard varslingsmelding er: "Assistanse ønskes!"

NB! Hvis det blinker rødt og vibreres 10 ganger tett, betyr det at ingen mottakere har oppfattet varslingen. Flytt deg nærmere mottaker og prøv på nytt!

Motta et varsel

Når ARM-L mottar et varsel fra andre sendere, varsler den med grønt blink og vibrasjon. Se kap. 3.

5. Viktig informasjon

- Produktet kan rengjøres med en myk, lett fuktet klut.
- Armbåndsmottakeren er for innendørs bruk i ikke-kondenserende miljø.
- Armbåndsmottakeren vil varsle til FlexiBlink LIFE mottakere om behov for batteribytte hvis du har mottakere som viser dette.

6. Resirkulering

Produktet og batteriet skal ikke kastes sammen med restavfall.



Gjør deg kjent med lokale bestemmelser for avfallsdeponering av elektriske produkter.

Ved riktig håndtering vil store deler av produktet kunne resirkuleres, samtidig som du skåner miljøet.

7. Tekniske data

Dim. (lxb):	235x10mm
Håndleddets omkrets:	10,5-21 cm
Vekt m/ batteri:	40 g
Radiofrekvens:	868.1–869.85 MHz
Sendereffekt:	10 mW e.r.p.
Temperatur:	-10 °C - +40 °C
Ladespenning:	5VDC (USB)

8. Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsninger
Det varsles ikke i mottakere	Avstanden mellom ARM-L og mottaker er for stor.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater.
	ARM-L er tom for strøm.	Lad opp ARM-L.
	ARM-L og mottakere er ikke sammenkoblet.	Utfør sammenkobling. Se kap. 3
	Feil på mottaker	Se bruksanvisning for mottakeren.
Sammenkobling fungerer ikke	Begge enhetene har vært sammenkoblet tidligere. Det blinker rødt.	Nullstill sammenkobling. Se kap. 3
Det lyser ikke grønt når varslingsknappen trykkes.	ARM-L er tom for strøm.	Lad opp ARM-L.
Det blinker rødt/grønt	ARM-L er nesten tom for strøm.	Lad opp ARM-L.
Det varsles med feil signal i mottakere.	ARM-L er satt til å sende et "feil" varsel.	Bruk en IRIS LIFE for å sette riktig varsling i ARM-L. Se brukerhåndbok for IRIS-L.
Det blinker rødt og vibrerer etter at knappen er trykket og etter at grønt lys for sending har slukket.	Varslingen ble ikke mottatt av noen mottakere.	Flytt enhetene nærmere hverandre eller sett inn en repeater
		Utfør sammenkobling med mottakere.

Hvis du har fått produktet på utlån fra NAV Hjelpemiddel-sentral, må du kontakte hjelpemiddelsentralen i fylket ditt ved behov for assistanse.

For å søke assistanse hos Vestfold Audio AS kan du sende en epost til post@vestfoldaudio.no eller ringe oss på telefon nr. 33 47 33 47.



Vestfold Audio AS

www.vestfoldaudio.no

tel. 33 47 33 47

